


# Safetac teknologi

Bandager med Safetac teknologi er det foretrukne valg for patienter og sundhedspersonale på grund af minimering af smerte og traume ved bandageskift. Safetac teknologi tilbyder dog også en række andre fordele, som bidrager til effektiv sårbehandling:


- Opretholder et fugtigt sårmiljø
- Kan flyttes uden klæbeevnen går tabt
- Indeholder ikke lim og er dermed ikke-sensibiliserende (ingen hudreaktioner)
- Efterlader ikke klæberester
- Er meget formbar, muliggør nem applicering på sår, der er vanskelige at bandagere
- Nemme bandager gør appliceringsprocessen meget enklere

Forskellen mellem Safetac teknologi og traditionel klæb.


Bandager med traditionel klæb

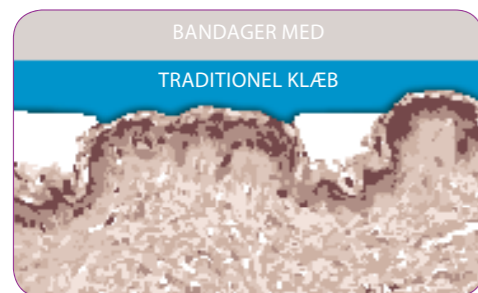

Traditionel klæb er mindre fleksibel og skaber kun kontakt med det øverste lag af hudoverfladen. Det må derfor klæbe kræftigere for at kunne blive på plads.

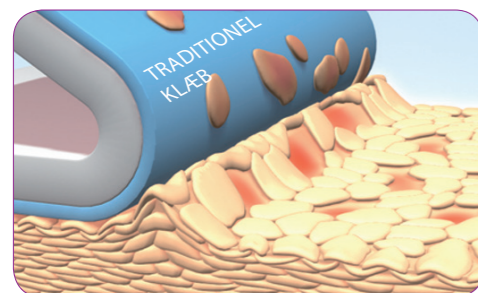


Ved aftagning stripes de epidermiske celler af den aggressive traditionelle klæb, og det giver sårtraume og smerte.

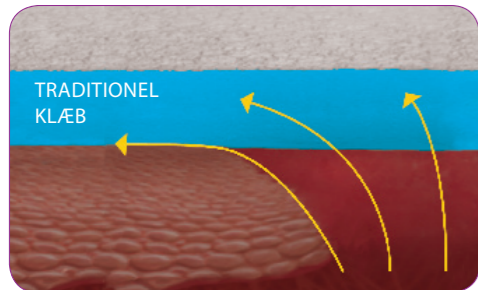


Traditionel klæb kan ikke skabe komplet forsegling af sårkanterne, hvorefter eksudatet kan sprede sig.


Bandager med Safetac teknologi

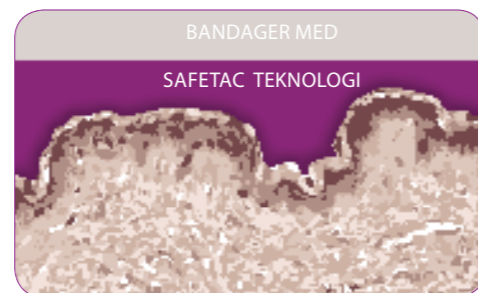

Safetacs bløde klæb tilpasser sig efter hudens konturer og forsegler sårkanterne.

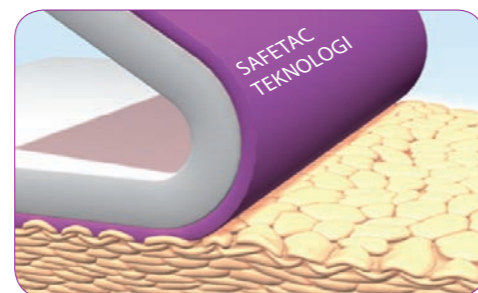

Bandager med Safetac teknologi fjerner ikke nogle epidermiske celler (ingen hudstripping)

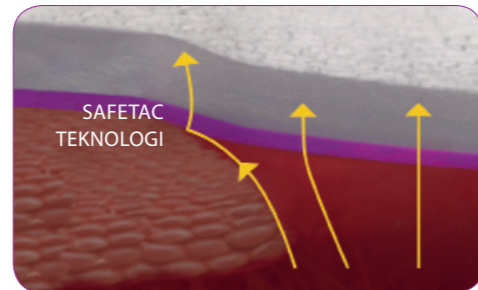

Safetac teknologien forsegler sårkanterne og minimerer dermed effektivt risikoen for maceration.

## SÅRBEHANDLING



Vask først hænderne, vask derefter såret med vand for at fjerne skidt og snavs. Tør huden forsigtigt og læg sårbandagen på såret. Kontakt lægen hvis såret væsker mere eller bliver mere rødt og smertefuldt. Dette kan være tegn på infektion.

# Sårprodukter med traditionel klæb samt fikseringsløsninger

Produkt	Varenr.	Størrelse	Antal/pakning	Anvendelsesområde	Egenskaber	
 <b>Mepore®</b> Selvklæbende absorberende bandage	207212	6 x 7 cm	10	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kirurgiske sår</li> <li>• Rifter</li> <li>• Mindre hudafskrabninger</li> <li>• Tørre til let væskende sår</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Åndbar</li> <li>• Absorberende</li> </ul>	
	207260	9 x 10 cm	5			
	206982	9 x 15 cm	5			
	209815	9 x 20 cm	5			
	211204	6 x 7 cm	1			
	211205	9 x 10 cm	1			
211206	9 x 15 cm	1				
 <b>Mepore® Pro</b> Brusetæt, selvklæbende absorberende bandage	206983	6 x 7 cm	60	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kirurgiske sår</li> <li>• Rifter</li> <li>• Hudafskrabninger</li> <li>• Let til moderat væskende sår</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Åndbar</li> <li>• Absorberende</li> <li>• Virus- og bakterietæt film</li> <li>• Brusetæt</li> </ul>	
	209797	6 x 7 cm	10			
	209798	9 x 10 cm	10			
	209799	9 x 15 cm	10			
	211541	9 x 20 cm	10			
 <b>Mepore® Film &amp; Pad</b> Selvklæbende transparent filmbandage	209804	4 x 5 cm	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Primær bandage til sår, hvor en barriere mod væske, virus og bakterier ønskes.</li> <li>• Ved behov for god fleksibilitet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Åndbar</li> <li>• Absorberende</li> <li>• Blid og sikker fiksering</li> <li>• Brusetæt</li> </ul>	
	209805	5 x 7 cm Oval	5			
	209806	5 x 7 cm	5			
	210468	9 x 10 cm	5			
	209808	9 x 15 cm	5			
	209809	9 x 20 cm	5			
 <b>Mepore® Film</b> Selvklæbende transparent filmbandage	209800	6 x 7 cm	10	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Primær bandage til rene sår</li> <li>• Sekundær fikseringsbandage</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Åndbar</li> <li>• Blid og sikker fiksering</li> <li>• Brusetæt</li> <li>• Transparent</li> </ul>	
	209801	10 x 12 cm	10			
	209802	10 x 25 cm	10			
 <b>Mesorb®</b> Absorberende bandage med lækagebarriere ikke hæftende	763680	10 x 10 cm	50	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kan anvendes direkte på såret eller som sekundær bandage</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Åndbar</li> <li>• Højabsorberende bandage, der kan indeholde store mængder sårsekret</li> <li>• Væskeafvisende overflade</li> <li>• Kan fikses med Tubifast 2-Way Stretch, Mefix, Mepore Film eller Mepitac</li> </ul>	
	209814	10 x 10 cm	10			
 <b>Mesoft®</b> Kompres Nonwoven	Sterile, 40 g		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Absorption</li> <li>• Desinfektion</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Høj absorptionskapacitet</li> <li>• Blød</li> </ul>		
	209811	5 x 5 cm			20	
	209812	7,5 x 7,5 cm			20	
	209813	10 x 10 cm			20	
	Usterile, 30 g				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Absorption</li> <li>• Desinfektion</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Høj absorptionskapacitet</li> <li>• Blød</li> </ul>
	208965	5 x 5 cm				
209035	7,5 x 7,5 cm	100				
208739	10 x 10 cm	100				
 <b>Mefix®</b> Fikseringsplaster	2,5 meter ruller		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ideel til fiksering</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Åndbar</li> <li>• Sikker fiksering</li> <li>• Blød, elastisk</li> </ul>		
	775387	5 cm bred			1	
	211273	10 cm bred			1	
	10 meter ruller				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Absorption</li> <li>• Desinfektion</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Høj absorptionskapacitet</li> <li>• Blød</li> </ul>
	211432	2,5 cm bred				
211399	10 cm bred	1				
 <b>Tubifast™ 2-way stretch</b> Elastisk tube-bandage der kan strækkes i begge retninger.	738807	3,5 cm x 1 m	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Til bandagefiksering</li> <li>• Kan dække forskellige kroppsdele uanset størrelse eller facon</li> <li>• Kan klippes efter behov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2-Way Stretch tubefacon holder bandagen sikkert på plads</li> <li>• Giver bevægelsesfrihed</li> <li>• Hver størrelse er markeret med forskellig farve</li> </ul>	
	209820	5 cm x 1 m	1			
	209821	7,5 cm x 1 m	1			
	209822	10,75 cm x 1 m	1			
	209823	20 cm x 1 m	1			

Vores bandager er angivet med dråber, som viser mængden af væske, de kan håndtere.

 Let - og ikke væskende sår
  Let - til moderat væskende sår
  Moderat til kraftigt væskende sår

# Sårbandager med Safetac® klæbeteknologi

- minimerer smerte ved bandageskift og klæber ikke til det fugtige sårleje

Produkt	Varenr.	Størrelse	Antal/pakning	Anvendelsesområde	Egenskaber
 <b>Mepitel®</b> Blødt transparent sårkontaktlag	200797	5 x 7,5 cm	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ikke væskende til kraftigt væskende sår</li> <li>• 2. grads forbrændinger</li> <li>• Hudafskrabninger</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kan ligge på såret i op til 14 dage</li> <li>• Skal altid kombineres med sekundær bandage.</li> <li>• Forhindrer at den sekundære bandage hænger i såret</li> <li>• Kan klippes til efter behov</li> </ul>
	209678	7,5 x 10 cm	10		
 <b>Mepilex®</b> Skumbandage	207248	10 x 10 cm	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Let til moderat væskende sår</li> <li>• Bensår</li> <li>• Tryksår</li> <li>• Traumesår</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fleksibel og formbar</li> <li>• Selvklæbende, muliggør håndfri fiksering</li> <li>• Kan fikses med Tubifast, Mefix eller Mepitac</li> <li>• Kan klippes til efter behov</li> </ul>
	208556	15 x 15 cm	5		
 <b>Mepilex® Lite</b> Tynd skumbandage	206256	6 x 8,5 cm	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Let- og ikke væskende sår</li> <li>• Diabetiske fodsår</li> <li>• Håndkirurgi</li> <li>• Stråleskader</li> <li>• Skrøbelig hud (prednisonshud)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tynd, fleksibel og formbar</li> <li>• Selvklæbende, muliggør håndfri fiksering.</li> <li>• Kan fikses med Tubifast, Mefix eller Mepitac</li> <li>• Kan klippes til efter behov</li> </ul>
	205719	10 x 10 cm	5		
 <b>Mepilex® Border</b> Alt-i-en skumbandage	207370	7,5 x 7,5 cm	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Moderat til meget væskende sår</li> <li>• Tryksår</li> <li>• Bensår</li> <li>• Fodsår</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Selvklæbende alt-i-en bandage</li> <li>• Åndbar</li> <li>• Bakterietæt</li> <li>• Smidig</li> <li>• Brusetæt</li> </ul>
	207484	10 x 10 cm	5		
 <b>Mepilex® Border Lite</b> Tynd alt-i-en skumbandage	208102	4 x 5 cm	10	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Let- og ikke væskende sår</li> <li>• Tryksår</li> <li>• Bensår</li> <li>• Fodsår</li> <li>• Fingerskader</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tynd selvklæbende alt-i-en bandage</li> <li>• Åndbar</li> <li>• Bakterietæt</li> <li>• Smidig</li> <li>• Brusetæt</li> </ul>
	209153	5 x 12,5 cm	5		
	210983	7,5 x 7,5 cm	5		
 <b>Mepilex® Ag</b> Antimikrobiel skumbandage	209803	10 x 10 cm	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Let til moderat væskende sår</li> <li>• Anvendes ved tegn på øget bakterievækst</li> <li>• Bensår</li> <li>• Fodsår</li> <li>• Tryksår og forbrændinger</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bekæmper bakterier</li> <li>• Hurtig og vedvarende antimikrobiel virkning</li> <li>• Selvklæbende, muliggør håndfri fiksering</li> <li>• Kan fikses med Tubifast, Mefix eller Mepitac</li> </ul>
 <b>Mepiform®</b> Bandage til arbejdning	209344	4 x 30 cm	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Arbejdning</li> <li>• Hypertrofiske ar (forhøjede og synlige ar)</li> <li>• Keloider (arforandringer)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kan anvendes i flere dage</li> <li>• Tilpasser sig efter kroppskonturerne</li> <li>• Tynd og diskret</li> <li>• Kan klippes til efter behov</li> <li>• Selvklæbende</li> </ul>
	210023	5 x 7,5 cm	5		
	209366	10 x 18 cm	5		
 <b>Mepitac®</b> Blød fikseringsstape	205793	2 cm x 3 m	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nænsom fiksering</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ideel ved sart og skrøbelig hud</li> <li>• Tilpasser sig efter kroppskonturerne</li> </ul>
	205803	4 cm x 1,5 m	1		

Vores bandager er angivet med dråber, som viser mængden af væske, de kan håndtere.

 Let - og ikke væskende sår
  Let - til moderat væskende sår
  Moderat til kraftigt væskende sår