

Mepitac®

WITH SAFETAC® TECHNOLOGY

Skonsam tejp
Skånsom tape
Hellävarainen teippi

MD

Medicinteknisk produkt
Medisinsk utstyr
Medicinsk udstyr
Lääkinnällinen laite



www.molnlycke.com/symbols

Made in Finland


Master PD-484571 Rev. 02

40427-40

PD-575610 Rev. 02


Mölnlycke®

Manufacturer

 Mölnlycke Health Care AB
Gamlestadvägen 3C, Box 13080
SE-402 52 Göteborg, Sweden

www.molnlycke.com

Vad/Hva/Hvad är Mepitac®?

sv no da

Mepitac är en bekväm/formbar självhäftande selvklebende/selvklæbende tejp/tape, som är enkel att applicera och avlägsna/fjerne. Mepitac är lämplig/egnet när upprepad/gjentatt/gentagen applicering och borttagning/fjerning/fjernelse är nödvändig, eftersom produkten innebär skonsam/skånsom borttagning/fjerning/fjernelse från hud och kroppsbe håring, säker/sikker fixering/fiksering och minimala rester efter borttagning/fjerning/fjernelse. Mepitac kan lyftas/løftes och appliceras igen, om/hvis inspektion eller omplacering är nödvändig. Mepitac är även/også vattenavstötande/vannavstøtende/vandafvisende.

Materialinnehåll/Indhold: Polyuretanfilm, akrylathäfta/-heft/-klæb, polyester/polyapolyamidtricot, silikonhäfta/-heft/-klæb, polyetylenfilm

Vad/Hva/Hvad används/brukes/bruges Mepitac® för/til?

Mepitac är avsedd/ment/beregnet til fixering/fiksering av medicinsk utrustning/udstyr såsom sårforband/sårbandasjer/sårbandager. Mepitac ger/tilbyr/giver skonsamt/skånsom skydd/beskyttelse för/af huden vid användning/bruk/brug under utrustning/udstyr såsom slangar/slanger.

Försiktighetsåtgärder/forholdsregler

- Mepitacs fästförmåga/festeevne/klæbeevne kan försämrars/svekkes/svækkes, om/hvis teipen/tapen används/brukes/bruges vid/under fuktiga/fugtige förhållanden/forhold som till exempel på patienter som har feber eller svettas mycket/svetter mye/sveder meget.

- Får ej återanvändas/skal ikke gjenbrukes/må ikke genanvendes. Om/Hvis produktet återanvänds/gjenbrukes/genanvendes kan den/det ha/have nedsatt effekt, och korskontaminering/krysskontaminering/krydskontaminering kan förekomma/forekomme.
- Använd inte/bruk/brug ikke Mepitac på personer med känd/kendt överkänslighet/overfølsomhet mot/over for materialen/komponenterna i produkten.

Bruksanvisning/Brugsanvisning

Hur ofta/Hvor ofte produktet behöver bytas/må byttes/skal skiftes är beroende/avhenger/afhænger av hudens tillstånd. Byt/Skift Mepitac när fästförmågan/festeevnen/klæbeevnen inte längre/længere är tillräcklig/tilstrækkelig/tilstrækkelig.


Avfall/Affald ska hanteras/håndteres enligt/ifølge lokala miljörutiner.

Övrig information


Om/Hvis en allvarlig incident/alvorlig hendelse/hændelse med koppling till/forbundet med användning av Mepitac inträffar/indtræffer ska detta rapporteras till Mölnlycke Health Care och till ansvarig/ansvarlig myndighet/lokale, kompetente myndigheder.

Mepitac® och Safetac® är registrerade varumärken/varemærker som tillhör Mölnlycke Health Care AB.

Bruksanvisning/Brugsanvisning

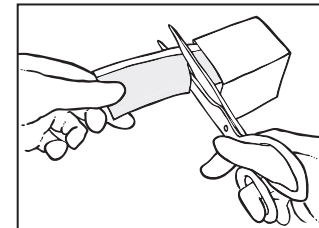

1. Se till/Sørg for att huden är ren, torr/tør och fri från krämer/cremer, geler eller salvor etc.
2. Klipp till den önskade tejlängden/tapelængde med en sax/saks.

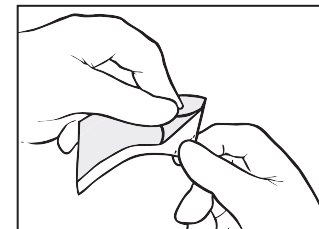

3. Avlägsna/fjern skyddsfilm/beskyttelsesfilmen och applicera Mepitac utan att sträcka/strekke/strække den.
4. Mepitac kan lyftas/løftes och appliceras igen om inspektion eller omplacering är nödvändig.

Mepitac®

WITH SAFETAC® TECHNOLOGY

Skonsam tejp
Skånsom tape
Hellävarainen teippi

MD Medicinteknisk produkt
Medisinsk utstyr
Medicinsk udstyr
Lääkinnällinen laite



www.molnlycke.com/symbols

Made in Finland

Master PD-484571 Rev. 02

40427-40

PD-575610 Rev. 02

Manufacturer
Mölnlycke Health Care AB
Gamlestadvägen 3C, Box 13080
SE-402 52 Göteborg, Sweden

www.molnlycke.com

Mikä on Mepitac®?

Mepitac on mukautuvainen kiinnitysteippi, joka on helppo asettaa ja irrottaa. Tuote sopii potilaille, jotka tarvitsevat toistuvaa käyttöä ja poistoa, sillä se tarjoaa samalla sekä hellävaraisen poiston ihosta ja ihokarvoituksesta että varman kiinnityksen, ja poistossa jää silti minimaalisesti jäämiä. Jos tarvitaan tarkistusta tai uudelleenasettelua, Mepitac voidaan irrottaa ja asettaa uudelleen paikoilleen. Mepitac on myös vedenkestävä.

Materiaalit: Polyuretaanikalvo, akryyliliima, polyesteri-/polyamiditrikoo, silikonikiinnitysaine, polyeteenikalvo

Mihin Mepitac® on tarkoitettu?

Mepitac on suunniteltu kiinnittämään sairaalavälineitä, kuten haavasidoksia. Mepitac on lisäksi hellävarainen ja suojaa ihoa, kun sitä käytetään laitteiden, kuten putkien, alla.

Huomioitavaa

- Mepitacin kiinnitysvoima saattaa vähentyä kosteassa ympäristössä, kuten potilailla, joilla on kuumetta tai jotka hikoilevat paljon.
- Älä käytä tuotetta uudelleen. Uudelleen käytettäessä tuotteen toimintakyky voi heikentyä ja ristikontaminaatiota esiintyä.
- Älä käytä Mepitacia henkilöille, joiden tiedetään olevan yliherkkiä valmisteen materiaaleille/komponenteille.

fi

Käyttöohjeet

Vaihtoväli riippuu ihon kunnosta. Vaihda Mepitac, kun tarttuvuusominaisuudet eivät enää ole riittävät.


Tuote on hävitettävä paikallisten ympäristömääräysten mukaan.

Muita tietoja


Jos Mepitac-tuotteen käytön yhteydessä ilmenee vakavia häirtavaikutuksia, siitä on ilmoitettava Mölnlycke Health Carelle ja paikalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle.

Mepitac® ja Safetac® ovat Mölnlycke Health Care AB:n rekisteröityjä tavaramerkkejä

Käyttöohjeet

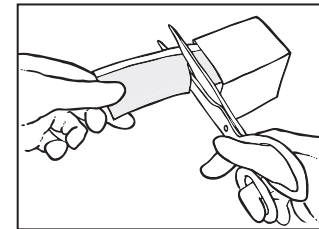

1. Varmista, että iho on puhdas ja kuiva eikä siinä ole voiteita yms.
2. Leikkaa saksilla haluttu pituus teippiä.

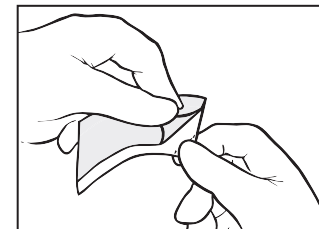

3. Poista suojaava taustakalvo ja aseta Mepitac venyttämättä.
4. Jos tarvitaan tarkistusta tai uudelleenasettelua, Mepitac voidaan irrottaa ja asettaa uudelleen paikoilleen.