


# Mepilex<sup>®</sup> Border Protect

## Talon

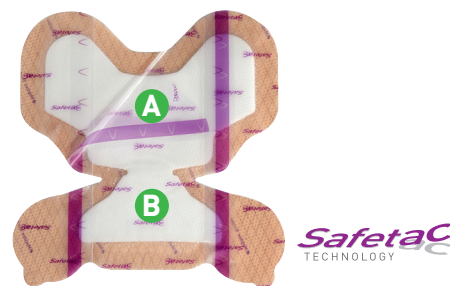

1. Après avoir séché et nettoyé le pourtour de la plaie, retirez le feuillet protecteur au centre du pansement et positionnez le sous le talon.



2. Appliquez la partie adhésive noté A (voir illustration ci-dessus) sur la partie postérieure du talon et la zone du tendon d'Achille. Ne pas étirer le pansement.



3. Enlevez successivement les feuillets de chaque côté de la cheville, appliquez la partie adhésive et lissez. Ne pas étirer le pansement.



4. Appliquez la partie adhésive du pansement marqué B (voir l'illustration ci-dessus) sous la zone talonnière du pied. Ne pas étirer le pansement.



5. Enlevez les feuillets protecteurs latéraux successivement de la partie notée B. Les languettes se manipulent grâce aux ailettes. Appliquez le pansement puis lissez.



6. Appuyez sur le pansement pour vous assurer qu'il soit entièrement au contact de la peau.

Mölnlycke, Mepilex et Safetac sont des marques et des logos déposés au niveau mondial par la société Mölnlycke Health Care AB ou l'une de ses filiales. Ces produits sont fabriqués en Europe. Dispositifs médicaux. L'organisme notifié de ces produits est BSI (British Standards Institution). CE 2797. Pour plus d'informations, veuillez-vous reporter à la notice d'utilisation accompagnant les produits.

**Réclamations qualité produits : [reclamation.qualite@molnlycke.com](mailto:reclamation.qualite@molnlycke.com)**

Service clients & renseignements produits : Tél : 03 20 12 25 55 – Fax : 03 20 12 25 44  
Distributeur : Mölnlycke Health Care – CS 70205 – 13 allée du Château Blanc – 59445 Wasquehal cedex  
Fabricant : Mölnlycke Health Care, Box 13080, SE6402 52 Göteborg, Sweden – Tél : +46 31 722 30 00 – Fax : +46 31 722 34

[www.molnlycke.fr](http://www.molnlycke.fr)  
©Copyright [2022] Mölnlycke Health Care

