



Mölnlycke®

BARRIER® EasyWarm®

ご使用前に必ずお読みください。

【製品名】：イージーウォーム 【製品番号】 629900 平均温度：44℃ ブランケット内のウォーマー個数：12 個 サイズ：92×152 cm

【原材料】：ウォーミングパッド（活性炭、塩類、鉄粉、水、アクリル酸ナトリウム） 【有効期限】：外枠に記載

【製品について】
自己保温用アクティブブランケット BARRIER EasyWarm(イージーウォーム) は、自己発熱機能を伴う使い捨てタイプの未滅菌ブランケットです。
ブランケットは、真空パックに個包装されています。真空パックからブランケットを取り出すと、ウォーミングパッドが空気に触れて発熱し始めます。

【製品詳細】
SMS(メルトブローン・スパンボンド) ポリプロピレン不織布を使用した 2 層構造で、上面にポケットがついています。
生地とポケットはポリエステル糸で縫い合わされ、端部はポリプロピレン不織布を使用しています。ブランケットのポケット内には、鉄粉、活性炭、水、塩、アクリル酸ナトリウムを封入した通気性のあるウォーミングパッドが挿入されています。
【用途】
防寒や身体の保温。冷えの予防。

【禁忌事項：以下に該当する場合は使用しないで下さい】

☐ 18 歳未満の方

☐ 重度の末梢血管疾患、末梢（皮膚を含む）循環に重度の障害がある方（以下、例）

▽ 重度の低血圧症状がある方、また長期にわたる低血圧症状が危惧される方 ▽ 大動脈手術後における、大動脈クロスカンピング遠位部への使用

▽ 重度の心不全／心原性ショックの発症が危惧される方

☐ ブランケットは酸素の多い環境では使用しないでください。すなわち、ブランケットは高気圧医療の現場では使用せず、ウォーミングパッドは酸素を使用する治療や器具から流出する酸素に触れないよう使用してください。

【使用上の注意】

☐ 製品の素材に対して使用者が過敏症であることが分かっている場合は、製品を使用しないでください。☐ 打撲、腫脹、凍傷のある部位には、直接皮膚に触れないようにすることをお勧めします。☐ ウォーミングパッドは磁石に反応し、かつ X 線に対して非透過性の素材です。MRI や X 線撮影する際は、必ずブランケットを外して下さい。☐ ブランケットから発生する熱により、経皮投薬システム（パッチ）からの薬物送達が増加する可能性がありますのでご注意ください。☐ 再使用をしないでください。製品の性能が低下し、また製品を通じた感染等が生じる可能性があります。

これらの禁忌事項及び使用上の注意を考慮しない場合、熱傷のリスクが生じる可能性があります。

【使用方法】

☐ ブランケットは、有資格の医療従事者またはその監督下で使用することを推奨しております。ブランケットは、周囲温度が 18 ～ 24℃ の環境で使用してください。


1. プレカットタブからパッケージを開封し製品を取り出す。
2. ブランケットを開き、完全に広げます。
3. 毛布が温まるまで約 30 分待ちます。
4. ウォーミングパッドが上になるようにブランケットを使用者の上に置きます。正しい上面は毛布の「THIS SIDE UP」マークで示されます。

☐ ブランケットを使用者の顔の上に置かないでください。☐ ブランケットを使用者の腕、脚、体の下に敷かないでください。☐ 固定ベルト、テープ、ストラップ、補助寝具等をブランケットの上から使用しないでください。☐ 補助寝具、医療器具、その他の体重を支えるものを含め、余計な重量や圧力をブランケットの上に加えて使用しないでください。☐ ウォームパッドが当たっている部分につきましては、定期的に肌の状態をチェックしてください。☐ 使用する際はブランケットを回転させるかスライドさせることで位置を調整し、ブランケットを折りたたまないでください。☐ ブランケットの最大使用時間は 10 時間です。☐ 就寝時には使用せず、乳幼児や身体のご不自由な人など、自分ですぐに使用を中止できない場合は使用しないようお願いします。☐ 本品を直接肌にかけて使用する場合は、低温やけどにご注意ください。また、自覚症状を伴わないで低温やけどになる場合があるので十分に気を付けて使用して下さい。また周期期の病人に使用する場合は、病人本人がすぐに使用を中止できない場合が想定されるため医療従事者が低温やけどに十分注意を払いながら使用して下さい。☐ 肌に痛みやかゆみ、また長時間赤みが消えない場合は使用を中止し、医師にご相談ください。☐ 本品のウォーミングパッドが取り付けられている部分を折ったり、重ねたりして使用しないでください。☐ 本製品を使用しながらホットカーペットを利用する時や、ストーブの前にいることで、表示以上の温度になる場合がありますのでご注意ください。

☐ ウォーミングパッドの特質上、酸素濃度が低い場所では温度上場までに時間がかかる場合があります。☐ 汗等で衣服等が濡れていることで、直接熱が肌に伝わりやすくなり、異常発熱と感じられる場合がありますが、異常発熱することはありませんので、ご安心ください。☐ 設定された温度を妨げる可能性もありますので、水濡れにはご注意ください。☐ 本品を開封する際は、切り込み部分から手で開封してください。刃物等で開封される場合、ウォームパッド部分を切らないようにご注意ください。☐ ウォーミングパッドの袋を破って内容物を出したり、口に入れたりしないでください。万一保温パッドの内容物が眼に入った場合には、眼を水洗し医師にご相談ください。☐ その他、身体に異常を感じた場合、暑すぎると感じた場合は使用を中止し、医師にご相談ください。

【保管上の注意と廃棄について】

☐ 水濡れ、直射日光、高温多湿をさせて保管してください。☐ 幼児の手の届くところに置かないでください。☐ 使用後は各自自治体の区分に従って廃棄してください。

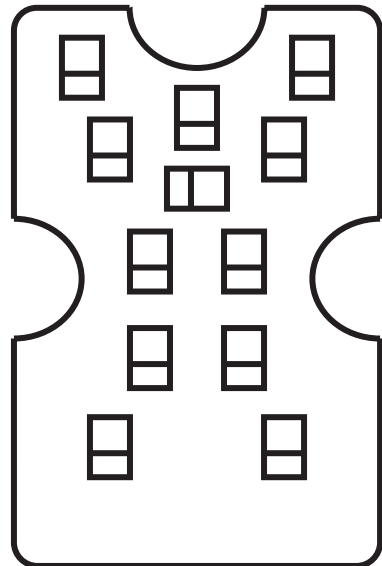

ブランケットは折り重ならないようにご使用ください。



固定ベルト、テープ、ストラップ、補助寝具等をブランケットの上に使用しないでください。ブランケットを使用者の腕、脚、または体の下に折り込んだり下に設置しないでください。また、使用者の手、腕等の四肢をブランケットの上には置かないでください。



末梢（皮膚を含む）循環に重度の障害がある方は使用しないで下さい。



使用中は皮膚の状態にご注意ください。使用者を観察する際は、ブランケットを回転させたりずらしてください。折り重ねないでください。



ウォーミングパッドが上になるようにブランケットを使用者の上に置きます。正しい上面はブランケットの「THIS SIDE UP」マークで示されます。



【その他】

☐ 本製品の品質には万全を期しておりますが、万一事故が発生した場合や不良品がございましたら、発生日、お買い上げの日、場所等を記載の上、輸入販売元または、販売代理店までご連絡ください。

☐ Mölnlycke および BARRIER® EasyWarm® の名称、ロゴは、Mölnlycke ヘルスケアグループの登録商標です。



Mölnlycke Health Care AB
Entreprenörstråket 21
SE-431 53 Mölndal, Sweden
www.molnlycke.com

輸入販売元：メンリッケヘルスケア株式会社
〒160-0023 東京都新宿区西新宿 6-20-7 4F
Tel: 03- 6914-5006

MHCJPSU-202601-03
Made in China