

# Tubifast® Garments

# Tubifast® Gloves

WITH  
2-WAY STRETCH®  
TECHNOLOGY

WITH  
2-WAY STRETCH®  
TECHNOLOGY

Vêtements et gants en jersey, légers et extensibles en longueur et en largeur, non stériles

## DESCRIPTION

Tubifast® Garments / Gloves 2-Way Stretch® sont des gammes de vêtements et gants prêts-à-porter en jersey pour la fixation de pansements, la protection de la peau et le traitement de l'eczéma atopique par enveloppement humide ou sec.

## COMPOSITION



- 1 Jersey tubulaire  
Viscoses (rayonne), élastanne, polyamide (nylon).

### Autres informations

- Absence de latex de caoutchouc naturel.
- Absence de phtalate (DEHP).
- Absence de produit d'origine animale ou biologique.

## INDICATIONS

- Fixation de pansements
- Traitement adjuvant de l'eczéma atopique dans le cadre de la technique par enveloppement humide ou sec.

## MODE D'ACTION

Les vêtements et gants Tubifast® 2-Way Stretch® sont constitués d'un maillage de fibres de viscose tissé de fils très fins de polyamide et d'élastanne dans le sens de la longueur et de la largeur.

Le procédé de fabrication breveté 2-Way Stretch® confère une élasticité suffisante et nécessaire pour une mise en place facile et un maintien efficace sans constriction ni compression.

## MODE D'EMPLOI

### Pour le maintien de pansement :

- Poser le pansement primaire sur la zone à traiter.
- Prendre les mensurations de la zone à couvrir et choisir dans le tableau la taille appropriée de vêtements ou de gants.
- Etirer légèrement les vêtements ou les gants pour faciliter l'enfilage.

### Pour le traitement de l'eczéma atopique par la technique d'enveloppement sec ou humide :

- Nettoyer la zone affectée et sécher par tamponnement.
- Appliquer le traitement local recommandé par votre médecin sur les zones sérieusement touchées.
- Appliquer un émollient adapté sur la peau en l'étalant du haut vers le bas.
- Tremper le vêtement ou le gant Tubifast® 2-Way Stretch® dans l'eau chaude, l'essorer et l'appliquer lorsqu'il est encore chaud et humide. Il est possible d'enfiler un autre vêtement ou gant Tubifast® 2-Way Stretch® sec pour éviter d'humidifier les vêtements de ville ou de nuit.

Pour réaliser un enveloppement sec, ne pas tremper les vêtements/gants dans l'eau chaude et mettre une seule couche de vêtements/gants Tubifast® 2-Way Stretch®.

## RENOUVELLEMENT

Les vêtements/gants Tubifast® 2-Way Stretch® peuvent être laissés en place plusieurs jours. Ils peuvent être lavés en machine (T°C < 60°C). Ils doivent être changés lorsqu'ils sont souillés ou lorsque leurs propriétés de maintien deviennent insuffisantes.

## PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- Enveloppement sec ou humide : si l'eczéma s'aggrave ou s'infecte, cesser le traitement et consulter un médecin.
- Eviter les flammes et toutes sources d'étincelles, notamment lors d'une utilisation avec des produits à base de paraffine.
- Non stérile. La stérilisation de Tubifast® Garments 2-Way Stretch® ou Tubifast® Gloves 2-Way Stretch® n'a pas été testée et n'est pas recommandée.
- Ne pas utiliser après la date d'expiration. Si le produit est utilisé après la date d'expiration ses performances ne sont plus garanties.

## CONTRE-INDICATIONS

Aucune contre-indication rapportée.

## PROPRIÉTÉS

- Technologie 2-Way Stretch® : fixation optimale des pansements par une pression légère et uniforme. Pas de compression, ni constriction, ni effet garrot.
- Léger, souple et extensible : permet une bonne liberté de mouvement, une protection optimale des peaux fragiles ou lésées et un confort accru pour le patient.
- Atraumatique pour la peau et indolore pour le patient.
- Non sensibilisant, non irritant : bonne tolérance cutanée.
- Coutures plates pour éviter les frottements.
- Large choix de tailles et de formes (gants, leggings, tee-shirts, chaussettes...).
- Mise en place pratique et rapide.
- Lavable en machine (jusqu'à 60°C).

## COMPATIBILITÉ AVEC D'AUTRES DISPOSITIFS ET/ TOPIQUES LOCAUX

Aucune incompatibilité rapportée

## CONDITIONNEMENT, STOCKAGE ET PÉREMPTION

### Conditionnement

#### DOUBLE EMBALLAGE

Protection de la poussière, de l'humidité et des dommages lors du transport et de la manutention

- **Carton de transport**  
A ouvrir au niveau du magasin.
- **Boîte intérieure:**  
A ouvrir au niveau du service.

### Conditions de stockage

Température < 25°C

### Durée de validité:

5 ans

## MARQUAGE CE

Classe I

Auto-certification

Date de première mise sur le marché dans l'UE : 2008 (avec la technologie 2-Way Stretch®).

## PRÉSENTATIONS

Unité d'emploi = 1 Tee-shirt ou 1 legging ou 1 paire de chaussettes ou 1 paire de gants = 1 pièce (pcs)


### PRÉSENTATIONS COLLECTIVITÉS ET VILLE :

Référence Labo	Code ACL 13	Code LPPR	Age	Dimensions Circonférences (cm)			UCD* (pcs)	Carton (pcs)
Tee-shirt manches longues				A	B	C		
992 007	5 055 158 000 759	NR**	6-24 mois	74 à 86	28 à 34	25 à 29,5	1	30
992 008	5 055 158 000 766	NR**	2-5 ans	86 à 110	34 à 37	29,5 à 35,5	1	30
992 009	5 055 158 000 773	NR**	5-8 ans	110 à 128	47 à 58	35,5 à 42	1	30
992 010	5 055 158 000 780	NR**	8-11 ans	128 à 146	58 à 68	42 à 49	1	30
992 011	5 055 158 000 797	NR**	11-14 ans	146 à 164	67 à 77	49 à 57,5	1	30
Collants, Leggings, Chaussettes				A	B	C		
992 012	5 055 158 000 704	NR**	6-24 mois	74 à 86	28 à 34	25 à 29,5	1	30
992 013	5 055 158 000 711	NR**	2-5 ans	86 à 110	34 à 37	29,5 à 35,5	1	30
992 014	5 055 158 000 728	NR**	5-8 ans	110 à 128	47 à 58	35,5 à 42	1	30
992 015	5 055 158 000 735	NR**	8-11 ans	128 à 146	58 à 68	42 à 49	1	30
992 016	5 055 158 000 742	NR**	11-14 ans	146 à 164	67 à 77	49 à 57,5	1	30
992 017	5 055 158 000 268	NR**	Taille Unique : 2 à 14 ans				1	42
Gants								
5 922	7 332 551 870 706	NR**	Enfant XS				1	42
5 923	7 332 551 896 126	NR**	Enfant S				1	42
5 921	7 332 551 870 652	NR**	Enfant M-L / Adulte S-M				1	42
5 920	7 332 551 870 607	NR**	Adulte M-L				1	42

\*UCD (Unité Commune de Dispensation) = 1 unité de commande = 1 boîte

\*\*NR : Non Remboursé.

**CODE CLADIMED** : M50BB

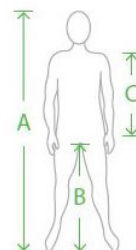

## PRODUCTION ET STÉRILISATION

Fabricant (au sens du règlement (UE)

2017/745) : Mölnlycke Health Care AB,

Box 13080, S-40252 Göteborg - Suède

**Fabricant certifié EN ISO 13485**

Certificat numéro MD83345 délivré par B.S.I.

**Lieu de fabrication et stérilisation**

Fabriqué en Angleterre pour le laboratoire  
Mölnlycke Health Care AB

## DISTRIBUTEUR FRANCE

Laboratoire Pharmaceutique Mölnlycke Health Care SAS

CS 70205 - 13 allée du Château Blanc

59445 Wasquehal Cedex

Service clients :

Tél : 0800 915 188 - Fax : 0800 915 073

Renseignements produits :

Tél : 03 20 12 25 55 - Fax : 03 20 12 25 46

Matéiovigilance :

Mail : [reclamation.qualite@molnlycke.com](mailto:reclamation.qualite@molnlycke.com)

Internet : [www.molnlycke.fr](http://www.molnlycke.fr)