

Lesiones más frecuentes en la 3ªEdad

Lesiones por presión

**Categoría I: eritema no blanqueable**  
Alteración observable en la piel íntegra, relacionada con la presión, que se manifiesta por un eritema cutáneo que no palidece al presionar; en pieles oscuras, puede presentar tonos rojos, azules o morados.

**Categoría II: úlcera de espesor parcial**  
Pérdida parcial del grosor de la piel que afecta a la epidermis, dermis o ambas. Úlcera superficial que tiene aspecto de abrasión, ampolla o cráter superficial.

**Categoría III: pérdida completa del grosor de la piel**  
Pérdida total del grosor de la piel que implica lesión o necrosis del tejido subcutáneo, que puede extenderse hacia abajo pero no por la fascia subyacente.

**Categoría IV: pérdida total del espesor de los tejidos**  
Pérdida total del grosor de la piel con destrucción extensa, necrosis del tejido o lesión en músculo, hueso o estructuras de sostén (tendón, cápsula articular, etc.).

**LPP no estadiable**  
Profundidad desconocida. Pérdida de tejido de espesor total en la que la base de la úlcera está cubierta por descamación (amarillo, tostado, gris, verde o marrón) y/o escara (bronceada, marrón o negra) en el lecho de la herida.

**Sospecha de lesión de tejidos profundos:**  
Profundidad desconocida. Área localizada de color púrpura o granate de piel intacta descolorida o ampolla llena de sangre debido al daño del tejido blando subyacente por presión y/o cizallamiento.

Nivel de exudado

Prevención/Tratamiento

Solución

Mepilex® Border Flex Oval

Mepilex® Border Flex Oval

+ Exufiber®

Mepilex® Border Flex Oval

Desgarros cutáneos

**Piel en riesgo**  
La piel de las personas mayores es más vulnerable y propensa a sufrir desgarros cutáneos

**Tipo 1: Sin pérdida de tejido**  
Desgarro lineal o colgajo que puede volverse a colocar para cubrir el lecho de la herida¹

**Tipo 2: Pérdida parcial del tejido**  
Pérdida parcial de colgajo, que no puede volverse a colocar para cubrir el lecho de la herida¹

**Tipo 3: Pérdida total del tejido**  
Pérdida total del colgajo que deja expuesto todo el lecho de la herida¹

Tratamiento

Solución

Si hay infección

Fijación/Protección

Epaderm® Cream

Mepilex® Up Mepilex® Ag Tubifast®

Mepilex® Up o Mepilex® Border Flex Oval Mepilex® Ag Tubifast®

Úlceras vasculares

Úlceras venosas

Úlceras arteriales

Tratamiento

Solución

































Si hay infección

Fijación/Protección

Mepilex® Up o Mepilex® Border Flex Oval + Exufiber® Mepilex® Ag Exufiber® Ag Tubifast®

Mepilex® Up o Mepilex® Border Flex Oval Mepilex® Ag Tubifast®

Soluciones para el tratamiento de heridas

					Tipo de lesión							
Productos*				Tam. cm	Código Orion	Cuidado de la piel	Lesiones por humedad	Prevención UPP	Tratamiento UPP	Desgarros cutáneos	Úlceras venosas	Úlceras arteriales
Mepilex® Border Flex Oval   				15 x 19	908423							
Exufiber®   				10 x 10	908497							
Mepilex® Up   				15 x 15	908430							
Mepilex® Ag   				12,5 x 12,5	908632							

1. LeBlanc K et al. State of the science: Consensus statements for the prevention, prediction, assessment and treatment of skin tears. Advances in Skin and Wound Care. 2011.