

## Importante:

En caso de limpieza con jabón antiséptico, aclare y seque bien la piel antes de aplicar el apósito. De lo contrario, los residuos de jabón podrían afectar a la capacidad de permanencia del apósito.

No estire el apósito mientras lo aplica. Evite las arrugas.



## Mepilex Border Post-Op

Ref.	Tamaño (cm)	Uds/RET	Uds/TRP
496100	6 x 8	10	100
496150	6 x 12	10	60
496200	9 x 10	10	100
496300	10 x 15	10	100
496405	10 x 20	5	25
496455	10 x 25	5	30
496605	10 x 30	5	25
496650	10 x 35	5	50

Si busca obtener los mejores resultados en el tratamiento de las heridas postquirúrgicas las soluciones Mölnlycke serán su mejor aliado:



Para más información visite:  
<https://www.molnlycke.es/tipos-heridas/soluciones-herida-quirurgica/>

Referencias: 1. Beele H. et al. A prospective randomized controlled clinical investigation comparing two post-operative wound dressings used after elective hip and knee replacement; Mepilex® Border Post-Op versus Aquacele® Surgical. International Journal of Orthopaedic and Trauma Nursing, 2020. 2. Van Overschelde P., et al. Undisturbed wound healing: a single centre retrospective study investigating patient reported outcomes and clinical validity of extended dressing wear time for incisional healing following orthopaedic surgery, the ARCTIS study. Journal of Wound Care, 2024. 3. Zarghooni K. et al. Is the use of modern versus conventional wound dressings warranted after primary knee and hip arthroplasty? Acta Orthopaedica Belgica, 2015. 4. Bredow J. et al. Evaluation of Absorbent Versus Conventional Wound Dressing. A Randomized Controlled Study in Orthopedic Surgery. Deutsche Arzteblatt International, 2018.

## Más información en [www.molnlycke.es](http://www.molnlycke.es)

Mölnlycke Health Care, Calle Quintanavides 17, Edif. 3 - 4ª Planta, 28050 Las Tablas (Madrid). Tel: 914841320, Mölnlycke, Mepilex y Safetac son marcas y logotipos registrados globalmente por una o más empresas del grupo Mölnlycke Health Care. © 2024 Mölnlycke Health Care AB. Todos los derechos reservados. HQIM004485



Mejore los resultados de los pacientes

Guía de aplicación

Mepilex® Border Post-Op

Cicatrización sin interrupciones

Empiece siempre limpiando cuidadosamente la herida y la piel de cualquier residuo, por ejemplo, tejido adiposo y productos de limpieza. Asegúrese de que la piel está completamente seca antes de aplicar el apósito.

## Cómo utilizar Mepilex® Border Post-Op

1.

Abra el paquete estéril y retire el apósito. Asegúrese de que la piel está limpia y seca antes de iniciar la aplicación.



2.

Retirar total o parcialmente la película y aplicar el apósito sobre la piel.



3.

Utilizando la lengüeta, empieza a retirar los marcos, uno tras otro.



4.

Finalizar la aplicación presionando el apósito para lograr la máxima adherencia. No dejar pliegues por debajo del apósito.





## Cuándo no cambiar

Mepilex Border Post-Op está diseñado para **absorber** y retener eficazmente la sangre de la incisión<sup>1</sup>. Esto hace que el tiempo de uso del apósito **pueda alargarse durante muchos días**, obteniendo los beneficios de la cicatrización sin interrupciones<sup>2</sup>.

Si ve sangre en el apósito, no piense que tiene que cambiarlo. Deje que el apósito haga su trabajo, **no lo cambie a menos que sea necesario**.

Las imágenes siguientes muestran cuándo es el momento de hacerlo.

¡No cambie el apósito!

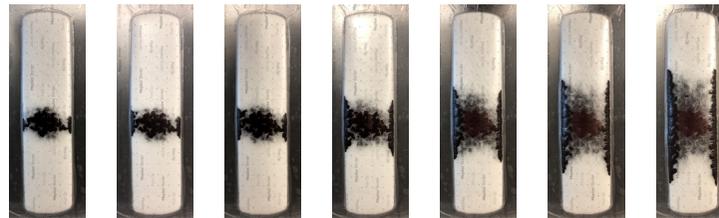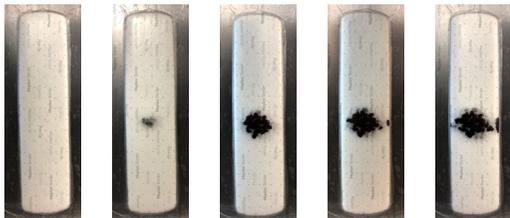

¡Cambie el apósito!

