

# Guía Tratamiento Úlceras Venosas\*

## 1. Limpieza y desbridamiento

Seleccione una solución de limpieza suave y segura para limpiar la herida y la piel perilesional. Desbride la herida si fuese necesario para eliminar el tejido muerto o desvitalizado y en caso de biofilm.



Granudacyn®

## 2. Tratar la herida

Elija un apósito con silicona para proteger la herida y la piel perilesional capaz de absorber eficazmente el exudado.

Los profesionales clínicos deben elegir un apósito adecuado en función de las características de la herida y la piel perilesional, teniendo en cuenta problemas como el exudado y el dolor<sup>1</sup>.

### ¿La herida está infectada?

Utilice apósitos antimicrobianos en caso de sospecha o infección de la herida.



Scanee el código QR para más información

[my.molnlycke.es](http://my.molnlycke.es)



No infectada



Mepilex® Up

Infectada



Exufiber® Ag

+



Mepilex® Up

## 3. Hidratación

Aplique un emoliente para restaurar la hidratación de la piel



Epaderm® Cream

## 4. Compresión

Aplique terapia de compresión para mejorar la cicatrización y prevenir las recidivas.



La terapia de compresión ha demostrado ser beneficioso para el tratamiento de las úlceras venosas de pierna y es el estándar de cuidado<sup>2</sup>. La terapia de compresión fuerte es la piedra angular de la curación de las úlceras venosas de la pierna<sup>1</sup>. Para evitar la recurrencia de la úlcera, los pacientes necesitan terapia compresiva durante toda la vida<sup>1</sup>.

1. Documento Posicionamiento EWMA - Comprendiendo la terapia compresiva

2. Consenso sobre Úlceras Vasculares y Pie Diabético de la Asociación Española de Enfermería Vasculare y Heridas (AEEVH)

### Presentaciones (Sobres estériles):

#### Mepilex® Up

Ref.	Tam.(cm)	Uds/RET	Uds/TRP	C.N.	Tam. (cm)	Uds/RET	Uds/TRP
212100	10 x 10cm	5	70	486902*	10 x 10cm	3	30
212300	15 x 15cm	5	25	486910*	15 x 15cm	3	18
212200	10 x 20cm	5	25	494039*	10 x 20cm	3	15
212400	20 x 20cm	5	25				
212500	20 x 50cm	2	12				

#### Exufiber® Ag+

Ref.	Tam. (cm)	Uds/RET	Uds/TRP	C.N.	Tam. (cm)	Uds/RET	Uds/TRP
603401	5 x 5cm	10	40	496752*	10 x 10cm	3	18
603402	10 x 10cm	10	60				
603403	15 x 15cm	10	60				
603407	20 x 30cm	5	20				
603400	2 x 45cm	5	20				

\*Medidas financiadas por el Sistema Nacional de Salud para el tratamiento de lesiones

Más información en [www.molnlycke.es](http://www.molnlycke.es)

Molnlycke Health Care, Calle Quintanavides 17, Edif. 3 - 4ª Planta. 28050 Las Tablas (Madrid). Molnlycke, Epaderm, Exufiber, Granudacyn, Mepilex y Safetac son marcas, nombres y logos registrados globalmente a una o más de las compañías del grupo Molnlycke Health Care. © 2025 Molnlycke Health Care AB. Todos los derechos reservados. ESWC0253

