

Mepilex® Up

Diseñado para minimizar el riesgo de fugas



Reducción de fugas de exudado

Captura y bloquea el exudado incluso bajo compresión y minimiza la maceración



Reducido grosor

Flexibilidad y adaptabilidad para un mayor confort



Absorción capilar mejorada

Distribuye el exudado tanto normal como viscoso en todas las direcciones incluso contra la gravedad



Mayor permanencia

Mayor tiempo de uso y menos cambios de apósitos

Suave, seguro
y adaptable



Tecnología Safetac®. Menos trauma. Menos dolor

La Tecnología Safetac® es una tecnología exclusiva de suave silicona. Estos apósitos minimizan el traumatismo en la herida y la piel perilesional, lo que minimiza el dolor en el paciente. El riesgo de maceración se minimiza al sellar los bordes de la herida.

Para más información visite www.molnlycke.es



Sin Safetac



Con Safetac

Soluciones Mölnlycke

Mepilex® Up

ESPUMA CON CANALES DE ABSORCIÓN



C.N.	Tamaño cm
486902	10 x 10cm
486910	15 x 15cm
494039	10 x 20cm

Mefix®

TELA AUTOADHESIVA



C.N.	Tamaño cm
499822	10 x 10cm

Tubifast®

VENDAJE TUBULAR LIGERO



C.N.	Color e indicaciones	Tam. cm x m
316209	Línea ROJA Miembros pequeños	3,5 x 1
316490	Línea VERDE Miembros pequeños/medianos	5 x 1
316205	Línea AZUL Miembros grandes	7,5 x 1
316204	Línea AMARILLA Miembros muy grandes	10,75 x 1
316207	Línea PÚRPURA Tronco grande adulto	25 x 1

Más información en www.molnlycke.es

Mölnlycke Health Care, Calle Quintanavides 17, Edif. 3 - 4ª Planta
28050 Las Tablas (Madrid). Tel: +34 91 484 13 20
Mölnlycke, Safetac, Mepilex, Mefix y Tubifast son marcas, nombres y logos registrados globalmente por una o más empresas del grupo Mölnlycke Health Care.
© 2025, Mölnlycke Health Care AB. Todos los derechos reservados.




Guía de cortes

Mepilex® Up

Mepilex® Up

Apósito de espuma de poliuretano con canales de absorción

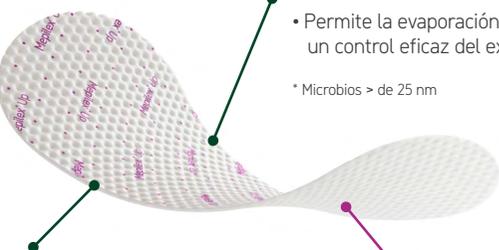

Film posterior de poliuretano, barrera frente a virus y bacterias*

• Permite la evaporación de la humedad para un control eficaz del exudado.

* Microbios > de 25 nm

Cuerpo absorbente con canales de absorción

- Gestión de exudado superior
- Canales de absorción diseñados para gestionar exudados viscosos
- Espuma flexible. Se adapta a los contornos del cuerpo.


Capa con Safetac®

- Atraumático en los cambios de apósito.
- No se adhiere al lecho húmedo de la herida.
- Minimiza el riesgo de maceración.

Safetac®
TECHNOLOGIES

Absorción del exudado venciendo la gravedad

Los apósitos de espuma están específicamente diseñados para absorber los fluidos de la herida mediante la acción capilar, que se produce a través de espacios estrechos. Sin embargo, la exclusiva estructura de Mepilex Up con canales de absorción potencia este proceso. Esto significa que expande el exudado eficazmente en todas direcciones, incluso hacia arriba, en contra de la gravedad!

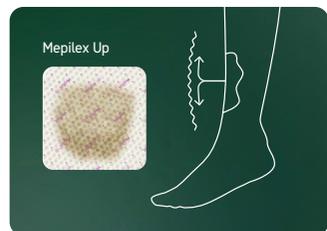

Guía de cortes



Dedos

Indicaciones:

- Cirugía del dedo



Codo

Indicaciones:

- Prevención U.P.P.
- Post-tratamiento de bursitis



Talón

Indicaciones:

- Talonera
- Protección ampollas
- Prevención U.P.P.



En el primer dedo

Indicaciones:

- Heridas/ Úlceras
- Uñas encarnadas
- Tras retirada de uñas



Oreja

Indicaciones:

- Heridas alrededor de la oreja
- Prevención U.P.P.



Entre los dedos

Indicaciones:

- Para heridas difíciles entre los dedos



Axila

Indicaciones:

- Nódulos linfáticos
- Heridas exudativas



Mano

Indicaciones:

- Heridas en contractura, en la palma o nudillos



Tubos y catéteres

Indicaciones:

- Drenajes y catéteres suprapúbicos
- Fijación alrededor de zona suturadas con grapas

Cuando sea necesario, fije Mepilex® Up con una venda u otro tipo de fijación.