



# Mepiform®

## Pansement doux siliconé auto-adhésif pour le traitement des cicatrices


- auto-adhésif, sans fixation supplémentaire
- discret et mince
- confortable dans la vie quotidienne
- un seul pansement par semaine

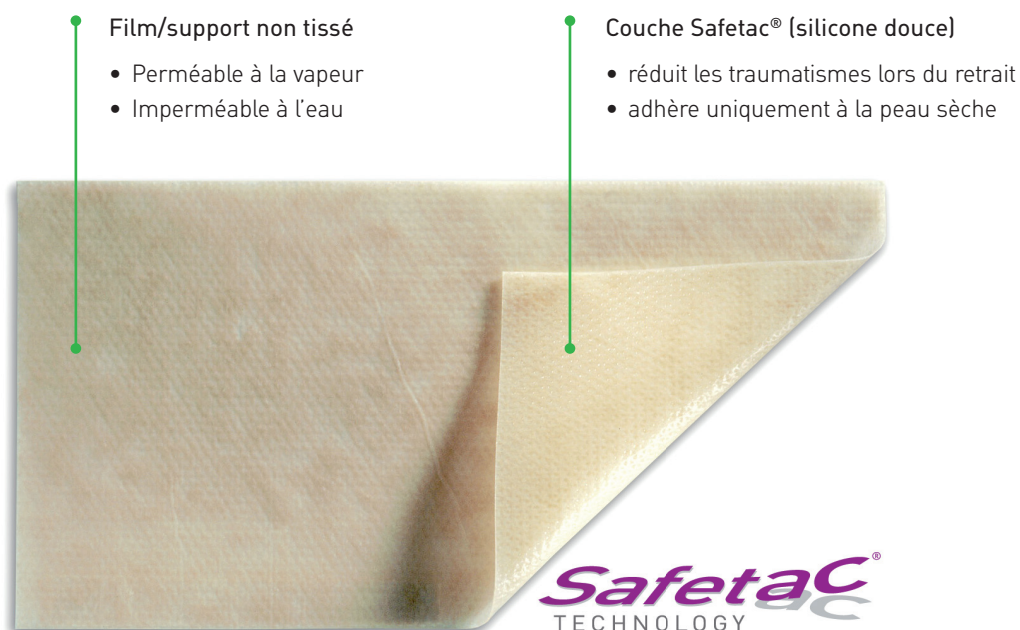


## Mode d'emploi

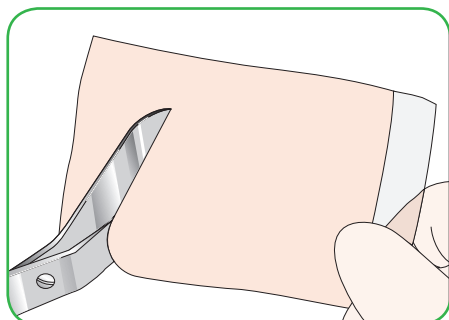

Otez le film protecteur. Le cas échéant, découpez la forme souhaitée, avant d'enlever le film protecteur.

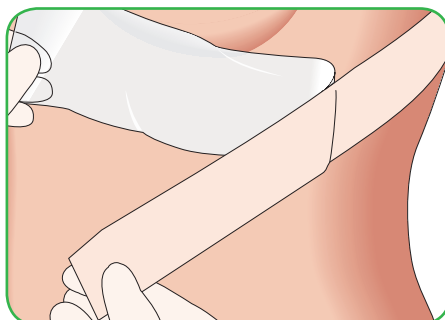

Séchez bien la peau avant d'appliquer Mepiform®.

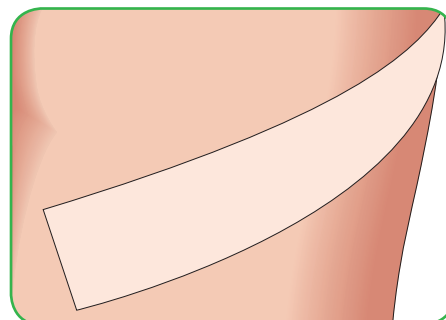

Enlevez le pansement une fois par jour pour nettoyer la peau. Après la douche ou le bain, attendez quelques minutes avant de le remettre en place.

## Mode d'action de Mepiform®

On a montré de façon empirique que la silicone topique a un impact positif sur les cicatrices hypertrophiques et les chéloïdes. L'amélioration d'une cicatrice ancienne peut prendre de 3 mois à un an, selon l'état du tissu cicatriciel. Mepiform® doit être porté 24 heures sur 24. Il est conseillé de l'enlever une fois par jour, au moment du bain ou de la douche, afin d'inspecter et de nettoyer la peau. A titre préventif, Mepiform® sera appliqué pendant 2 à 6 mois, selon l'état du tissu cicatriciel.

## Applications

- cicatrices hypertrophiques anciennes ou récentes, chéloïdes
- plaies fermées, en prévention de la formation de cicatrices hypertrophiques et chéloïdes

## Avantages de Mepiform®

- Auto-adhésif, sans fixation supplémentaire requise
- Mince, souple et discret
- Peut être porté pendant les activités de la vie quotidienne
- Peut être enlevé et remis en place
- Economique : un seul pansement Mepiform® peut être porté pendant 7 jours en moyenne

## Mesures de précaution

En cas de macération, d'urticaire, de démangeaisons ou d'irritation, le traitement doit être momentanément interrompu. Dès que les symptômes ont disparu, les pansements Mepiform® peuvent à nouveau être utilisés. Augmentez progressivement la durée d'application par jour. Mepiform® offre un facteur de protection UV équivalent à 7.7 <sup>[2]</sup>.

### Références:

1. Quinn KJ (1987), Burns 13:33-40; Ahn ST et al (1991), Arch Surg 126:499-504; Dockery GL et al (1994), J Foot Ankle Surg 33:110-19; Katz BE (1995) Cutis 56:65-7; Carney SA et al (1994) Burns 20:163-7.
2. AS/NZS 4399:1996.



## Gamme Mepiform® (stérile)

Dimensions	code CNK	N° d'art.	Conditionnement	Emb. de transp.
5 x 7,5 cm	1457-274	293200	5 x 1 pièce	30 pièces
10 x 18 cm	1457-282	293400	5 x 1 pièce	25 pièces
4 x 30 cm	1457-266	293100	5 x 1 pièce	25 pièces

Mölnlycke Health Care S.A.  
Berchemstadionstraat 72 boîte 2 • 2600 Berchem (Anvers)  
Tél: +32(0)3 286 89 50 • Fax: +32(0)3 286 89 52  
www.molnlycke.com • www.safetac.com

Le nom et le logo Mölnlycke Health Care ainsi que la marque Mepiform® sont déposés partout dans le monde par Mölnlycke Health Care.

  
**Mölnlycke®**