

Aldress®

Pansement protecteur stratifié, absorbant, semi-perméable

Polyester nonwoven

- For stability and ease of application
- Maintains dressing integrity

Coussinet stratifié très absorbant

- Absorbe et retient l'exsudat
- Diminue le risque de macération
- Prévient l'écoulement latéral

Bordure adhésive de polyacrylate


- Fixation solide, moins de fuites
- Adhésif aqueux sans latex ou solvant, doux pour la peau

Pellicule imperméable à l'eau, perméable à la vapeur

- Perméable à la vapeur d'eau
- Permet la douche
- Diminue le frottement

Couche de contact en maille de polyester de conception spéciale


- Minimise l'adhérence à la plaie
- Perméable à l'exsudat
- Bloque l'absorption des hydrogels
- Réduit le risque de macération

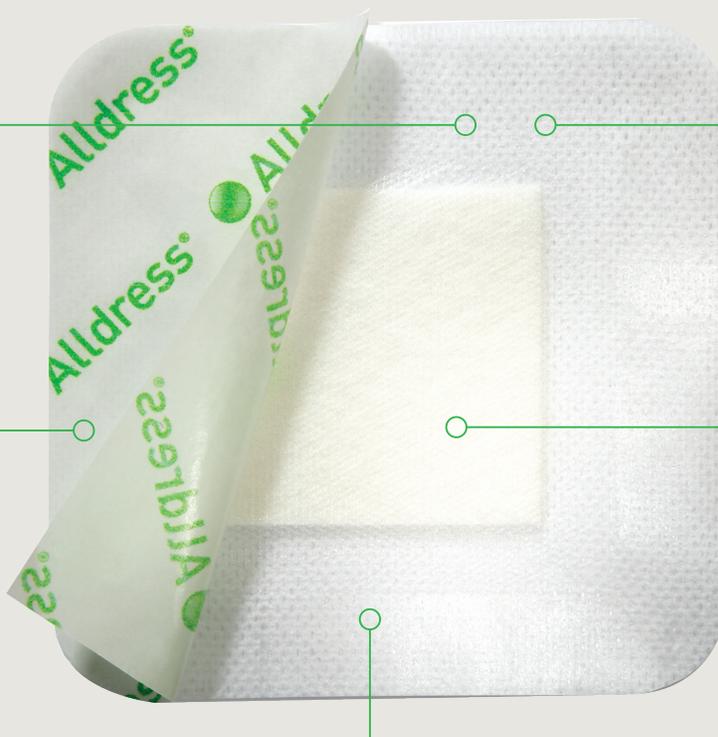

- Aldress est un pansement protecteur complet, absorbant et auto-adhérent.
- Son adhésif doux pour la peau assure une performance et un confort optimaux.

- Il résiste aux bactéries, aux virus et à l'eau pour la protection des patients et cliniciens.


Application d'Alldress

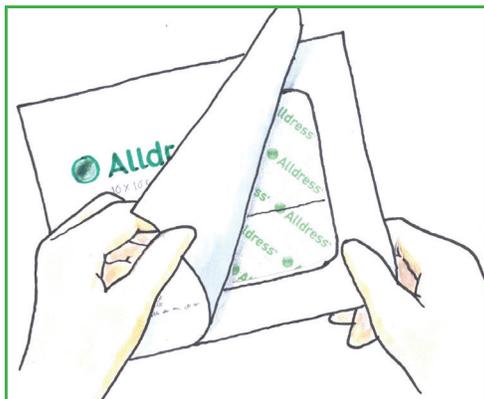

Nettoyer délicatement la plaie; assécher le pourtour. Ouvrir l'emballage; retirer la moitié du papier antiadhésif.



Placer la bordure adhésive sur la peau près de la plaie.

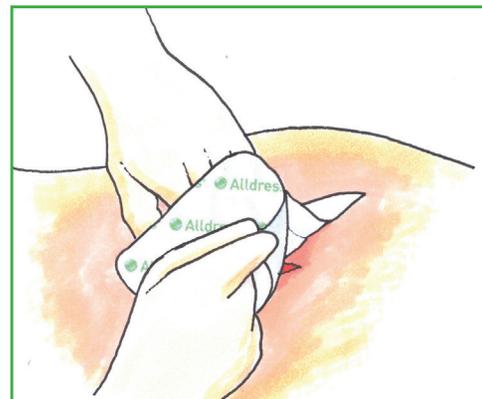

Retirer l'autre moitié du papier et poser le pansement sur la plaie. NE PAS ÉTIRER. Lisser les bords doucement pour assurer une bonne adhérence.

Mode d'action d'Alldress

Alldress comporte une couche de contact en maille hypoadhérente sous un coussinet stratifié qui absorbe et contient l'exsudat, minimisant ainsi le risque de macération.

L'adhésif aqueux, doux pour la peau assure une fixation solide tout en prévenant les fuites.

La pellicule résiste aux bactéries, aux virus et à l'eau. Son excellente rétention des liquides favorise un équilibre hydrique optimal.

Avantages d'Alldress

- La maille de contact hypoadhérente minimise l'adhérence à la plaie
- Maintient l'humidité de la plaie
- Risque minime de macération
- Permet la douche
- Résiste aux virus, aux bactéries et à l'eau, protégeant patients et cliniciens
- Le papier protecteur s'enlève facilement et respecte l'asepsie
- Adhésif aqueux, doux pour la peau
- Très absorbant

Indications*

Alldress est indiqué dans l'absorption, la protection et le maintien d'un environnement humide des plaies ouvertes et fermées. Alldress est indiqué à la fois pour les plaies sèches et exsudatives et comme pansement secondaire lorsqu'il est utilisé avec par exemple des gels ou des alginates.

Précautions*

Alldress ne peut être utilisé sur les plaies infectées sans avis ni suivi médical. En cas de réutilisation l'efficacité du produit peut être altérée et une contamination croisée peut survenir. Stérile. Ne pas utiliser si l'emballage intérieur est ouvert ou endommagé avant l'utilisation. Ne pas restériliser.

Sélection Alldress®

No d'article	Format cm (pansement)	Pièces/boîte	Pièces/caisse
265320	10 x 10	10	70
265340	15 x 15	10	100
265360	15 x 20	10	120

*Avis : Pour plus de détails sur les produits sous licence de Mölnlycke, y compris les indications et les précautions d'emploi, veuillez vous référer au site www.molnlycke.ca

