

fi Mikä on Mepiform®?

Mepiform on itsekiinnittyvä pehmeä silikonisidos arpien hoitoon.

Materiaalit: Polyakrylaatti, polyuretaani, silikoni, viskoosi

Mihin Mepiform® on tarkoitettu?

Mepiform on tarkoitettu sekä vanhojen että uusien hypertrofisten ja keloïdien arpien hoitoon. Sitä voidaan käyttää myös umpeutuneissa haavoissa ennaltaehkäisevästi estämään hypertrofista tai keloïdia arpeutumista.

Huomioitavaa

- Mepiformia ei saa käyttää potilailla, joiden tiedetään olevan allergisia tuotteen materiaaleille/ komponenteille.
- Jos ilmenee ihottumaa tai iho muuttuu märeäksi ja valkoiseksi (maseraatio), poista sidos ja anna ihon toipua, kunnes oire on hävinnyt. Jatka sitten hoitoa pidentäen vähitellen hoitoaika. Jos oireet eivät häviä, lopeta käyttö ja ota yhteys terveydenhuollon ammattilaiseen tai lääkäriin.
- Älä käytä avoimiin haavoihin.

Käyttöohjeet

Sidosken vaihto ja poisto

- Mepiformin optimaalinen käyttöaika on 24 tuntia vuorokaudessa. Poista sidos kerran päivässä ihon tarkistusta ja pesua varten. Sidosta voidaan tämän jälkeen asettaa takaisin.
- Mepiform vaihdetaan normaaliolosuhteissa 7 päivän välein tai kun sidos ei enää kiinnity kunnolla.
- Mepiform on suihkunkestävä. Mepiformissa on UV-suojakerroin (UPF) 5 arven suojaamiseksi. Tuote on hävitettävä paikallisten ympäristömääräysten mukaan.

Muita tietoja

Jos Mepiform-sidosken käytön yhteydessä ilmenee vakavia haittavaikutuksia, siitä on ilmoitettava Mölnlycke Health Carelle.

Mepiform® ja SafetaC® ovat Mölnlycke Health Care AB:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.


Julkaistu 2019-12

Mepiform®

5 x 7,5 cm
2 förband/bandasjer/
bandager/sidosta

Självhäftande/Selvklibbende mjukt/myk/blød silikonförband/-bandasje/-bandage för/til gamla och nya ärr/arr/ar

Itsekiinnittyvä pehmeä silikonisidos vanhojen ja uusien arpien hoitoon

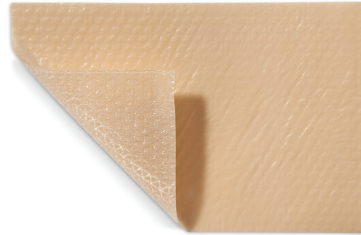

- Skonsamt/skånsomt mot huden Hellävarainen iholle
- Duschbart/kan dusjes med/brusetæt Suihkunkestävä
- Skydd/beskyttelse mot sol- och UV-strålar Suojaa auringolta ja UV-säteiltä
- Kan bäras/brukes/bruges i upp till 7 dagar/dager/dage Voidaan käyttää jopa 7 päivää


Mölnlycke®

Mölnlycke Health Care AB
Gamlestadvägen 3C, Box 13080,
SE-402 52 Göteborg, Sweden

www.molnlycke.com





REF 293770

Made in Finland



7 332551 949327

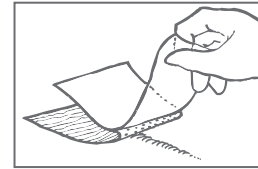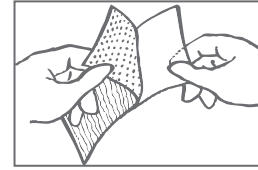

Användning / Käyttö

1. Öppna förpackningen/pakningen och ta ut förbandet/bandasjen/bandagen. Avaa pakkaus ja ota sidos esille.
2. Klipp till förbandet/bandasjen/bandagen i lämplig/passende storlek/størrelse om det behövs. Mepiform ska överlappa äret och den omkringliggande huden med minst 1 cm.
Leikkaa sidos tarvittaessa sopivan kokoiseksi. Mepiform-sidosken on peitettävä arpea ympäröivää ihoa vähintään 1 cm.
3. Se till att området är torrt/tørt när Mepiform appliceras/legges på. När produkten används tillsammans med salva eller kräm/creme, se till att förbandet/bandasjen/bandagen täcker/dekker ett område som är större än det insmorda/indsmurte området.
Kun asetat Mepiformia, tarkista, että alue on kuiva. Jos sidosta käytetään salvan tai voiteen kanssa, varmista, että sidos ylittää voidealueen reunat.
4. Ta bort skyddsfilmen/fjern beskyttelsesfilmen och applicera/legg den självhäftande/selvklibbende sidan av Mepiform på äret utan att sträcka förbandet/bandasjen/bandagen.
Poista taustakalvo ja aseta Mepiform-sidosken kiinnittyvä puoli arven päälle sidosta venyttämättä.

Mepiform®


5 x 7,5 cm

2 förband/bandasjer/bandager/sidosta

Mepiform®

5 x 7,5 cm
2 förband/bandasjer/
bandager/sidosta

ÄRR/ARR- BEHANDLING ARPIEN HOITOON

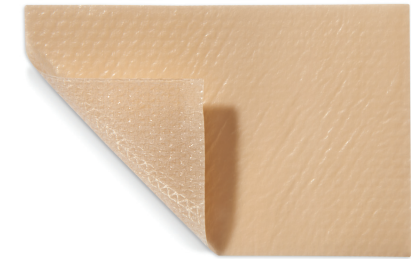

Förebygger och reducerar
ärrbildning/arrdannelse

Ehkäisee ja vähentää arpia


Mölnlycke®

SafetaC
TECHNOLOGY

**sv Vad/Hva/Hvad är Mepiform®?**

no Mepiform är ett självhäftande/selvklebende mjukt/myk/blødt silikonförband/-bandasje/-bandage för ärrbehandling.

da Materialinnehåll: Polyakrylat, polyuretan, silikon, viskos

Vad/Hva/Hvad används/brukes Mepiform för?

Mepiform är utformat/udviklet för behandling av både nya och gamla hypertrofiska ärr och keloider. Det kan även användas/brukes på slutna/lukkede sår för att förebygga hypertrofiska ärr och keloider.

Försiktighetsåtgärder/forholdsregler

- Mepiform bör inte användas/brukes av personer med känd/kendt överkänslighet/overfølsomhet mot ingående material/komponenter i produkten.
- Vid utslag/udslæt eller om huden blir våt och vit/hvid (maceration), avlägsna/løsne/fjern förbandet/bandasjen/bandagen och låt/la huden vila och återhämta/komme sig tills symtomen har försvunnit. Därefter kan behandlingen inledas/fortsettes igen/genoptages, öka behandlingstiden successivt/gradvist. Om symtomen kvarstår/ikke forsvinner, avbryt behandlingen och kontakta vårdpersonal/helsepersonell/sundhedspersonale eller läkare/lege.
- Använd/bruk inte på öppna/åbne sår.

Bruksanvisning/Brugsanvisning

Byte/skift och borttagande/fjerning/fjernelse av förband/bandasje/bandage

- Mepiform ska bäras dygnet/døgnet runt för bästa behandling. Avlägsna/løsne/fjern förbandet/bandasjen/bandagen en gång per dag för inspektion och tvätt/vask av huden. Förbandet/bandasjen/bandagen kan därefter återappliceras/legges på igjen.
- Mepiform bör under normala förhållanden/forhold bytas/skiftes var/hver 7:e dag eller när förbandets/bandasjens/bandagens vidhäftningsförmåga/klebeevne inte längre är tillräcklig/god.
- Mepiform är duschbart/kan dusjes med/brusetæt.

Mepiform har UV-skyddsfaktor/beskyttelsesfaktor (UPF) 5 för att skydda/beskytte ärret.

Avfall/Affald ska hanteras enligt lokala miljörutiner/miljøprosedyrer/miljømessige procedurer.

Övrig information

Om en allvarlig incident/hendelse/uheld med koppling/forbindelse till Mepiform inträffar ska detta rapporteras till Mölnlycke Health Care.

Mepiform® och Safetac® är registrerade varumärken som tillhör Mölnlycke Health Care AB.