


Mölnlycke®

# Mepilex® XT

WITH SAFETAC® TECHNOLOGY

Apósito absorbente de espuma cubierto de suave silicona

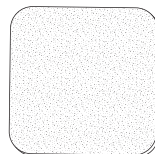

Revised 2021-02

**40435-40**

PD-559462 rev.01

Master PD-491829 rev.07

Manufacturer



Mölnlycke Health Care AB

Gamlestadsvägen 3C, Box 13080, SE-402 52 Göteborg, Sweden

STERILE EO

CE 2797



Un solo uso



Vea instrucciones de uso



No utilizar si el envase está dañado

MD

Producto sanitario



Sistema de barrera única estéril



Para lesiones con poco exudado




Para lesiones con exudado moderado



Para lesiones con mucho exudado

Mepilex® XT

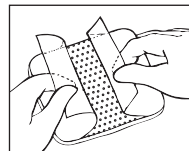

# Mepilex® XT

Apósito absorbente de espuma cubierto de suave silicona

## Descripción del producto

Mepilex XT es un apósito muy adaptable con canales de exudado integrados que absorbe exudados de viscosidad baja y alta, mantiene húmedo el entorno de la lesión y reduce al mínimo el riesgo de maceración. El apósito cuenta con una capa de contacto con la lesión Safetac®, una tecnología adhesiva exclusiva. Minimiza el dolor de los pacientes y el traumatismo en las lesiones y la piel perilesional durante la retirada del apósito.

Mepilex XT está formado por:

- una capa de contacto con la lesión de suave silicona (Safetac);
- una almohadilla absorbente fina y flexible de espuma de poliuretano;
- una película exterior de poliuretano transpirable e impermeable a líquidos.

Contenido del material del apósito:

Silicona, poliuretano

## Indicaciones de uso

Mepilex XT está indicado para úlceras por presión y úlceras vasculares.

## Precauciones

- No lo utilice en pacientes con hipersensibilidad diagnosticada a los apósitos o sus materiales.
- No utilice este apósito junto con agentes oxidantes como soluciones de hipoclorito o peróxido de hidrógeno.
- Si observa signos de infección clínica, como fiebre o enrojecimiento, calentamiento o hinchazón de la lesión o la piel perilesional, consulte a un profesional sanitario para que le indique un tratamiento adecuado.
- Debe prestar especial atención en la aplicación sobre piel o tejidos altamente sensibles, por ejemplo, en el tratamiento de pacientes con Epidermólisis Bulbosa. La superficie de espuma puede generar una tensión adicional en el lecho de la lesión y la piel perilesional. Puede valorar la posibilidad de utilizar otro producto Safetac.
- No lo reutilice, ya que puede empeorar el rendimiento del producto y pueden producirse contaminaciones cruzadas.
- Estéril. No lo utilice si la barrera estéril está dañada o abierta antes de su uso. No lo esterilice de nuevo.

## Instrucciones de uso

Mepilex XT puede ser utilizado por cualquier persona bajo la supervisión de profesionales sanitarios.

1. Lave la lesión según la práctica clínica.
2. Seque bien la piel perilesional.
3. Seleccione un tamaño de apósito adecuado. El apósito debería cubrir al menos 1–2 cm de piel perilesional seca en el caso de lesiones pequeñas (tamaños de hasta 12,5×12,5 cm) y unos 3–5 cm para tamaños mayores. Si es necesario, el apósito se puede cortar para adaptarse a las distintas formas y lugares de la lesión.
4. Retire la primera película protectora y coloque el lado adhesivo sobre la lesión.
5. Retire el resto de película protectora y alise el apósito sobre la piel. No estire el apósito.
6. Si es necesario, sujete el apósito con una venda u otra fijación.

Puede cambiar el apósito en un intervalo de varios días. Cambie el apósito antes de que esté completamente saturado, si se aprecian indicios de fuga o según las indicaciones del profesional sanitario.

Mepilex XT puede utilizarse bajo vendajes de compresión y con geles.

Debe desecharse respetando los procedimientos medioambientales locales.

## Otra información

El color de la espuma de poliuretano empleada en el producto puede volverse más amarillo si se expone a la luz, al aire o al calor. Este cambio de color no repercutirá en las propiedades del producto mientras se utilice antes de la fecha de caducidad.

Todo incidente grave que pueda producirse en relación con el uso de Mepilex XT deberá ser notificado a Mölnlycke Health Care y a las autoridades locales competentes.

Mepilex® y Safetac® son marcas registradas de Mölnlycke Health Care AB.