

Champ de césarienne avec assistance maternelle



Grâce au champ de césarienne avec assistance maternelle, la maman a la possibilité d'accoucher sous accompagnement, grâce aux housses de bras intégrées et au champ d'anesthésie transparent.

- Un champ de césarienne tout-en-un qui facilite l'engagement du patient
- Les housses de bras intégrées permettent à la maman de tenir son bébé pendant l'accouchement
- Double champ d'anesthésie : un bleu et un transparent. Le champ transparent permet de surveiller la naissance du bébé
- Poche de recueil à 360 degrés intégrée avec film d'incision
- Ce champ est uniquement disponible en tant que composant de trousse ProcedurePak®.

Instructions de drapage



1. Repérez le sens indiqué par le pictogramme. Retirez le feuillet de protection et placez le champ de manière centrée sur l'abdomen du patient. Dépliez le champ une fois et appuyez fermement.



2. Dépliez le champ vers les pieds du patient.



3. Ensuite, dépliez le champ opératoire à l'extrémité de la tête. Fixez les champs entre deux supports à perfusion.



4. Le moment venu, abaissez la partie bleue. Laissez le champ transparent en place.



5. Insérer les bras du patient dans les housses de bras.



6. Dépliez la poche de recueil. Vous avez terminé le drapage.



7. Le bébé est né et entre en contact avec sa maman.

Réf.	Composant de trousse ProcedurePak®
2326601	Champ de césarienne avec assistance maternelle 175/250x370cm, champ transparent 250x160cm, film d'incision 38x32cm

Fabricant légal : Nurel Medikal

Importé et distribué par : Mölnlycke Health Care AB