

Maternal assisted sectiolaken



Dankzij het maternal assisted sectiolaken heeft de moeder de mogelijkheid om onder begeleiding haar baby ter wereld te brengen door middel van de geïntegreerde armhoezen en het geïntegreerde doorzichtige anesthesieveld.

- All-in-one sectiolaken dat patiëntbetrokkenheid mogelijk maakt
- Dankzij de geïntegreerde armhoezen kan de moeder haar baby vasthouden als onderdeel van de bevalling
- Dubbel anesthesieveld - een blauw en een transparant. Het transparante veld biedt de mogelijkheid om de geboorte van de baby te volgen
- 360-graden geïntegreerde vochttopvangzak met incisiefolie
- Dit afdeklaken is uitsluitend beschikbaar als component in ProcedurePak® trays.



1. Let op de richting van het pictogram. Verwijder het schutblad en plaats het laken gecentreerd op de buik van de patiënt. Vouw het laken één keer open en druk stevig aan.



2. Vouw het laken open in de richting van de voeten.



3. Vouw vervolgens het laken aan het hoofdeinde uit. Bevestig de velden tussen twee infuuspalen.



4. Als het moment daar is, trek het blauwe gedeelte naar beneden. Laat het transparante veld naar boven.



5. Breng de armen van de patiënt in de armhoezen.



6. Vouw de opvangzak open. U bent klaar met het draperen.



7. De baby is geboren. De moeder en de baby maken contact.

Art.nr. Mölnlycke® ProcedurePak component

2326601 Maternity assisted sectiolaken 175/250x370cm, transparant paneel 250x160cm, incisiefolie 38x32cm

Wettelijke fabrikant: Nurel Medikal

Geïmporteerd en gedistribueerd door: Mölnlycke Health Care AB