

Versorgung von Verbrennungen in der Praxis

Wann sollten Sie Patienten an ein Verbrennungszentrum überweisen¹?

- Patienten mit Verbrennungen im Gesicht, an den Händen, im Genitalbereich oder an grösseren Gelenken
- Tiefe partielle Verbrennungen, Vollverbrennungen und Umfangers Verbrennungen jeder Altersgruppe und jedes Ausmasses
- Jede Art von Verbrennungen, wenn Zweifel an der Behandlung bestehen (z.B. durch begleitende Traumata oder Krankheiten)
- Elektrische Verbrennungen und/oder Verätzungen


Versorgung bei Verbrennungen bis 2a

Debridement und/oder Reinigung



Granudacyn®

Exsudatmanagement / Antimikrobielle Barriere

	Exsudatslevel	Bei pädiatrischen Patienten	Bei erwachsenen Patienten
Versorgung mit Silberverbänden	Gering bis stark	 Mepilex® Ag	 Mepilex® Ag
Versorgung ohne Silberverbände	Gering bis stark	Nicht indiziert	 Mepitel® One +  Mextra®

Fixierung

Management von Schwellungen



Tubifast®



Tubifast® garments



Tubigrip®


Schwere der Verbrennung bestimmen mit der 9er-Regel nach Wallace²:

Mit Grösse/Fläche (in Prozent) der verbrannten Haut gemessen an der Gesamtkörperoberfläche (KOF)

Überweisung der Patienten in ein Verbrennungszentrum notwendig ab folgenden Anteilen der Körperoberfläche¹:

Alter	% der KOF
Kinder ← 2 Jahre	5%
Kinder 3-10 Jahre	10%
Kinder 10-15 Jahre	15%
Erwachsene	20%
Senioren → 65 Jahre	10%

Beurteilung der verbrannten KOF in %

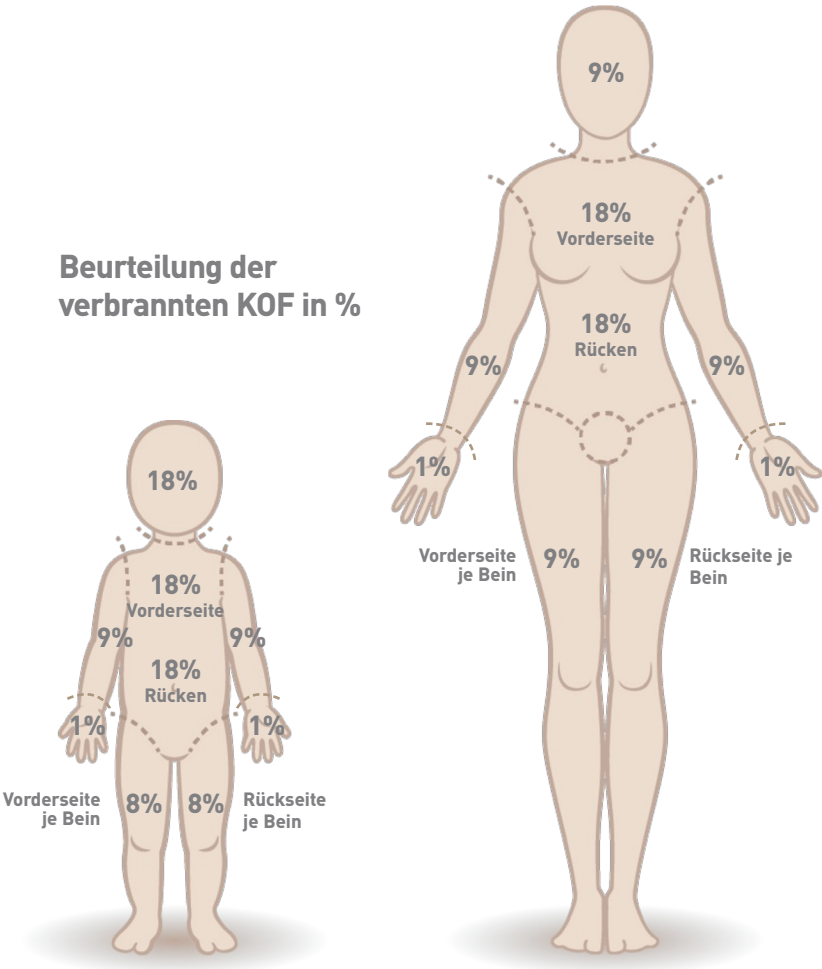

References:
1. Europäische Vereinigung für Verbrennungen. European Practice Guidelines for Burn Care, Minimum level of Burn Care, Provision in Europe. 2017 Version
4. <https://www.euroburn.org/documents/>. 2 Wallace AB. Die Expositionsbehandlung von Verbrennungen. Lancet 1951;1(6653):501-4.

Erfahren Sie mehr unter www.molnlycke.ch

Mölnlycke Health Care AG, Brandstrasse 24, 8952 Schlieren, Schweiz. Tel.: +41 44 744 54 00, info.ch@molnlycke.com
Der Name Mölnlycke Health Care und alle genannten Marken sind weltweit eingetragene Marken eines oder mehrerer Mitglieder der Mölnlycke Health Care Unternehmensgruppe. © 2023 Mölnlycke Health Care AB. Alle Rechte vorbehalten.

