


Tubifast® 2-Way Stretch®

Un bandage tubulaire de haute qualité pour une liberté de mouvement totale du patient




Les bandages Tubifast® 2-Way Stretch® sont conçus pour la fixation des pansements sans épingle ou ruban adhésif, l'enveloppement de pansements (humide ou sec) et peuvent être utilisés comme jersey sous plâtre. Tubifast peut également être utilisé pour couvrir la peau de toute partie du corps et dans le cadre du traitement de l'épidermolyse bulleuse².


Comment utiliser Tubifast® 2-Way Stretch®

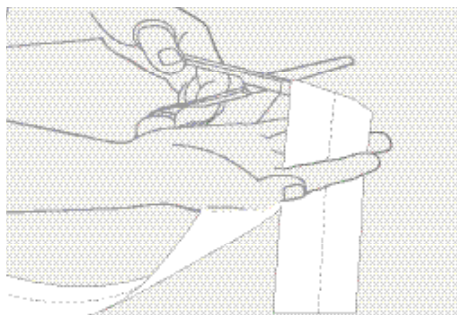

1. Sélectionner le bandage de largeur adéquate à l'aide du code couleur disponible dans le tableau de référence et couper la longueur désirée.

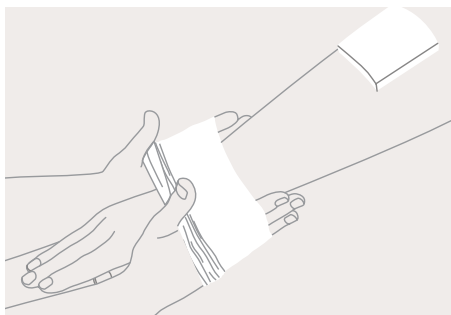

2. Étirer Tubifast 2-Way Stretch au-dessus de la zone concernée.

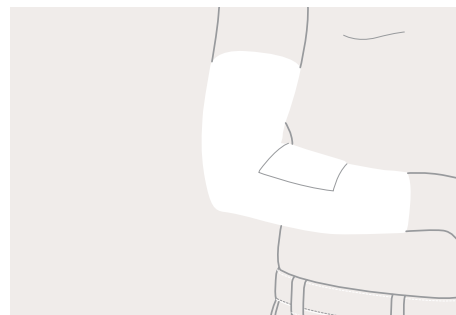

3. Placer Tubifast 2-Way Stretch de manière à couvrir le pansement.

Le principe Tubifast 2-Way Stretch

Tubifast 2-Way Stretch est une structure tubulaire auto-maintenue qui permet à l'air de circuler sur la peau. Tubifast 2-Way Stretch offre une légère élasticité dans le sens vertical et horizontal, assurant une liberté de mouvement totale pour le patient.

Avantages de Tubifast 2-Way Stretch

- Suit le contour de tout membre ou torse grâce à la technologie 2-Way Stretch
- Permet une liberté de mouvement totale du patient
- Facile d'utilisation: peut être coupé selon la longueur requise
- Maintien automatique sans épingle ou ruban adhésif
- Sans latex, non sensibilisant et non irritant
- Réutilisable après lavage
- Disponible dans 5 largeurs de couleurs différentes adaptées à toute partie du corps

Domaines d'utilisation

Les bandages tubulaires Tubifast 2-Way Stretch sont conçus pour la fixation de pansement sans épingle ni ruban adhésif; ils s'adaptent particulièrement au maintien des pansements dans les zones difficiles telles que le moignon d'un patient amputé.

Le produit est également conçu pour l'enveloppement de pansement (humide ou sec) et peut être utilisé comme jersey sous plâtre. Tubifast 2-Way Stretch peut également être utilisé pour couvrir la peau de toute partie du corps et dans le cadre du traitement de l'épidermolyse bulleuse².

Composition

Viscose, élasthanne et polyamide

Informations de commande Tubifast 2-Way Stretch

Produit	largeur x longueur	Membre ↔	Référence (article)	Pcs/RET	Pcs/TRP
LIGNE ROUGE Membres de petite taille	3,5 cm x 10 m	9-18 cm	2434	1	20
LIGNE VERTE Membres de taille petite et moyenne	5 cm x 10 m	14-24 cm	2436	1	24
LIGNE BLEUE Membres de grande taille	7,5 cm x 10 m	24-40 cm	2438	1	30
LIGNE JAUNE Membres de très grande taille, têtes, torse d'enfant	10,75 cm x 10 m	35-64 cm	2440	1	12
LIGNE VIOLETTE Torse d'adultes	20 cm x 10 m	64 - 130 cm	2444	1	15

Tubifast 2-Way Stretch est contenu dans des emballages individuels.

Instructions de lavage



Références: 1. Eytier C, Gazeau E, Beneteau G, Verfaillie G. Convenience and tolerance of the combination of a soft silicone foam dressing and a two-way stretch tubular bandage in the management of local wounds. Journal des plaies et cicatrisations 2013;18(88):38-44.
2. Mölnlycke Health Care. Données internes.

Pour en savoir plus: www.molnlycke.ch/fr-ch

Mölnlycke Health Care AG, Brandstrasse 24, 8952 Schlieren, Suisse. Tél.: +41 44 744 54 00, info.ch@molnlycke.com
Les marques, noms et logos Mölnlycke, Tubifast et TwoWay Stretch sont des marques déposées à l'échelle mondiale au nom d'une ou plusieurs sociétés du Groupe Mölnlycke Health Care. © 2022 Mölnlycke Health Care AB. Tous droits réservés. HQIM002144