

Vêtements Tubifast® avec la technologie TwoWay Stretch®

Vêtements prêts à porter

SoftSeam technology®
aide à réduire l'irritation
des peaux sensibles¹



Les vêtements Tubifast® avec la technologie TwoWay Stretch® sont une gamme de vêtements prêts à porter¹ adaptés à l'enveloppement humide ou sec³-⁵ et la fixation des pansements⁵.

Le principe des vêtements Tubifast® avec la technologie TwoWay Stretch®

Les vêtements Tubifast prêts à porter¹ avec la technologie TwoWay Stretch conçus pour la fixation des pansements⁵ ou l'enveloppement humide ou sec²⁻⁵ sont disponibles sous forme de vestes à manches longues, vestes à mitaines intégrées (6-24 mois uniquement), collants, jambières, chaussettes, gants et Patch Wrap®. Pour les enfants âgés de six mois et plus.

Conçus sans ruban adhésif, épingle ou attache², les vêtements Tubifast dotés de la technologie TwoWay Stretch sont faciles d'utilisation⁵ et leur structure bi-élastique¹ assure une liberté de mouvement totale. Agréables à porter sous les vêtements de nuit et les vêtements classiques¹, ils aident également à passer des journées actives et des nuits reposantes.

Avantages des vêtements Tubifast avec technologie TwoWay Stretch

- Les coutures plates protègent les peaux sensibles de l'irritation¹
- Solution d'enveloppement pratique²⁻⁵
- Agréable à porter sous les vêtements de nuit et les vêtements classiques¹
- Liberté de mouvement¹
- Disponibles sous forme de vestes à manches longues, vestes à mitaines intégrées, collants, jambières, chaussettes, gants et Patch Wrap

Propriétés du tissu

Viscose, élasthanne et polyamide

Instructions de lavage



INFORMATION IMPORTANTE: veuillez noter qu'il est recommandé de choisir les vêtements Tubifast dotés de la technologie TwoWay Stretch en fonction des dimensions et de l'âge. Si vous hésitez entre deux tailles, sélectionnez la taille supérieure (par ex. si l'enfant porte une couche-culotte en dessous des vêtements Tubifast dotés de la technologie TwoWay Stretch, choisissez la taille la plus grande).

Références: 1. Mölnlycke Health Care. Données internes. 2. Choi J-W, Kang M-J, Lew B-L, Sim W-Y. Efficacy and utility of wet wrap dressing for patients with pediatric atopic dermatitis. Journal of the American Academy of Dermatology. 2018;79(3):AB122. 3. He H, Koh MJA, Lee HY, Ang SB. Pilot study of a customized nanotextile wet garment treatment on moderate and severe atopic dermatitis: A randomized clinical trial. Pediatric Dermatology. 2019. 4. Hon KLE, Wong KY, Cheung LK, Ha G, Lam MCA, Leung TF, et al. Efficacy and problems associated with using a wet-wrap garment for children with severe atopic dermatitis. Journal of Dermatological Treatment. 2007;18(5):301-5. 5. Cross-sectional observational study report Epidermolysis Bullosa. PD-566181 Rev 01. 2019.

Pour en savoir plus: www.molnlycke.ch/fr-ch

Mölnlycke Health Care AG, Brandstrasse 24, 8952 Schlieren, Suisse. Tél.: +41 44 744 54 00, info.ch@molnlycke.com
Les marques, noms et logos Mölnlycke Tubifast, SoftSeam Technology, Patch Wrap et Epaderm sont des marques déposées à l'échelle mondiale au nom d'une ou plusieurs sociétés du Groupe Mölnlycke Health Care. © 2022 Mölnlycke Health Care AB. Tous droits réservés. HQIM000404

Domaines d'utilisation

L'enveloppement humide est un traitement contre l'eczéma atopique qui implique l'utilisation d'un agent émollient sous le bandage de fixation. Pour l'enveloppement, il est possible de combiner une pommade émolliente avec les vêtements dotés de la technologie TwoWay Stretch ou les bandages Tubifast TwoWay Stretch. Un agent émollient est appliqué sur la zone affectée, laquelle est ensuite recouverte d'un vêtement Tubifast humide doté de la technologie TwoWay Stretch ou d'un bandage. Ensemble, l'agent émollient et la couche humide gardent la peau hydratée et humide et contribuent à réduire l'inflammation.

Le vêtement Tibufast humidifié doté de la technologie TwoWay Stretch ou le bandage agit également comme une couche de fixation, s'assurant que l'agent émollient reste en contact avec la peau. Cette couche rafraîchit et apaise la peau, contribuant à réduire les démangeaisons. Une seconde couche sèche est ensuite appliquée, maintenant le vêtement du patient sec, empêchant le patient de se gratter et prévenant toute lésion ou aggravation potentielle de l'état de la peau.

L'enveloppement sec est un processus similaire à l'enveloppement humide. Un agent émollient est appliqué sur la zone affectée, laquelle est ensuite recouverte d'une seule couche sèche de vêtement Tubifast doté de la technologie TwoWay Stretch ou d'un bandage.

Informations de commande de vêtements Tubifast avec la technologie TwoWay Stretch

	Âge	No. d'art.	Pcs/RET
Vestes avec mitaines intégrées	6-24 mois	992007	6
Vestes	2-5 ans	992008	6
	5-8 ans	992009	6
	8-11 ans	992010	6
	11-14 ans	992011	6
Collants	6-24 mois	992012	6
Jambières	2-5 ans	992013	6
	5-8 ans	992014	6
	8-11 ans	992015	6
	11-14 ans	992016	6
Chaussettes	2-14 ans	992017	6
Gants	Enfant XS	5922	6
	Enfant S	5923	6
	Enfant M/L Adulte S/M	5921	6
	Adulte M/L	5920	6