

# Prise en charge de brûlures au cabinet

## Quand adresser un patient à un centre des brûlés<sup>1</sup>?

- Patients présentant des brûlures au niveau du visage, des mains, de la région génitale et des grandes articulations
- Brûlures partielles profondes, brûlures intégrales et brûlures étendues de toute classe d'âge et toute ampleur
- Tout type de brûlures, en cas de doute à l'égard du traitement (par ex. induites par des traumatismes ou des maladies concomitantes)
- Brûlures électriques et/ou brûlures chimiques

## Prise en charge de brûlures jusqu'au deuxième degré superficiel

### Débridement et/ou détersion



Granudacyn®

### Gestion de l'exsudat / barrière antimicrobienne

	Niveau d'exsudat	Chez l'enfant pédiatrique	Chez le patient adulte
Prise en charge avec des pansements à l'argent	Faible à important	 Mepilex® Ag	 Mepilex® Ag
Prise en charge sans pansement à l'argent	Faible à important	Non indiquée	 Mepitel® One +  Mextra®

### Fixation

### Gestion des œdèmes



Tubifast®



Tenues Tubifast®



Tubigrip®



## Détermination du degré de brûlure selon la règle des 9 de Wallace<sup>2</sup>:

Avec la surface (en %) de la peau brûlée mesurée en fonction de la surface corporelle intégrale (SC)

## Renvoi des patients auprès d'un centre pour les brûlés nécessaire à partir des proportions suivantes de surface corporelle<sup>1</sup>:

Age	% de SC
Enfant < 2 ans	5%
Enfant 3-10 ans	10%
Enfant 10-15 ans	15%
Adulte	20%
Seniors > 65 ans	10%

### Evaluation de la SC en %

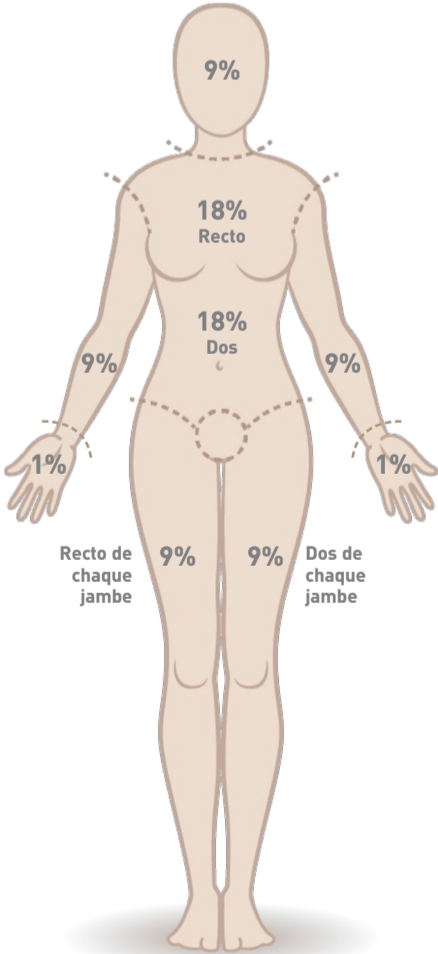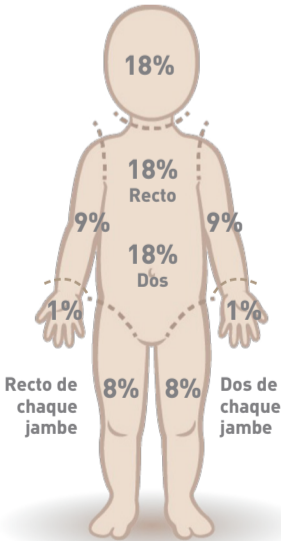

Références:  
1. European Burns Association. European Practice Guidelines for Burn Care, Minimum level of Burn Care, Provision in Europe. 2017 Version  
4. <https://www.euroburn.org/documents/>. 2 Wallace AB. Die Expositionsbehandlung von Verbrennungen. Lancet 1951;1(6653):501-4.

Découvrez-en plus sur [www.molnlycke.ch/fr-ch](http://www.molnlycke.ch/fr-ch)

Mölnlycke Health Care AG, Brandstrasse 24, 8952 Schlieren, Suisse. Tél.: +41 44 744 54 00, [info.ch@molnlycke.com](mailto:info.ch@molnlycke.com)  
Le nom Mölnlycke Health Care et toutes les marques citées sont des marques déposées à l'échelle mondiale d'un ou de plusieurs membres du groupe de sociétés Mölnlycke Health Care. © 2023 Mölnlycke Health Care AB. Tous droits réservés.

