

# Coussin de positionnement fluidisé Z-Flo™

Positionner pour de meilleurs résultats.

(pour adultes et enfants)



Coussin de positionnement fluidisé Z-Flo™



# Aides au positionnement du patient

Le positionnement est un pilier de la prévention et du traitement des escarres. Mais les aides au positionnement traditionnelles disponibles sont plus qu'inadaptées.

Inconvénients potentiels des couvertures, des coussins et des cales de positionnement du patient :

- Manque de répartition de la pression
- Difficultés à déterminer la position souhaitée
- Pas de stabilité durable dans la position souhaitée
- Malléabilité insuffisante pour protéger les zones sensibles

## Protection durable grâce à la répartition de la pression

Les coussins de positionnement Z-Flo™ sont conçus de manière à ce que la stabilité n'entraîne aucun mouvement et aucune mémorisation (zéro mémoire et zéro débit). Ils sont donc faciles à ajuster et à modeler, et servent à redistribuer la pression. Ils facilitent le positionnement et le repositionnement des patients, conservent leur forme et offrent un confort supplémentaire. Les coussins de positionnement sont fabriqués à partir d'huile minérale fluidisée et sont recouverts d'un film protecteur en polyuréthane sans latex ni DEHP qui peut être essuyé et désinfecté. Les tailles adulte contiennent des microsphères et des billes de polyéthylène supplémentaires pour une répartition optimale du poids.



**Placez le Z-Flo™ sous la tête** et ajustez-le au-dessus des épaules.



**Mettez le Z-Flo™ dans la forme souhaitée.** Pour ce faire, ajustez le coussin de positionnement à la forme de la tête en veillant à ce que la zone sous la colonne cervicale soit remplie.



La position et la forme correctes du coussin de positionnement permettent d'obtenir le **positionnement et la décharge de pression** souhaités.



Mölnlycke  
Z-Flo® Fluidized positioner  
REF 1401007

Le coussin de positionnement permet de **modéliser des cavités et des creux** pour les câbles médicaux, les tubulures et les plaies existantes.

# Z-Flo™ pour soins intensifs

Z-Flo™ est un produit polyvalent qui offre de nombreuses possibilités d'application. Parmi les indications d'utilisation les plus répandues figurent la prévention des escarres, par exemple avec la protection de l'arrière de la tête<sup>7</sup>, ainsi que le soulagement des zones du corps. Z-Flo a également fait ses preuves en tant que soutien dans les positions micro, latérale ou de décubitus ventral<sup>1,3-7</sup>.

Réduction des  
escarres occipitales de

**87.7%**<sup>7</sup>

## Prévention des escarres à l'arrière de la tête

Une étude a évalué l'efficacité clinique du coussin de positionnement fluidisé Z-Flo™ dans le cadre d'une utilisation pour réduire l'apparition d'escarres de décubitus occipital en unité de soins intensifs (USI). L'étude a également inclus des patients sous oxygénation par membrane extracorporelle (ECMO) pour lesquels le déchargement et le repositionnement fréquents de la tête sont difficiles.<sup>1</sup>

Le coussin Z-Flo™ permet d'augmenter la surface de contact<sup>5</sup> et de repositionner la tête, comme le prévoit la norme de soins pour la prévention des escarres.



## Retournement et repositionnement

Le coussin de positionnement fluidisé Z-Flo™ conserve sa forme et maintient le patient dans la position souhaitée au fil du temps.<sup>2</sup>

De plus, l'utilisateur peut déterminer l'angle de rotation à l'aide du coussin de positionnement, de la microrotation à la rotation à grand angle.

Une étude a comparé le coussin de positionnement fluidisé Z-Flo™ aux coussins de positionnement traditionnels. Les résultats ont montré une différence statistiquement significative entre les deux aides au positionnement pour le maintien de la position.<sup>8</sup>







## Détails de commande

Réf. art.	Taille	Description de l'article	Unité/boîte	Quantité/carton*
<b>Adultes</b>				
14 01 001	28 x 56 cm	Aide au positionnement petit sans housse	1	1
14 01 003	41 x 76 cm	Aide au positionnement avec sangles sans housse	1	1
14 01 005	65 x 90 cm	Aide au positionnement grand sans housse	1	1
14 01 007	30 x 51 cm	Aide au positionnement sans housse	1	8
14 01 008	30 x 51 cm	Aide au positionnement avec housse (lavable)	1	8
14 01 011	41 x 76 cm	Aide au positionnement sans housse	1	1
<b>Pédiatrie/Néonatalogie</b>				
14 00 200	30 x 51 cm	Aide au positionnement avec housse (lavable)	1	6
14 00 206	41 x 61 cm	Aide au positionnement avec housse (lavable)	1	6
14 00 213	51 x 76 cm	Aide au positionnement avec housse (lavable)	1	4
14 00 224	152 cm	Aide au positionnement avec housse (lavable)	1	6
14 00 227	18 x 25 cm	Aide au positionnement avec housse (lavable)	1	12
<b>Housses</b>				
14 00 201	30 x 51 cm	Housse (lavable)	1	50
14 00 202	30 x 51 cm	Housse (à usage unique)	1	50
14 00 225	150 cm	Housse (lavable)	1	50

\*Minimum de commande Z-Flo

**Bibliographie :** 1. Gefen A, et al. Sacral Soft Tissue Deformations When Using a Prophylactic Multilayer Dressing and Positioning System. J Wound Ostomy Continence Nurse. 2018;00(0):1-6. 2. Mölnlycke Health Care, Holds shape over time, December 2018. Données internes. 3. Boesch RP, Myers C, Garrett T et al. Prevention of tracheostomy-related pressure injuries in children. Pediatrics. 2012;129: e792-e797. 4. Cohen LP, Ovadia-Blechman Z, Hoffer O, Gefen A. Dressings cut to shape alleviate facial tissue loads while using an oxygen mask. Int Wound J. 2019; 1-14. 5. Katzungold R, Gefen A. What makes a good head positioner for preventing occipital pressure injuries. International Wound Journal. 2017; 1-7. 6. Barakat-Johnson, M., Lai, M., Gefen, A., Coyer, F. (2018). Evaluation of a fluidised positioner to reduce occipital pressure injuries in intensive care patients: A pilot study. International Wound Journal, 1-9. DOI: 10.1111/iwj.13051. 7. Fomora, M.M., Boyes, C., & Peworski, C. (2019). Not my head, please! Preventing hospital-acquired pressure injury to the occiput and ear. Mayo Clinic. Poster Presentation: NPIAP 2020. Houston, TX. 8. Kapp S, Gerditz M, Gefen A, Prematunga R, Santamaria N. An observational study of the maintenance of the 30° side-lying lateral tilt position among aged care residents at risk of developing pressure injuries when using the standard care pillow and a purpose-designed positioning device. Int Wound J. 2019.

En savoir plus sur [www.molnlycke.ch/fr-ch](http://www.molnlycke.ch/fr-ch)

Mölnlycke Health Care, Brandstrasse 24, 8952 Schlieren, Suisse. Tél. +41 (0)44 744 54 00, [info.ch@molnlycke.com](mailto:info.ch@molnlycke.com)  
Les noms Mölnlycke Health Care ainsi que tous les produits cités sont des marques déposées au niveau mondial par une ou plusieurs sociétés du groupe Mölnlycke Health Care. ©2025 Mölnlycke Health Care. Tous droits réservés. CH-DWC0271

