


Up-grade für die Wundheilung!

Mepilex® Up verfügt über eine innovative, patentierte Schaumstruktur mit genoppter Oberfläche. Diese verbessert die Kapillarkirkung und ermöglicht einzigartiges Exsudatmanagement.¹⁻⁶

- Gleichmäßige Verteilung des Exsudats – selbst entgegen der Schwerkraft¹⁻⁶
- Dünnes Profil bei maximaler Auslastung – dank hoher Saugleistung^{1,3,4}
- Wölbung zum Wundgrund ermöglicht Verwendung bei unebenem Wundgrund
- Sehr anpassungsfähig und zuschneidbar^{1,7}
- Absorbiert und schließt Bakterien sicher ein⁸
- Wie gemacht zur Verwendung bei Kompression^{1,3,4}
- Anwendbar bei Wunden in allen Heilungsphasen – auch bei belegten Wunden.

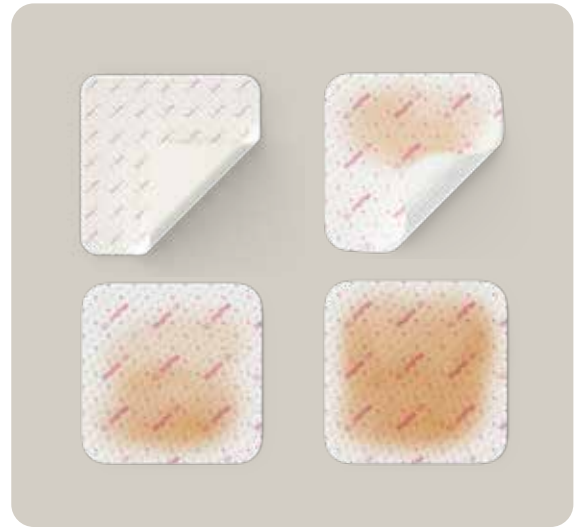

>70% der Wunden zeigen eine Verbesserung oder vollständige Heilung nach 6 Wochen¹

Eindrucksvolle Wundheilungserfolge mit Mepilex® Up – Ergebnisse aus zwei Fallbeobachtungen:

- Bereits nach 1 oder 2 Verbandwechseln wurde eine **beginnende Epithelisierung** von den Wundrändern aus festgestellt.⁹
- Bei 10 Patienten mit **stark exsudierenden Wunden** wurde **keine Mazeration** beobachtet.¹⁰
- In den meisten Fällen konnten trotz hoher Exsudatmenge **7 Tage ohne Verbandwechsel** vergehen, ohne dass beim Entfernen Schmerzen auftraten.¹⁰



Überzeugen Sie sich selbst von den klinischen Vorteilen.



Hören Sie Erfahrungsberichte von Mepilex® Up.

Anwendungshinweis:

Die Wunde sollte sich in der Mitte des Verbandes befinden, da das Exsudat vertikal im Verband nach außen verteilt wird. Für einen besonders langanhaltenden Effekt, wählen Sie die nächstgrößere Größe.

Durch eine transparente Rückfolie kann der Verlauf sowie die Färbung des Exsudats gut beobachtet werden.



Mit Safetac®



Ohne Safetac®

Mehr Komfort für Ihre Patienten¹¹

- komfortables Tragegefühl¹¹
- Vorbeugung von Leckagen^{3,4}
- Weniger Schmerzen durch Safetac® Kontaktschicht: Safetac® schützt neues Gewebe und intakte Haut, sodass Wunden ungestört bleiben, eine schnellere natürliche Heilung unterstützt und Mazeration verhindert wird.¹¹
- Weniger Verbandwechsel: In einer klinischen Studie betrug die durchschnittliche Tragedauer 5 Tagen¹

Bestellinformationen Home Care

Art.-Nr.	Größe	PZN	Stück/ Packung	Stück/ Karton
21 20 50	5 x 5 cm	18781819	5	40
21 21 55	10 x 10 cm	18781825	5	70
21 22 55	10 x 20 cm	18781831	5	25
21 23 55	15 x 15 cm	18781848	5	25
21 24 55	20 x 20 cm	18781860	5	25
21 25 50	20 x 50 cm	18781877	2	12

Steril – einzeln verpackt

Klinik

Art.-Nr.	Größe	Stück/ Packung	Stück/ Karton
21 20 50	5 x 5 cm	5	40
21 21 50	10 x 10 cm	10	40
21 22 50	10 x 20 cm	10	30
21 23 50	15 x 15 cm	10	30
21 24 50	20 x 20 cm	10	30
21 25 50	20 x 50 cm	2	12

Steril – einzeln verpackt

Referenzen: 1. Lev-Tov H. A prospective, open, multi-center, interventional, noncomparative clinical investigation to follow the progress of exuding chronic wounds using Mepilex Up. Clinical Investigation Report - Diplo01. Mölnlycke Health Care. PD-737729 Rev 1. 2024. 2. Product Manual - Absorption capacity using inclined plane. PD-741137, 2024.3. Product Manual - Fluid management under compression for seven days. PD-741114, 2024.4. Product Manual - Fluid Handling Management FLUHT, PD-740012, 2024.5. Product Manual - Fluid Handling Management FLUHT, PD-741994, 2024.6. Product Manual - Fluid Handling Capacity, PD-740029, 2024.7. Product Manual - Bending Length, PD-740005, 2024.8. External test method, Bacterial trapping effect, T-2129. Report: PD-749306. 9. Weir, D., Aviles, F., & Mölnlycke Health Care. (2024). Im Kampf gegen die Schwerkraft bei Exsudatmanagement in Beinschwüren: Bewertung eines neuen Silikonschaumverbandes [Poster-10. Aviles, F., & Mölnlycke Health Care. (2024). Mit Exsudat in komplexen Wunden mithalten: Fallstudienreihe zur Evaluierung eines neuen genoppten Silikon-Schaumverbandes ohne Hafttrand [Poster-Präsentation]. Symposium on Advanced Wound Care Spring 2024, Orlando, FL, USA 11. White, R. A multinational survey of the assessment of pain when removing dressings. Wounds UK. 4(1). 2008].

Erfahren Sie mehr unter www.molnlycke.com/de-de

Mölnlycke Health Care GmbH, EUREF-Campus Düsseldorf, EUREF-Campus 1B, 40472 Düsseldorf, Telefon + 49 211 920 880, Fax +49 211 920 88 170, info.de@molnlycke.com. Die Marken Mölnlycke, Mepilex und Safetac sowie die Namen und entsprechenden Logos sind weltweit eingetragene Marken eines oder mehrerer Unternehmen der Mölnlycke Health Care Unternehmensgruppe. ©2026 Mölnlycke Health Care. Alle Rechte vorbehalten. DWOC0231 / Stand: Juni 2026

