



Påtagningsvejledning: Ansigtmaske med bindebånd

- A. Form næseklemmen. Placér masken for ansigtet, så den dækker både din næse og din mund
- B. Placér de øverste bindebånd på toppen af dit hoved, og bind dem stramt for at minimere luftlækage
- C. Placér de nederste bindebånd rundt om nakken og bind også dem stramt
- D. Fold altid masken helt ud for at minimere antallet af lag, du skal ånde gennem

- E. Skift maske, når den er kontamineret og mellem hver operation
- F. Hvis der er risiko for vækestænk, anvendes en stænkresistent maske og beskyttende briller/visir eller en stænkresistent maske med visir
- G. Smid masken væk efter brug

Læs mere på molnlycke.com/da-dk

Mölnlycke Health Care ApS, Gydevang 39, 3450 Allerød, Tlf.: 80 88 68 10, info.dk@molnlycke.com.
Mölnlycke varemærke, navn og logo er registreret globalt til en eller flere af virksomhederne i Mölnlycke Health Care gruppen.
©2025 Mölnlycke Health Care AB. Alle rettigheder forbeholdes. DKSU1712508



Mölnlycke[®]