

Operationsstue- løsninger



Vi er Mölnlycke, en markedsledende virksomhed indenfor medicoteknik

VORES FORMÅL

Vi har et eneste formål - at revolutionere omsorgen for mennesker og planeten.

100

lande
er vi tilstede i

8.427

ansatte globalt



99%

ejet af Investor AB
resten af ledelsen

Indholdsfortegnelse

ProcedurePak [®] procedurepakker	5	Supplementsprodukter	Oversigt over medicinske
Laparoskopiske løsninger	7	Assistancebordsposer.....	ansigtsmasker
Laparoskopiske instrumenter	8	Bordafdækninger	123
Laparoskopiske komponenter tjekliste.....	13	Incisionsfilm	Påtagningsvejledning for
Ortopædiske løsninger	14	Poser	ansigtsmasker
Pulsed Lavage	15	Instrumentafdækninger	124
Mölnlycke plume evacuation pencil.....	17	Øvrige supplementsprodukter.....	Engangsuniformer.....
Ortopædiske komponenter tjekliste.....	19		Basic
Farvekodning	20	Servietter/tamponer med røntgentråd	Extra komfort.....
Mölnlycke [®] Portal	22	Standard nonwoven.....	131
		Special nonwoven.....	Renrumsdragter
		Gaze.....	133
			Warm-up jacket.....
BARRIER [®] operationsafdækninger	24	BARRIER [®] personalebeklædning	135
Introduktion til koder og materialer	25	Operationskitler	Patientbeklædning.....
ISCC sortiment.....	27	Vælg den rette operationskittel.....	136
Universalfafdækninger og -sæt		Påtagningsvejledning for	BARRIER [®] EasyWarm [®] aktivt
Universalsæt	32	operationskitler	selvvarmende tæppe
Slidslagner	34	Classic (Spunlace NW).....	136
Patientafdækninger	34	Ultimate (SMS)	Patientopvarmning.....
Hulstykke	38	Primary Plus (SMS).....	137
Specialafdækninger og sæt		Bæredygtigt sortiment (SMS).....	Beskyttelseskitler
Ortopædi	40	Fluid Protection Plus (Laminat).....	138
Generel/Abdominal.....	49	Virus Protection Plus.....	Beskyttelseskittel AAMI2.....
Laparoskopi.....	52	Beskyttelsesærme.....	139
Hjerte/kar.....	58	Hovedbeklædning.....	Biogel [®] handsker.....
Angiografi.....	60	Basic	Biogel steril naturgummilatex.....
Neurokirurgi.....	64	Standard.....	144
Gynækologi	65	Special.....	Biogel usteril naturgummilatex.....
Obstetrik.....	69	Extra komfort.....	146
Urologi.....	71	Medicinske ansigtsmasker.....	Biogel steril syntetisk.....
Øjen.....	76	Standard (type II)	147
ENT-Dental	80	Special (type II).....	Biogel Tech steril syntetisk
Plastikkirurgi.....	82	Extra protection (type IIR).....	151
		Personligt værnemiddel	Biogel Tech steril naturgummilatex.....
			153
			Åbnings-og påtagningsvejledninger
			154
			Kontaktpersoner hos Mölnlycke.....
			161
			Referencer
			162

VORES LØSNINGER

Kirurgiske løsninger

Sikkerhed og effektivitet er i fokus på operationsstuen, og vi arbejder kontinuerligt med sundhedspersonale for at lære, hvordan vi kan hjælpe dem med at opnå endnu bedre resultater. Vores kundetilpassede ProcedurePak® procedurepakker er et godt eksempel. De indeholder de engangskomponenter, der er behov for, til et kirurgisk indgreb, inklusiv instrumenter, afdækninger, kitler og bandager. Det er en løsning, der begrænser affaldsmængden, sparer tid og giver indkøbere bedre overblik over omkostningerne. Dette er bare en af de måder, hvorpå vi hjælper med at øge resultatet på operationsstuen.



Mölnlycke kirurgiske instrumenter

Vores førende brands

BARRIER® personalebeklædning Et bredt sortiment af beskyttende beklædning, der giver sikkerhed og komfort til sundhedspersonale og patienter.

BARRIER® afdækninger Et bredt sortiment af afdækninger specifikt udviklet til forskellige typer kirurgiske indgreb.

Biogel® operationshandsker Til beskyttelse og med dobbelthandsker med punktur indikationssystem. Også det foretrukne valg mht. pasform, fingerspidsfølelse og komfort¹.

Mölnlycke® kirurgiske instrumenter Et bredt sortiment af engangsinstrumenter, inklusiv trokarer til minimal, invasiv kirurgi.

ProcedurePak® procedurepakker Alle engangsinstrumenter, der er behov for, til et specifikt kirurgisk indgreb, pakket i én steril pakke for at give sundhedspersonale en kundetilpasset og komplet løsning.



Mölnlycke® procedurepakker

Specialtilpassede operationspakker indeholder alle de engangsartikler, der skal bruges til specifikke operationer. Dette øger effektiviteten på mange forskellige måder. ProcedurePak® procedurepakker tilbyder de rette produkter til ethvert indgreb. Muligheden for at ændre i pakkerne som tilpasning til nye eller eksisterende operationer betyder, at du kan forberede dig til nye måder at arbejde på, og du hurtigere kan gøre klar til operation. På grund af pakkernes høje kvalitet og brugervenlighed oplever sundhedspersonalet en mere smidig arbejdsgang, især under klargøring til operation. Hver enkelt effektivitetsforbedring kan få stor betydning.

ProcedurePak® procedurepakker fører til bedre behandling af flere patienter

Tilpassede operationspakker sparer generelt tid. Men der kan opnås flere fordele på hospitalet. ProcedurePak® procedurepakker er en total serviceløsning, der er en kombination af operationsspecifikke produkter, den højeste sikkerhed, leverings- og logistikmuligheder samt løbende support og uddannelse. Disse elementer skaber tilsammen ekstra tid, mere effektiv indsats og færre omkostninger. Det frigør igen værdifulde ressourcer, der skaber ny effektivitet - og hjælper med at give flere patienter en bedre behandling.

En ægte specialtilpasset løsning

Med mængden og kvaliteten af de komponenter, der er til rådighed, kan der altid opnås den mest optimale sammensætning til en specifik operation.

Garanterer den højeste sikkerhed

Alle komponenterne og selve pakken opfylder de strengeste standardkrav af hensyn til patienternes og personalets sikkerhed.

Ekspertrådgivning, uddannelse og support

Det højt kvalificerede team hos Mölnlycke er altid til din rådighed for at give støtte, uddannelse og effektivitetsrådgivning.

Pålidelig levering og logistik

Levering og lagerføring skræddersyet til dine behov - så du altid har den rette pakke til rådighed, når du har brug for den.

En komplet løsning til øget effektivitet

Vores specialister arbejder tæt sammen med dig for at finde frem til og vurdere den bedste løsning til dig fra vores sortiment af kirurgiske produkter. Resultatet? Din egen kundetilpassede løsning med alt, hvad du behøver, til hver specifik procedure i én enkel, praktisk og omkostningseffektiv pakke.



40%

AF FORBEREDELSES-TIDEN SPARET, SÅ DER KAN UDFØRES FLERE PROCEDURER.

Med en pakke vil du kunne:

- reducere forberedelsestiden med op til 40%²
- have tillid til hver eneste klargøring
- få mulighed for at øge antallet af procedurer
- hjælpe med at reducere produkt- og logistikomkostninger

‘Antallet af procedurer blev øget med 18%, og der er blevet sparet 1.600 timer gennem hele arbejdsflowet. Det har givet besparelser på 51.000 EUR.’

Hartmut Freckmann,
Oversygeplejerske på
operationsafdeling, Tyskland,
som taler om kundetilpassede
procedurepakker.

Truly customised solutions

Alt, hvad dit team behøver

Mölnlycke® laparoskopiske løsninger

- 1 BARRIER® afdækninger**
Alt-i-en specialafdækninger der passer til laparoskopiske indgreb
- 2 BARRIER® personalebeklædning**
Komfort og avanceret beskyttelse
- 3 Biogel® handsker**
Avanceret beskyttelse og god pasform, fingerspidsfølsomhed og komfort
- 4 Mepilex® Border Post-Op**
Den fleksible, absorberende alt-i-en post-op bandage
- 5 Trokarer, instrumenter og komponenter**
Bredt sortiment af trokarer og instrumenter i høj kvalitet



Truly customised
laparoscopic solutions

Instrumenter

Du arbejder for at opnå effektivitet og de bedste patientresultater. Vi kan hjælpe dig. Vores kundetilpassede løsninger til laparoskopiske procedurer er fokuserede på at gøre dit team i stand til at opnå deres mål. Du kan vælge alt, dit team behøver, fra vores sortiment af Mölnlycke® trokarer, monopolære sakse, instrumenter, L-hook-elektroder og aftagelige præparatposer. Vi pakker dit valg i effektive procedurepakker. Du sparer tid og omkostninger.

Aftagelig præparatpose


- Leveres i en lang række størrelser med mulighed for udtagning af alle vævs- og organtyper
- Et selvåbnende posedesign tillader hurtig og enkel opsamling af prøver
- En forstærket metalring sikrer enkel indsættelse og en stor, permanent poseåbning til opsamling af selv vanskelige prøver
- Aftagelig pose som gør det muligt at udsætte udtagelsen af det opsamlede væv



Varenr. sterilt	Beskrivelse	Inderæske/trp. karton
899102	Aftagelig præparatpose 9x14,5 cm (250-300ml rumfang) - 10mm	5/50
899103	Aftagelig præparatpose 13x18 cm (500-700ml rumfang) - 10mm	5/50
899104	Aftagelig præparatpose 19x23 cm (1150-1500ml rumfang) - 15mm	5/50
899112	Aftagelig præparatpose 19x23 cm (1150-1500ml rumfang) - 12mm	5/50

Monopolær L-hook-elektrode

- Den 5 mm monopolære L-hook-elektrode muliggør præcis, kontrolleret dissektion og koagulering af blodkar og væv.
- Bekvem instrument til engangsbrug, som garanterer sterilitet og effektiv aktivering af monopolær strøm, hvorved man forhindrer forbrænding af det tilstødende væv
- Ergonomisk letvægtshåndtag, som tillader præcis og kontrolleret dissektion af væv

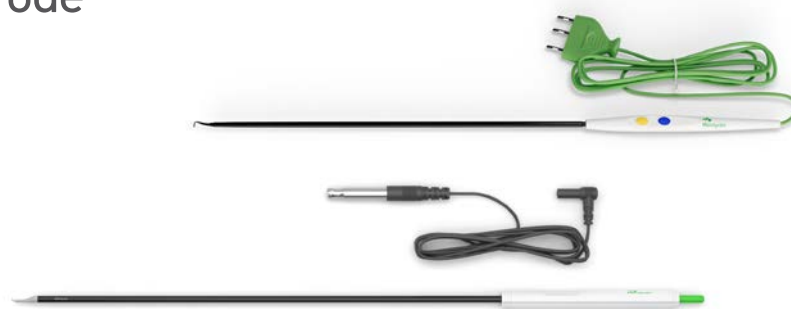

Varenr. sterilt	Beskrivelse	Inderæske/trp. karton
899100	Monopolær L-hook-elektrode 5mm / 33cm	10/100
899101	Monopolær L-hook-elektrode 5mm / 33cm med kabel	10/100
420200	Monopolær L-hook-elektrode, hånddaktiveret 5mm/33cm	10/120

Monopolært instrumentkabel



Varenr. sterilt	Beskrivelse	Inderæske/trp. karton
899110	Monopolært instrumentkabel Universal 4mm	20/240
899111	Monopolært instrumentkabel Universal 8mm	20/240



Monopolære sakse

- Til præcis, kontrolleret dissektion, koagulering og transsektion af blodkar og væv
- Bekvem og altid skarpt instrument til engangsbrug, som eliminerer udgifter til genbehandling og sterilisering
- Skarpe Metzenbaum blade sikrer et præcist skæreforløb langs hele bladets længde



Varenr. steril	Beskrivelse	Inderæske/trp. karton
899216	Monopolær saks 5mm / 33cm - Metzenbaum	10/100
899217	Monopolær saks 5mm / 33cm - Mini Metzenbaum	10/100
899218	Monopolær saks 5mm / 45cm - Metzenbaum	10/100

Veress kanyle

- Skarp affaset spids giver nem og sikker penetrering af bugvæggen
- Fjederbelastet nål giver et mærkbart og tydeligt klik til sikring af korrekt placering
- Når nålen er trængt gennem bugvæggen, beskytter en glat afskærmning den affasede spids for at undgå eventuelle risici for at beskadige tilstødende organer



Suge- og skyllesæt

- Ergonomisk design. Håndstykket kan betjenes med begge hænder
- Gennemsigtigt håndstykke, som giver uhindret visualisering
- Envejsventil forhindrer saltvand i at løbe tilbage
- Blød DEHP-fri slange med lavt drejemoment og easy-peel-adskillelse



Varenr. steril	Beskrivelse	Inderæske/trp. karton
899105	Veress kanyle 120mm	25/500
899106	Veress kanyle 150mm	25/500
800105	K-Line veress kanyle 120mm	10/450
800106	K-Line veress kanyle 150mm	10/450

Varenr. steril	Beskrivelse	Inderæske/trp. karton
899107	Suge- og skyllesæt 5mm / 33cm m/to spidser	10/20
899108	Suge- og skyllesæt 5mm / 45cm m/to spidser	10/20
899109	Rør til sug- og skyllesæt 10mm / 33cm	10/100
899113	Rør til sug- og skyllesæt 5mm / 45cm	10/100
800107	K-Line sug- og skyllesæt med to spidser 5mm / 33cm	6/36
800108	K-Line sug- og skyllesæt med to spidser 5mm / 45cm	6/36
800113	K-Line rør til sug- og skyllesæt 5mm / 45 cm	10/120

Juridisk producent: Unimax Medical Systems Inc.
 Juridisk producent: Hangzhou Kangji Medical Instrument Co.,
 Ltd. Importeret af: Mölnlycke Health Care AB

Trokarer

Designet med lav-profil hus.

- Et omfattende sortiment af ergonomisk designede trokarer, som giver enkel og sikker adgang til bughulen
- Gennemsigtig, riflet port til instrumentvisualisering og effektiv fastholdelse i bugvæggen
- Robust universalmembran, der passer til 5 - 12 mm instrumenter* samtidig med at pneumoperitoneum bevares

Afskærmet trokar, skærende

Varenr. steril	Beskrivelse	Inderæske/ trp. karton
899300	Afskærmet trokar, skærende 5mm / 70mm	5/60
899301	Afskærmet trokar, skærende 5mm / 100mm	5/60
899302	Afskærmet trokar, skærende 11mm / 100mm	5/60
899303	Afskærmet trokar, skærende 11mm / 150mm	5/30
899304	Afskærmet trokar, skærende 12mm / 100mm	5/60
899305	Afskærmet trokar, skærende 12mm / 150mm	5/30



Ikke-skærende trokar m/dilaterende spids

Varenr. steril	Beskrivelse	Inderæske/ trp. karton
899308	Ikke-skærende trokar m/dilaterende spids 5mm / 70mm	5/60
899309	Ikke-skærende trokar m/dilaterende spids 5mm / 100mm	5/60
899310	Ikke-skærende trokar m/dilaterende spids 11mm / 100mm	5/60
899311	Ikke-skærende trokar m/dilaterende spids 11mm / 150mm	5/30
899312	Ikke-skærende trokar m/dilaterende spids 12mm / 100mm	5/60
899313	Ikke-skærende trokar m/dilaterende spids 12mm / 150mm	5/30
899336	Ikke-skærende trokar m/dilaterende spids 15mm / 100mm	5/30



Dobbeltpakkede trokarer

Varenr. steril	Str.	Længde	Type	Inderæske/ trp. karton
899343	5mm	70mm	Optisk	5/60
899344	5mm	100mm	Optisk	5/60
899345	11mm	100mm	Optisk	5/60
899346	12mm	100mm	Optisk	5/60
899347	5mm	150mm	Optisk	5/60
899349	12mm	150mm	Optisk	5/60



*Til trokar med diameter på 12 mm

Optisk trokar

Varenr. sterilt	Beskrivelse	Inderæske/ trp. karton
899316	Optisk trokar 5mm / 70mm	5/60
899317	Optisk trokar 5mm / 100mm	5/60
899324	Optisk trokar 5mm / 150mm	5/45
899318	Optisk trokar 11mm / 100mm	5/60
899319	Optisk trokar 12mm / 100mm	5/60
899326	Optisk trokar 12mm / 150mm	5/30
800316*	K-Line optisk trokar 5mm / 70mm	8/80
800317*	K-Line optisk trokar 5mm / 100mm	8/80
800318*	K-Line optisk trokar 10mm / 100	6/60
800319*	K-Line optisk trokar 12mm / 100mm	6/60

Porte

Varenr. sterilt	Beskrivelse	Inderæske/ trp. karton
899320	Universel port 5mm / 70mm	5/60
899321	Universel port 5mm / 100mm	5/60
899322	Universel port 11mm / 100mm	5/60
899323	Universel port 12mm / 100mm	5/60
800320*	Port til optisk K-Line trokar 5mm / 70mm	8/80
800321*	Port til optisk K-Line trokar 5mm / 100mm	8/80
800322*	Port til optisk K-Line trokar 10mm / 100mm	6/60
800323*	Port til optisk K-Line trokar 12mm / 100mm	6/60

Hasson trokar

Varenr. sterilt	Beskrivelse	Inderæske/ trp. karton
899306	Hasson trokar 11mm / 100mm	5/60
899307	Hasson trokar 12mm / 100mm	5/60

Optisk ballon trokar

Varenr. sterilt	Beskrivelse	Inderæske/ trp. karton
899327	Optisk ballon trokar 5mm/100mm	5/60
899328	Optisk ballon trokar 12mm/100mm	5/60
899330	Optisk ballon trokar 5mm/70mm	5/60
899331	Optisk ballon trokar 11mm/100mm	5/60
899332	Optisk ballon trokar port 5mm/70mm	5/60
899333	Optisk ballon trokar port 5mm/100mm	5/60
899334	Optisk ballon trokar port 11mm/100mm	5/60
899335	Optisk ballon trokar port 12mm/100mm	5/60

Hasson ballon trokar

Varenr. sterilt	Beskrivelse	Inderæske/ trp. karton
899329	Hasson ballon trokar 12mm/100mm	5/60



Retsmæssig producent: Unimax Medical Systems Inc.

*Retsmæssig producent: Hangzhou Kangji Medical Instrument Co., Ltd.

Distribueret af: Mönlycke Health Care AB

Monopolære instrumenter

- Et omfattende sortiment af spidser giver et komplet kirurgisk tilbud
- Robuste spidser med todelt ledforbindelse og bred åbning giver optimale anvendelsesmuligheder under en operation
- Et omfattende sortiment af førsteklasses 5 mm monopolære instrumenter til engangsbrug med to forskellige håndtag, som giver kirurger det ultimative valg og bekvemmelighed.



Type I



Varenr. sterilt	Beskrivelse	Inderæske/trp. karton
899200	Lige fattetang 5mm / 33cm med crémaillère	10/100
899201	Dissektionspean - Maryland 5mm / 33cm	10/100
899202	Lapclinch 5mm / 33cm med crémaillère	10/100
899203	Babcock 5mm / 33cm med crémaillère	10/100
899204	Skarptandet fattetang - Rattooth 5mm / 33cm med crémaillère	10/100
899206	Tarmfattetang 5mm / 33cm med crémaillère	10/100
899207	Lige fattetang 5mm / 33cm med crémaillère - Fenestreret	10/100

Type II



Varenr. sterilt	Beskrivelse	Inderæske/trp. karton
899208	Lige fattetang 5mm / 33cm med crémaillère Control	10/100
899209	Dissektionspean - Maryland 5mm / 33cm	10/100
899210	Lapclinch 5mm / 33cm med crémaillère Control	10/100
899211	Babcock 5mm / 33cm med crémaillère Control	10/100
899212	Skarptandet fattetang - Rattooth 5mm / 33cm med crémaillère Control	10/100
899214	Tarmfattetang 5mm / 33cm med crémaillère Control	10/100
899215	Lige fattetang 5mm / 33cm med crémaillère Control - Fenestreret	10/100

Bipolære tænger

- Coated hængselled for at forebygge opbygning af debris
- Materialerne er DEHP- og latexfri
- Sikker, isoleret skaft



Varenr. sterilt	Beskrivelse	Inderæske/trp. karton
800400	K-Line bipolar tang, lige kæber, 5x330mm	5/90
800401	K-Line bipolar tang, kurvede kæber, 5x330mm	5/90
800402	K-Line bipolar tang med kniv, 5x330mm	1/10

Juridisk producent: Hangzhou Kangji Medical Instrument Co., Ltd.
 Importeret af: Mölnlycke Health Care AB

Din vejledning til valg af alle de komponenter, du har brug for, til dine specifikke, laparoskopiske indgreb



Dette er en checkliste til en laparoskopisk cholecystectomi

Alle produkter kan inkluderes i en ProcedurePak® procedurepakke, så den svarer til dine behov og ønsker.

- | | |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Patientafdækning | <input type="checkbox"/> Kameraovertræk |
| <input type="checkbox"/> Bordafdækning | <input type="checkbox"/> Hudmarkør |
| <input type="checkbox"/> Kitler | <input type="checkbox"/> Engangsinstrumenter* |
| <input type="checkbox"/> Veress kanyler | <input type="checkbox"/> Gaze servietter |
| <input type="checkbox"/> Trokarer | <input type="checkbox"/> Sprøjter og kanyler |
| <input type="checkbox"/> Lap. saks, Metzenbaum | <input type="checkbox"/> Instrumentafdækning |
| <input type="checkbox"/> Laparoskopisk tang | <input type="checkbox"/> Lampehåndtagsovertræk |
| <input type="checkbox"/> Laparoskopisk pean | <input type="checkbox"/> Skåle |
| <input type="checkbox"/> Monopolar L-hook elektrode | <input type="checkbox"/> Skalpelblade, sikkerhedsskalpel |
| <input type="checkbox"/> Aftagelig præparatpose | <input type="checkbox"/> Opsamlingskop med låg |
| <input type="checkbox"/> Monopolært kabel | <input type="checkbox"/> Nåletæller |
| <input type="checkbox"/> Suge- og skyllesæt | <input type="checkbox"/> Suturer |
| <input type="checkbox"/> Insufflationsslange | <input type="checkbox"/> Bakke til skarpe genstande |
| <input type="checkbox"/> Røgfilter | <input type="checkbox"/> Post-operative bandager |
| <input type="checkbox"/> Anti-dug løsning | <input type="checkbox"/> Time-out afdækning |
| <input type="checkbox"/> Suturpasser | |

* f.eks. saks, nåleholder, forceps

Alt, hvad dit team behøver

Mölnlycke® ortopædkirurgiske løsninger

2 Mepilex® Border Post-Op
Den fleksible, absorberende
alt-i-en post-op bandage

**4 BARRIER®
personalebeklædning**
Komfort og avanceret
beskyttelse

6 Plume Evacuation
Integreret røgsug
med indbygget
teleskopfunktion

**1 Pulsed Lavage og
pakkekomponenter**
Bredt sortiment af
pakkekomponenter i høj
kvalitet

3 Biogel® handsker
Avanceret beskyttelse
og god pasform,
fingerspidsfølsomhed og
komfort

5 BARRIER® afdækninger
Alt-i-en special-
afdækninger der passer til
ortopædkirurgiske indgreb



Truly customised
orthopaedic solutions

Mölnlycke® Pulsed Lavage*

Truly customised orthopaedic solutions



Batteriversion

Vekselstrøm version

Mölnlycke Pulsed Lavage er DEHP-fri

Vores Pulsed Lavage-system med højt tryk til engangsbrug renser knoglen effektivt og fjerner knogle- og vævsrester i forbindelse med udskiftning af led. Herved øges cementpenetrationen i den spongiøse knogle med mulighed for at styrke fikseringen af implantatet og reducere revisionshyppigheden. Med lavt tryk er det også en effektiv, mekanisk debridering til sårrensning, fjernelse af nekrotisk væv og vævsrester.

Fås i to versioner

- Vekselstrømadapter: reduceret miljømæssig påvirkning, da der ikke bruges alkaliske batterier. Engangshåndtag og genanvendelig vekselstrømadapter
- Indbygget batteri: en fleksibel og mobil version med integreret batteripakke i håndtaget, så skift af batteri kan ske hurtigt og nemt

Alt inklusiv betyder ingen skjulte omkostninger

- Ergonomisk og bekvemt håndtag
- Kort sprøjtstud med dobbelt stænk skjold
- Lang femoral børste
- Integreret suge- og skyllesystem
- Rensestav til at klare eventuelle tilstopninger i studsen til lårbensknoglen

Enkeltpakket eller inkluderet i Mölnlycke® procedurepakker

- Inkluder Pulsed Lavage i dine kundetilpassede, procedure-specifikke pakker og opnå effektivitetsgevinster
- Fås også sterilt, enkeltpakket

Revisionsstuds med filter

- Til hofterevisjoner har vi en special stud til håndtering af små knogle- eller cementdele
- Fås også sterilt, enkeltpakket

* Pulsed Lavage's retmæssige producent er Kaiser Technology co., Ltd.

Mölnlycke® Pulsed Lavage - Vekselstrøm version

Sterilt, enkeltpakket

Varenr.	Beskrivelse	Inder/ TRP
9750000	Pulsed Lavage System, Vekselstrøm	1/5
9752010	Strømforsyning (AC100240V), DK	-/1
9751000	Femoral børste	1/10
9751001	Kort, konisk studs*	1/10
9751002	Lang studs*	1/10
9751003	Hofterevisionsstuds	1/20

* Kort og lang studs er inkluderet ved køb af Pulsed Lavage system

I procedurepakker


Beskrivelse
Pulsed Lavage System, Vekselstrøm
Femoral børste




Vekselstrøm




Strømforsyning

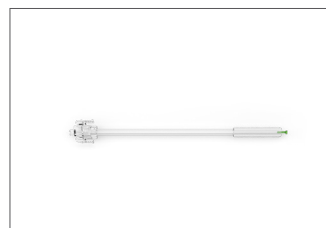


Femoral børste

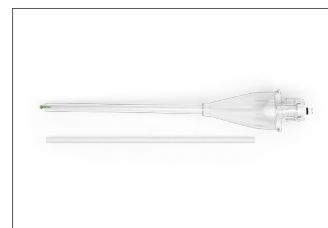

Hofterevisionsstuds

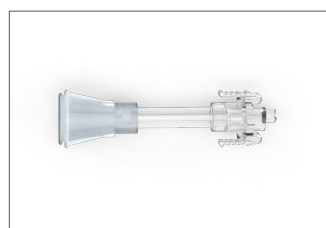

Kort studs

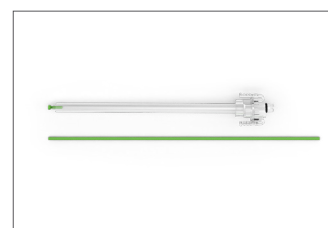

Lang studs

Mölnlycke® Pulsed Lavage - Indbygget batteri


Sterilt, enkeltpakket

Varenr.	Beskrivelse	Inder/ TRP
9750003	Pulsed Lavage System, Indbygget batteri	1/5
9751004	Femoral børste	1/10
9751005	Kort, konisk studs*	1/10
9751006	Lang studs*	1/10
9751007	Hofterevisionsstuds	1/10


* Kort og lang studs er inkluderet ved køb af Pulsed Lavage system

I procedurepakker


Beskrivelse
Pulsed Lavage System, Indbygget batteri
Femoral børste

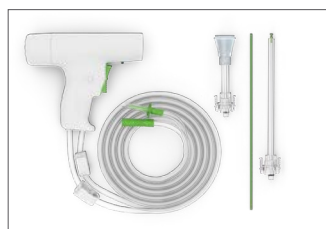


Indbygget batteri

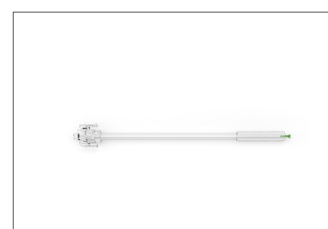


Femoral børste

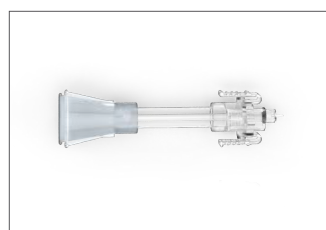

Kort studs

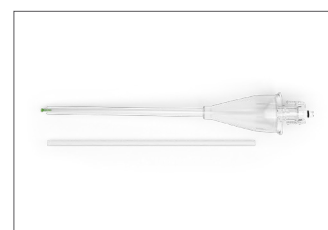

Hofterevisionsstuds

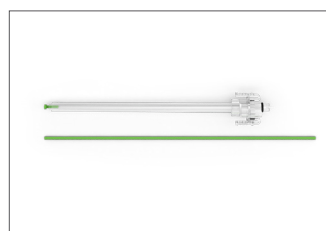

Lang studs

Mölnlycke® Plume Evacuation Pencil



Hver gang der skabes kirurgisk røg på operationsstuen, bliver operationspersonale udsat for en risiko. Løsningen er lige for hånden med den nye, unikke Mölnlycke® Plume Evacuation Pencil (diatermipen med røgsug), en fremragende løsning, der sikrer minimeret udsættelse for røg og tydelig visualisering af operationsfeltet. Det sætter din og dine patienters sikkerhed først.

- Et unikt, alt-i-en, letvægts, smalt design med integreret teleskopfunktion, hvilket giver en umiddelbar løsning til både dybe og overfladiske incisioner.
- Mölnlycke Plume Evacuation Pencil tilbyder en bæredygtig løsning, DEHP og PVC fri.
- Meget høj sugekapacitet (95 l/min) hvilket minimerer udsættelsen for røg og giver hurtig visualisering af operationsfeltet.
- Fås i både dine kundetilpassede procedurepakker samt sterilt, enkeltpakket.

Tekniske data

Valg af elektroder:

Rustfri stål ❶ til hurtige, enkle opgaver.

Coated PTFE ❷ til reduceret afbrydelse af operationen pga. ophobning af væv.

Isoleret PTFE ❸ til reduceret risiko for utilsigtet beskadigelse af væv når man opererer på trange områder.

- 360° drejeligt håndtag muliggør bevægelsesfrihed og reducerer risikoen for træthed i håndledet
- Universal 22mm forbindelse passer til alle røgsugmaskiner



- Smal diameter sikrer præcis kontrol og større visualisering, især i trange områder
- Praktisk 4 meter kabel

Bestillingsinformation, enkeltpakket steril

Varenr.	Beskrivelse	Stk./inder	Stk./TRP
420100	Plume Evacuation Pencil, PTFE elektrode	20	40
420101	Plume Evacuation Pencil, PTFE isoleret elektrode	20	40
420102	Plume Evacuation Pencil, rustfri stål elektrode	20	40

Varenummer til inkludering i Mölnlycke® procedurepakker

Varenr.	Beskrivelse
2325334	Plume Evacuation Pencil, PTFE elektrode
2325352	Plume Evacuation Pencil, PTFE isoleret elektrode
2325353	Plume Evacuation Pencil, rustfri stål elektrode
2326215	Tungsten elektrode, 5,5cm
2326246	Tungsten elektrode, 7cm
2326271	Keramisk elektrode, 7cm

Prima Medical Limited er den lovmæssige producent af Plume Evacuation Pencil.

Din vejledning til valg af alle de komponenter, du har brug for, til dine specifikke, ortopædiske indgreb

Alle produkter kan inkluderes i en ProcedurePak[®] procedurepakke, så den svarer til dine behov og ønsker.

Dette er en checkliste til en knæudskiftning

- | | | |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Patientafdækning | <input type="checkbox"/> Diatermipen med røgsug | <input type="checkbox"/> Basin liner |
| <input type="checkbox"/> Bordafdækning | <input type="checkbox"/> Elektroder til el-kirurgi | <input type="checkbox"/> Nåletæller |
| <input type="checkbox"/> Kitler | <input type="checkbox"/> Gaze servietter | <input type="checkbox"/> Engangsinstrumenter* |
| <input type="checkbox"/> Incisionsfilm | <input type="checkbox"/> Slinger | <input type="checkbox"/> Hudmarkør |
| <input type="checkbox"/> Afdækning til udstyr | <input type="checkbox"/> Skalpel blade/sikkerhedsskalpel | <input type="checkbox"/> Bakke til skarpe genstande |
| <input type="checkbox"/> Pulsed Lavage | <input type="checkbox"/> Hudclips | <input type="checkbox"/> "Anti-slip" måtte |
| <input type="checkbox"/> Cementblende system | <input type="checkbox"/> Lampehåndtagsovertræk | <input type="checkbox"/> Time-out afdækning |
| <input type="checkbox"/> Suturer | <input type="checkbox"/> Sårdræn | <input type="checkbox"/> Post-operative bandager |
| <input type="checkbox"/> Sugeseæt | <input type="checkbox"/> Bandager inkl. Esmark | |
| <input type="checkbox"/> Nåle og kanyler | <input type="checkbox"/> Skåle | |

* f.eks. saks, nåleholder, forceps



Farvemærk dine procedurepakker og dit lager og bliv endnu mere effektiv



Bruger du for meget tid på fremstilling til operationer og for lidt tid med patienterne? Med vores farvemærkningsløsning bliver produktflowet en del af en velorganiseret og velfungerende maskine. Vores system giver mulighed for hurtigere og mere effektiv lokalisering og genopfyldning³⁵.

Fordele:

- Muliggør nem identifikation og åbning af den korrekte procedurepakke til dit indgreb
- Mere effektiv genopfyldning og lagerstyring
- Gør det muligt for alt hospitalspersonale at finde og klargøre effektivt
- Mere effektivitet på operationsstuen, da der opnås kortere klargørings- og udskiftningstid mellem operationer¹
- Lagerhåndtering gøres også enklere, da transportkarton er farvekodet

Farvemærket lager

Farvemærket transportkarton og mærkat på siden af pakken muliggør hurtigere klargørings- og udskiftningstid mellem operationer.

Mölnlycke tager farvemærkningen et skridt videre og kan også tilbyde supplerende hjælp med materiale til at farvemærke lagerrum, så der opnås en mere effektiv lagerstyring.

Du kan vælge mellem 12 farver:



Nemme trin til at farvemærke dine ProcedurePak® procedurepakker og dit lager

TRIN 1

Farvemærk dine ProcedurePak procedurepakker

Vælg en af de eksisterende 12 farver samt en tekst til mærkaten på siden af hver procedurepakke. Transportkartonerne bliver også farvemærkede.

Du kan vælge mellem 12 farver:



TRIN 2

Sammensæt dit farvemærknings sæt

Baseret på dine behov, kan du tilpasse dit farvemærknings sæt ud fra følgende emner:

- Farvekodede mærkater og stregekoder
- Skilteholdere til toppen af reolen
- Mærkatholdere til hylder
- Farvet tape til mærkning af hylder og gulv




Farvemærk dit lager

Med kombinationen af dine farvemærkede ProcedurePak® procedurepakker og tilpassede farvemærknings sæt, kan du nu organisere dit lager, så du får et mere effektivt produktflow og derved mulighed for at opnå kortere klagørings- og udskiftningstid.



Maksimer værdien af dine procedurepakker

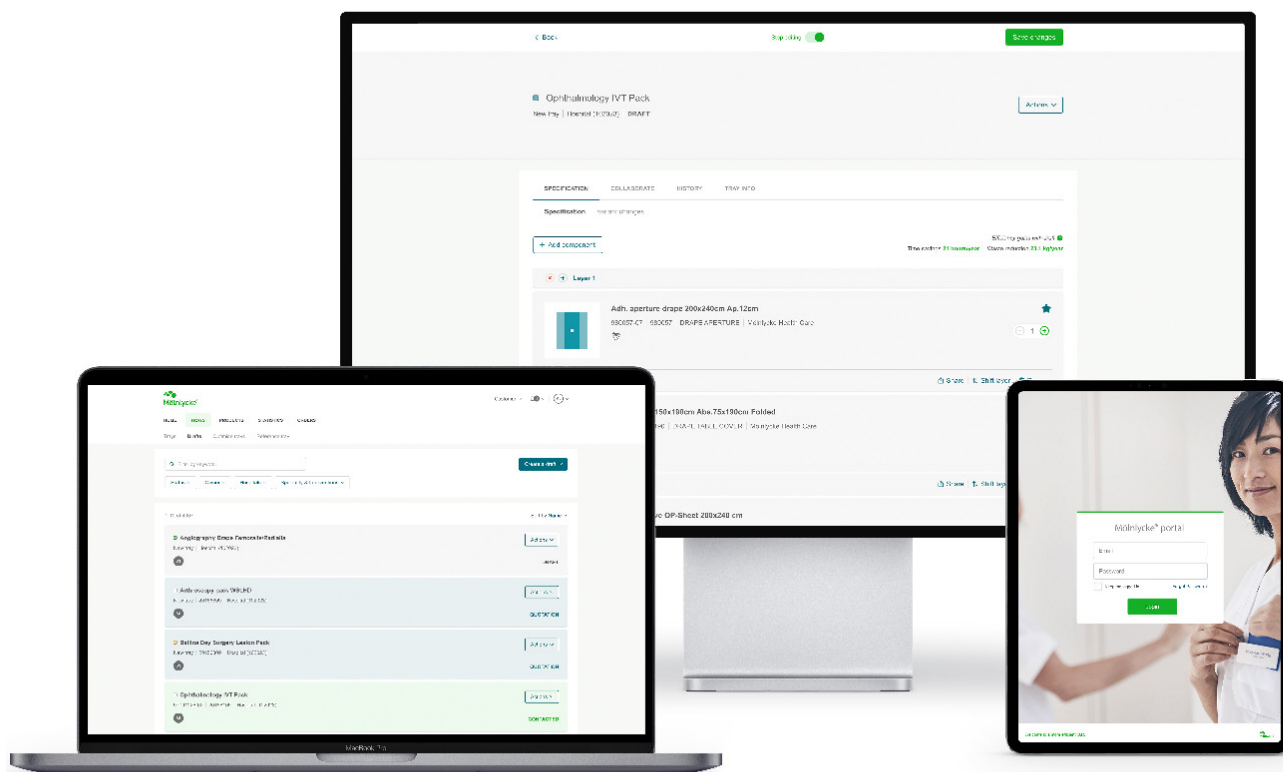

Håndtér alle dine ProcedurePak® pakker et samlet sted

Din organisation kan spare tid, penge og undgå affald med kundetilpassede procedurepakker. Nu kan du også håndtere alle dine ProcedurePak® pakker et samlet sted. Du kan bruge Mölnlycke® Portal til enkelt at sammensætte, analysere og håndtere procedurepakkekøb - med hjælp fra detaljerede statistikker og rapporter.

✓ Kontrol

Optimer og kontrollér dine ProcedurePak pakker
Mölnlycke Portal giver dig kontrol over dit teams procedurepakker. Du kan styre dit forbrug af komponenter og optimere værdien takket være detaljerede statistikker.

✓ Transparens

Total synlighed for dine ProcedurePak pakker
Mölnlycke Portal lader relevante brugere i hele organisationen styre brugen af pakker ved at vise alle pakker og alle komponenter i hver enkelt pakke.


✓ Effektivitet

Effektiv måde at arbejde på
Vores digitale værktøj er let at bruge med enkle og logiske trin. Mölnlycke Portal giver dig muligheden for at dele pakkeinformationer hurtigt og enkelt samt godkende pakkeændringer på en effektiv måde.




Startside

Her kan du se en oversigt med links til de forskellige dele af portalen.

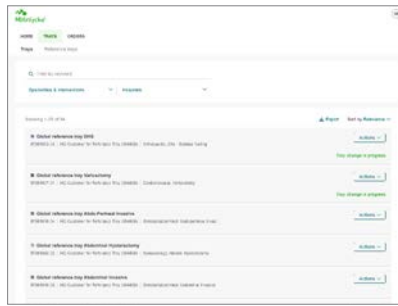


Se alle dine pakker og optimér dem

I pakkeoversigten kan du følge alle dine pakker og organisere dem med filtre. For hver pakke kan du se alle specifikationer og følge op på statistik. Du kan også optimere dine pakker og gøre dem endnu mere effektive.

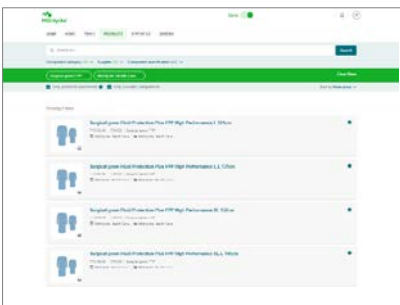

Se alle tilgængelige produkter

Dette er en oversigt over alle de produkter i et produktkatalog, der er mulige at medtage i en pakke. Du kan søge, filtrere på kategori, leverandør eller specifikationer.

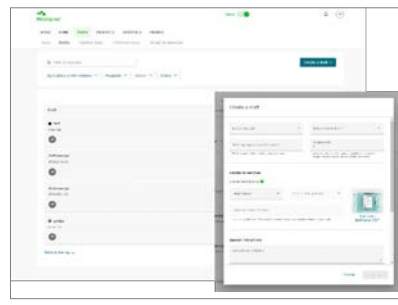


Pakkeudkast og skab nye pakker

Her får du en oversigt over alle dine pakkeudkast og også alle pakkeændringer. Du kan også nemt oprette et pakkeudkast og bygge den ud fra en eksisterende, en blank eller fra en reference. Referencepakkerne vil give dig vejledning til en optimal pakkesammensætning med fokus på effektivitet og værdi.



Statistikker og data

Statistik for alle dine pakker og produkter, som du også kan eksportere. Følg op på mængde og køb for forskellige tidsrammer i dette dashboard.

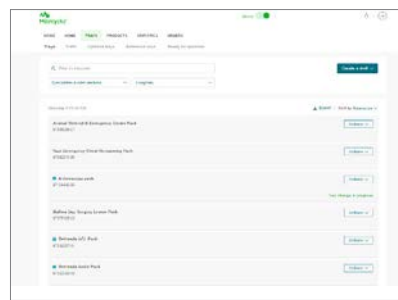

Ordrestatus og leverancer

Viser dig alle oplysninger om din ordrestatus, ordreindhold og leveringer. Dit team har døgnet rundt adgang til logistisk information.

Sådan kan du maksimere værdien

Mölnlycke® Portal hjælper dig med at få den bedste værdi for pengene ved at gøre det nemt at sammensætte en komplet ProcedurePak® med de rigtige komponenter. Alt sammen fra ét sted. Du kan forbedre kontrollen over dine pakker – og maksimere deres værdi.

Brug Mölnlycke Portal til at:

- skræddersy pakkerne til dine præcise behov
- få forslag til hvordan du optimerer dine pakker
- tilgå alle data om dine ProcedurePak pakker
- se alle logistik informationer om dine pakker for at opnå større kontrol

Tag en prøvetur!

Prøv Mölnlycke® Portal og se, hvilke fordele den kan give dig og din arbejdsplads!



BARRIER® operationsafdækninger

Alle produkter og løsninger i BARRIER® sortimentet af operationsafdækninger er udviklet og designet til at lette det daglige arbejde på operationsstuen.

Gennem den omfattende række af procedurespecifikke produkter kan BARRIER levere innovative produktløsninger, der er designet til at yde en optimal kombination af beskyttelse og funktionalitet. Alle BARRIER afdækninger er designet til at sørge for den bedst mulige patientsikkerhed ved at yde en optimal barriere mod mikrobiel migration. En effektiv infektionskontrol opnås, hvor det er nødvendigt, med impermeable materialer, mens der opnås effektiv væskekontrol med

absorption eller væskeopsamlingsposer. Vores opmærksomhed på detaljen sikrer desuden, at alle produkter er foldet til optimal aseptisk håndtering og nem drapering.

BARRIER produkter leveres komplet med den bedst opnåelige service og support, herunder både uddannelse i optimal udnyttelse af produkterne og skræddersyede leverings- og logistikløsninger i overensstemmelse med kundernes behov.


BARRIER er Europas førende brand inden for operationsafdækninger til engangsbrug,

og i dag sætter vi standarden med et sortiment, der opfylder alle de forskellige behov på operationsstuen. For Mölnlycke og BARRIER sortimentet ligger vores engagement i det kirurgiske område, og hos de patienter, der skal behandles.

BARRIER® OPERATIONSADFÆKNINGER - INTRODUKTION TIL KODER OG MATERIALER

SÆTOPBYGNING:

Sæt navn	Beskrivelse og størrelse	Antal i inderæske	Antal i transportkarton
UNIVERSAL SÆT BASIC		6/12	698900

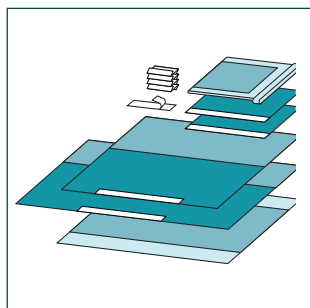

Varenr. usterilt	Antal	Beskrivelse
996106	1	assistancebordspose 79x145cm, 65x85cm absorberende område
-	4	papirhåndklæde 18x25cm
911500	1	op-tape 9x49cm
930200	2	afdækning m. klæb 90x75cm
967775	1	afdækning m. klæb 175x175cm
967776	1	afdækning m. klæb 240x150cm
90190	1	bordafdækning 150x190cm, 75x190cm absorberende område


Sterilt varennummer for sættet (fed)

Usterilt varennummer. Disse numre anvendes kun ved inklusion i procedurepakker.

Antal

OPBYGNING ENKELTPAKKEDE PRODUKTER:



Produkt navn	Beskrivelse og størrelse	Antal i inderæske	Antal i transportkarton
AFDÆKNING M. KLÆB BARRIER® FLEX			

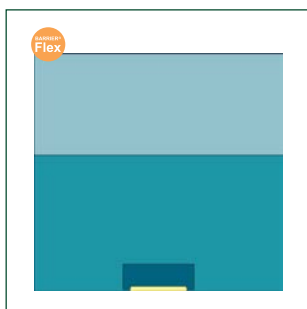

Produktets sterile varennummer (fed)


Varenr. sterilt	Varenr. usterilt	Beskrivelse	Inderæske/trp. karton
66002	76002	Afdækning m. klæb 175x175cm, forstærket, BARRIER® Flex	20/40
66003	76003	Afdækning m. klæb 300x175cm, forstærket, BARRIER® Flex	14/28

Usterilt varennummer. Disse numre anvendes kun ved inklusion i procedurepakker.

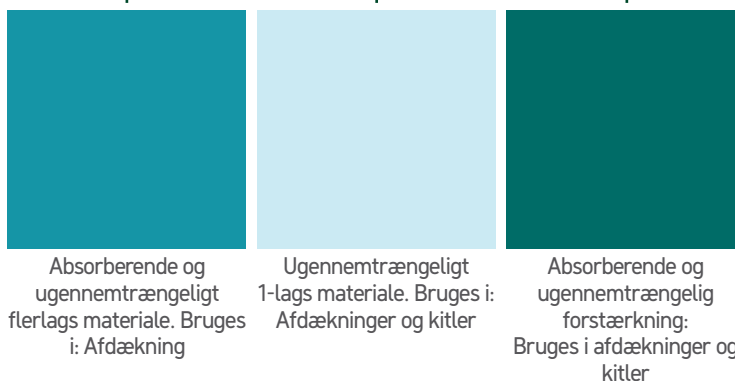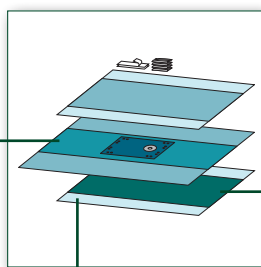





Elastisk film.
Bruges i: Afdækninger

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
Klar plastfilm. Transparent
Bruges i: Afdækninger



Incisionsfilm.
Bruges i: Afdækninger

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Ugennemtrængeligt
1-lags materiale.
Bruges i: Afdækninger og kitler




Absorberende og
ugennemtrængeligt
2-lags materiale.
Bruges i: Afdækninger



Absorberende og
ugennemtrængeligt
flerlags materiale.
Bruges i: Afdækninger



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Ugennemtrængeligt 2-lags
materiale med komfortlag.
Bruges i: Afdækninger og kitler



Væskeafvisende materiale.
Bruges i: Afdækninger og kitler



Kraftigt væskeafvisende
materiale.
Bruges i: Afdækninger og kitler



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
Absorberende og
ugennemtrængelig forstærkning.
Bruges i afdækninger og kitler




Kraftigt absorberende
forstærkning +
absorberende 1-lags materiale.
Bruges i: Afdækninger




Kraftigt absorberende og
ugennemtrængelig forstærkning.
Bruges i: Afdækninger




Skummateriale.
Bruges i: Afdækninger

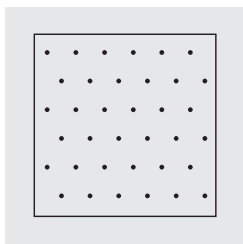


Standard nonwoven
abdominalserviet

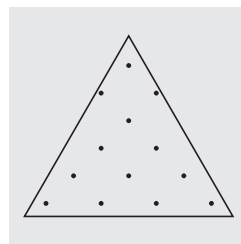


Standard nonwoven
operationsserviet

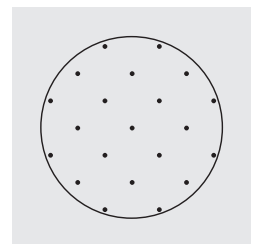


Standard nonwoven
operationstampon

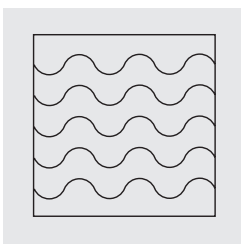


Standard nonwoven
operationsserviet

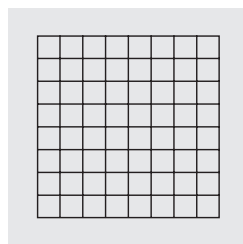

Standard gaze abdominalserviet

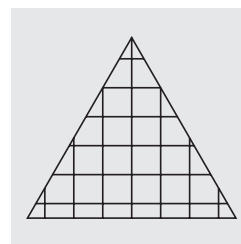

Standard gaze abdominalserviet

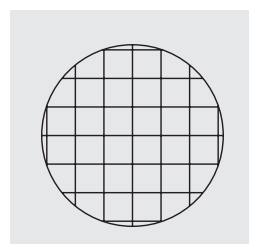

Standard gaze operationstampon



BARRIER® ISCC sortiment

Som leverandør af medicinsk udstyr er vores vigtigste mission at levere et produkt, der er sikkert at bruge og sikre, at den påtænkte anvendelse af infektionskontrol er optimeret. Vi vil aldrig kompromittere patientens sikkerhed. Vi har sammen med vores leverandører listet forskellige muligheder for at gøre os i stand til at blive mere bæredygtige. Det langsigtede mål er at levere et klimaneutralt produkt.

Konvertere til fornybare materialer

- Biobaserede
- Reducere CO₂ udledninger (dette er ikke kun relateret til fornybare materialer men effekten er større pga. absorptionen).

Ved at anvende biobaserede produkter, kan vi reducere udtømningen af fossil olie og reducere akkumuleringen af CO₂ gasser ud i vores atmosfære. Faktisk, ved at anvende biobaseret materiale, absorberer vi CO₂ fra atmosfæren.

Øget brug af genanvendte materialer

Hvis det er muligt, vil vi gerne lave vores produkter af genanvendte materialer. Vi vil undersøge, om det er muligt at gøre uden at kompromittere produktets sikkerhed.

Reducere materiale i produktionen

- Vi arbejder mod at reducere vægten (nedmåle) af råmaterialerne der bliver brugt til vores produkter
- Minimere affald i produktionen
- Sænke vores råmateriale affald

Reducere brugen af skadelige kemikalier

Vi vurderer altid den kemiske sammensætning af vores produkter. Det er vigtigt at sikre, at der ikke anvendes forbudte eller uønskede kemikalier i produktionen/produktet, som kan bringe patientsikkerheden såvel som miljøet i fare.

Øget brug af biobaserede råmaterialer

Vi starter med at implementere biobaseret materiale, og det vil gradvist reducere fossilbaserede CO₂ udledninger i vores forsyningskæde, i vores produktion, optimere vores ressourceforbrug og opretholde fuld sporbarhed.

Vi vil forpligte os til at bruge en stor andel af biobaserede materialer i vores proces til at skabe nye, bæredygtige produkter. Vi introducerer dette trin for trin, efterhånden som vi forbedrer vores miljøpræstation.

Men hvordan kan kunderne vide og stole på, at vi gør noget? Det er her, ISCC kommer ind i billedet.

Hvad står "ISCC" for?

Forkortelsen ISCC står for "International Sustainability and Carbon Certification" (International bæredygtighed og kulstofcertificering).

Hvad er det?

Det er en uafhængig multi-interessent-organisation, der er ansvarlig for udvikling, overvågning, revision og løbende forbedring af ISCC-certificeringssystemet. Medlemmer omfatter landmænd, industrier, forskningsinstitutioner og ikke-statslige organisationer som WWF.

Hvad er ISCC systemet?

Det er et system, hvor biomasse og andre råvarer produceres på en miljømæssig, social og økonomisk bæredygtig måde og er fuldt sporbare gennem hele forsyningskæden.



Massebalance overordnet

Massebalance er et begreb, der har eksisteret i længe, selvom de fleste normalt ikke genkender det som massebalance.

Hvad er det?

Kort sagt er massebalance en mekanisme til at afbryde en positiv værdi af noget fysisk, der er sket på et bestemt oprindelsessted, og overføre denne værdi gennem en kæde af forskellige bærere.

Hvordan fungerer det?

Det fungerer ved at bogføre fra oprindelsesstedet, indtil det når kunden. Der er naturligvis meget specifikke og kontrollerede regler at følge som en del af at blive certificeret til disse systemer.

Nafta

Den kemiske kilde til PE, polyethylen, kaldes nafta. Nafta kan produceres fra både fossile og vedvarende kilder. Vi ønsker, at det


skal komme fra en bestemt vedvarende kilde lige nu, tallolie, som er en rest fra træmasseindustrien.

Er det det samme produkt?

Ethylen fremstillet af både bio-nafta og fossilt nafta er dog kemisk nøjagtigt det samme, og det er fremstillet ved hjælp af det samme udstyr, hvori ethylenet fra disse to kilder blandes. Fra dette tidspunkt er det umuligt at spore, hvor hvert molekyle kommer fra, eller hvor de er på vej hen.


Hvad kan vi påstå?

Input og output styres af nøjagtig bogføring, som gør det muligt at sige, hvor mange ethylenmolekyler, der stammer fra tallolie. Det er kun denne brugte mængde, der kan sælges som PE-film med certificeret bio-krav.

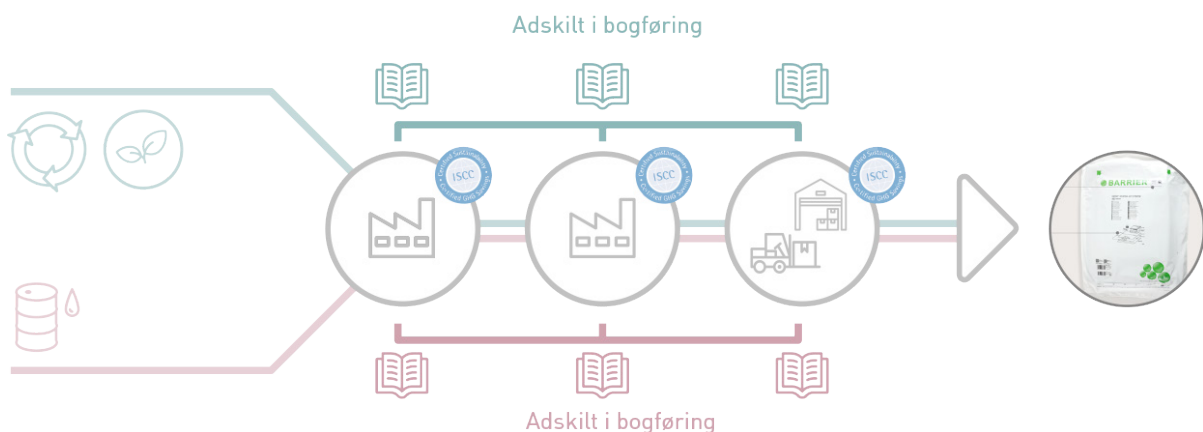

UNIVERSALSÆT STANDARD ISCC


6/12 60054

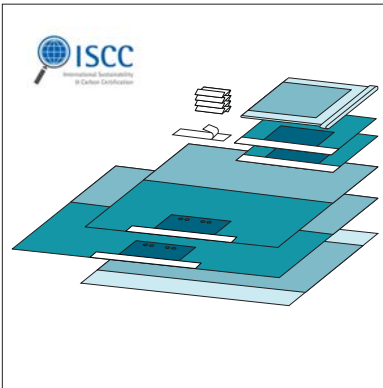

Varenr. usterilt	Antal	Beskrivelse
996106	1	assistancebordspose 79x145cm, 65x85cm absorberende område
70200	2	afdækning m. klæb 90x75cm ISCC
-	4	papirhåndklæde 18x25cm
911500	1	op-tape 9x49cm
70772	1	afdækning m. klæb 175x175cm ISCC
70773	1	afdækning m. klæb 240x150cm ISCC
90190	1	bordafdækning 150x190cm, 75x190cm absorberende område

UNIVERSALSÆT BASIC ISCC


6/12 60900

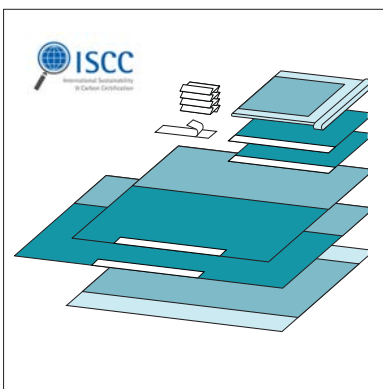

Varenr. usterilt	Antal	Beskrivelse
996106	1	assistancebordspose 79x145cm, 65x85cm absorberende område
-	4	papirhåndklæde 18x25cm
911500	1	op-tape 9x49cm
70300	2	afdækning m. klæb 90x75cm ISCC
70775	1	afdækning m. klæb 175x175cm ISCC
70776	1	afdækning m. klæb 240x150cm ISCC
90190	1	bordafdækning 150x190cm, 75x190cm absorberende område

UNIVERSALSÆT STANDARD ISCC

7/14 60340

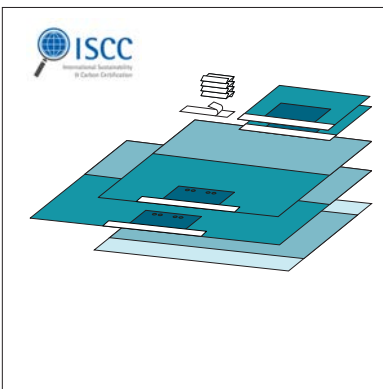

Varenr. usterilt	Antal	Beskrivelse
70200	2	afdækning m. klæb 90x75cm ISCC
-	4	papirhåndklæde 18x25cm
911500	1	op-tape 9x49cm
70772	1	afdækning m. klæb 175x175cm ISCC
70773	1	afdækning m. klæb 240x150cm ISCC
90190	1	bordafdækning 150x190cm, 75x190cm absorberende område

AFDÆKNING MED KLÆB, STANDARD ISCC

7/14 699340



Varenr. usterilt	Varenr. usterilt	Beskrivelse	Inderæske/ trp. karton
-	70772	Afdækning med klæb 175x175cm, forstærket, ISCC	
-	70773	Afdækning med klæb 240x175cm, forstærket, ISCC	
-	70782	Afdækning med klæb 300x175cm, forstærket, ISCC	

AFDÆKNING MED KLÆB, FORSTÆRKET, ISCC



Varenr. sterilt	Varenr. usterilt	Beskrivelse	Inderæske/trp. karton
60800	70200	Afdækning med klæb 90x75cm, forstærket, ISCC	45/90

AFDÆKNING MED KLÆB, ISCC




Varenr. sterilt	Varenr. usterilt	Beskrivelse	Inderæske/trp. karton
60500	-	Afdækning med klæb 75x75cm, ISCC	35/210
60677	70300	Afdækning med klæb 90x75cm, ISCC	32/192

AFDÆKNING MED KLÆB, ISCC




Varenr. sterilt	Varenr. usterilt	Beskrivelse	Inderæske/trp. karton
60761	70776	Afdækning med klæb 240x150cm, ISCC	12/24
60750	70775	Afdækning med klæb 175x175cm, ISCC	13/26

AFDÆKNING 2-LAG, ISCC

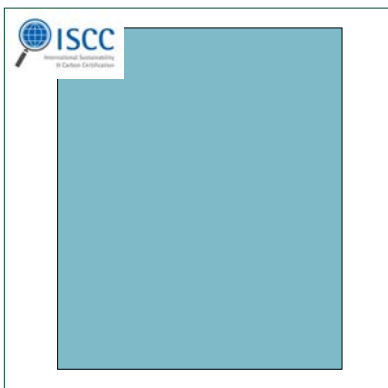

Varenr. sterilt	Varenr. usterilt	Beskrivelse	Inderæske/trp. karton
60530	-	Afdækning, 2-lag 75x90cm, ISCC	38/228

FORSTÆRKET ASSISTANCEBORDSPOSE, ISCC

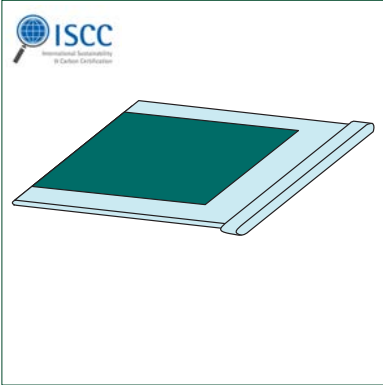

Varenr. steril	Varenr. usterilt	Beskrivelse	Inderæske/trp. karton
-	996113	Forstærket assistancebordspose 79x145cm, 65x85cm absorberende område, teleskopfoldet	
-	996108	Forstærket assistancebordspose 79x145cm, 65x85cm absorberende område	

ANÆSTESIAFDÆKNING, ISCC



Varenr. steril	Varenr. usterilt	Beskrivelse	Inderæske/trp. karton
-	944217	Transparent anæstesiafdækning, 300x275cm, slids 70x55cm	

LAPAROSKOPISK SLIDSLAGEN, ISCC



Varenr. steril	Varenr. usterilt	Beskrivelse	Inderæske/trp. karton
-	944218	Laparoskopisk slidslagen 200x275cm, slids 75x25cm Kan kombineres med 944217, transparent anæstesiafdækning som vist på tegningen	

LAPAROSKOPISK SLIDSLAGEN, ABDO-PERINEALT, ISCC




Varenr. steril	Varenr. usterilt	Beskrivelse	Inderæske/trp. karton
-	944219	Laparoskopisk, abdo-perinealt slidslagen 300/200x190cm, hul 10x13cm, slids 75x25cm. Transparent benposer. Kan kombineres med 944217, transparent anæstesiafdækning som vist på tegningen	

UNIVERSALSÆT BASIC

6/12

698900

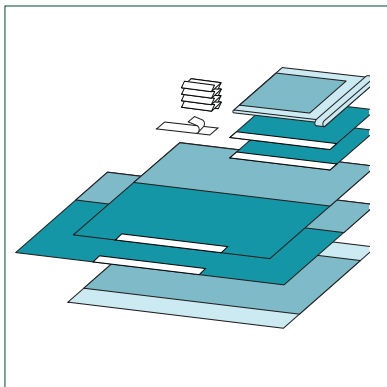


Varenr. usterilt	Antal	Beskrivelse
996106	1	assistancebordspose 79x145cm, 65x85cm absorberende område
-	4	papirhåndklæde 18x25cm
911500	1	op-tape 9x49cm
930200	2	afdækning m. klæb 90x75cm
967775	1	afdækning m. klæb 175x175cm
967776	1	afdækning m. klæb 240x150cm
90190	1	bordafdækning 150x190cm, 75x190cm absorberende område

PÆDIATRISÆT BASIC

6/12

699010

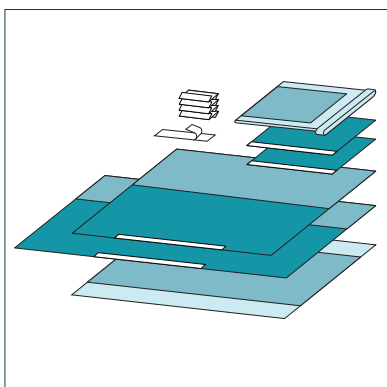


Varenr. usterilt	Antal	Beskrivelse
996106	1	assistancebordspose 79x145cm, 65x85cm absorberende område
-	4	papirhåndklæde 18x25cm
917198	2	afdækning m. klæb 75x73cm, klæbebredde 2,5cm
911500	1	op-tape 9x49cm
917775	1	afdækning m. klæb 175x173cm, klæbebredde 2,5cm
917776	1	afdækning m. klæb 240x148cm, klæbebredde 2,5cm
90190	1	bordafdækning 150x190cm, 75x190cm absorberende område

UNIVERSALSÆT STANDARD

6/12

699054

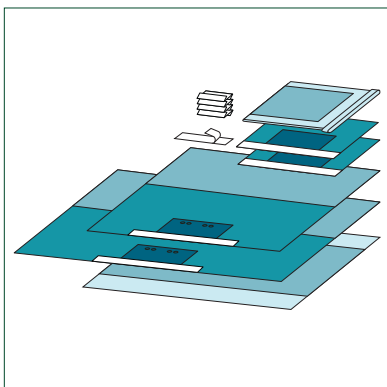


Varenr. usterilt	Antal	Beskrivelse
996106	1	assistancebordspose 79x145cm, 65x85cm absorberende område
910200	2	afdækning m. klæb 90x75cm
-	4	papirhåndklæde 18x25cm
911500	1	op-tape 9x49cm
967772	1	afdækning m. klæb 175x175cm
967773	1	afdækning m. klæb 240x150cm
90190	1	bordafdækning 150x190cm, 75x190cm absorberende område

UNIVERSALSÆT STANDARD

7/14

699340

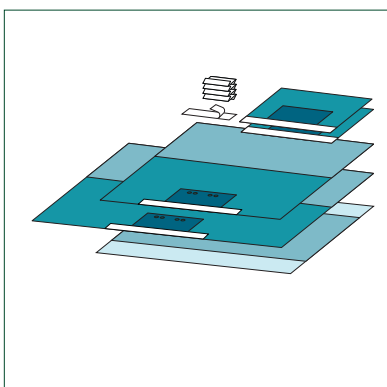


Varenr. usterilt	Antal	Beskrivelse
910200	2	afdækning m. klæb 90x75cm
-	4	papirhåndklæde 18x25cm
911500	1	op-tape 9x49cm
967772	1	afdækning m. klæb 175x175cm
967773	1	afdækning m. klæb 240x150cm
90190	1	bordafdækning 150x190cm, 75x190cm absorberende område

UNIVERSALSÆT STANDARD

4/8

699600

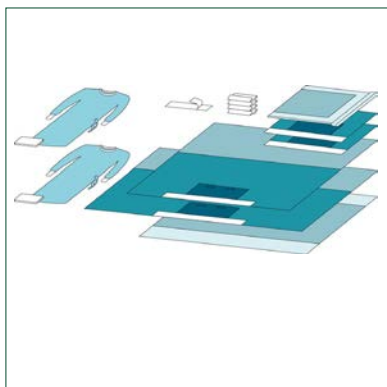


Varenr. usterilt	Antal	Beskrivelse
750105	1	operationskittel L-L + 2 håndklæder 30x40cm, indpakket
996106	1	assistancebordspose 79x145cm, 65x85cm absorberende område
-	4	papirhåndklæde 18x25cm
910200	2	afdækning m. klæb 90x75cm
750111	1	operationskittel XL-L
911500	1	op-tape 9x49cm
967772	1	afdækning m. klæb 175x175cm
967773	1	afdækning m. klæb 240x150cm
90190	1	bordafdækning 150x190cm, 75x190cm absorberende område

UNIVERSALSÆT STANDARD

6/12

699600

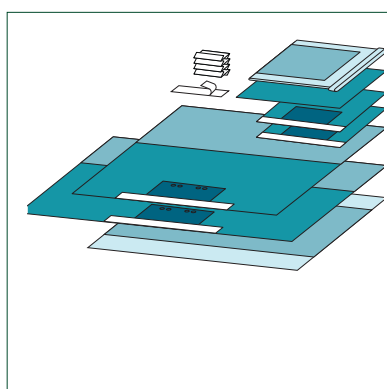


Varenr. usterilt	Antal	Beskrivelse
996106	1	assistancebordspose 79x145cm, 65x85cm absorberende område
910519	1	afdækning 75x90cm
-	4	papirhåndklæde 18x25cm
910198	2	afdækning m. klæb 75x75cm
911500	1	op-tape 9x49cm
967772	1	afdækning m. klæb 175x175cm
967773	1	afdækning m. klæb 240x150cm
90190	1	bordafdækning 150x190cm, 75x190cm absorberende område

UNIVERSALSÆT BARRIER® FLEX


4/8

66010

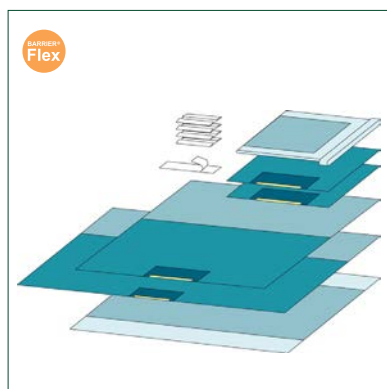


Varenr. usterilt	Antal	Beskrivelse
996106	1	assistancebordspose 79x145cm, 65x85cm absorberende område
76001	2	afdækning m. klæb 90x75cm
-	4	papirhåndklæde 18x25cm
911500	1	op-tape 9x49cm
76002	1	afdækning m. klæb 175x175cm
76003	1	afdækning m. klæb 300x175cm
90190	1	bordafdækning 150x190cm, 75x190cm absorberende område

SLIDSLAGNER FORSTÆRKET

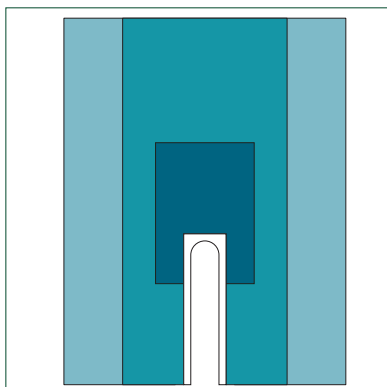


Varenr. steril	Varenr. usteril	Beskrivelse	Inderæske/trp. karton
60502	70502	Slidslagen 200x150cm, slids 7x65cm, absorptionszone 70x100cm	10/40
60503	70503	Slidslagen 200x260cm, slids 7x102cm, absorptionszone 70x100cm	14/28
60504	70504	Slidslagen 200x260cm, slids 20x102cm, absorptionszone 70x100cm	14/28
60506	70506	Slidslagen 200x290cm, slids 7x102cm, absorptionszone 70x100cm	12/24
-	70508	Slidslagen 230x150cm, slids 7x65cm, absorptionszone 70x100cm	
-	70509	Slidslagen 150x260cm, slids 7x65cm, absorptionszone 70x100cm	
-	70511	Slidslagen 230x330cm, slids 20x102cm, absorptionszone 70x160cm	
-	70512	Slidslagen 200x260cm, slids 20x102cm, absorptionszone 70x160cm	
-	70513	Slidslagen 250x290cm, slids 20x102cm, absorptionszone 70x160cm	

SLIDSLAGNER

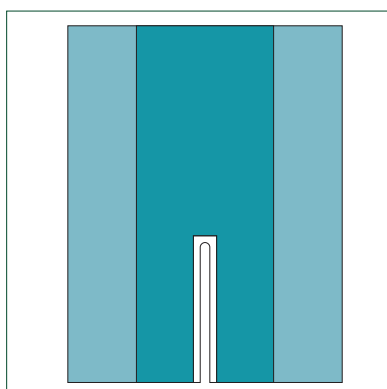


Varenr. steril	Varenr. usteril	Beskrivelse	Inderæske/trp. karton
778900	980789	Slidslagen 150x125cm, slids 7x45cm	15/60
779300	980793	Slidslagen 200x260cm, slids 7x102cm	13/26
-	980776	Slidslagen 150x260cm, slids 7x65cm	
-	950799	Slidslagen 200x260cm, slids 20x102cm	
-	75012	Slidslagen 200x290cm, slids 7x65cm, smal klæb	

AFDÆKNING M. KLÆB BARRIER® FLEX

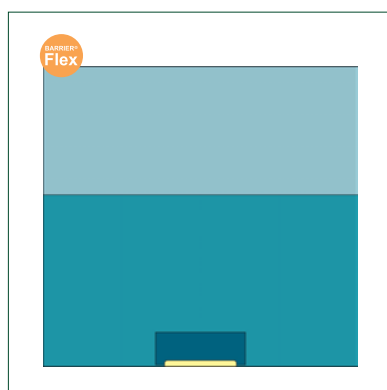


Varenr. steril	Varenr. usteril	Beskrivelse	Inderæske/trp. karton
66002	76002	Afdækning m. klæb 175x175cm, forstærket, BARRIER® Flex	20/40
66003	76003	Afdækning m. klæb 300x175cm, forstærket, BARRIER® Flex	14/28

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AFDÆKNING M. KLÆB




Varenr. steril	Varenr. usteril	Beskrivelse	Inderæske/trp. karton
777400	967774	Afdækning m. klæb 175x150cm	18/36
777600	967776	Afdækning m. klæb 240x150cm	16/32
778200	967882	Afdækning m. klæb 300x175cm	9/18
920496	967775	Afdækning m. klæb 175x175cm	18/36

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AFDÆKNING M. KLÆB




Varenr. steril	Varenr. usterilt	Beskrivelse	Inderæske/trp. karton
63615	2324282	Afdækning m. klæb, 180x150cm, PRIMARY	26/52
63616	2324283	Afdækning m. klæb, 240x150cm, PRIMARY	22/44
63607	2324822	Afdækning m. klæb, 300x180cm, PRIMARY	13/26

AFDÆKNING M. KLÆB - SMAL KLÆB

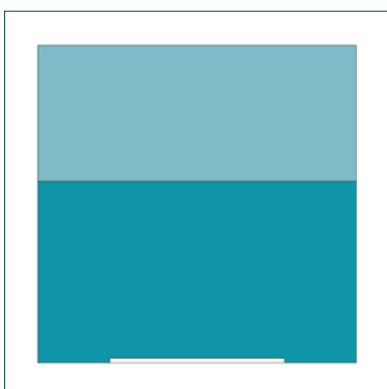


Varenr. steril	Varenr. usterilt	Beskrivelse	Inderæske/trp. karton
777025	917770	Afdækning m. klæb 140x100cm, smal klæb	20/40
777525	917775	Afdækning m. klæb 175x173cm, smal klæb	13/26
-	75013	Afdækning m. klæb 175x200cm, smal klæb	
-	917776	Afdækning m. klæb 240x148cm, smal klæb	

AFDÆKNING M. KLÆB FORSTÆRKET

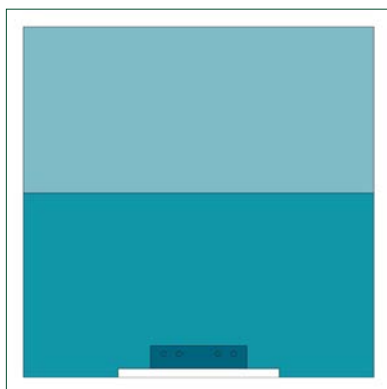


Varenr. steril	Varenr. usterilt	Beskrivelse	Inderæske/trp. karton
66550	967784	Afdækning m. klæb 200x200cm, forstærket	11/22
66540	76540	Afdækning m. klæb 260x175cm, forstærket, fuld klæbebredde	13/26
-	76408	Afdækning m. klæb 200x240cm, forstærket	
-	76409	Afdækning m. klæb 240x175cm, forstærket	
-	76410	Afdækning m. klæb 300x175cm, forstærket	
-	967772	Afdækning m. klæb 175x175cm, forstærket	
-	967773	Afdækning m. klæb 240x150cm, forstærket	
-	967782	Afdækning m. klæb 300x175cm, forstærket	
-	76500	Afdækning m. klæb 300x250cm, forstærket	

AFDÆKNING 3-LAG

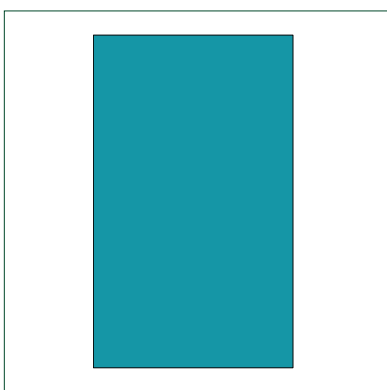


Varenr. steril	Varenr. usterilt	Beskrivelse	Inderæske/trp. karton
777900	910184	Afdækning 90x150cm	30/60
778000	910185	Afdækning 150x175cm	14/28
778100	910186	Afdækning 150x240cm	11/22

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AFDÆKNING 2-LAG




Varenr. sterilt	Varenr. usterilt	Beskrivelse	Inderæske/trp. karton
63816	93911	Afdækning 90x150cm	17/34

AFDÆKNING M. KLÆB BARRIER® FLEX

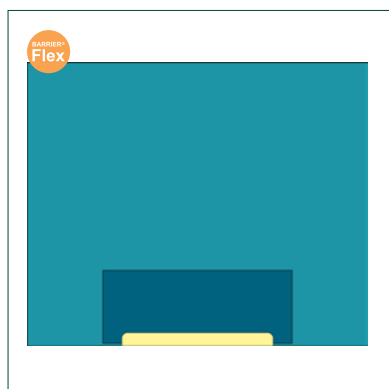


Varenr. sterilt	Varenr. usterilt	Beskrivelse	Inderæske/trp. karton
66001	76001	Afdækning m. klæb 90x75cm, forstærket, BARRIER® Flex	24/48

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AFDÆKNING M. KLÆB




Varenr. sterilt	Varenr. usterilt	Beskrivelse	Inderæske/trp. karton
706300	947063	Afdækning m. klæb 75x50cm	50/300
706400	947064	Afdækning m. klæb 50x50cm	65/390
63813	93906	Afdækning m. klæb 50x50cm, PRIMARY	73/146
706500	910598	Afdækning m. klæb 75x75cm	35/210
63611	93990	Afdækning m. klæb, 75x75 cm, PRIMARY	42/84
706700	947067	Afdækning m. klæb 75x100cm	28/168
63612	93991	Afdækning m. klæb, 100x75cm, PRIMARY	33/66
706900	927069	Afdækning m. klæb 100x100cm	43/86
63614	93992	Afdækning m. klæb, 100x100cm, PRIMARY	70/140
707500	910598	Afdækning m. klæb 2 stk. 75x75cm	34/204
906677	930200	Afdækning m. klæb 90x75cm	32/192
63613	93613	Afdækning m. klæb, 90x75cm, PRIMARY	60/120

AFDÆKNING M. KLÆB FORSTÆRKET

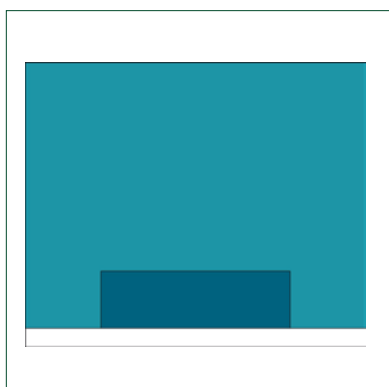


Varenr. sterilt	Varenr. usterilt	Beskrivelse	Inderæske/trp. karton
66520	76520	Afdækning m. klæb 120x100cm, forstærket	22/44
63604	93604	Afdækning m. klæb, 120x100cm, forstærket, PRIMARY	60/120
706800	910200	Afdækning m. klæb 90x75cm, forstærket	45/90
63603	93603	Afdækning m. klæb, 90x75cm, forstærket, PRIMARY	33/66
-	917069	Afdækning m. klæb 100x100cm, forstærket	
-	76510	Afdækning m. klæb 200x100cm, forstærket	

AFDÆKNING M. KLÆB, SMAL KLÆB

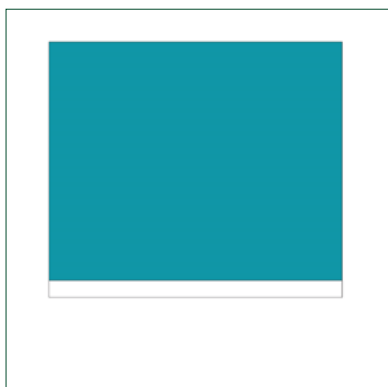


Varenr. steril	Varenr. usterilt	Beskrivelse	Inderæske/ trp. karton
-	917198	Afdækning m. klæb 75x75cm, smal klæb	
-	930201	Afdækning m. klæb 90x73cm, smal klæb	

ABSORBERENDE AFDÆKNING M. KLÆB

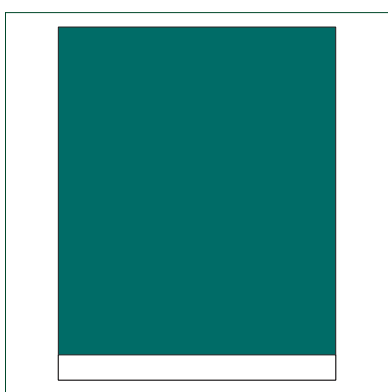


Varenr. steril	Varenr. usterilt	Beskrivelse	Inderæske/ trp. karton
706100	904764	Afdækning m. klæb, meget absorberende 55x70cm	40/80

AFDÆKNING 2-LAG

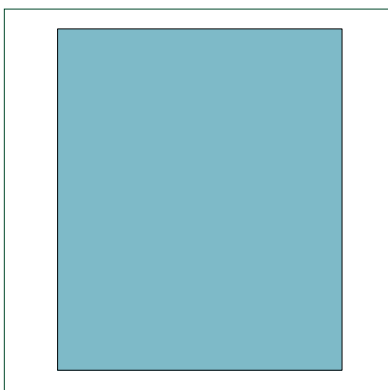


Varenr. steril	Varenr. usterilt	Beskrivelse	Inderæske/ trp. karton
63814	93908	Afdækning, 2-lag 37,5x45cm, PRIMARY	125/250
63815	93909	Afdækning, 2-lag 45x75cm, PRIMARY	70/140
63619	93619	Afdækning, 2-lag 75x90cm, PRIMARY	45/90
63812	93904	Afdækning, 2-lag 90x150cm, PRIMARY	36/72
63810	93902	Afdækning, 2-lag 150x175cm, PRIMARY	19/38
63811	93903	Afdækning, 2-lag 150x245cm, PRIMARY	15/30

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AFDÆKNING 3-LAG




Varenr. steril	Varenr. usterilt	Beskrivelse	Inderæske/ trp. karton
-	910519	Afdækning, 3-lag 75x90cm	

VARIABELT HULSTYKKE M. KLÆB

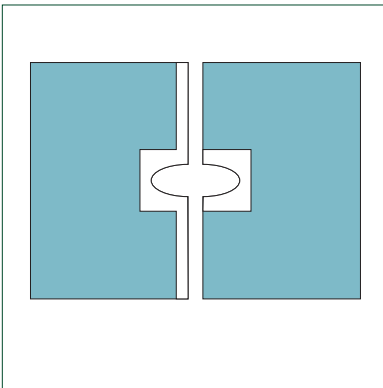


Varenr. steril	Varenr. usterilt	Beskrivelse	Inderæske/ trp. karton
706620	970662	Hulstykke m. klæb, variabelt 50x75cm	42/84
63628	93942	Hulstykke m. klæb, variabelt 75x100cm, Primary	56/112
706630	970663	Hulstykke m. klæb, variabelt 75x100cm	30/60
63629	93943	Hulstykke m. klæb, variabelt 100x150cm, Primary	36/72

HULSTYKKE M. KLÆB

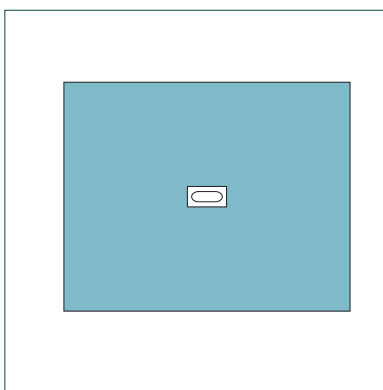


Varenr. steril	Varenr. usterilt	Beskrivelse	Inderæske/ trp. karton
706610	956601	Hulstykke m. klæb 100x125cm, hul 11cm, 45cm fra toppen	20/40
708840	968840	Hulstykke m. klæb 120x150cm, hul 5x7cm	16/32
708850	968850	Hulstykke m. klæb 150x180cm, hul 5x15cm	28/56
708860	968860	Hulstykke m. klæb 200x240cm, hul 12cm	17/34
708870	968870	Hulstykke m. klæb 200x280cm, hul 15cm, 114cm fra toppen	15/30
708880	968880	Hulstykke m. klæb 200x280cm, hul 14x14cm, 124cm fra toppen	14/28
904622		Hulstykke m. klæb 45x75cm, hul 7cm	15/90
63621	93941	Hulstykke m. klæb 75x90cm, hul 6x8cm, PRIMARY	36/72
63623	93986	Hulstykke m. klæb 50x60cm, hul 6x8cm, PRIMARY	90/180
63624	93946	Hulstykke m. klæb 120x150cm, hul 5x7cm, 65cm fra toppen, PRIMARY	30/60

HULSTYKKE M. KLÆB

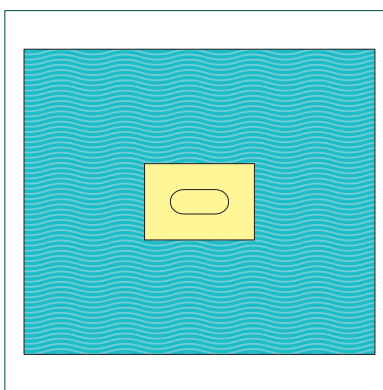


Varenr. steril	Varenr. usterilt	Beskrivelse	Inderæske/ trp. karton
85601	95601	Hulstykke m. klæb 115x100cm, incisionsfilm 19x8cm	20/40

EPIDURALAFDÆKNING M. KLÆB

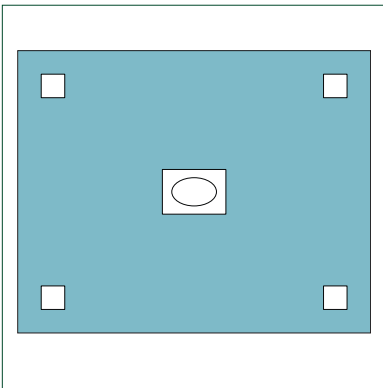

Varenr. steril	Varenr. usterilt	Beskrivelse	Inderæske/trp. karton
906540	904741	Epiduralafdækning m. klæb 60x75cm, hul 6x9,5cm	50/100
63625	93989	Epiduralafdækning m. klæb 75x80cm, hul 6x15cm, PRIMARY	48/96


HULSTYKKE

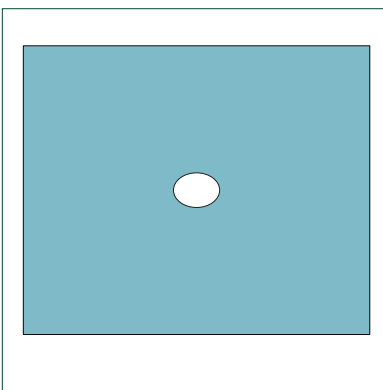

Varenr. steril	Varenr. usterilt	Beskrivelse	Inderæske/trp. karton
906544	904736	Hulstykke 50x60cm, hul 6x8cm	70/140

KNÆARTROSKOPISÆT


5/10 60101

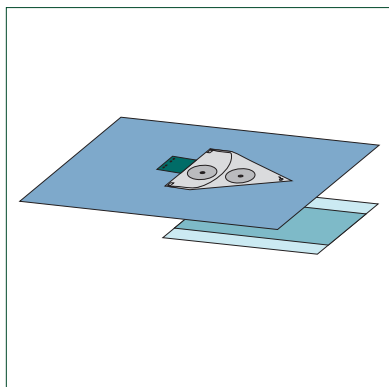

Varenr. usterilt	Antal	Beskrivelse
70104	1	knæartroskopiafdækning 220x320cm, hul 7 og 5cm elastisk
90190	1	bordafdækning 150x190cm, 75x190cm absorberende område

KNÆARTROSKOPISÆT

4/8 60102

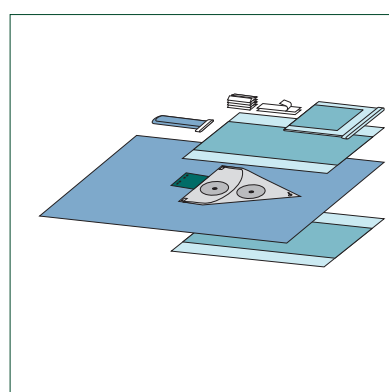


Varenr. usterilt	Antal	Beskrivelse
996106	1	assistancebordspose 79x145cm
-	4	papirhåndklæde 18x25cm
90190	1	bordafdækning 150x190cm, 75x190cm absorberende område
946111	1	stockinette S, 22x75cm
911500	2	op-tape 9x49cm
70104	1	knæartroskopiafdækning 220x320cm, hul 7 og 5cm elastisk
90190	1	bordafdækning 150x190cm, 75x190cm absorberende område

KNÆARTROSKOPIAFDÆKNING




Varenr. steril	Varenr. usterilt	Beskrivelse	Inderæske/trp. karton
60104	70104	Knæartroskopiafdækning 220x320cm, hul 7 og 5cm elastisk	5/10

KNÆARTROSKOPIAFDÆKNING

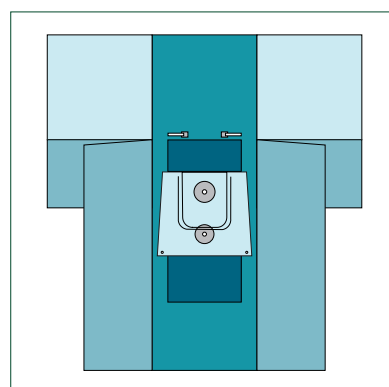

Varenr. steril	Varenr. usterilt	Beskrivelse	Inderæske/trp. karton
60105	70105	Knæartroskopiafdækning 260/330x320cm, hul 7 og 5cm elastisk, indpakket	4/8


KNÆARTROSKOPIPOSE

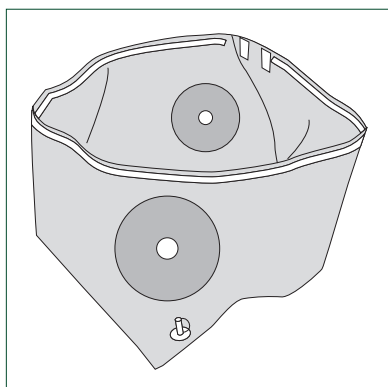

Varenr. usterilt	Varenr. usterilt	Beskrivelse	Inderæske/ trp. karton
69200	79200	Knæartroskopipose 60x120cm, hul 7 og 5cm elastisk	9/18

EKSTREMITETSSÆT


7/14 60202

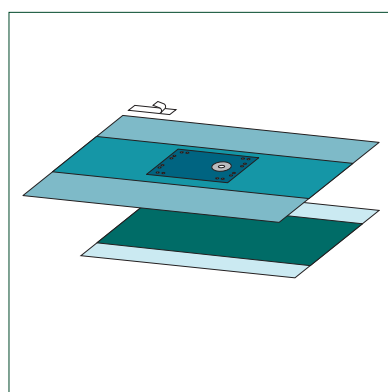

Varenr. usterilt	Antal	Beskrivelse
911500	1	op-tape 9x49cm
70213	1	ekstremitetsafdækning 230x315cm, hul 7cm elastisk
95190	1	forstærket bordafdækning 150x190cm, 75x190cm absorberende område

EKSTREMITETSSÆT


5/10 60208

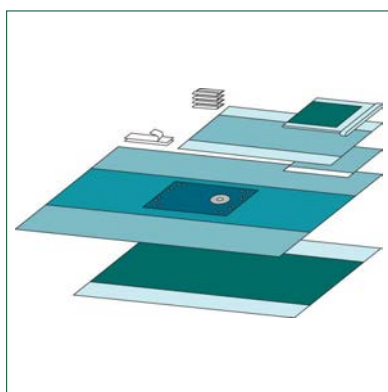

Varenr. usterilt	Antal	Beskrivelse
996109	1	forstærket assistancebordspose 79x145cm, 65x85cm absorberende område
-	4	papirhåndklæde 18x25cm
90190	1	bordafdækning 150x190cm, 75x190cm absorberende område
910598	1	afdækning m. klæb 75x75cm
911500	2	op-tape 9x49cm
70213	1	ekstremitetsafdækning 230x315cm, hul 7cm elastisk
95190	1	forstærket bordafdækning 150x190cm, 75x190cm absorberende område


EKSTREMITETSSÆT

5/10 60209

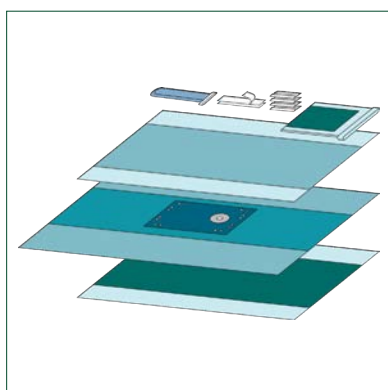


Varenr. usterilt	Antal	Beskrivelse
996109	1	forstærket assistancebordspose 79x145cm, 65x85cm absorberende område
-	4	papirhåndklæde 18x25cm
90190	1	bordafdækning 150x190cm, 75x190cm absorberende område
946111	1	stockinette, S, 22x75cm
911500	2	op-tape 9x49cm
70213	1	ekstremitetsafdækning 230x315cm, hul 7cm elastisk
95190	1	forstærket bordafdækning 150x190cm, 75x190cm absorberende område

EKSTREMITETSAFDÆKNING

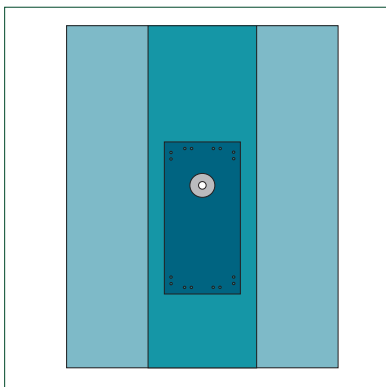

Varenr. steril	Varenr. usterilt	Beskrivelse	Inderæske/trp. karton
60211	70211	Ekstremitetsafdækning 200x300cm, hul 7cm elastisk	11/22
60213	70213	Ekstremitetsafdækning 230x315cm, hul 7cm elastisk	10/20
	70210	Ekstremitetsafdækning 250x315cm, hul 7 cm elastisk	


EKSTREMITETSAFDÆKNING

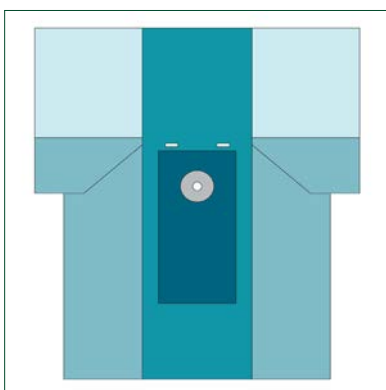

Varenr. steril	Varenr. usterilt	Beskrivelse	Inderæske/trp. karton
60214	70214	Ekstremitetsafdækning 200/300x320cm, hul 7cm elastisk	8/16

EKSTREMITETSSÆT, BILATERAL FOD


5/10 60300

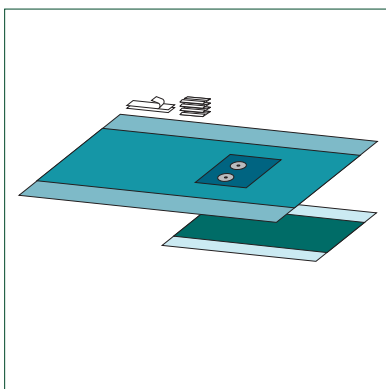

Varenr. usterilt	Antal	Beskrivelse
-	4	papirhåndklæde 18x25cm
911500	2	op-tape 9x49cm
70311	1	bilateral fodafdækning 200x300cm, huller 3,5cm elastiske
95190	1	forstærket bordafdækning 150x190cm, 75x190cm absorberende område

EKSTREMITETSSÆT, BILATERAL BEN


5/10 60301

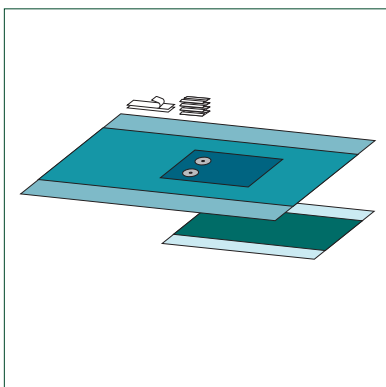

Varenr. usterilt	Antal	Beskrivelse
-	4	papirhåndklæde 18x25cm
911500	2	op-tape 9x49cm
70313	1	bilateral benafdækning 200x300cm, huller 7cm elastiske
95190	1	forstærket bordafdækning 150x190cm, 75x190cm absorberende område

SKULDERSÆT


4/8 60001

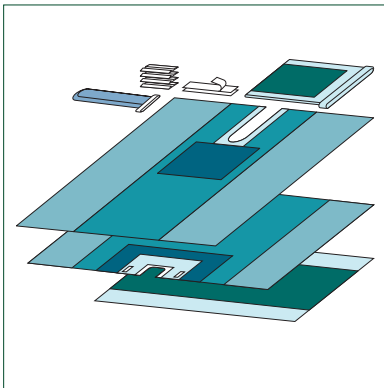

Varenr. usterilt	Antal	Beskrivelse
996109	1	forstærket assistancebordspose 79x145cm, 65x85cm absorberende område
-	4	papirhåndklæde 18x25cm
70007	1	nedre skulder slidslagen 230x295cm, slids 10x70cm
946111	1	stockinette, S, 22x75cm
911500	2	op-tape 9x49cm
70005	1	øvre skulder slidslagen 240x170cm, slids 15x45cm
95190	1	forstærket bordafdækning 150x190cm, 75x190cm absorberende område

SKULDERSÆT M. POSE


4/8 60002

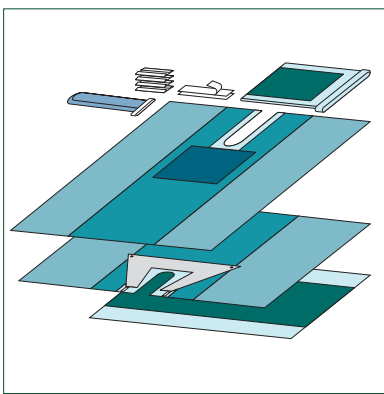

Varenr. usterilt	Antal	Beskrivelse
996109	1	forstærket assistancebordspose 79x145cm, 65x85cm absorberende område
-	4	papirhåndklæde 18x25cm
70007	1	nedre skulder slidslagen 230x295cm, slids 10x70cm
946111	1	stockinette, S, 22x75cm
911500	2	op-tape 9x49cm
70006	1	øvre skulder slidslagen m. pose 240x170cm, slids 15x45cm
95190	1	forstærket bordafdækning 150x190cm, 75x190cm absorberende område


SKULDERSÆT

4/8 60003

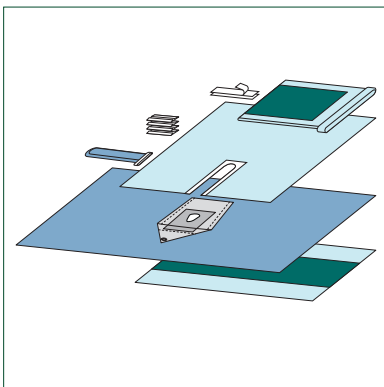

Varenr. usterilt	Antal	Beskrivelse
996109	1	forstærket assistancebordspose 79x145cm, 65x85cm absorberende område
-	4	papirhåndklæde 18x25cm
9475	1	slidslagen (plast) 150x193cm, slids 15x61cm
946111	1	stockinette, S, 22x75cm
911500	2	op-tape 9x49cm
70004	1	beach chair skulderafdækning 400x220cm, hul 10x10cm elastisk
95190	1	forstærket bordafdækning 150x190cm, 75x190cm absorberende område


BEACH CHAIR SKULDERAFDÆKNING

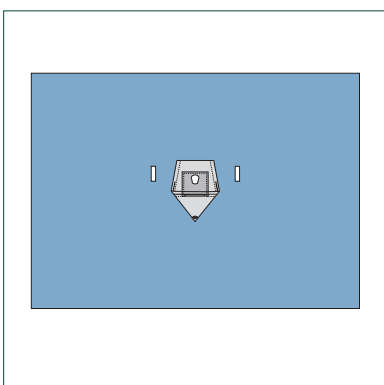

Varenr. steril	Varenr. usterilt	Beskrivelse	Inderæske/ trp. karton
60004	70004	Beach chair skulderafdækning 400x220cm, hul 10x10cm elastisk, indpakket	5/10

HÅND-/FODSÆT


7/14 60303

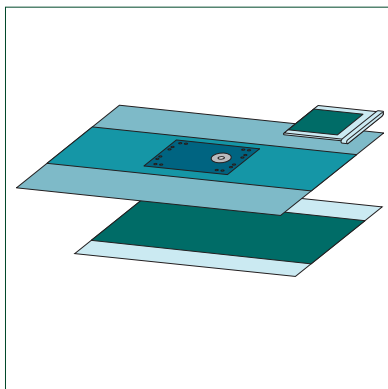

Varenr. usterilt	Antal	Beskrivelse
996109	1	forstærket assistancebordspose 79x145cm, 65x85cm absorberende område
70309	1	hånd/fod afdækning 230x315cm, hul 3,5cm elastisk
95190	1	forstærket bordafdækning 150x190cm, 75x190cm absorberende område

HÅNDSÆT


6/12 60305

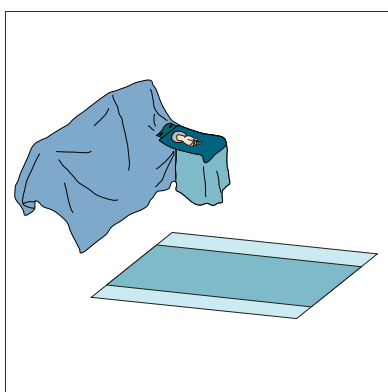

Varenr. usterilt	Antal	Beskrivelse
70310	1	håndafdækning 150/370x280cm, hul 3,5cm elastisk
90190	1	bordafdækning 150x190cm, 75x190cm absorberende område


HÅNDSÆT

5/10 60306

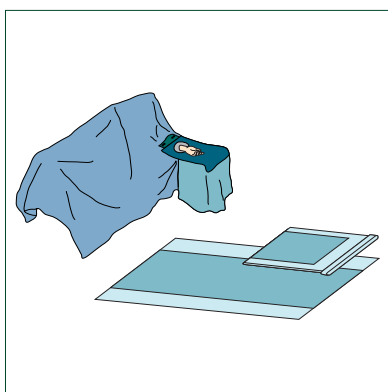


Varenr. usterilt	Antal	Beskrivelse
996106	1	assistancebordspose 79x145cm
70310	1	håndafdækning 150/370x280cm, hul 3,5cm elastisk
90190	1	bordafdækning 150x190cm, 75x190cm absorberende område

HÅND-/FODAFDÆKNING

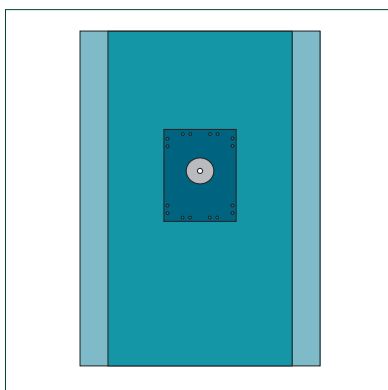

Varenr. sterilt	Varenr. usterilt	Beskrivelse	Inderæske/ trp. karton
60308	70308	Hånd-/fodafdækning 150x180cm, hul 3,5cm elastisk	13/52
60309	70309	Hånd-/fodafdækning 230x315cm, hul 3,5cm elastisk	11/22


HÅNDAFDÆKNING

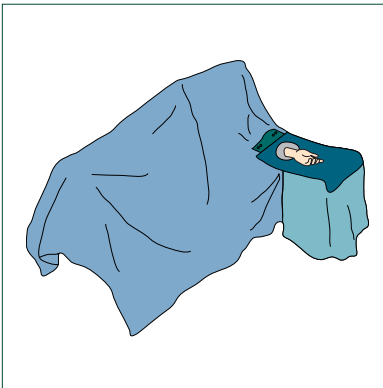

Varenr. steril	Varenr. usterilt	Beskrivelse	Inderæske/ trp. karton
60310	70310	Håndafdækning 150/370x280cm, hul 3,5cm elastisk	7/14
-	70312	Håndafdækning 150/270x280cm, hul 3,5cm elastisk	

HOFTESÆT M/DISLOKATIONSPOSER


3/6 60602

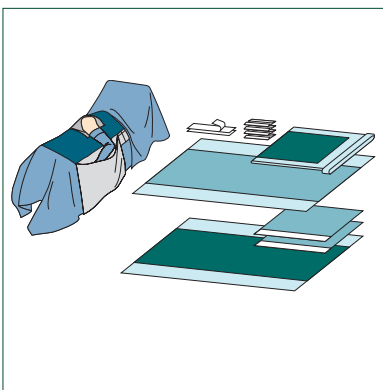

Varenr. usterilt	Antal	Beskrivelse
996109	1	forstærket assistancebordspose 79x145cm, 65x85cm absorberende område
-	4	papirhåndklæde 18x25cm
90190	1	bordafdækning 150x190cm, 75x190cm absorberende område
910598	2	afdækning m. klæb 75x75cm
946112	1	stockinette, L, 32x120cm
911500	2	op-tape 9x49cm
70601	1	hofteafdækning m/dislokationsposer 220/300x340cm, hul 18x22cm elastisk
95190	1	forstærket bordafdækning 150x190cm, 75x190cm absorberende område

HOFTESÆT


4/8 60604

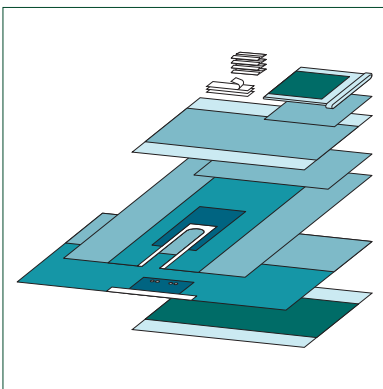

Varenr. usterilt	Antal	Beskrivelse
996109	1	forstærket assistancebordspose 79x145cm, 65x85cm absorberende område
-	4	papirhåndklæde 18x25cm
968005	1	afdækning 75x90cm
90190	1	bordafdækning 150x190cm, 75x190cm absorberende område
910184	1	afdækning 90x150cm
911500	3	op-tape 9x49cm
70504	1	slidslagen 200x260cm, slids 20x102cm
76410	1	afdækning m. klæb 300x175cm
95190	1	forstærket bordafdækning 150x190cm, 75x190cm absorberende område


HOFTESÆT

4/8 60608

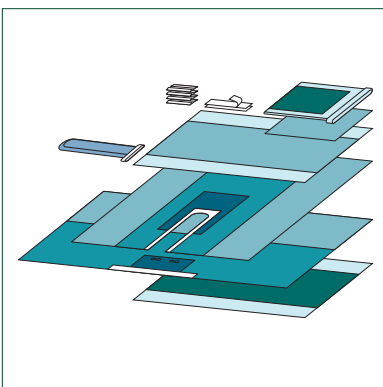


Varenr. usterilt	Antal	Beskrivelse
996109	1	forstærket assistancebordspose 79x145cm, 65x85cm absorberende område
-	4	papirhåndklæde 18x25cm
968005	1	afdækning 75x90cm
90190	1	bordafdækning 150x190cm, 75x190cm absorberende område
946112	1	stockinette, L, 32x120cm
911500	2	op-tape 9x49cm
70504	1	slidslagen 200x260cm, slids 20x102cm
76410	1	afdækning m. klæb 300x175cm
95190	1	forstærket bordafdækning 150x190cm, 75x190cm absorberende område

HOFTEAFDÆKNING

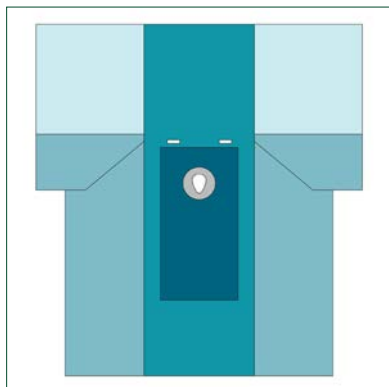

Varenr. sterilt	Varenr. usterilt	Beskrivelse	Inderæske/trp. karton
60600	70600	Hofteafdækning 230/300x330cm, hul 18x22cm elastisk	7/14


HOFTEAFDÆKNING M/DISLOKATIONSPOSER

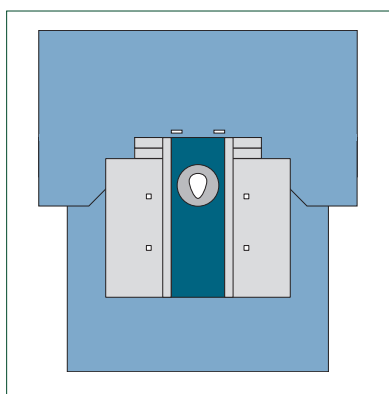

Varenr. sterilt	Varenr. usterilt	Beskrivelse	Inderæske/trp. karton
60601	70601	Hofteafdækning m/dislokationsposer 220/300x340cm, hul 18x22cm elastisk, indpakket	4/8

VERTIKALSÆT


5/10 903016

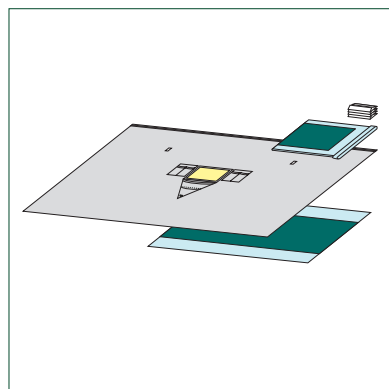

Varenr. usterilt	Antal	Beskrivelse
996109	1	forstærket assistancebordspose 79x145cm, 65x85cm absorberende område
-	4	papirhåndklæde 18x25cm
815301	1	vertikallagen 330x240cm, incisionsfilm 40x30cm
95190	1	forstærket bordafdækning 150x190cm, 75x190cm absorberende område


VERTIKALSÆT

6/12 903026

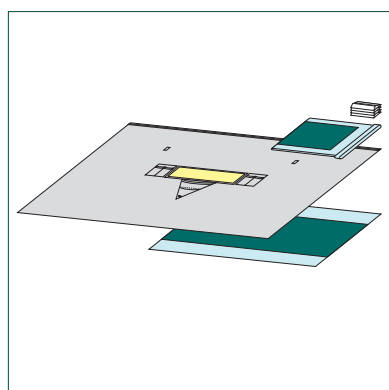


Varenr. usterilt	Antal	Beskrivelse
996109	1	forstærket assistancebordspose 79x145cm, 65x85cm absorberende område
-	4	papirhåndklæde 18x25cm
815300	1	vertikallagen 330x240cm, incisionsfilm 86x25cm
95190	1	forstærket bordafdækning 150x190cm, 75x190cm absorberende område

VERTIKALLAGEN

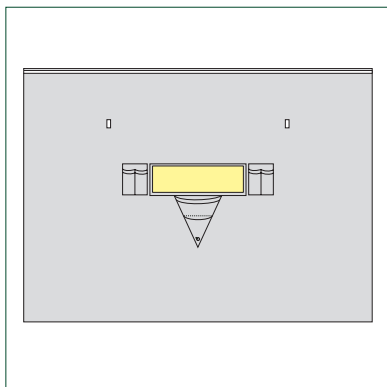


Varenr. sterilt	Varenr. usterilt	Beskrivelse	Inderæske/ trp. karton
826010	815300	Vertikallagen 330x240cm, incisionsfilm 86x25cm	7/14

VERTIKALLAGEN

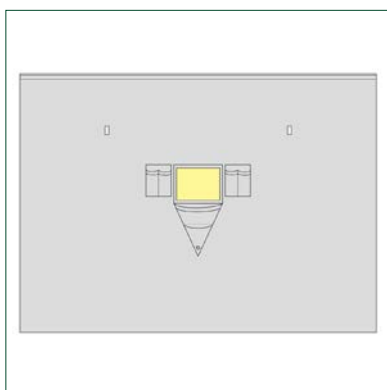

Varenr. sterilt	Varenr. usterilt	Beskrivelse	Inderæske/ trp. karton
826020	815301	Vertikallagen 330x240cm, incisionsfilm 40x30cm	8/16


VERTIKALLAGEN

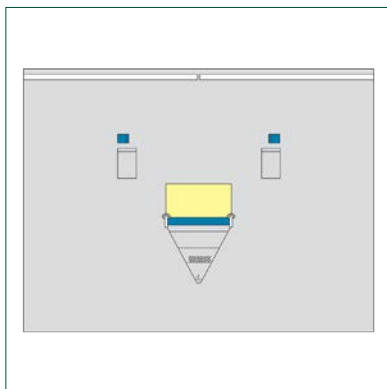

Varenr. sterilt	Varenr. usterilt	Beskrivelse	Inderæske/ trp. karton
8000527	80008032	Vertikallagen 320x240cm, incisionsfilm 60x30cm	8/16


SPINALSÆT

6/12 **80005471**

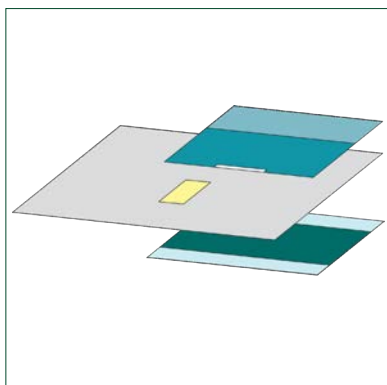


Varenr. usterilt	Antal	Beskrivelse
967774	1	afdækning m. klæb 175x150cm
80008030	1	spinalafdækning 240x320cm, incisionsfilm 30x60cm
95190	1	forstærket bordafdækning 150x190cm, 75x190cm absorberende område

ØVRE SKULDESLIDSLAGEN

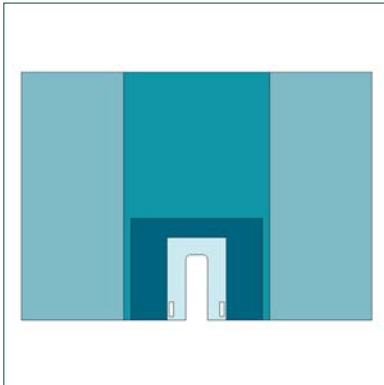


Varenr. steril	Varenr. usterilt	Beskrivelse	Inderæske/ trp. karton
-	70005	Øvre skulderslidslagen 240x170cm, slids 15x45cm	

ØVRE SKULDESLIDSLAGEN M. POSE

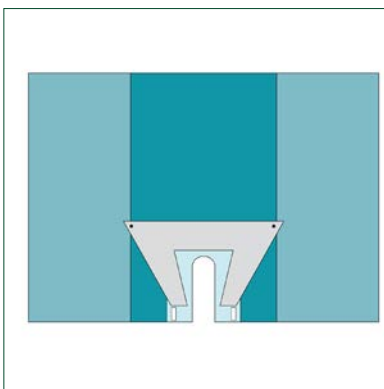

Varenr. steril	Varenr. usterilt	Beskrivelse	Inderæske/ trp. karton
-	70006	Øvre skulderslidslagen m. pose 240x170cm, slids 15x45cm	


NEDRE SKULDESLIDSLAGEN

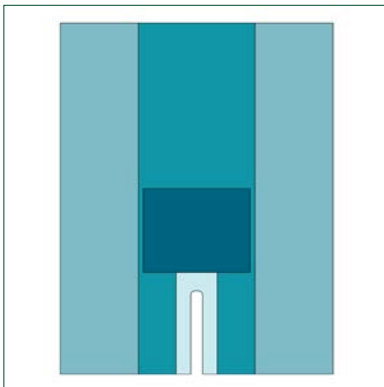

Varenr. steril	Varenr. usterilt	Beskrivelse	Inderæske/ trp. karton
-	70007	Nedre skulderslidslagen 230x295cm, slids 10x70cm	

SLIDSLAGEN SÆT


5/10 60620

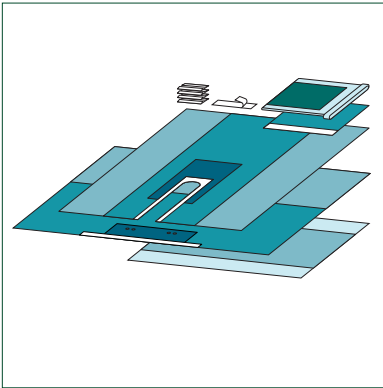

Varenr. usterilt	Antal	Beskrivelse
996109	1	forstærket assistancebordspose 79x145cm, 65x85cm absorberende område
-	4	papirhåndklæde 18x25cm
911500	1	op-tape 9x49cm
930200	1	afdækning m. klæb 90x75cm
70504	1	slidslagen 200x260cm, slids 20x102cm
76409	1	afdækning m. klæb 240x175cm
90190	1	bordafdækning 150x190cm, 75x190cm absorberende område


VARIKØST VENESÆT

6/12 61400

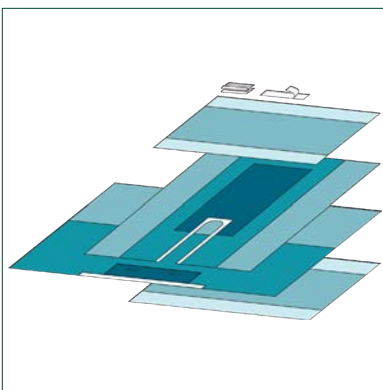


Varenr. usterilt	Antal	Beskrivelse
-	2	papirhåndklæde 18x25cm
90100	1	bordafdækning 100x150cm
911500	1	op-tape 9x49cm
70512	1	slidslagen 200x260cm, slids 20x102cm, absorb. 70x160cm
76409	1	afdækning m. klæb 240x175cm
90190	1	bordafdækning 150x190cm, 75x190cm absorberende område

PÆDIATRIAFDÆKNING

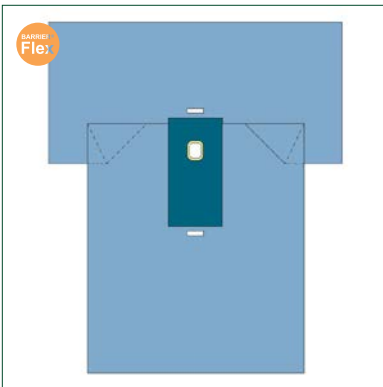


Varenr. sterilt	Varenr. usterilt	Beskrivelse	Inderæske/ trp. karton
61310	71310	Pædiatriafdækning 200/270x320cm, hul 10x14cm	8/16

LAPAROTOMIAFDÆKNING

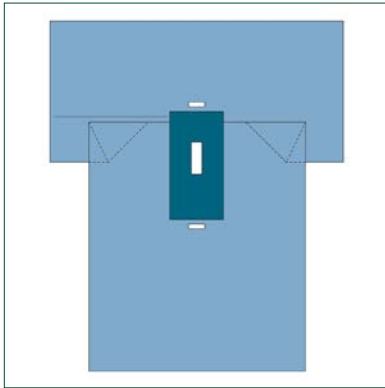


Varenr. sterilt	Varenr. usterilt	Beskrivelse	Inderæske/ trp. karton
61320	71320	Laparotomiafdækning 200/270x320, hul 10x30cm	10/20

LAPAROTOMIAFDÆKNING

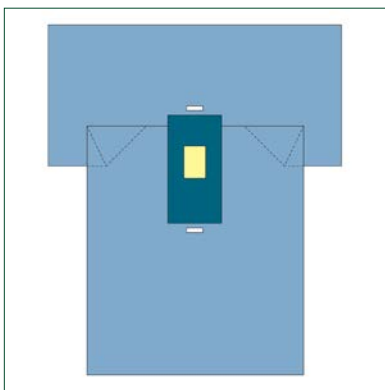


Varenr. sterilt	Varenr. usterilt	Beskrivelse	Inderæske/ trp. karton
61330	71330	Laparotomiafdækning 200/270x320, incisionsfilm 23x36cm	8/16

LAPAROTOMIAFDÆKNING

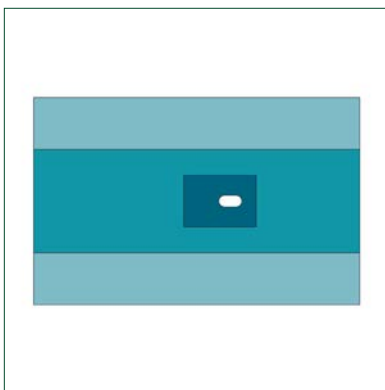


Varenr. sterilt	Varenr. usterilt	Beskrivelse	Inderæske/ trp. karton
825000	980250	Laparotomiafdækning 200x315cm, 11x22cm, absorb. 70x70cm	12/24

LAPAROTOMIAFDÆKNING M. POSER

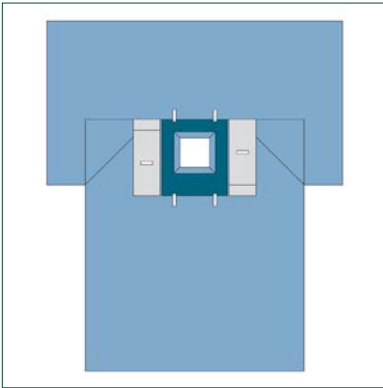

Varenr. steril	Varenr. usterilt	Beskrivelse	Inderæske/ trp. karton
-	71369	Laparotomiafdækning m. poser 200/270x320cm, variabelt hul 30x30cm	

PERINEAL AFDÆKNING

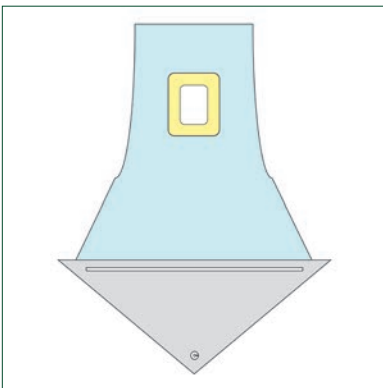


Varenr. steril	Varenr. usterilt	Beskrivelse	Inderæske/ trp. karton
-	988522	Perineal afdækning 50x84cm m. pose, hul m. klæb 7x10cm	

LAPAROSKOPISÆT

5/10

61040

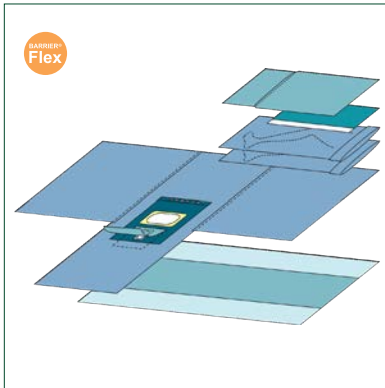

Varenr. usterilt	Antal	Beskrivelse
972890	1	stykke m/opsamlingspose 75x100cm
947063	1	afdækning m. klæb 75,50cm
9855	2	XL litotomi benpose 75x150cm
71040	1	gynækologjafdækning abdo-perineal 75/250x245cm, hul m. klæb 25x18cm, perinealt hul 6x15cm
90210	1	bordafdækning 150x210cm, 75x210cm absorberende område

LAPAROSKOPISÆT BARIATRI

4/8

61450




Varenr. usterilt	Antal	Beskrivelse
996106	1	assistancebordspose 79x145cm, 65x85cm absorberende område
-	4	papirhåndklæde 18x25
911500	1	op-tape 9x49cm
824098	2	slangeholder velcro 2,5x30cm
815332	1	kameraovertræk m. perforeret spids 14x250cm
975880	2	instrumentpose 25x40cm
70550	1	laparoskopi afdækning med benposer 280/230/270x335cm, hul m. klæb 32x42cm
90190	1	bordafdækning 150x190cm, 75x190cm absorberende område

LAPAROSKOPISÆT ABDO-PERINEAL

5/10

694240

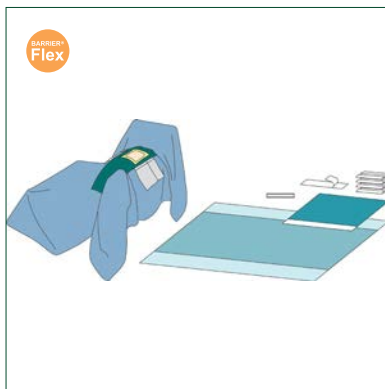


Varenr. usterilt	Antal	Beskrivelse
-	4	papirhåndklæde 18x25cm
911500	1	op-tape 9x49cm
824098	1	slangeholder velcro 2,5x30cm
910598	1	afdækning m. klæb 75x75cm
944200	1	laparoskopi afdækning abdo-perineal 250/175/270x260cm, hul m. klæb 25x30cm, perinealt hul 13x24cm
90190	1	bordafdækning 150x190cm, 75x190cm absorberende område

LAPAROSKOPISÆT ABDO-PERINEAL

4/8

694241

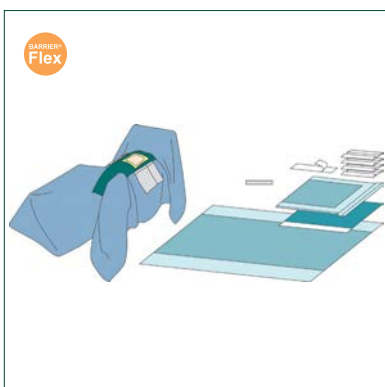


Varenr. usterilt	Antal	Beskrivelse
996106	1	assistancebordspose 79x145cm, 65x85cm absorberende område
-	4	papirhåndklæde 18x25cm
911500	1	op-tape 9x49cm
824098	1	slangeholder velcro 2,5x30cm
910598	1	afdækning m. klæb 75x75cm
944200	1	laparoskopi afdækning abdo-perineal 250/175/270x260cm, hul m. klæb 25x30cm, perinealt hul 13x24cm
90190	1	bordafdækning 150x190cm, 75x190cm absorberende område

LAPAROSKOPISÆT MED BENPOSER

4/8

694245

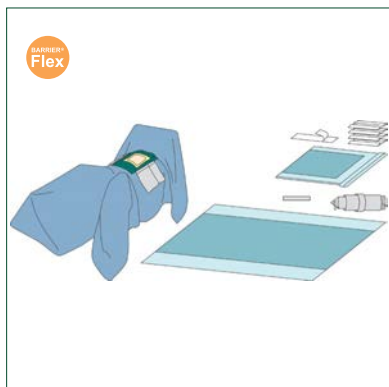


Varenr. usterilt	Antal	Beskrivelse
996106	1	assistancebordspose 79x145cm, 65x85cm absorberende område
-	4	papirhåndklæde 18x25cm
911500	1	op-tape 9x49cm
824098	1	slangeholder velcro 2,5x30cm
815332	1	kameraovertræk m. perforeret spids 14x250cm
944205	1	laparoskopi afdækning med benposer 250/175/270x260cm, hul m. klæb 25x30cm
90190	1	bordafdækning 150x190cm, 75x190cm absorberende område

LAPAROSKOPISÆT

5/10

694265

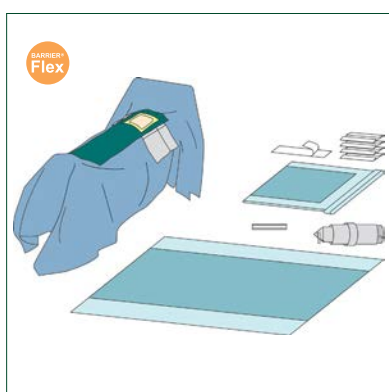


Varenr. usterilt	Antal	Beskrivelse
996106	1	assistancebordspose 79x145cm, 65x85cm absorberende område
-	4	papirhåndklæde 18x25cm
911500	1	op-tape 9x49cm
824098	1	slangeholder velcro 2,5x30cm
815332	1	kameraovertræk m. perforeret spids 14x250cm
954225	1	laparoskopi afdækning 175/250x360cm, hul m. klæb 25x30cm
90190	1	bordafdækning 150x190cm, 75x190cm absorberende område

GYN / LAPAROSKOPISÆT

5/10

696600

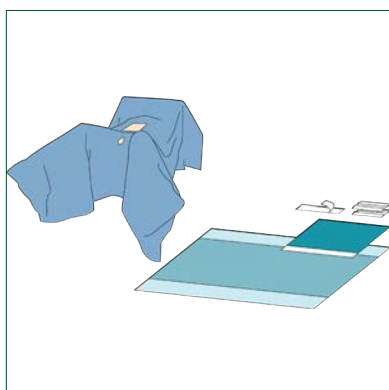


Varenr. usterilt	Antal	Beskrivelse
-	2	papirhåndklæde 18x25cm
911500	1	op-tape 9x49cm
910598	1	afdækning m. klæb 75x75cm
956966	1	laparoskopi afdækning abdo-perineal 250/270x270cm, hul med klæb 26x20cm, perinealt hul 9x13cm (smal klæb under hullet)
90190	1	bordafdækning 150x190cm, 75x190cm absorberende område

GYN / LAPAROSKOPISÆT


5/10

903020

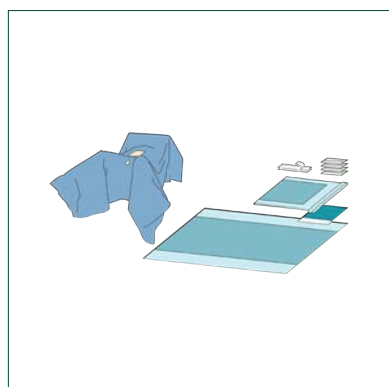


Varenr. usterilt	Antal	Beskrivelse
996106	1	assistancebordspose 79x145cm, 65x85cm absorberende område
-	4	papirhåndklæde 18x25cm
911500	2	op-tape 9x49cm
947064	1	afdækning m. klæb 50x50cm
956966	1	laparoskopi afdækning abdo-perineal 250/270x270cm, hul m. klæb 26x20cm, perinealt hul 9x13 cm (smal klæb under hullet)
90190	1	bordafdækning 150x190cm, 75x190cm absorberende område

LAPAROSKOPI AFDÆKNING

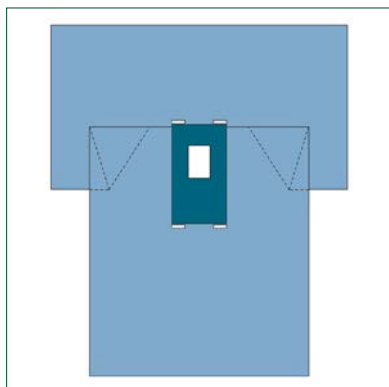

Varenr. sterilt	Varenr. usterilt	Beskrivelse	Inderæske/ trp. karton
61360	71360	Laparoskopi afdækning 200/270x320cm, hul 20x30cm	10/20

LAPAROSKOPI AFDÆKNING

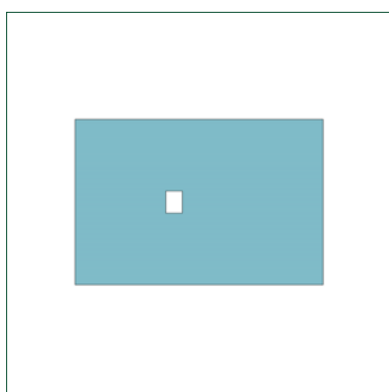

Varenr. sterilt	Varenr. usterilt	Beskrivelse	Inderæske/ trp. karton
903005	900078	Laparoskopi afdækning 200x300cm, hul 26x20 cm	12/24

LAPAROSKOPI AFDÆKNING ABDO-PERINEAL



Varenr. sterilt	Varenr. usterilt	Beskrivelse	Inderæske/ trp. karton
-	944200	Laparoskopi afdækning abdo-perineal 250/175/270x260cm, hul med klæb 25x30cm, perinealt hul 13x24cm	

LAPAROSKOPI AFDÆKNING ABDO-PERINEAL



Varenr. sterilt	Varenr. usterilt	Beskrivelse	Inderæske/ trp. karton
-	956967	Laparoskopi afdækning abdo-perineal 250/200/300x285cm, hul med klæb 25x18cm og perinealt hul med klæb 10x13cm (flap til at dække det perineale område), integrerede, transparente benposer	

LAPAROSKOPI AFDÆKNING ABDO-PERINEAL



Varenr. sterilt	Varenr. usterilt	Beskrivelse	Inderæske/trp. karton
-	944201	Laparoskopi afdækning abdo-perineal 250/200/300x285cm, hul m. klæb 28x30cm og perinealt hul med klæb 10x13cm (flap til at dække det perineale område) Integrerede, transparente benposer	
-	944216	Laparoskopi afdækning abdo-perineal 300/200/300x375cm, hul m. klæb 34x35cm og perinealt hul med klæb 10x13cm (flap til at dække det perineale område) Integrerede, transparente benposer Transparent anæstesisestykke	

LAPAROSKOPI AFDÆKNING MED BENPOSER



Varenr. sterilt	Varenr. usterilt	Beskrivelse	Inderæske/trp. karton
-	944205	Laparoskopi afdækning med benposer 250/175/270x260cm, hul m. klæb 25x30cm	

LAPAROSKOPI AFDÆKNING MED TRANSPARENT BENPOSER



Varenr. sterilt	Varenr. usterilt	Beskrivelse	Inderæske/trp. karton
-	944206	Laparoskopi afdækning med transparente benposer 250/200/300x285cm, hul m. klæb 28x30cm	

LAPAROSKOPI AFDÆKNING ABDO-PERINEAL



Varenr. sterilt	Varenr. usterilt	Beskrivelse	Inderæske/trp. karton
-	944210	Laparoskopi afdækning abdo-perineal 300/200/270x295cm, hul med klæb 25x30cm, perinealt hul 13x24cm	

LAPAROSKOPI AFDÆKNING ABDO-PERINEAL




Varenr. sterilt	Varenr. usterilt	Beskrivelse	Inderæske/trp. karton
-	944215	Laparoskopi afdækning abdo-perineal 300/200/270x355cm, hul med klæb 25x30cm, perinealt hul 15x24cm, transparent anæstesisykke	

LAPAROSKOPI AFDÆKNING ABDO-PERINEAL



Varenr. sterilt	Varenr. usterilt	Beskrivelse	Inderæske/trp. karton
-	944216	Laparoskopi afdækning abdo-perineal 300/200/300x375cm, hul med klæb 34x35cm, perinealt hul 10x13cm, transparente benposer og transparent anæstesisykke	

LAPAROSKOPI AFDÆKNING ABDO-PERINEAL

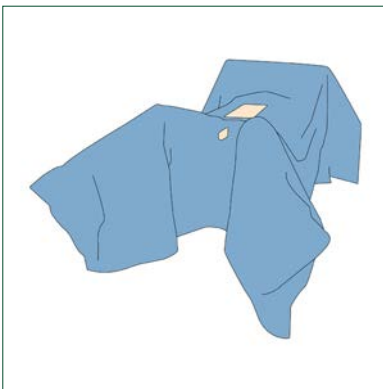

Varenr. sterilt	Varenr. usterilt	Beskrivelse	Inderæske/trp. karton
-	956966	Laparoskopi afdækning abdo-perineal 250/270x270cm, hul med klæb 26x20cm, perinealt hul 9x13cm (smal klæb under hullet)	

LAPAROSKOPI AFDÆKNING



Varenr. sterilt	Varenr. usterilt	Beskrivelse	Inderæske/trp. karton
-	954225	Laparoskopi afdækning 175/250x360cm, hul m. klæb 25x30cm	


LAPAROSKOPI AFDÆKNING



Varenr. sterilt	Varenr. usterilt	Beskrivelse	Inderæske/trp. karton
-	954226	Laparoskopi afdækning 200/250x365cm, hul m. klæb 28x30cm	

AKUT THORAX SÆT


3/6 669600

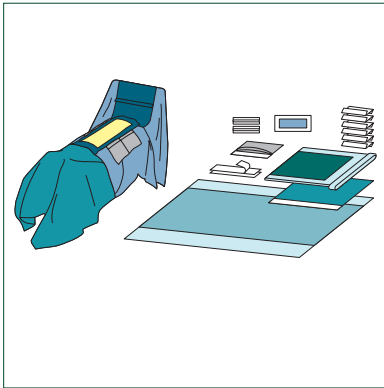

Varenr. usterilt	Antal	Beskrivelse
996109	1	forstærket assistancebordspose 79x145cm, 65x85cm absorberende område
-	1	perineal afdækning 20x42cm
-	6	papirhåndklæde 18x25cm
824098	2	slangeholder velcro 2,5x30cm
910598	1	afdækning m. klæb 75x75cm
-	1	sug- og diatermpose 33x38cm
911500	2	op-tape 9x49cm
966960	1	akut thorax afdækning 200/300x350cm, incisionsområde 37x65cm
90240	1	bordafdækning 150x240cm, 75x240cm absorberende område

KARDIOVASKULÆRT SÆT


3/6 694640

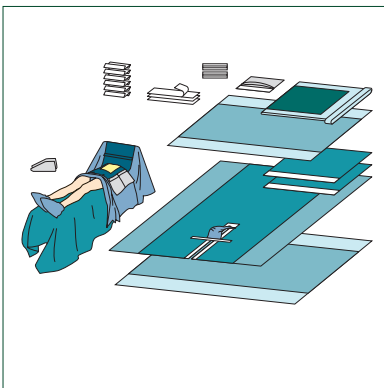

Varenr. usterilt	Antal	Beskrivelse
996109	1	forstærket assistancebordspose 79x145cm, 65x85cm absorberende område
-	6	papirhåndklæde 18x25cm
90190	1	bordafdækning 150x190cm, 75x190cm absorberende område
-	1	defibrillator pose 33x38cm
824098	2	slangeholder velcro 2,5x30cm
911500	3	op-tape 9x49cm
941005	2	fodafdækning grøn, 36x28cm
991005	2	fodafdækning transparent
910598	2	afdækning m. klæb 75x75cm
988795	1	nedre vaskulær afdækning 200x260cm, slids 20x102cm
966946	1	thorax afdækning 200/300x330cm, incisionsfilm 32x40cm
90240	1	bordafdækning 150x240cm, 75x240cm absorberende område


KARDIOVASKULÆRT SÆT

3/6 694700

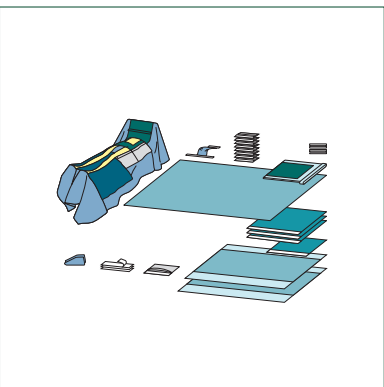


Varenr. usterilt	Antal	Beskrivelse
996109	1	forstærket assistancebordspose 79x145cm, 65x85cm absorberende område
-	8	papirhåndklæde 18x25cm
824098	2	slangeholder velcro 2,5x30cm
911500	3	op-tape 9x49cm
968088	1	bordafdækning 200x280cm, absorberende
90190	1	bordafdækning 150x190cm, 75x190cm absorberende
941005	2	fodafdækning grøn, 36x28cm
978001	1	perineal afdækning, 20cm/47x55cm
910598	1	afdækning m. klæb 75x75cm
927069	3	afdækning m. klæb 100x100cm
-	1	defibrillator pose, 38x33cm
969476	1	kardiovaskulær afdækning, 200/300x350cm, inc. 32x40 cm (1), inc. 17x107cm (2), forstærk. m. poser
90240	1	bordafdækning 150x240cm, 75x240cm absorberende

THORAX AFDÆKNING

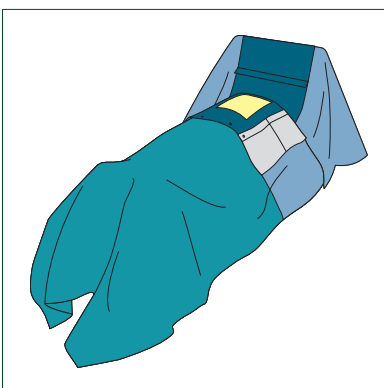


Varenr. steril	Varenr. usterilt	Beskrivelse	Inderæske/ trp. karton
824600	966946	Thorax afdækning 200/300x330cm, incisionsfilm 32x40cm	6/12

THORAX AFDÆKNING

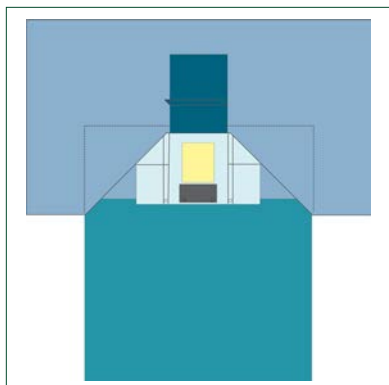


Varenr. sterilt	Varenr. usterilt	Beskrivelse	Inderæske/trp. karton
-	966948	Thorax afdækning 175/350x350cm incisionsfilm 32x40 cm	

THORAX AFDÆKNING

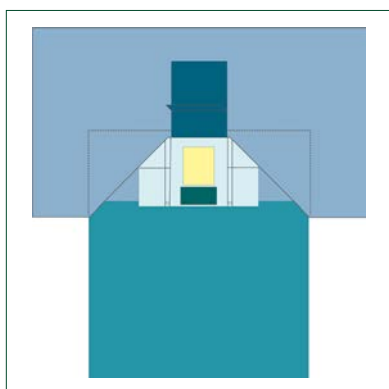


Varenr. sterilt	Varenr. usterilt	Beskrivelse	Inderæske/trp. karton
-	966949	Thorax afdækning 175/300x350cm, incisionsfilm 32x40cm	

THORAX AFDÆKNING

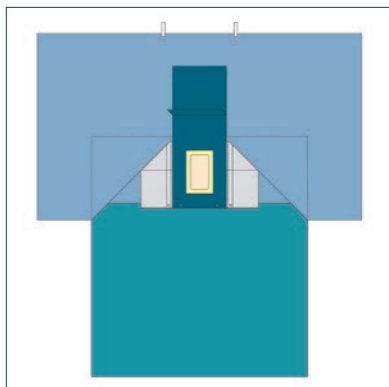

Varenr. sterilt	Varenr. usterilt	Beskrivelse	Inderæske/trp. karton
-	966950	Thorax afdækning 200/300x330cm hul m. incisionsfilm 17x32cm	


NEDRE VASKULÆR AFDÆKNING

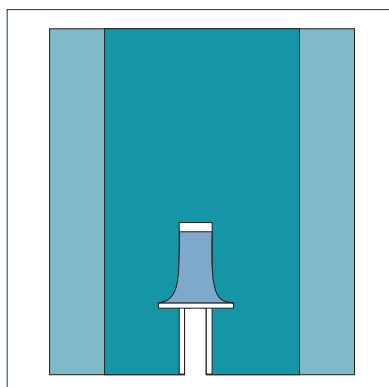

Varenr. sterilt	Varenr. usterilt	Beskrivelse	Inderæske/trp. karton
824700	988795	Nedre vaskulær afdækning 200x260cm, slids 20x102cm	12/24

HYBRID KARDIOVASKULÆR AFDÆKNING


4/8 61800

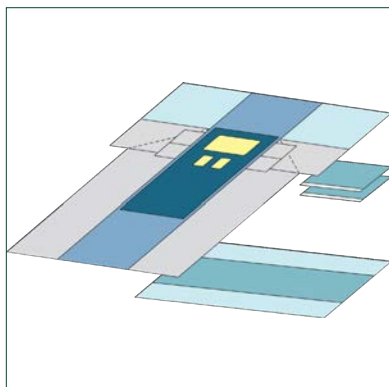

Varenr. usterilt	Antal	Beskrivelse
71800	1	hybrid kardiovaskulær afdækning 240/300x450cm, incisionsfilm 60x40cm og 15x27cm (2), 2 stk. afdækning m. klæb 75x75cm
90190	1	bordafdækning 150x190cm, 75x190cm absorberende område

RADIAL ANGIOGRAFISÆT


4/8 698260

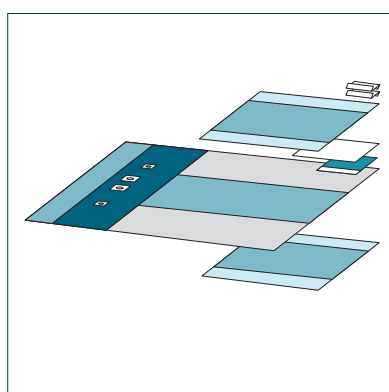

Varenr. usterilt	Antal	Beskrivelse
90150	1	bordafdækning 150x150cm, 75x150cm absorberende område
-	2	papirhåndklæde 18x25cm
923720	1	afdækning, absorberende 75x100cm
947064	1	afdækning m. klæb 50x50cm
958284	1	angiografi afdækning 240x330cm, huller 5x7cm (2) og 7x9cm (2)
90150	1	bordafdækning 150x150cm, 75x150cm absorberende område


ANGIOGRAFISÆT

6/12 904730

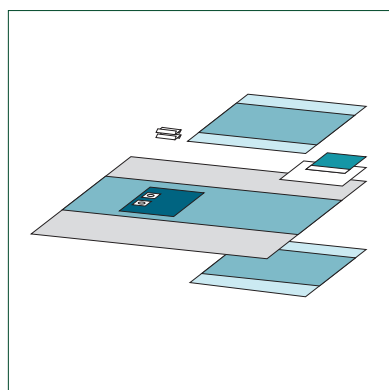


Varenr. usterilt	Antal	Beskrivelse
-	2	papirhåndklæde 18x25cm
90100	1	bordafdækning 100x150cm, 75x150 absorberende område
923720	1	afdækning, absorberende 75x100cm
947064	1	afdækning m. klæb 50x50cm
904706	1	angiografi afdækning 240x370cm, forstærkning 70x70cm, 2 huller 7x10cm
90150	1	bordafdækning 150x150cm, 75x150cm absorberende område

ANGIOGRAFI AFDÆKNING

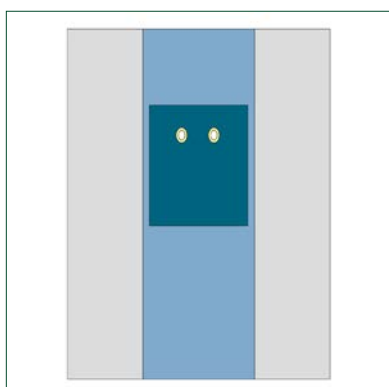


Varenr. steril	Varenr. usterilt	Beskrivelse	Inderæske/trp. karton
65210	751210	Angiografi afdækning 240x320cm, forstærkning 90x110cm, huller 6x9cm (2)	11/22

ANGIOGRAFI AFDÆKNING

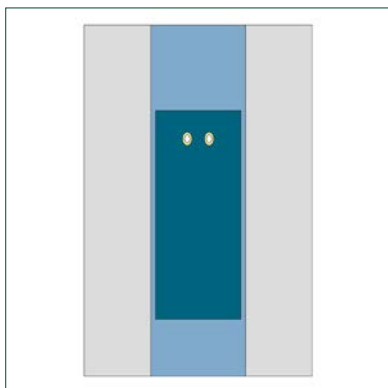


Varenr. steril	Varenr. usterilt	Beskrivelse	Inderæske/trp. karton
65211	75211	Angiografi afdækning 240x370cm, forstærkning 90x220cm, huller 6x9cm (2)	8/16
	75213	Angiografi afdækning 240x370cm, forstærkning 90x220cm, huller 6x9cm (2), foldet på langs	

FEMORALIS ANGIOGRAFI AFDÆKNING

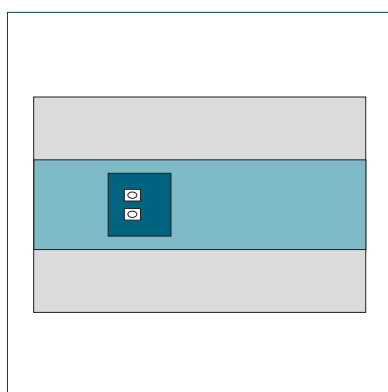


Varenr. steril	Varenr. usterilt	Beskrivelse	Inderæske/trp. karton
828300	958283	Angiografi afdækning 240x370cm, forstærkning 70x70cm, 2 huller 7x10cm	9/18
-	904706	Angiografi afdækning 240x370cm, forstærkning 70x70cm, 2 huller 7x10cm (foldet på langs)	

FEMORALIS ANGIOGRAFI AFDÆKNING

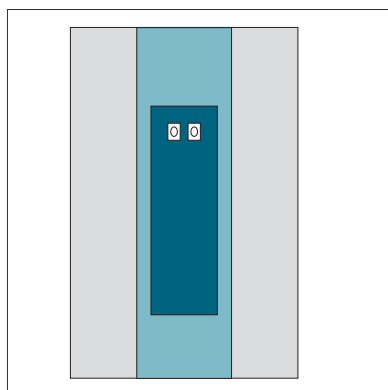


Varenr. steril	Varenr. usterilt	Beskrivelse	Inderæske/trp. karton
-	958291	Angiografi afdækning 240x370cm, forstærkning 70x220cm, 2 huller 7x10cm	
-	904709	Angiografi afdækning 240x370cm, forstærkning 70x220cm, 2 huller 7x10cm (foldet på langs)	

BRACHIAL ANGIOGRAFI AFDÆKNING

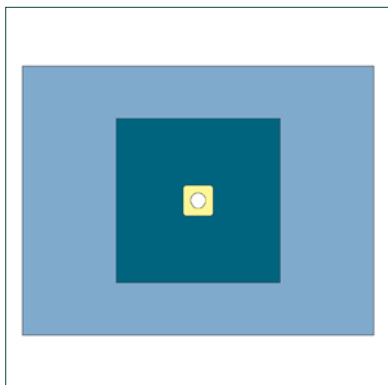


Varenr. steril	Varenr. usterilt	Beskrivelse	Inderæske/trp. karton
65212	75212	Brachial angiografi afdækning 115x150cm, forstærkning 70x70cm, hul 6cm	24/48

RADIAL ANGIOGRAFI AFDÆKNING

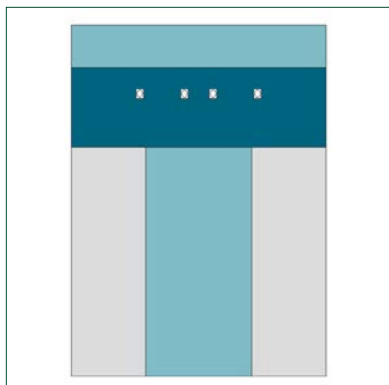


Varenr. sterilt	Varenr. usterilt	Beskrivelse	Inderæske/ trp. karton
-	958284	Radial angiografi afdækning 240x330cm, huller 5x7cm (2) og 7x9cm (2)	

RADIAL ANGIOGRAFI AFDÆKNING

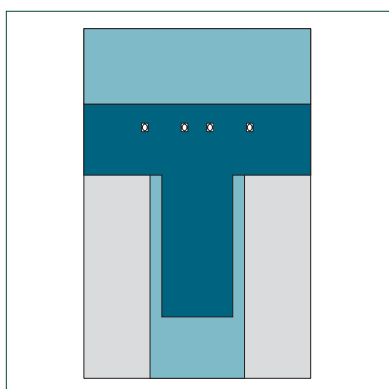


Varenr. sterilt	Varenr. usterilt	Beskrivelse	Inderæske/ trp. karton
-	958290	Radial angiografi afdækning 240x370cm, huller 5x7cm (2) og 7x10cm (2)	
-	958289	Radial angiografi afdækning 240x370cm, huller 5x7cm (2) og 7x10cm (2), (foldet på langs)	

PACEMAKER AFDÆKNING

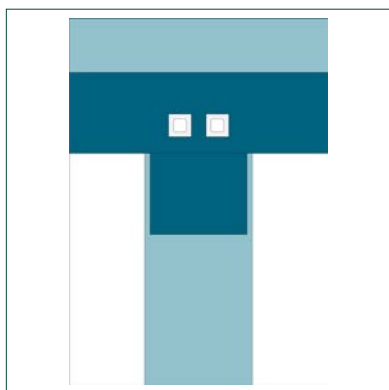


Varenr. sterilt	Varenr. usterilt	Beskrivelse	Inderæske/ trp. karton
-	958280	Pacemaker afdækning 240x335 cm, 2 huller 12x12cm	

PACEMAKER AFDÆKNING

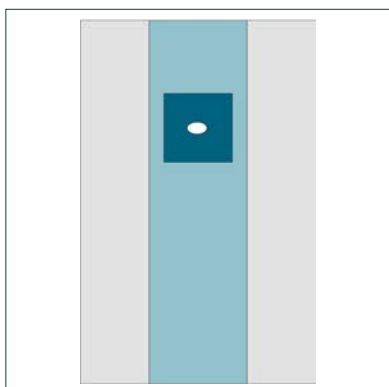

Varenr. sterilt	Varenr. usterilt	Beskrivelse	Inderæske/ trp. karton
-	958288	Pacemaker afdækning 240x370 cm, hul 12x20cm	
-	958287	Pacemaker afdækning 240x370 cm, hul 15x15cm	

HYBRID KARDIOVASKULÆR AFDÆKNING

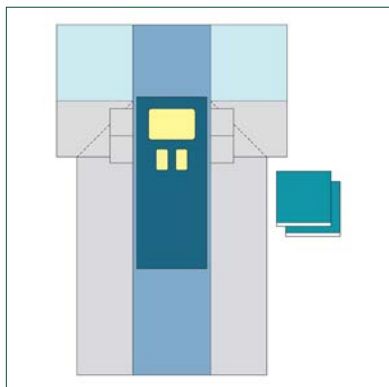


Varenr. steril	Varenr. usterilt	Beskrivelse	Inderæske/ trp. karton
-	71800	Hybrid kardiovaskulær afdækning 240/300x450cm, incisionsfilm 60x40cm og 15x27cm (2), 2 stk. afdækning m. klæb 75x75cm	

KRANIOTOMI SÆT


5/10

888142

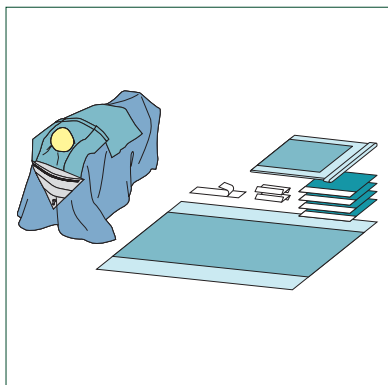


Varenr. usterilt	Antal	Beskrivelse
996106	1	assistancebordspose 79x145cm, 65x85cm absorberende område
-	2	papirhåndklæde 18x25cm
911500	1	op-tape 9x49cm
947064	4	afdækning m. klæb 50x50cm
965524	1	kraniotomi afdækning 230x300cm, incisionsfilm 30x20cm
90190	1	bordafdækning 150x190cm, 75x190cm absorberende område

KRANIOTOMI AFDÆKNING

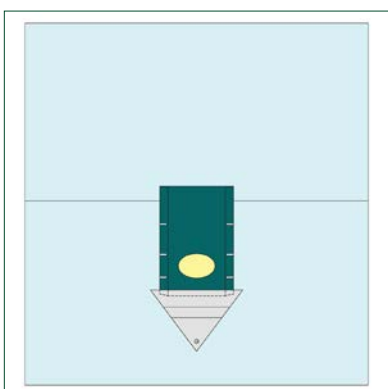

Varenr. sterilt	Varenr. usterilt	Beskrivelse	Inderæske/ trp. karton
888442	988442	Kraniotomi afdækning 280x295cm, incisionsfilm 30x20cm	9/18


KRANIOTOMI AFDÆKNING

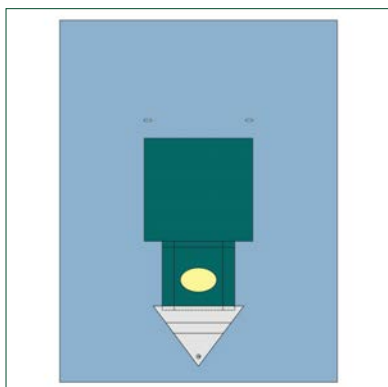

Varenr. sterilt	Varenr. usterilt	Beskrivelse	Inderæske/ trp. karton
-	965524	Kraniotomi afdækning 230x300cm, incisionsfilm 30x20cm	

LITOTOMI SÆT


6/12 61010

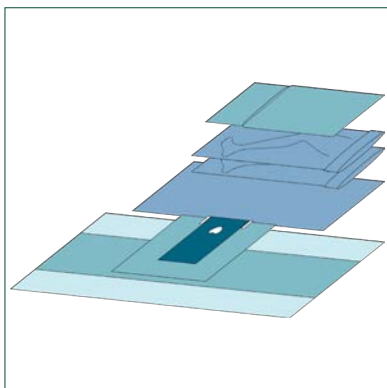

Varenr. usterilt	Antal	Beskrivelse
972890	1	afdækning m. fingerkant 75x100cm
906109	2	litotomi benpose 75x120cm
71000	1	litotomi afdækning 75/150x170cm, hul m. klæb 9x11cm
90190	1	bordafdækning 150x190cm, 75x190cm absorberende område

GYN / CYSTOSKOPI SÆT


11/22 696110

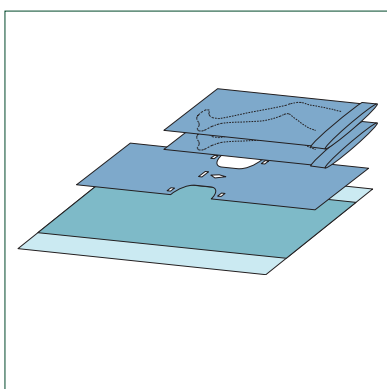

Varenr. usterilt	Antal	Beskrivelse
906109	2	litotomi benpose 75x120cm
957961	1	hulstykke 75x175cm, hul 9x15cm
90190	1	bordafdækning 150x190cm, 75x190cm absorberende område

GYNÆKOLOGI SÆT


8/16 696700

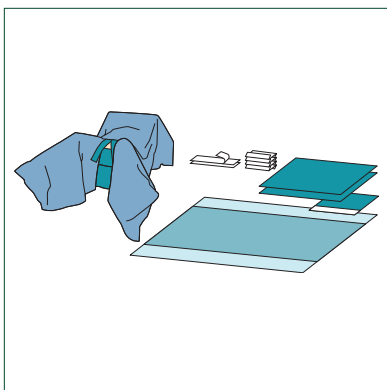

Varenr. usterilt	Antal	Beskrivelse
-	4	papirhåndklæde 18x25cm
910519	2	afdækning 75x90cm
947064	1	afdækning m. klæb 50x50cm
911500	2	op-tape 9x49cm
987762	1	litotomi afdækning m. benposer 150x235cm
90190	1	bordafdækning 150x190cm, 75x190cm absorberende område

GYNÆKOLOGI SÆT

6/12 888112

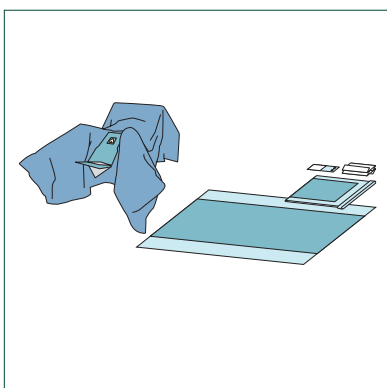


Varenr. usterilt	Antal	Beskrivelse
996106	1	assistancebordspose 79x145cm, 65x85cm absorberende område
-	2	papirhåndklæde 18x25cm
904762	1	slangeholder 9x18cm
988520	1	gynækologi afdækning 60x116cm m. pose, hul m. klæb 8x11cm
965523	1	gyn. afdækning m. benposer 200/270x215cm
90190	1	bordafdækning 150x190cm, 75x190cm absorberende område

GYNÆKOLOGI SÆT

6/12

888113

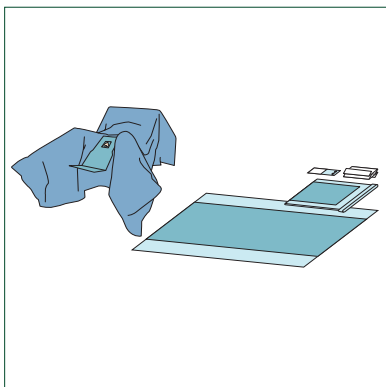


Varenr. usterilt	Antal	Beskrivelse
996106	1	assistancebordspose 79x145cm, 65x85cm absorberende område
-	2	papirhåndklæde 18x25cm
904762	1	slangeholder 9x18cm
988521	1	gynækologi afdækning 60x116cm, hul m. klæb 8x11cm
965523	1	gynækologi afdækning m. benposer 200/270x215cm
90190	1	bordafdækning 150x190cm, 75x190cm absorberende område

GYNÆKOLOGI SÆT

6/12

888212

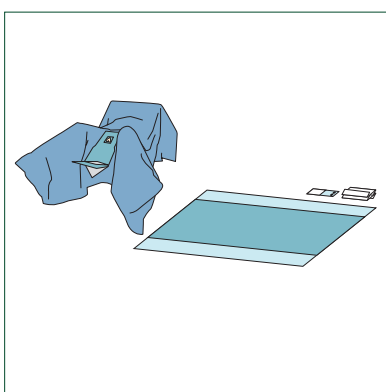


Varenr. usterilt	Antal	Beskrivelse
-	2	papirhåndklæde 18x25cm
904762	1	slangeholder 9x18cm
988520	1	gynækologi afdækning 60x116cm m. pose, hul m. klæb 8x11cm
965523	1	gynækologi afdækning m. benposer 200/270x215cm
90190	1	bordafdækning 150x190cm, 75x190cm absorberende område

GYN / CYSTOSKOPI SÆT

9/18

902496

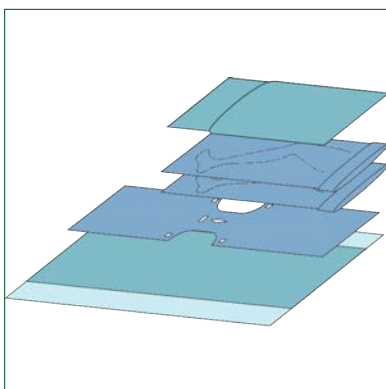


Varenr. usterilt	Antal	Beskrivelse
972890	1	afdækning m. fingerkant 75x100cm
906109	2	benpose 75x120cm
904746	1	cystoskopi afdækning 75x175cm, hul 9x15cm
90190	1	bordafdækning 150x190cm, 75x190cm absorberende område

URO / GYNÆKOLOGI SÆT

5/10

905020

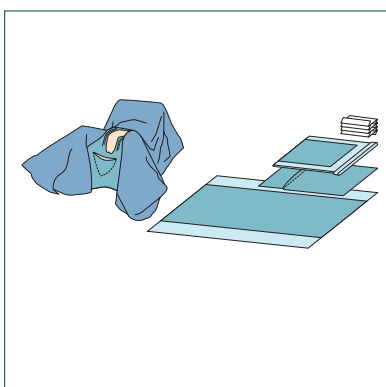


Varenr. usterilt	Antal	Beskrivelse
996106	1	assistancebordspose 79x145cm, 65x85cm absorberende område
972890	1	afdækning m. fingerkant 75x100cm
-	4	papirhåndklæde 18x25cm
990520	1	uro/gynækologi afdækning 200/355x295cm, hul m. klæb 17/8x28cm
90190	1	bordafdækning 150x190cm, 75x190cm absorberende område

GYNÆKOLOGI SÆT


4/8

925984

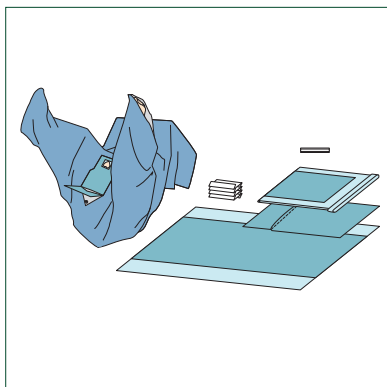


Varenr. usterilt	Antal	Beskrivelse
824098	1	slangeholder velcro 2,5x30cm
996106	1	assistancebordspose 79x145cm, 65x85cm absorberende område
-	4	papirhåndklæde 18x25cm
972890	1	afdækning m. fingerkant 75x100cm
950022	1	gynækologi afdækning 200/270x280cm, hul m. klæb 9x11cm
90190	1	bordafdækning 150x190cm, 75x190cm absorberende område

GYNÆKOLOGI AFDÆKNING

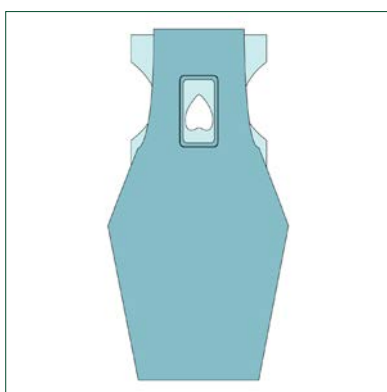


Varenr. sterilt	Varenr. usterilt	Beskrivelse	Inderæske/ trp. karton
888521	988521	Gynækologi afdækning 60x116cm, hul m. klæb 8x11cm	44/88
-	988520	Gynækologi afdækning 60x116cm m. pose, hul m. klæb 8x11cm	

GYNÆKOLOGI AFDÆKNING ABDO-PERINEAL

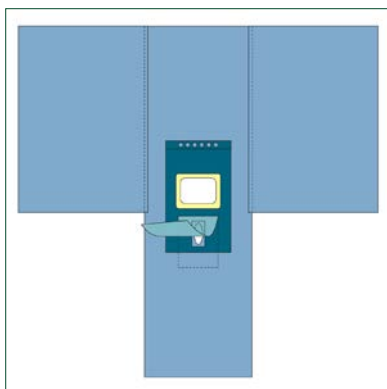


Varenr. sterilt	Varenr. usterilt	Beskrivelse	Inderæske/ trp. karton
-	71040	Gynækologi afdækning abdo-perineal 75/250x245cm, hul m. klæb 25x18cm, hul 6x15cm	

GYNÆKOLOGI AFDÆKNING

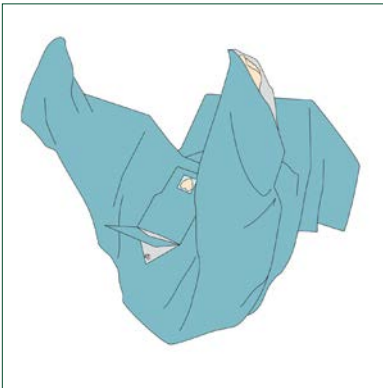

Varenr. sterilt	Varenr. usterilt	Beskrivelse	Inderæske/trp. karton
-	950022	Gynækologi afdækning 200/270x280cm, hul m. klæb 9x11cm	


CYSTOSKOPI AFDÆKNING

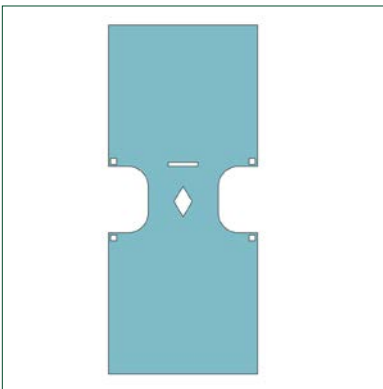

Varenr. sterilt	Varenr. usterilt	Beskrivelse	Inderæske/trp. karton
-	904746	Cystoskopi afdækning 75x175cm, hul 9x15cm	

SECTIO SÆT


4/8 694110

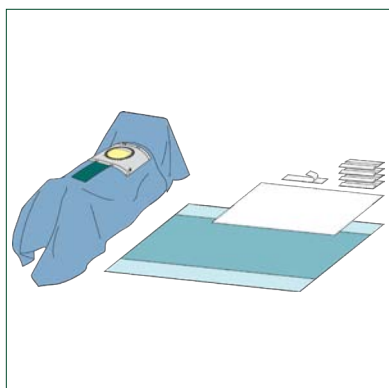

Varenr. usterilt	Antal	Beskrivelse
-	4	papirhåndklæde 18x25cm
911500	1	op-tape 9x49cm
910433	1	babylagen 90x120cm
969674	1	sectio afdækning 175/250x300cm, incisionsfilm 38x32cm
90190	1	bordafdækning 150x190cm, 75x190cm absorberende område

SECTIO SÆT


4/8 694135

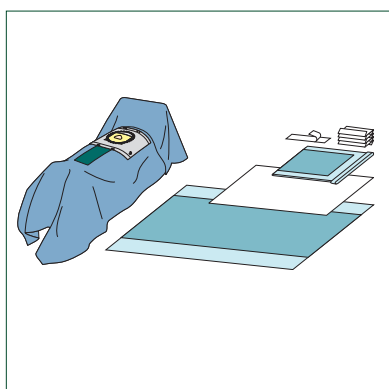

Varenr. usterilt	Antal	Beskrivelse
996106	1	assistancebordspose 79x145cm, 65x85cm absorberende område
-	4	papirhåndklæde 18x25cm
911500	1	op-tape 9x49cm
910433	1	babylagen 90x120cm
969673	1	sectio afdækning 175/250x300cm, incisionsfilm 38x32cm, hul i incisionsfilm 18x16cm
90190	1	bordafdækning 150x190cm, 75x190cm absorberende område

SECTIO SÆT

4/8 903355

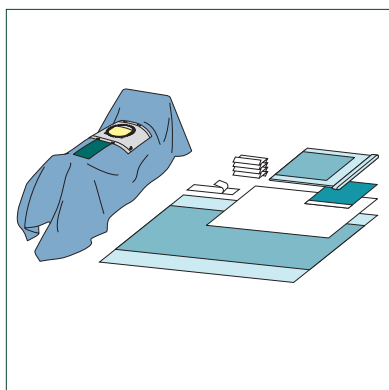

Varenr. usterilt	Antal	Beskrivelse
996106	1	assistancebordspose 79x145cm, 65x85cm absorberende område
-	4	papirhåndklæde 18x25cm
911500	1	op-tape 9x49cm
947064	1	afdækning m. klæb 50x50cm
910433	1	babylagen 90x120cm
904743	1	sectio afdækning 175/250x300cm foldet på langs, incisionsfilm 38x32cm
90190	1	bordafdækning 150x190cm, 75x190cm absorberende område

SECTIO AFDÆKNING



Varenr. sterilt	Varenr. usterilt	Beskrivelse	Inderæske/trp. karton
65031	969674	Sectio afdækning 175/250x300cm, incisionfilm 38x32cm, indpakket	5/10
-	904743	Sectio afdækning 175/250x300cm foldet på langs, incisionsfilm 38x32cm	

SECTIO AFDÆKNING



Varenr. sterilt	Varenr. usterilt	Beskrivelse	Inderæske/ trp. karton
65040	969673	Sectio afdækning 175/250x300cm, incisionsfilm 38x32cm, hul 18x16cm, indpakket	6/12

SECTIO AFDÆKNING




Varenr. sterilt	Varenr. usterilt	Beskrivelse	Inderæske/ trp. karton
-	905743	Sectio afdækning 175/250x300cm foldet på langs, incisionsfilm 38x32cm, m. transparent anæstesidel	

SECTIO AFDÆKNING




Varenr. sterilt	Varenr. usterilt	Beskrivelse	Inderæske/ trp. karton
-	969675	Sectio afdækning 250/175/270x270cm, incisionsfilm 38x32cm, hul i incisionsfilm 18x16cm	

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BABYLAGEN




Varenr. steril	Varenr. usterilt	Beskrivelse	Inderæske/ trp. karton
610434	910434	Babylagen 100x100cm	30/60
-	910433	Babylagen 90x120cm	

BABYLAGEN

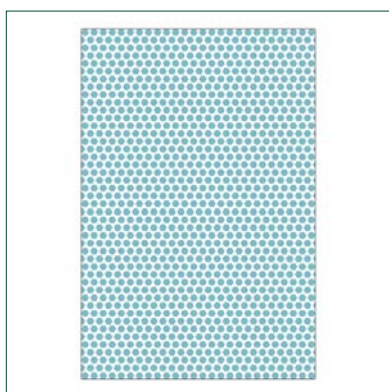

Varenr. steril	Varenr. usterilt	Beskrivelse	Inderæske/ trp. karton
-	80057095	Babylagen 60x90cm	

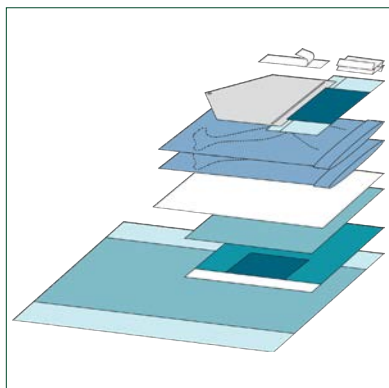


Varenr. usterilt	Antal	Beskrivelse
911500	1	op-tape 9x49cm
-	2	papirhåndklæde 18x25cm
9229	1	afdækning m. fingerkant 85x120cm, m. pose
906109	2	benpose 75x120cm
-	1	babylagen 100x100cm
968005	1	afdækning 75x90cm
910198	1	afdækning m. klæb 75x75cm
90190	1	bordafdækning 150x190cm, 75x190cm absorberende område

TUR SÆT

10/20

696310

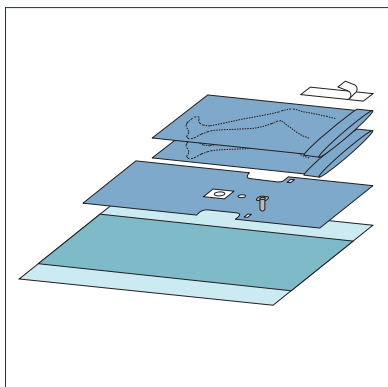


Varenr. usterilt	Antal	Beskrivelse
911500	1	op-tape 9x49cm
906109	2	benpose 75x120cm
-	1	tur afdækning 75x175cm, huller 8cm og 6cm, fingertut
90190	1	bordafdækning 150x190cm, 75x190cm absorberende område

TUR SÆT

7/14

888222

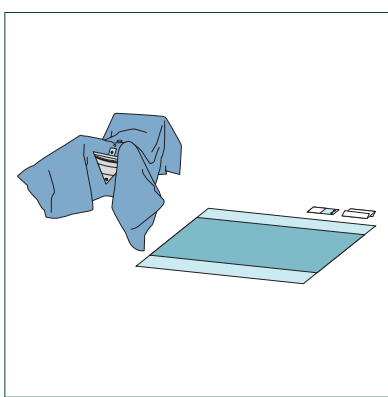


Varenr. usterilt	Antal	Beskrivelse
-	1	papirhåndklæde 18x25cm
904762	1	slangeholder 9x18cm
965520	1	tur afdækning 175/270x180cm m. pose, huller 8cm og 5cm, fingertut
90190	1	bordafdækning 150x190cm, 75x190cm absorberende område

TUR SÆT

9/18

888224

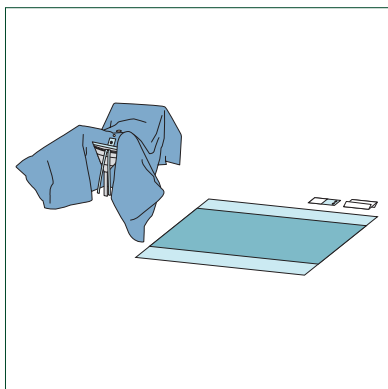


Varenr. usterilt	Antal	Beskrivelse
-	1	papirhåndklæde 18x25cm
904762	1	slangeholder 9x18cm
965522	1	tur afdækning 175/270x180cm m. pose og bundafløb, huller 8cm og 5cm, fingertut
90190	1	bordafdækning 150x190cm, 75x190cm absorberende område

TUR SÆT


9/18

888225

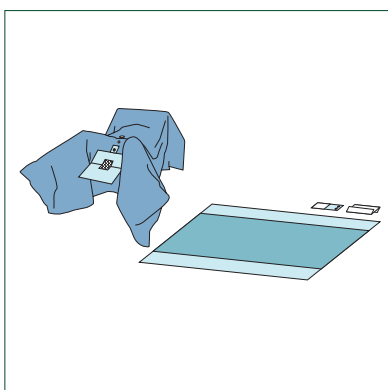


Varenr. usterilt	Antal	Beskrivelse
-	1	papirhåndklæde 18x25cm
904762	1	slangeholder 9x18cm
965525	1	tur afdækning 175/270x180cm m. si, huller 8cm og 5cm, fingertut
90190	1	bordafdækning 150x190cm, 75x190cm absorberende område

NEFROSKOPI AFDÆKNING

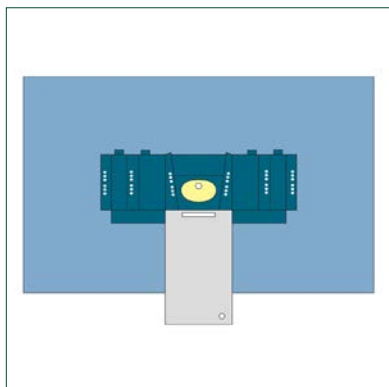


Varenr. steril	Varenr. usterilt	Beskrivelse	Inderæske/ trp. karton
65810	75810	Nefroskopi afdækning m. pose 175x300cm, indpakket	6/12

TUR AFDÆKNING

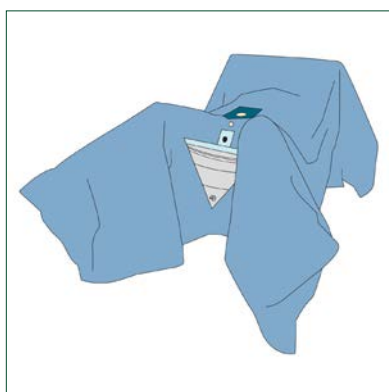


Varenr. steril	Varenr. usterilt	Beskrivelse	Inderæske/ trp. karton
88827	96527	Tur afdækning 175/270x240cm m. pose, huller 8cm og 5cm, fingertut	8/16

TUR AFDÆKNING

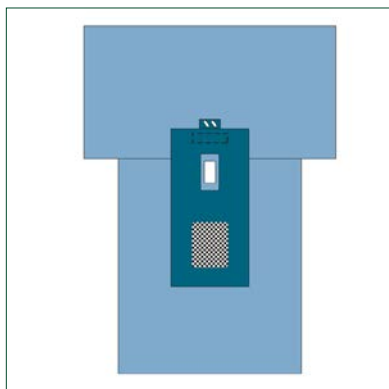


Varenr. steril	Varenr. usterilt	Beskrivelse	Inderæske/ trp. karton
-	75800	Tur afdækning 100/152x220cm, hul 9x18cm	

TUR AFDÆKNING

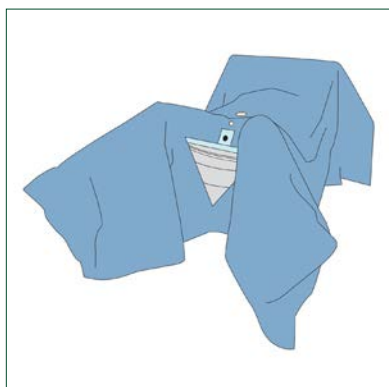


Varenr. steril	Varenr. usterilt	Beskrivelse	Inderæske/ trp. karton
-	96520	Tur afdækning 175/270x180cm m. pose, huller 8cm og 5cm, fingertut	

TUR AFDÆKNING

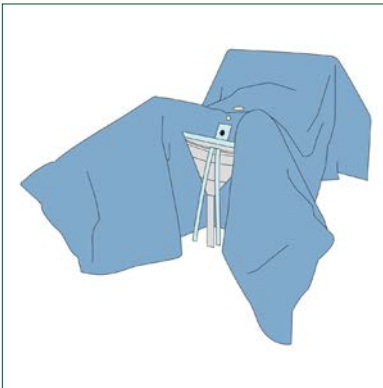

Varenr. sterilt	Varenr. usterilt	Beskrivelse	Inderæske/ trp. karton
-	965522	Tur afdækning 175/270x180cm m. pose og bundafløb, huller 8cm og 5cm, fingertut	

TUR AFDÆKNING

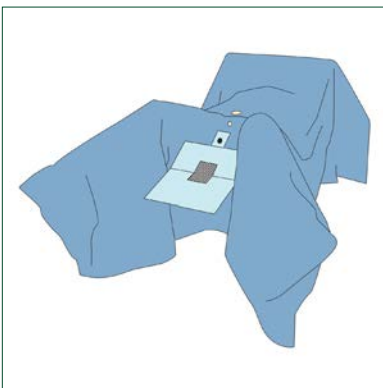


Varenr. sterilt	Varenr. usterilt	Beskrivelse	Inderæske/ trp. karton
-	965525	Tur afdækning 175/270x180cm m. si, huller 8cm og 5cm, fingertut	

ØJEN SÆT

8/16

903167

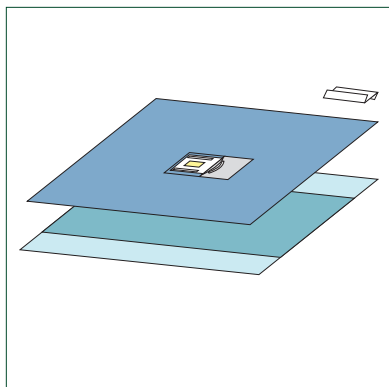


Varenr. usterilt	Antal	Beskrivelse
156400	1	mesoft 10x20cm
95606	1	øjen afdækning 140x150cm m. pose, incisionsfilm 8x10cm
90150	1	bordafdækning 150x150cm, 75x150cm absorberende område

ØJEN SÆT


8/16

903286

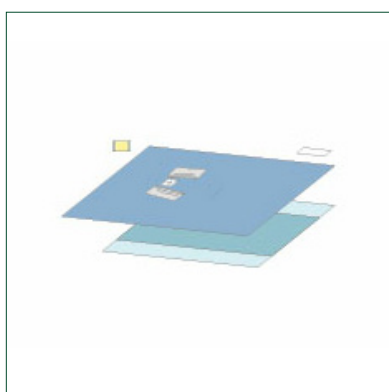


Varenr. usterilt	Antal	Beskrivelse
156400	1	mesoft, 10x20cm
921014	1	incisionsfilm 10x14cm (incisionfelt 10x11cm)
95603	1	øjen afdækning 150x180cm m. poser, hul 5x7cm
90150	1	bordafdækning 150x150cm, 75x150cm absorberende område

ØJENAFDÆKNING MED POSE

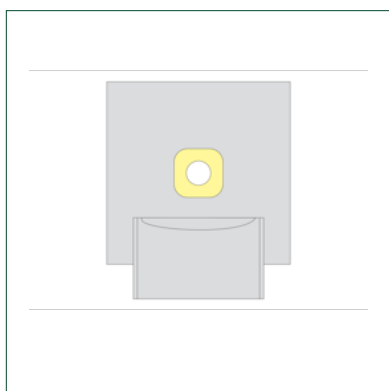


Varenr. sterilt	Varenr. usterilt	Beskrivelse	Inderæske/ trp. karton
63055	-	Øjenafdækning m. pose 45x45cm, hul 6cm	30/60

ØJENAFDÆKNING MED POSE

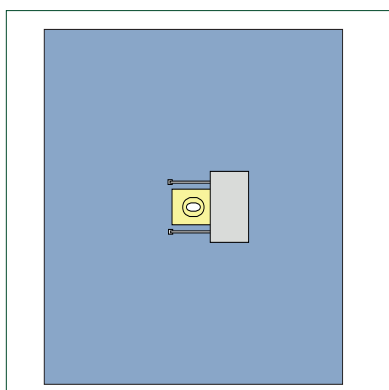


Varenr. sterilt	Varenr. usterilt	Beskrivelse	Inderæske/trp. karton
63818	93913	Øjenafdækning med pose 140x150cm, incisionsfilm 10x8cm, hul 6,5x3,5 cm	20/40

ØJENAFDÆKNING MED POSE

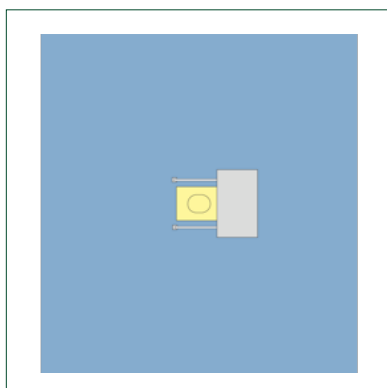


Varenr. steril	Varenr. usterilt	Beskrivelse	Inderæske/trp. karton
85606	95606	Øjenafdækning med pose 140x150cm, incisionsfilm 10x8cm	16/32
63819	93914	Øjenafdækning med pose 140x150cm, incisionsfilm 10x8cm	20/40

ØJENAFDÆKNING MED POSE

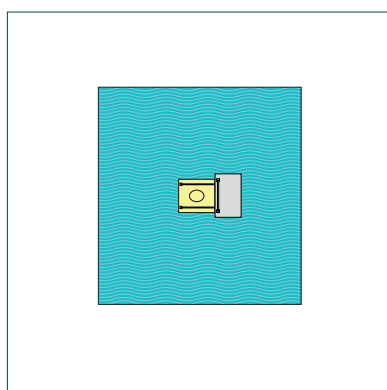


Varenr. steril	Varenr. usterilt	Beskrivelse	Inderæske/trp. karton
85613	95613	Øjenafdækning med pose 140x150cm, incisionsfilm 10x8cm	14/28
85617	95617	Øjenafdækning med pose 100x120cm, incisionsfilm 10x8cm, bogfoldet	24/48
63832	93926	Øjenafdækning med pose 140x150cm, incisionsfilm 10x8cm, bogfoldet	20/40

ØJENAFDÆKNING MED POSER

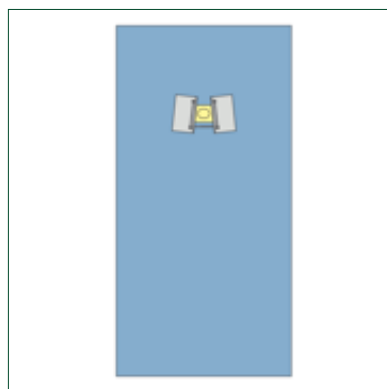


Varenr. steril	Varenr. usterilt	Beskrivelse	Inderæske/trp. karton
63824	93918	Øjenafdækning med poser 150x300cm, incisionsfilm 10x8cm	10/20

ØJENAFDÆKNING MED POSER

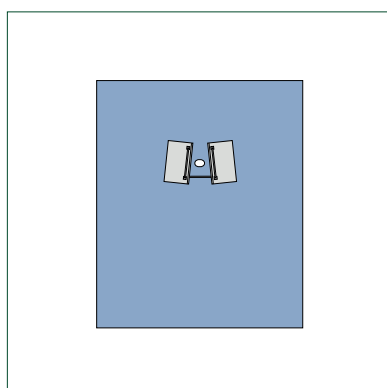


Varenr. steril	Varenr. usterilt	Beskrivelse	Inderæske/trp. karton
63820	93915	Øjenafdækning med poser 150x180cm, hul med klæb 7x5cm, PRIMARY	15/30

ØJENAFDÆKNING MED POSER

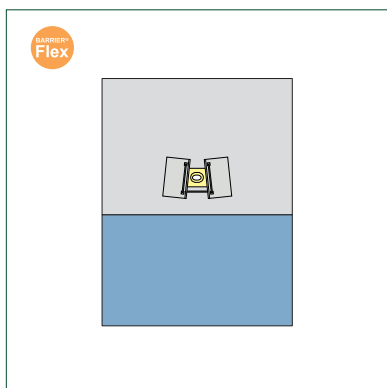


Varenr. sterilt	Varenr. usterilt	Beskrivelse	Inderæske/ trp. karton
63821	93916	Øjenafdækning med poser 150x195cm, incisionsfilm 10x8cm, hul 6,5x3,5cm	23/46

ØJENAFDÆKNING MED POSER

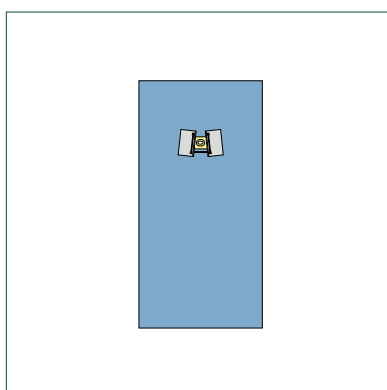


Varenr. sterilt	Varenr. usterilt	Beskrivelse	Inderæske/ trp. karton
63823	93917	Øjenafdækning med poser 150x300cm, incisionsfilm 10x8cm, hul 6,5x3,5cm	10/20

ØJENAFDÆKNING MED POSER

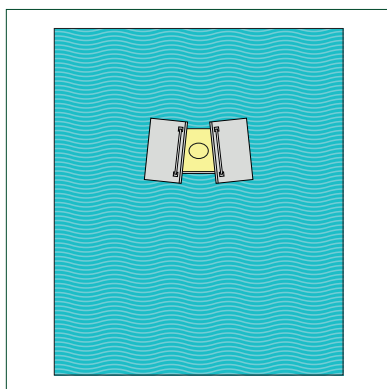


Varenr. sterilt	Varenr. usterilt	Beskrivelse	Inderæske/ trp. karton
85614	95614	Øjenafdækning med poser 150x180cm, incisionsfilm 10x8cm	12/24

ØJENAFDÆKNING

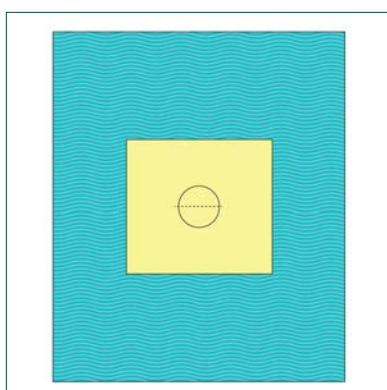


Varenr. sterilt	Varenr. usterilt	Beskrivelse	Inderæske/ trp. karton
85608	95608	Øjenafdækning 50x60cm, incisionsfilm ø 7cm, perforeret incisionsfilm	50/100

ØJENAFDÆKNING

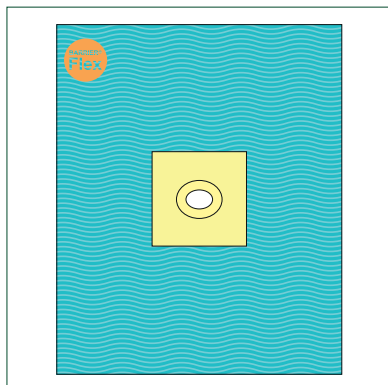


Varenr. steril	Varenr. usterilt	Beskrivelse	Inderæske/ trp. karton
85609	95609	Øjenafdækning 75x85cm, incisionsfilm 10 x 8cm, hul 6,5x3,5cm	44/88

ØJENAFDÆKNING

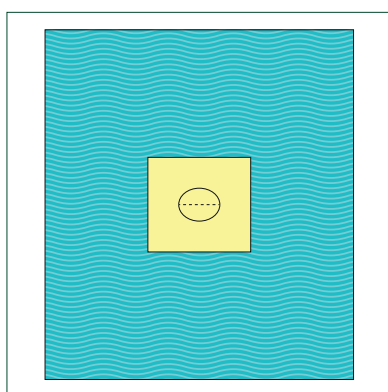


Varenr. steril	Varenr. usterilt	Beskrivelse	Inderæske/ trp. karton
85612	95612	Øjenafdækning 75 x 85cm, incisionsfilm 10x8cm, perforeret incisionsfilm	40/80

ØJENAFDÆKNING

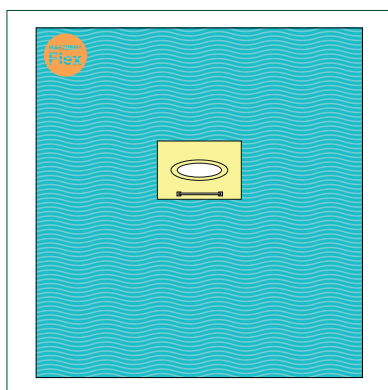

Varenr. steril	Varenr. usterilt	Beskrivelse	Inderæske/ trp. karton
85615	95615	Øjenafdækning 140 x 150cm, hul 19x6cm, bogfoldet	16/32

ØJENAFDÆKNING MED POSE

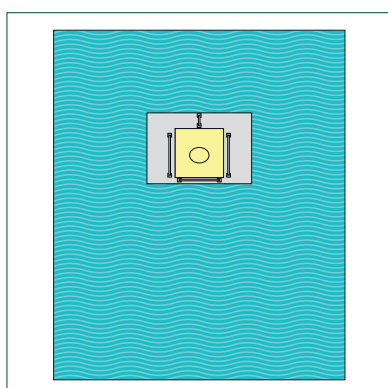


Varenr. steril	Varenr. usterilt	Beskrivelse	Inderæske/ trp. karton
85616	95616	Øjenafdækning med pose 140x180cm, incisionsfilm 10 x 8cm	12/24

ENT SÆT

7/14

65000

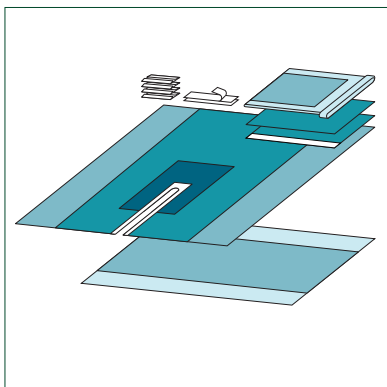


Varenr. usterilt	Antal	Beskrivelse
996106	1	assistancebordspose 79x145cm, 65x85cm absorberende område
-	4	papirhåndklæde 18x25cm
911500	2	op-tape 9x49cm
910519	1	afdækning 75x90cm
930200	1	afdækning m. klæb 90x75cm
70509	1	slidslagen 150x260cm, slids 7x65cm
90190	1	bordafdækning 150x190cm, 75x190cm absorberende område

DENTAL SÆT

22/44

306480

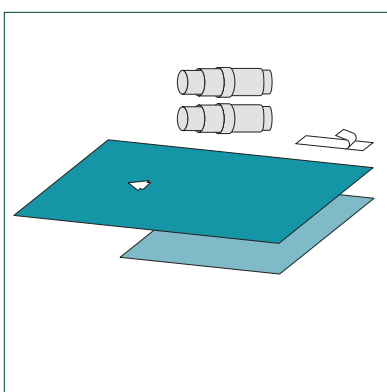


Varenr. usterilt	Antal	Beskrivelse
815330	2	slange/kamera overtræk med lige spids 8x120cm
911500	1	op-tape 9x49cm
900076	1	hulstykke 100x150cm, hul 13x9,5cm
968005	1	bordafdækning 75x90cm

DENTAL SÆT

16/32

694000

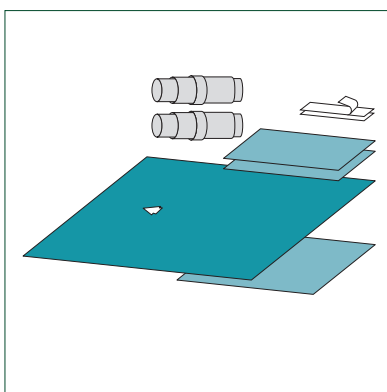


Varenr. usterilt	Antal	Beskrivelse
911500	1	op-tape 9x49cm
815330	2	slange/kamera overtræk med lige spids 8x120cm
968004	2	afdækning 45x75cm
910176	1	hulstykke 150x150cm, hul 10x14cm
968005	1	bordafdækning 75x90cm

HOVED SÆT

6/12

696940

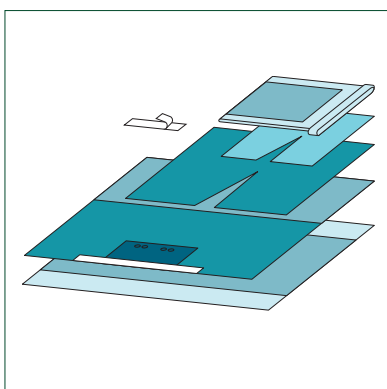


Varenr. usterilt	Antal	Beskrivelse
996106	1	assistancebordspose 79x145cm, 65x85cm absorberende område
911500	1	op-tape 9x49cm
988269	1	hoved afdækning 125/175x150cm og turban 100x106cm
967772	1	afdækning m. klæb 175x175cm
90190	1	bordafdækning 150x190cm, 75x190cm absorberende område

ENT SÆT


7/14

697000

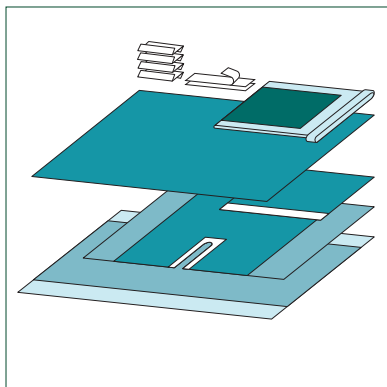


Varenr. usterilt	Antal	Beskrivelse
996109	1	forstærket assistancebordspose 79x145cm, 65x85cm absorberende område
-	4	papirhåndklæde 18x25cm
910185	1	afdækning 150x175cm
910598	1	afdækning m. klæb 75x75cm
911500	2	op-tape 9x49cm
980789	1	slidslagen 150x125cm, slids 7x45cm
90190	1	bordafdækning 150x190cm, 75x190cm absorberende område

HOVED AFDÆKNING

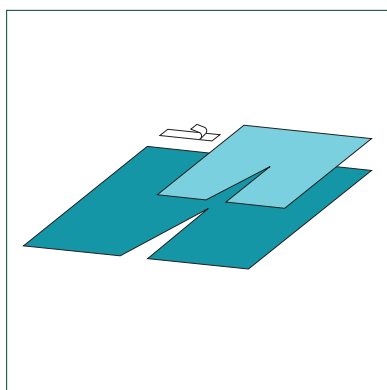


Varenr. steril	Varenr. usterilt	Beskrivelse	Inderæske/ trp. karton
826900	988269	Hoved afdækning 150x175cm, turban 106x103cm + 1 op-tape 9x49cm	10/20

NAKKE OG THYROIDEA AFDÆKNING

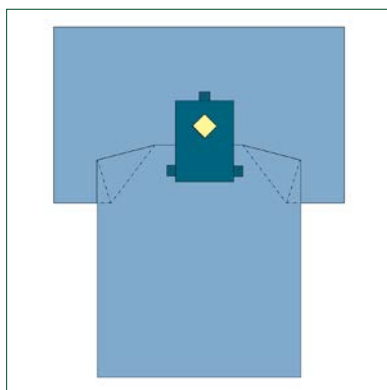


Varenr. steril	Varenr. usterilt	Beskrivelse	Inderæske/ trp. karton
65011	75011	Nakke og thyroidea afdækning 175/250x302cm, incisionsfilm 15x15cm	10/20

KLÆBENDE HOVED AFDÆKNING M. TURBAN

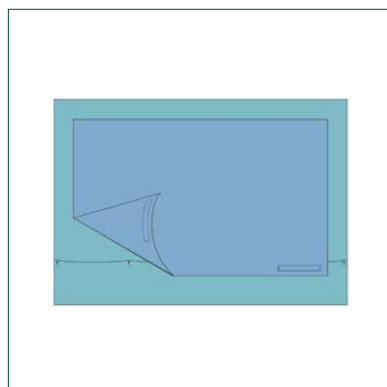


Varenr. steril	Varenr. usterilt	Beskrivelse	Inderæske/ trp. karton
-	8085	Klæbende hoved afdækning m. turban 150x94cm, 79x128cm	

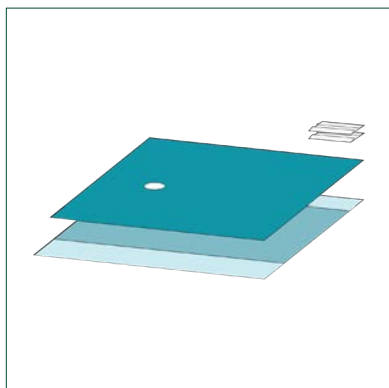


Varenr. usterilt	Antal	Beskrivelse
-	2	papirhåndklæde 18x25cm
956923	1	hulstykke 150x175cm, hul 13x17cm
90190	1	bordafdækning 150x190cm, 75x190cm absorberende område

ASSISTANCEBORDSPOSE

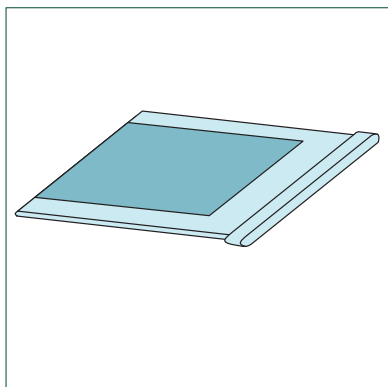


Varenr. steril	Varenr. usterilt	Beskrivelse	Inderæske/ trp. karton
610601	996106	Assistancebordspose 79x145cm, 65x85cm absorberende område	25/75

ASSISTANCEBORDSPOSE

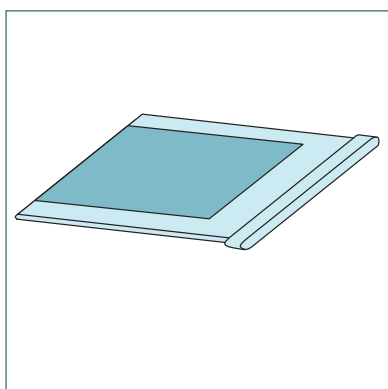


Varenr. steril	Varenr. usterilt	Beskrivelse	Inderæske/ trp. karton
1244	9544	Assistancebordspose 58x137cm, 50x60cm absorberende område	50/100
-	996104	Assistancebordspose 58x137cm, 50x60cm absorberende område, teleskopfoldet	

FORSTÆRKET ASSISTANCEBORDSPOSE

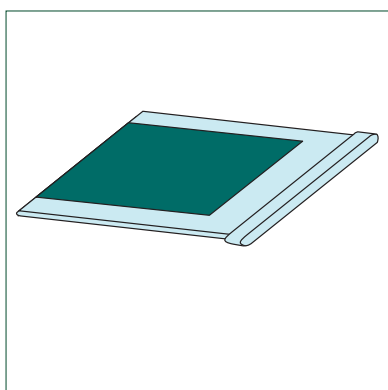


Varenr. steril	Varenr. usterilt	Beskrivelse	Inderæske/ trp. karton
610900	996109	Forstærket assistancebordspose 79x145cm, 65x85cm absorberende område	20/60

FORSTÆRKET ASSISTANCEBORDSPOSE

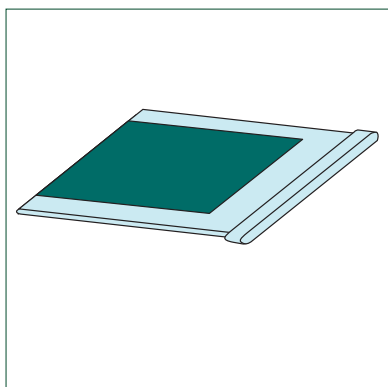


Varenr. steril	Varenr. usterilt	Beskrivelse	Inderæske/ trp. karton
-	996115	Forstærket assistancebordspose 100x170 cm, forstærket pude 90x105 cm	

BORDAFDÆKNING TREDIMENSIONEL

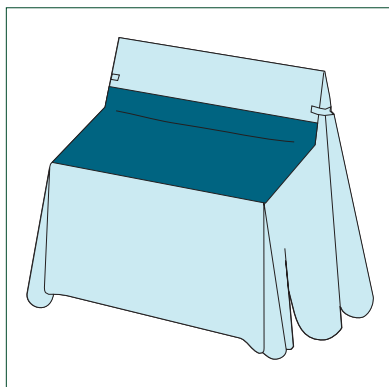


Varenr. steril	Varenr. usterilt	Beskrivelse	Inderæske/trp. karton
780300	978030	Bordafdekning tredimensionel 290x330cm, 80x150cm absorberende område	8/16

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BORDAFDÆKNING




Varenr. steril	Varenr. usterilt	Beskrivelse	Inderæske/trp. karton
80100	90100	Bordafdekning 100x150cm, 75x150cm absorberende område	40/80
80150	90150	Bordafdekning 150x150cm, 75x150cm absorberende område	30/60
80170	90170	Bordafdekning 150x170cm, 75x170cm absorberende område	27/54
80190	90190	Bordafdekning 150x190cm, 75x190cm absorberende område	22/44
80210	90210	Bordafdekning 150x210cm, 75x210cm absorberende område	21/42
80240	90240	Bordafdekning 150x240cm, 75x240cm absorberende område	20/40

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FORSTÆRKET BORDAFDÆKNING




Varenr. steril	Varenr. usterilt	Beskrivelse	Inderæske/trp. karton
85190	95190	Forstærket bordafdekning 150x190cm, 75x190cm absorberende område	15/30
85195	95190	Forstærket bordafdekning 150x190cm, 75x190cm absorberende område, indpakket	18/36
85215	95210	Forstærket bordafdekning 150x210cm, 75x210cm absorberende område, indpakket	18/36
85245	95240	Forstærket bordafdekning 150x240cm, 75x240cm absorberende område, indpakket	17/34
89215	99210	Forstærket bordafdekning 190x210cm, 90x210cm absorberende område, indpakket	14/28
89285	99280	Forstærket bordafdekning 190x280cm, 90x280cm absorberende område, indpakket	12/24

TRANSPARENT BORDAFDÆKNING

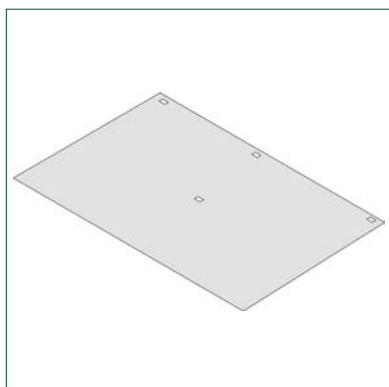


Varenr. steril	Varenr. usterilt	Beskrivelse	Inderæske/trp. karton
815427	815426	Transparent bordafdekning, 150x200cm	30/60

INCISIONSFILM

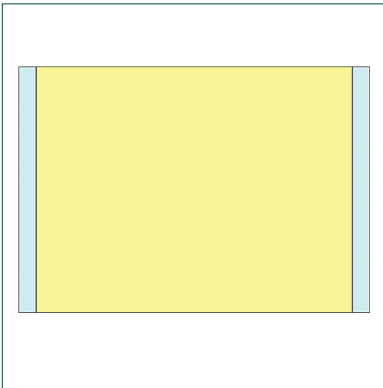


Varenr. steril	Varenr. usterilt	Beskrivelse	Inderæske/ trp. karton
-	921014	Incisionsfilm 10x14 (10x11)cm	
801526	921526	Incisionsfilm 15x26 (15x21)cm	30/120
803026	923026	Incisionsfilm 30x26 (30x21)cm	25/100
804040	924040	Incisionsfilm 40x40 (40x35)cm	20/80
804555	924555	Incisionsfilm 45x55 (45x50)cm	15/60
805680	925680	Incisionsfilm 56x80 (56x75)cm	10/40

OPSAMLINGSGPOSE

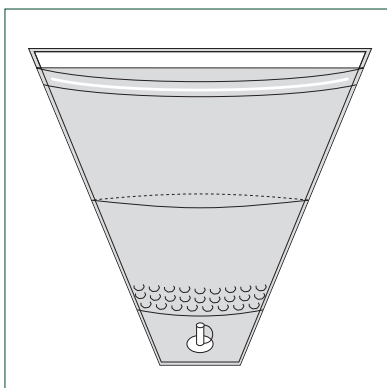


Varenr. sterilt	Varenr. usterilt	Beskrivelse	Inderæske/trp. karton
831200	815310	Opsamlingspose m. bundaftapning og si 50x50cm, klæb	7/14

OPSAMLINGSGPOSE

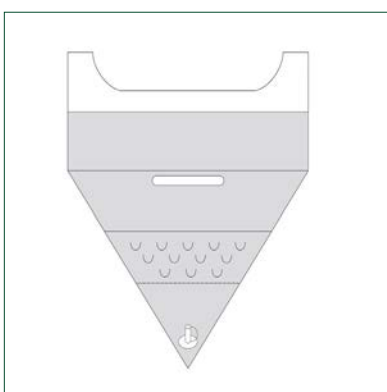


Varenr. sterilt	Varenr. usterilt	Beskrivelse	Inderæske/trp. karton
5218	-	Opsamlingspose m. bundaftapning og si 50x60cm, klæb	8/16

VÆSKEOPSAMLINGSGPOSE

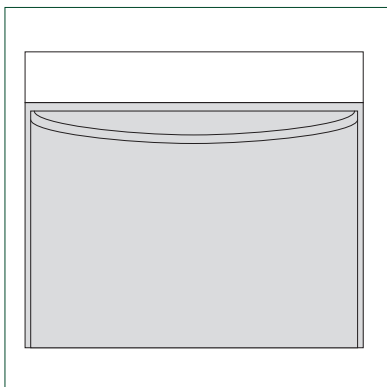


Varenr. sterilt	Varenr. usterilt	Beskrivelse	Inderæske/trp. karton
706035	976035	Væskeopsamlingspose 40x35cm, klæb	30/120

KNÆARTROSKOPI POSE

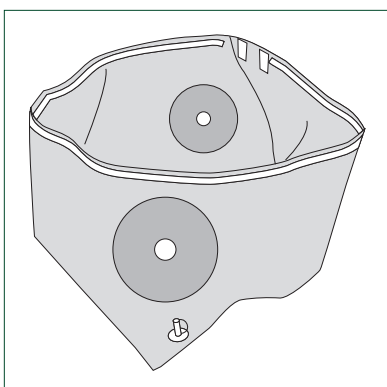


Varenr. sterilt	Varenr. usterilt	Beskrivelse	Inderæske/trp. karton
69200	79200	Knæartroskopi pose 60x120cm, hul 7 og 5cm elastisk	12/24

SKULDEROPSAMLINGSDRAPS

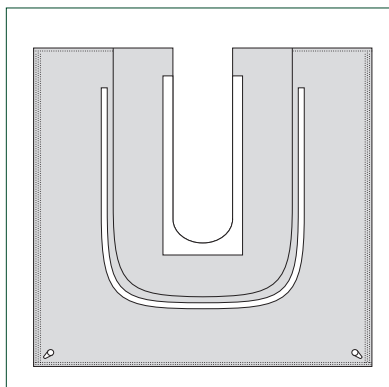


Varenr. steril	Varenr. usteril	Beskrivelse	Inderæske/ trp. karton
5217	9317	Væskeopsamlingspose 83x88cm, slids 15x52cm, klæb, indpakket	8/16

ABDOMINAL OPSAMLINGSDRAPS

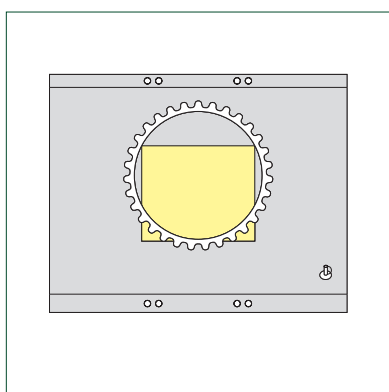


Varenr. steril	Varenr. usteril	Beskrivelse	Inderæske/ trp. karton
83200	983200	Væskeopsamlingspose m. incisionsfilm 100x80cm, incisionsfilm 38x32cm	10/20

INSTRUMENTDRAPS

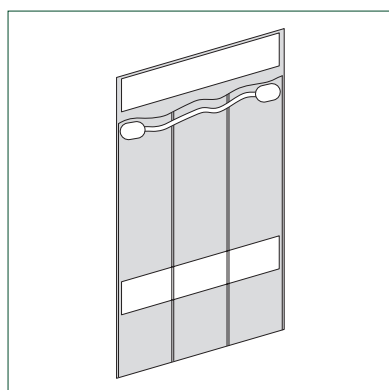


Varenr. steril	Varenr. usteril	Beskrivelse	Inderæske/ trp. karton
705860	815320	Instrumentpose 30x50cm, klæb, 3 rum	35/70

INSTRUMENTDRAPS

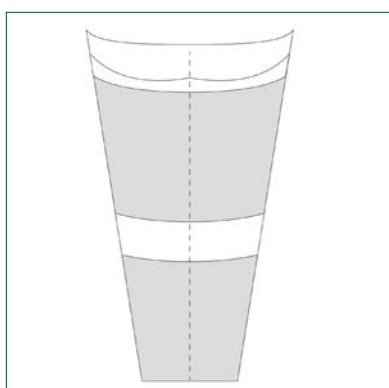


Varenr. steril	Varenr. usteril	Beskrivelse	Inderæske/ trp. karton
-	975880	Instrumentpose 25x40cm, klæb	

INSTRUMENTPOSE

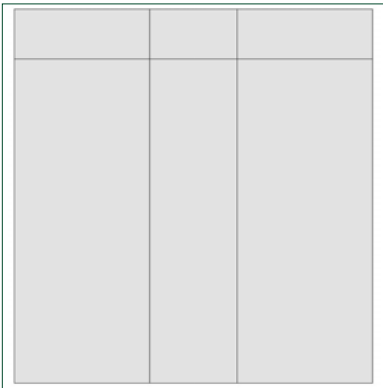


Varenr. steril	Varenr. usterilt	Beskrivelse	Inderæske/ trp. karton
-	977050	Instrumentpose 45x48cm	

SUG- OG DIATERMIPOSE

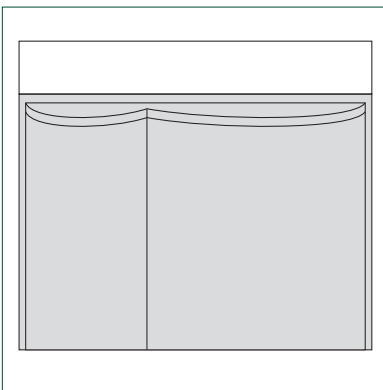


Varenr. steril	Varenr. usterilt	Beskrivelse	Inderæske/ trp. karton
707035	977035	Sug- og diatermipose, 40x35cm, klæb	30/120

SLANGEPOSE

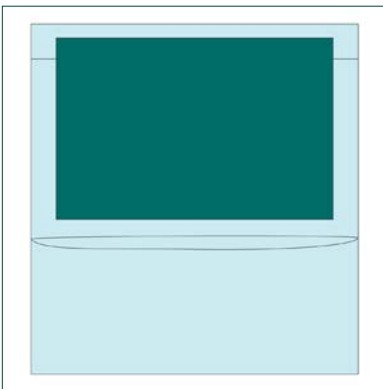


Varenr. steril	Varenr. usterilt	Beskrivelse	Inderæske/ trp. karton
80003113	8183	Slangepose 90x92cm, absorberende stykke 70x50cm, indpakket	12/48

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OPSAMLINGSPOSE




Varenr. steril	Varenr. usterilt	Beskrivelse	Inderæske/ trp. karton
84541230	922709	Opsamlingspose 75x120cm, indpakket	16/32

KAMERAOVERTRÆK

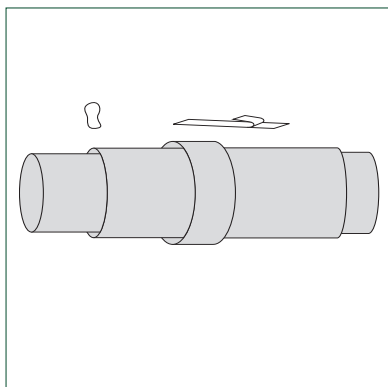


Varenr. sterilt	Varenr. usterilt	Beskrivelse	Inderæske/trp. karton
705740	815330	Kameraovertræk 8x120cm, lige spids	30/180

KAMERAOVERTRÆK

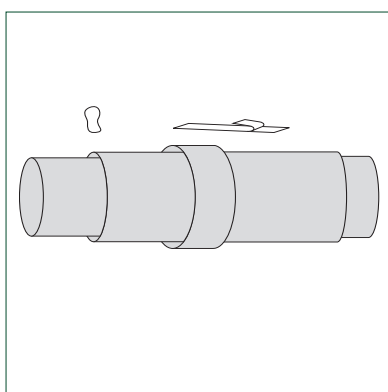


Varenr. sterilt	Varenr. usterilt	Beskrivelse	Inderæske/trp. karton
705750	815331	Kameraovertræk 14x250cm, lige spids	15/90

KAMERAOVERTRÆK

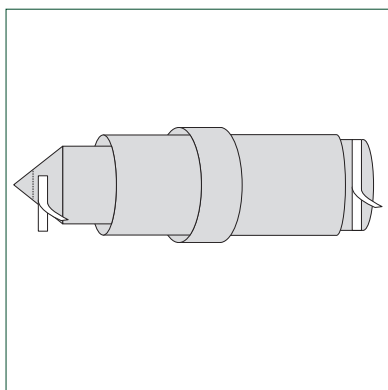


Varenr. sterilt	Varenr. usterilt	Beskrivelse	Inderæske/trp. karton
705820	815332	Kameraovertræk 14x250cm, perforeret spids	20/120

KAMERAOVERTRÆK

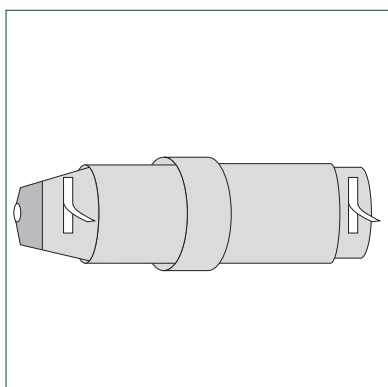


Varenr. sterilt	Varenr. usterilt	Beskrivelse	Inderæske/trp. karton
705830	815333	Kameraovertræk 18x250cm, elastisk membran	15/90

KAMERAOVERTRÆK

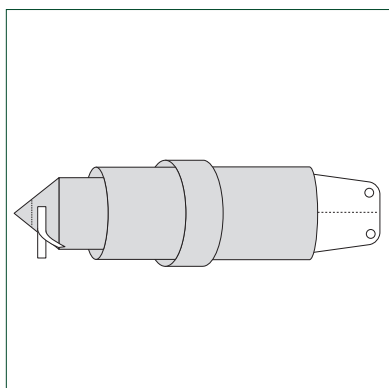


Varenr. steril	Varenr. usterilt	Beskrivelse	Inderæske/trp. karton
63047	-	Kameraovertræk 14x254cm, med papmontering og perforeret spids	80/160

BESKYTTESPOSE

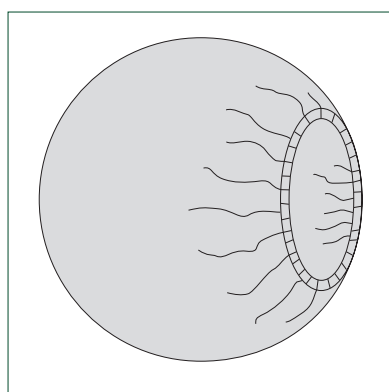


Varenr. steril	Varenr. usterilt	Beskrivelse	Inderæske/trp. karton
63010	-	Beskyttelsespose, rund 75cm	18/36
63011	-	Beskyttelsespose, rund 90cm	22/44
63012	-	Beskyttelsespose, rund 140cm	11/22

BESKYTTESPOSE

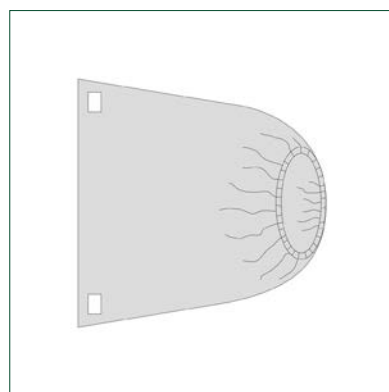


Varenr. steril	Varenr. usterilt	Beskrivelse	Inderæske/trp. karton
63013	-	Beskyttelsespose, firkantet, 90x75cm	15/30

INSTRUMENTAFDÆKNING

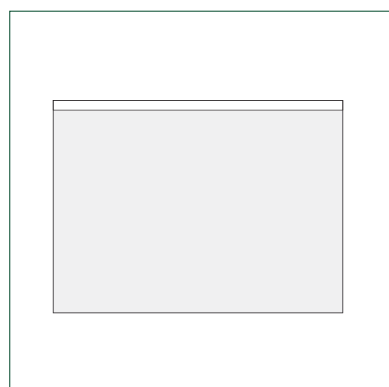


Varenr. steril	Varenr. usterilt	Beskrivelse	Inderæske/trp. karton
705815	815425	Instrumentafdækning 90x70cm, transparent, m. klæb	40/80

C-BUE AFDÆKNING

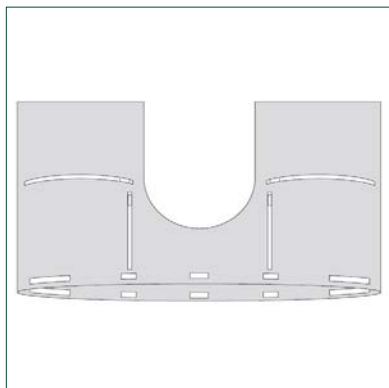


Varenr. sterilt	Varenr. usterilt	Beskrivelse	Inderæske/trp. karton
63057	-	C-bue afdækning, et stykke, heldækkende 152x265cm	8/16

C-BUE AFDÆKNING

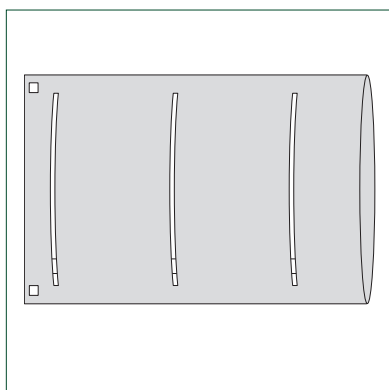


Varenr. sterilt	Varenr. usterilt	Beskrivelse	Inderæske/trp. karton
63048	-	C-bue afdækning, et stykke, delvist dækkende 117x183cm	38/76

MIKROSKOPAFDÆKNING M. ELASTISK LINSE

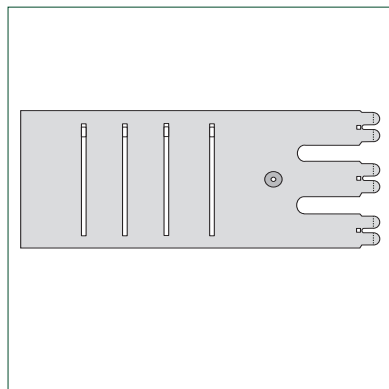


Varenr. sterilt	Varenr. usterilt	Beskrivelse	Inderæske/trp. karton
63054	-	Mikroskopafdækning m. elastisk linse, fleksibel, 117x254cm	10/20

MIKROSKOPAFDÆKNING WILD

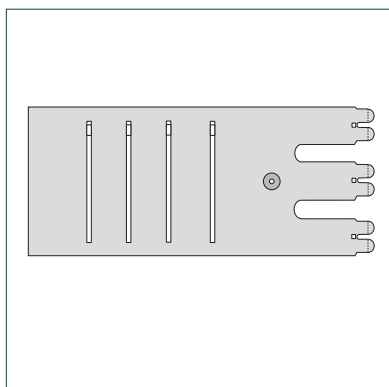


Varenr. sterilt	Varenr. usterilt	Beskrivelse	Inderæske/trp. karton
63051	-	Mikroskopafdækning WILD (objektiv 68mm) 117x254cm	10/20

MIKROSKOPAFDÆKNING ZEISS MD

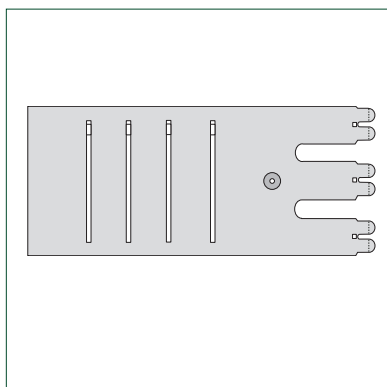


Varenr. sterilt	Varenr. usterilt	Beskrivelse	Inderæske/trp. karton
63052	-	Mikroskopafdækning Zeiss MD (objektiv 65mm) 117x254cm	10/20
63053	-	Mikroskopafdækning Zeiss MD (objektiv 65mm) 117x305cm	8/16

AFDÆKNING TIL ULTRALYDSPROBE

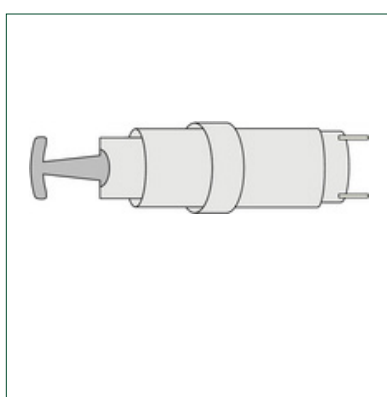


Varenr. sterilt	Varenr. usterilt	Beskrivelse	Inderæske/trp. karton
63058	-	Afdækning til ultralydsprobe 15x236cm, lille T-hoved	30/30

AFDÆKNING TIL ULTRALYDSPROBE

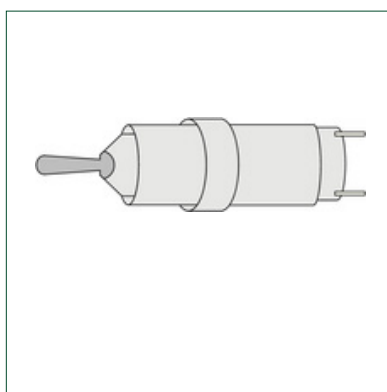


Varenr. sterilt	Varenr. usterilt	Beskrivelse	Inderæske/trp. karton
63059	-	Afdækning til ultralydsprobe 13x236cm, lige hoved	35/35

RØNTGENOVERTRÆK

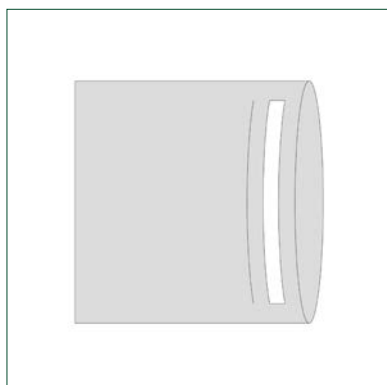


Varenr. sterilt	Varenr. usterilt	Beskrivelse	Inderæske/trp. karton
705856	815362	Røntgenovertræk 60x60cm	35/75

ARMLÆNSOVERTRÆK

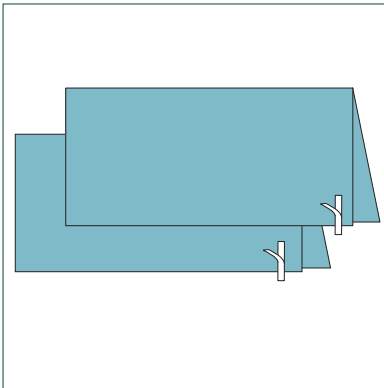


Varenr. steril	Varenr. usterilt	Beskrivelse	Inderæske/ trp. karton
63817	93912	Armlænsovertræk 35x73cm, 2 stk.	60/120

OVERTRÆK TIL LAMPEHÅNDTAG

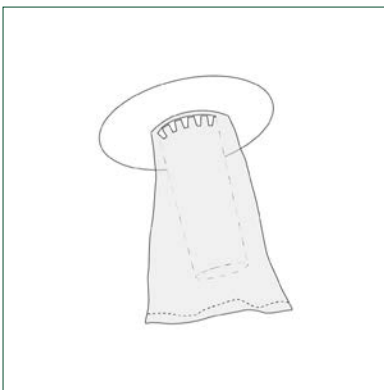


Varenr. steril	Varenr. usterilt	Beskrivelse	Inderæske/ trp. karton
63049	-	Overtræk til lampehåndtag, universal, Ø 4,5x15cm	40/80

AFDÆKNING M. FINGERKANT M. POSE

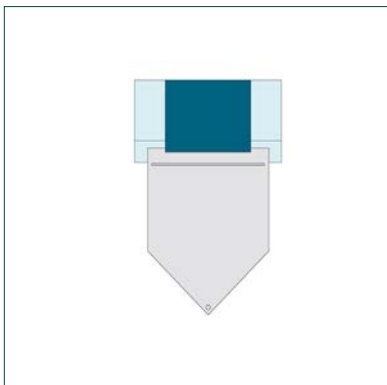


Varenr. steril	Varenr. usterilt	Beskrivelse	Inderæske/ trp. karton
229	9229	Afdækning m. fingerkant, m. pose 85x120cm	20/40

AFDÆKNING M. FINGERKANT

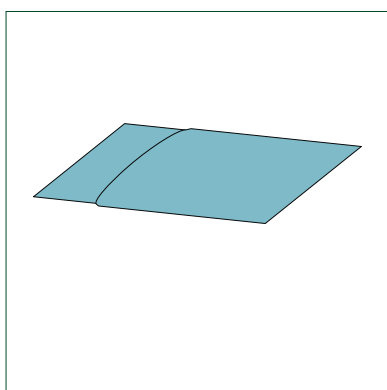


Varenr. steril	Varenr. usterilt	Beskrivelse	Inderæske/ trp. karton
63835	93936	Afdækning m. fingerkant, 75x100cm, PRIMARY	39/78

PERINEAL AFDÆKNING

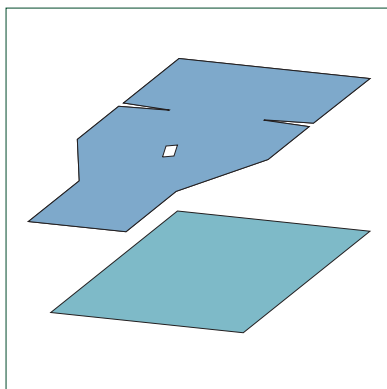


Varenr. steril	Varenr. usterilt	Beskrivelse	Inderæske/ trp. karton
706200	967062	Perineal afdækning 75x120cm, 8x12cm + Afdækning 75x90cm	20/40

OP-TAPE, VÆSKETÆT

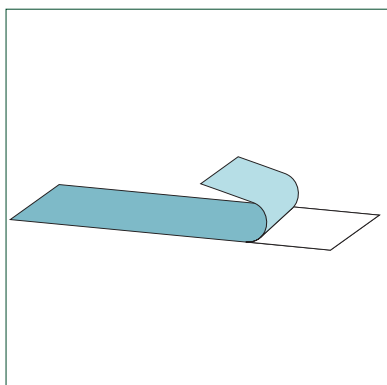


Varenr. steril	Varenr. usterilt	Beskrivelse	Inderæske/ trp. karton
381035	911500	Op-tape 9x49cm	100/400
381045	911500	Op-tape 9x49cm, 2 stk	120/480

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SLANGEHOLDER




Varenr. steril	Varenr. usterilt	Beskrivelse	Inderæske/trp. karton
708131	824098	Slangeholder 2,5x30cm, velcro, klæb	50/200
80006076	-	Slangeholder 5x15cm, velcro, klæb	50/200

LITOTOMI BENPOSER

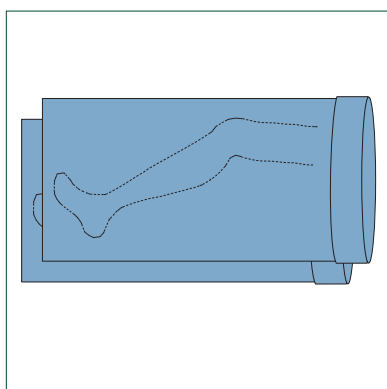


Varenr. steril	Varenr. usterilt	Beskrivelse	Inderæske/trp. karton
610930	906109	Litotomi benposer 2 stk., 75x120cm	36/72
255	9855	Litotomi benposer 2 stk., 75x150cm, indpakket	22/44

LITOTOMI BENPOSER

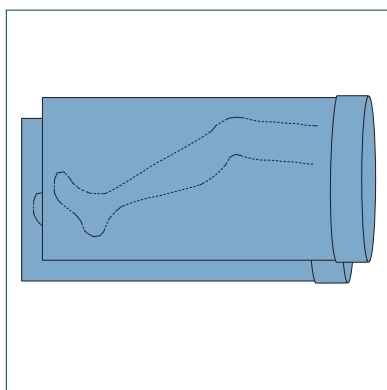


Varenr. steril	Varenr. usterilt	Beskrivelse	Inderæske/trp. karton
901680	-	Litotomi benposer, 2 stk. (plast), 75x120cm	66/132

STOCKINETTE

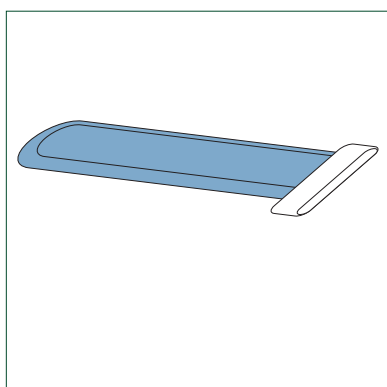


Varenr. steril	Varenr. usterilt	Beskrivelse	Inderæske/trp. karton
611105	946111	Stockinette, S, 22x75cm	22/44
611205	946112	Stockinette, L, 32x120cm	14/28

STOCKINETTE M. OMBUK

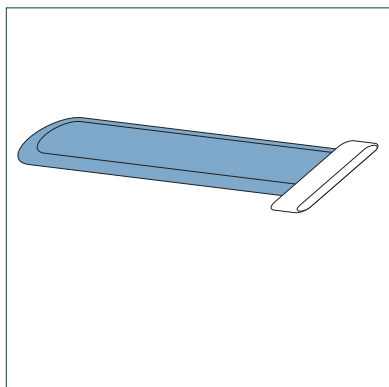


Varenr. steril	Varenr. usterilt	Beskrivelse	Inderæske/trp. karton
269	8008060	Stockinette 23x71cm, indpakket	10/20
273	9056	Stockinette 23x107cm, indpakket	6/24
274	9057	Stockinette 31x122cm, indpakket	5/20

GENITAL AFDÆKNING

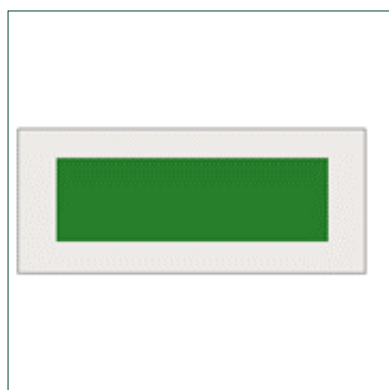


Varenr. steril	Varenr. usterilt	Beskrivelse	Inderæske/trp. karton
63062	-	Genital afdækning 20x42cm	105/210


FODAFDÆKNING

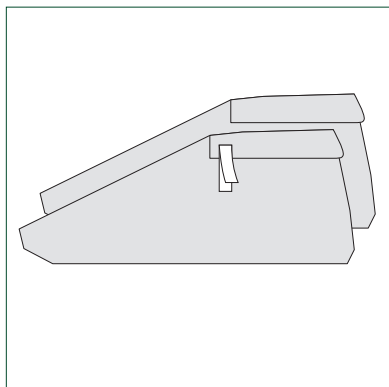


Varenr. steril	Varenr. usterilt	Beskrivelse	Inderæske/trp. karton
691005	991005	Fodafdækning, transparent 36x28cm 2 stk.	132/264

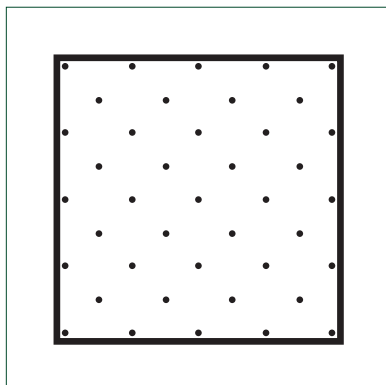STANDARD OPERATIONSSERVIETTER, HVID, 70G/M²

Varenr. steril	Varenr. usterilt*	Beskrivelse	Inderæske/trp. karton
188105		Rød 5 stk., 3x40cm	250/2000
185060		Orange 5 stk., 10x40cm	125/750
185260		Grøn 5 stk., 20x40cm	65/390
185460		Brun 5 stk., 30x40cm	45/270
185660		Blå 5 stk., 40x40cm	60/360
185830		Grå 1 stk., 40x65cm	30/180
185860		Sort 5 stk., 40x65cm	30/180

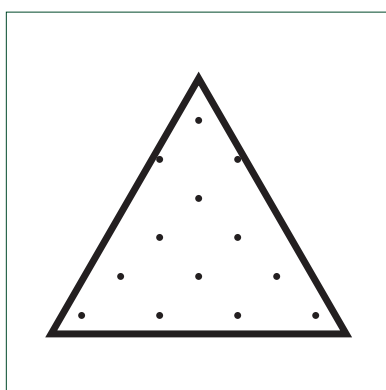
STANDARD OPERATIONSSERVIETTER, HVID, 70G/M²

Varenr. steril	Varenr. usterilt*	Beskrivelse	Inderæske/trp. karton
185105	185100	Gul 5 stk., 7,5x7,5cm, 6 lag	100/800
185305		Orange 5 stk., 10x10cm, 6 lag	90/540
185310		Brun 10 stk., 10x10cm, 6 lag	90/540
185405	185400	Grøn 5 stk., 10x20cm, 6 lag	90/540
185410		Blå 10 stk., 10x20cm, 6 lag	90/540

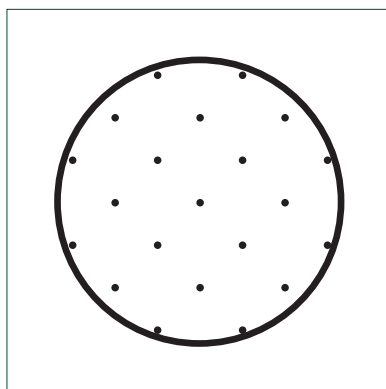
STANDARD OPERATIONSTAMPONER, HVID, 40G/M²

Varenr. steril	Varenr. usterilt*	Beskrivelse	Inderæske/trp. karton
154160		Gul 5 stk., No 1, ø 20 mm	175/1050
154360		Blå 5 stk., No 3, ø 27 mm	150/900
154460		Grå 5 stk., No 4, ø 40 mm	75/450
154560		Sort 5 stk., No 5, ø 47 mm	75/450

*: Usterilt produkt pakket i pose

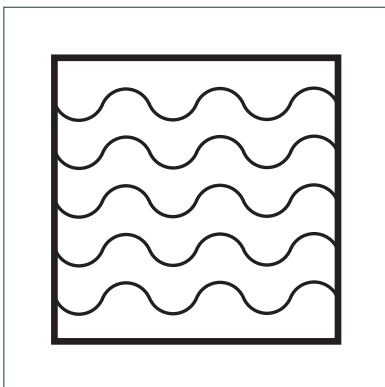SPECIAL OPERATIONSSERVIETTER, 130G/M², 3 LAG, HVID


Varenr. steril	Varenr. usterilt*	Beskrivelse	Inderæske/trp. karton
187605	187600	Rød 5 stk., 10x60cm	40/240
187705	187700	Brun 5 stk., 30x30cm	30/180
187802	187800	Grøn 2 stk., 40x40cm	24/144
187805	187800	Blå 5 stk., 40x40cm	25/150
187902	187900	Sort 2 stk., 40x60cm	16/96

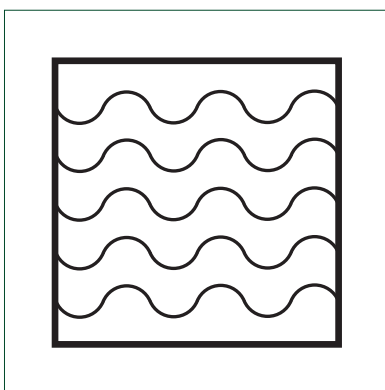SPECIAL OPERATIONSSERVIETTER, GRØN 130G/M², 3 LAG

Varenr. steril	Varenr. usterilt*	Beskrivelse	Inderæske/trp. karton
187922	187920	Sort 2 stk., 40x60cm	16/96


*: Usterilt produkt pakket i pose

OPERATIONSSERVIETTER, HVID

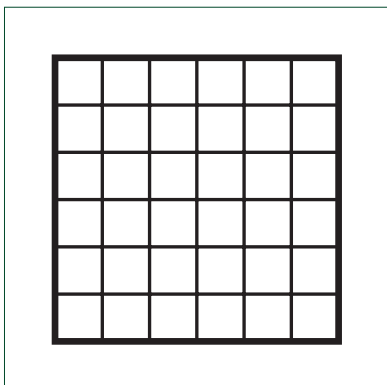


Varenr. steril	Varenr. usterilt*	Beskrivelse	Inderæske/trp. karton
175131		Grå 1 stk., 45x70cm, 3 lag	22/132
175160		Sort 5 stk., 45x70cm, 3 lag	25/150
175260		Brun 5stk., 30x45cm, 3 lag	55/330
175360		Blå 5 stk., 40x45cm, 3 lag	45/270

OPERATIONSSERVIETTER, HVID

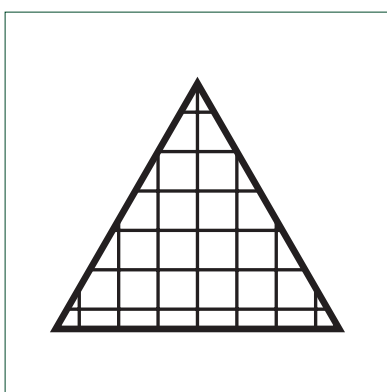

Varenr. steril	Varenr. usterilt*	Beskrivelse	Inderæske/trp. karton
159160	159100	Orange 5 stk., 10x10cm, 12 lag	130/780
159175		Gul 10 stk., 10x10cm, 12 lag	130/780
159460	159400	Lilla 5 stk., 10x60cm, 4 lag	125/750
159475		Blå 10 stk., 10x60cm, 4 lag	110/660
159660	159600	Grøn 5 stk., 10x60cm, 8 lag	65/390
159675		Grøn 10 stk., 10x60cm, 8 lag	70/420
159860		Rød 5 stk., 10x60cm, 12 lag	55/330

OPERATIONSTAMPONER, HVID

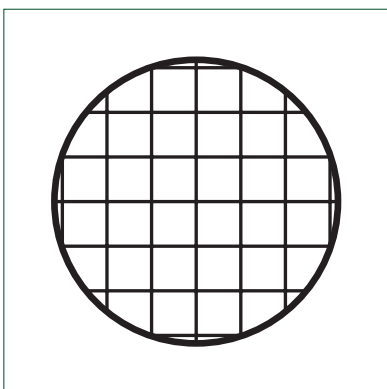

Varenr. steril	Varenr. usterilt*	Beskrivelse	Inderæske/trp. karton
150060	150000	Orange 5 stk., No 0, ø 18mm	200/1200
150160	150100	Gul 5 stk., No 1, ø 26 mm	175/1050
150360	150300	Blå 5 stk., No 3, ø 30 mm	150/900
150460	150400	Grå 5 stk., No 4, ø 35 mm	100/600
150560	150500	Sort 5 stk., No 5, ø 55 mm	75/450

*: Usterilt produkt pakket i pose



BARRIER® personalebeklædning

Sterile operationskitler medvirker ikke kun til at forhindre infektioner i operationssåret, de beskytter samtidig operationspersonalet mod forurenende væsker.

BARRIER® operationskitler dækker forskellige behov for beskyttelse, lige fra mindre invasive indgreb med væskeafvisende materiale til våde operationer med plastforstærkning på forstykket samt væsketætte ærmer. De sværeste betingelser ved specielle operationer kan mødes med operationskitler, der er helt væsketætte.

BARRIER operationskitler har meget høj komfort, fordi de er fremstillet af åndbare og bløde materialer.

Personalebeklædningen er udviklet til at sørge for sikkerhed for patienten og komfort for sundhedspersonalet. Serien af engangsuniformer og warm-up jackets giver den komfort og kvalitet, man har ved at få en ny uniform hver dag. Engangsuniformer er en del af hospitalets infektionskontrol.³

Renrumsdragterne yder en effektiv infektionsbarriere⁴ og reducerer flowet af bakteriefyldte hudpartikler fra personalet til omgivelserne. BARRIER hovedbeklædning yder høj komfort og reducerer risikoen for kontaminering af operationssåret.⁵

De medicinske ansigtsmasker fremstilles af højkvalitetsmaterialer. De filtrerer bakterier fra og yder stænkbeskyttelse.⁶

Mölnlycke tilbyder desuden en supplerende serie af beklædning med henblik på sikkerhed og komfort for hospitalspersonale, patienter og besøgende. Personalebeklædning såsom beskyttelsesskitler understøtter hospitalets infektionskontrolrutiner.

BARRIER EasyWarm® aktivt selvvarmende tæppe hjælper med at forebygge hypotermi i det perioperative miljø.⁷

Vælg den rigtige operationskittel til operationen!

Operationskitler er designet til at beskytte patienter og personale mod krydskontaminering. Mölnlycke® tilbyder et bredt BARRIER® sortiment, der giver dig mulighed for at vælge den rigtige operationskittel til operationen.

Materialer, der er åndbare, bløde og støjsvage, hjælper personalet med at holde fokus på den aktuelle opgave.

Kitlens design omfatter ergonomiske egenskaber, der giver stor bevægelsesfrihed, herunder:



Skulderlæg




Fremadvendte ærmer



Lange ærmer



Forbedret halslukning*

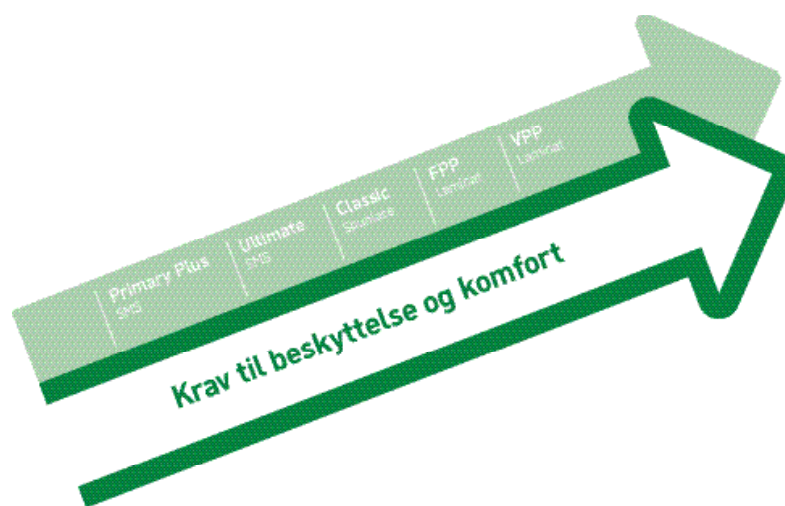

Materialeegenskaber

SMS

- Nonwoven polypropylen (spunbond for styrke, smelteblæst for væskeafvisende)
- Åndbart materiale
- Lav partikelafgift

Spunlace

- Nonwoven pulp/polyesterfibre fremstillet af mere end 50 % FSC certificeret biobaseret materiale
- Åndbart materiale
- Blødt tekstillignende materiale for øget komfort

Laminat

- Flerlagsmateriale, polyethylenfilm og polyester/polyethylen nonwoven
- Åndbart materiale med mikroporøs film, der lader luft og fugt bevæge sig fra kroppen til kittlens yderside
- Polyethylenfilm forhindrer væskeindtrængen
- Komfortlag mod huden for øget komfort
- Lav partikelafgift

* Primary Plus og VPP kittel

Procedure til påtagning af operationskitler

Tag den sterile kittel og gå ind i et område, hvor kitlen kan åbnes uden risiko for kontaminering.



1. Stik begge hænder ind i ærmehullerne. Hold kitlen på afstand af kroppen og lad den falde sig helt ud.



2. Lad begge hænder glide ind i ærmehullerne og ærmerne, hold hænderne på skulderniveau og på afstand af kroppen.



3a. Ved åben handskepåtagnin, trækkes manchetten hen til tommelfingerniveau.

3b. Ved lukket handskepåtagnin, skubbes hænderne frem til manchetkanten (lille billede).



4. Den assisterende person bør trække kitlen op over skulderne, idet vedkommende kun berører indersiden af kitlen.



5. Arrangér velcrolukningen i nakken.



6. Bind kittlens indvendige bånd.



7. Når handskerne er taget på, tages der fat i båndets pap med begge hænder. Adskil det venstre udvendige bånd fra pappet og hold båndet i venstre hånd.



8. Giv båndets pap til den assisterende person og drej så trekvart gang mod venstre, mens den assisterende person trækker det udvendige bånd ud til sin fulde længde.



9. Træk båndet ud af pappet, som den assisterende person holder, og bind det sammen med det udvendige bånd på venstre side.

OPERATIONSKITTEL CLASSIC ÅBEN RYG STANDARD YDEEVNE (SP) I FSC CERTIFICERET MATERIALE




Varenr. steril	Varenr. usterilt	Beskrivelse	Inderæske/trp. karton
840101	940101	Classic åben ryg SP, L 121cm, 2 håndklæder, indpakket	20/40
840102	940102	Classic åben ryg SP, XL-L 145cm, 1 håndklæde	20/40

OPERATIONSKITTEL CLASSIC STANDARD YDEEVNE (SP) I FSC CERTIFICERET MATERIALE




Varenr. steril	Varenr. usterilt	Beskrivelse	Inderæske/trp. karton
850101	950101	Classic SP, M 121 cm, 2 håndklæder, indpakket	20/40
850102	950102	Classic SP, L 121 cm, 2 håndklæder, indpakket	20/40
850104	-	Classic SP, L-L 131 cm, 2 håndklæder, indpakket	20/40
850103	950103	Classic SP, L-L 131 cm	22/44
850106	950104	Classic SP, XL 132 cm, 2 håndklæder, indpakket	18/36
850108	-	Classic SP, XL-L 145 cm, 2 håndklæder, indpakket	18/36
850107	950105	Classic SP, XL-L 145 cm	18/36
850110	950106	Classic SP, XXL-L 148 cm, 2 håndklæder, indpakket	18/36
850111	950107	Classic SP, XXL-XL 161 cm, 2 håndklæder, indpakket	16/32

OPERATIONSKITTEL CLASSIC HØJ YDEEVNE (HP) I FSC CERTIFICERET MATERIALE

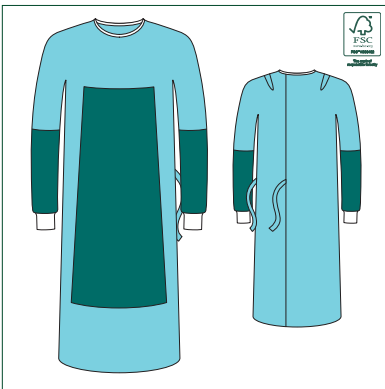

Varenr. steril	Varenr. usterilt	Beskrivelse	Inderæske/trp. karton
860101	960101	Classic HP, L 121 cm, 2 håndklæder, indpakket	18/36
860102	960102	Classic HP, L-L 131 cm	18/36
860103	-	Classic HP, L-L 131 cm, 2 håndklæder, indpakket	18/36
860105	960104	Classic HP, XL 132 cm	18/36
860106	-	Classic HP, XL 132 cm, 2 håndklæder, indpakket	16/32
860107	960105	Classic HP, XL-L 145 cm	18/36
860108	-	Classic HP, XL-L 145 cm, 2 håndklæder, indpakket	16/32
860110	960107	Classic HP, XXL-L 148 cm, 2 håndklæder, indpakket	16/32
860111	960108	Classic HP, XXL-XL 161 cm, 2 håndklæder, indpakket	16/32

UROLOGI OPERATIONSKITTEL CLASSIC HØJ YDEEVNE (HP) I FSC CERTIFICERET MATERIALE

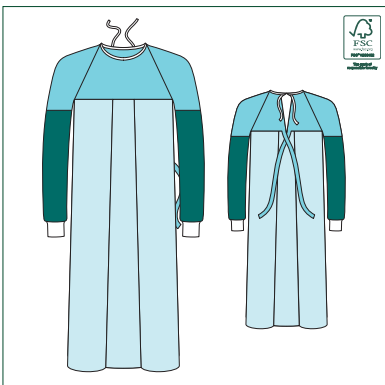

Varenr. steril	Varenr. usterilt	Beskrivelse	Inderæske/trp. karton
870301	970301	Urologikittel HP, L 141cm, 2 håndklæder, indpakket	16/32
870302	970302	Urologikittel HP, XL 160cm, 2 håndklæder, indpakket	16/32

OPERATIONSKITTEL ULTIMATE STANDARD YDEEVNE (SP)


Varenr. steril	Varenr. usterilt	Beskrivelse	Inderæske/trp. karton
680102	780102	Ultimate SP, L 119cm, 2 håndklæder, indpakket	18/36
680103	780103	Ultimate SP, L-L 134cm, 2 håndklæder, indpakket	16/32
680003	780103	Ultimate SP, L-L 134cm	16/32
680104	780104	Ultimate SP, XL 129cm, 2 håndklæder, indpakket	16/32
680105	780105	Ultimate SP, XL-L 144cm, 2 håndklæder, indpakket	16/32
680005	780105	Ultimate SP, XL-L 144cm	16/32
680106	780106	Ultimate SP, XXL-L 145cm, 2 håndklæder, indpakket	14/28
680006	780106	Ultimate SP, XXL-L 145cm	14/28

OPERATIONSKITTEL ULTIMATE HØJ YDEEVNE (HP)


Varenr. steril	Varenr. usterilt	Beskrivelse	Inderæske/trp. karton
690102	790102	Ultimate HP, L 119cm, 2 håndklæder, indpakket	16/32
690103	790103	Ultimate HP, L-L 134cm, 2 håndklæder, indpakket	14/28
690003	790103	Ultimate HP, L-L 134cm	14/28
690104	790104	Ultimate HP, XL 129cm, 2 håndklæder, indpakket	14/28
690105	790105	Ultimate HP, XL-L 144cm, 2 håndklæder, indpakket	14/28
690005	790105	Ultimate HP, XL-L 144cm	14/28
690106	790106	Ultimate HP, XXL-L 145cm, 2 håndklæder, indpakket	12/24
690006	790106	Ultimate HP, XXL-L 145cm	12/24
690107	790107	Ultimate HP, XXL-XL 165cm, 2 håndklæder, indpakket	12/24

OPERATIONSKITTEL PRIMARY PLUS STANDARD YDEEVNE (SP)


Varenr. steril*	Varenr. steril**	Varenr. usterilt	Beskrivelse	Inderæske/trp. karton
580200	580100	480100	Primary Plus SP, L, 119cm	20/40
580201	580101	480101	Primary Plus SP, L-L, 134cm	18/36
580202	580102	480102	Primary Plus SP, XL, 129cm	18/36
580203	580103	480103	Primary Plus SP, XL-L, 144cm	16/32
580204	580104	480104	Primary Plus SP, XXL-L, 145cm	16/32
580205	580105	480105	Primary Plus SP, XXL-XL, 157cm	16/32
580206	580106	480106	Primary Plus SP, XXL-XXL, 165cm	16/32

* 2 håndkl. +indpak. ** ingen håndkl.

OPERATIONSKITTEL PRIMARY PLUS HØJ YDEEVNE (HP)


Varenr. steril*	Varenr. steril**	Varenr. usterilt	Beskrivelse	Inderæske/trp. karton
590200	590100	490100	Primary Plus HP, L, 119cm	18/36
590201	590101	490101	Primary Plus HP, L-L, 134cm	16/32
590202	590102	490102	Primary Plus HP, XL, 129cm	16/32
590203	590103	490103	Primary Plus HP, XL-L, 144cm	14/28
590204	590104	490104	Primary Plus HP, XXL-L, 145cm	14/28
590205	590105	490105	Primary Plus HP, XXL-XL, 157cm	14/28

* 2 håndkl. +indpak. ** ingen håndkl.

OPERATIONSKITTEL PRIMARY PLUS, ISCC, STANDARD YDEEVNE (SP)



Varenr. steril*	Varenr. usterilt	Beskrivelse	Inderæske/ trp. karton
583100	483100	Primary Plus SP, L, 119cm	20/40
583101	483101	Primary Plus SP, L-L, 134cm	18/36
583102	483102	Primary Plus SP, XL, 129cm	18/36
583103	483103	Primary Plus SP, XL-L, 144cm	16/32
583104	483104	Primary Plus SP, XXL-L, 145cm	16/32
583105	483105	Primary Plus SP, XXL-XL, 157cm	16/32
583106	483106	Primary Plus SP, XXL-XXL, 165cm	16/32

* ingen
håndkl.


OPERATIONSKITTEL PRIMARY PLUS, ISCC, HØJ YDEEVNE (HP)



Varenr. steril*	Varenr. usterilt	Beskrivelse	Inderæske/ trp. karton
593100	493100	Primary Plus HP, L, 119cm	18/36
593101	493101	Primary Plus HP, L-L, 134cm	16/32
593102	493102	Primary Plus HP, XL, 129cm	16/32
593103	493103	Primary Plus HP, XL-L, 144cm	14/28
593104	493104	Primary Plus HP, XXL-L, 145cm	14/28
593105	493105	Primary Plus HP, XXL-XL, 157cm	14/28
593106	493106	Primary Plus HP, XXL-XXL, 165 cm	14/28

* ingen
håndkl.

OPERATIONSKITTEL FLUID PROTECTION PLUS HØJ YDEEVNE (HP)

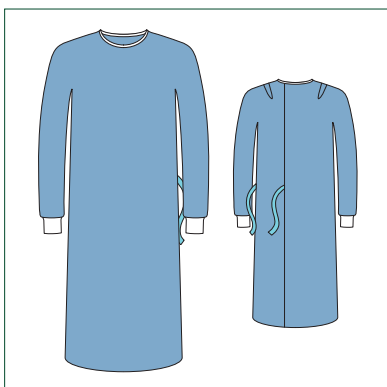


Varenr. steril	Varenr. usterilt	Beskrivelse	Inderæske/trp. karton
670102	770102	FPP HP L, 121cm, 2 håndklæder, indpakket	32/64
670103	770103	FPP HP L-L, 131cm, 2 håndklæder, indpakket 13 mm	30/60
670104	770104	FPP HP XL, 132cm, 2 håndklæder, indpakket	28/56
670105	770105	FPP HP XL-L, 145cm, 2 håndklæder, indpakket	28/56
670107	770107	FPP HP XXL-L, 148cm, 2 håndklæder, indpakket	26/52
670106	770106	FPP HP XXL-XL, 161cm, 2 håndklæder, indpakket	26/52

OPERATIONSKITTEL VIRUS PROTECTION PLUS, AAMI 4



Varenr. steril	Varenr. usterilt	Beskrivelse	Inderæske/trp. karton
652400	752400	VPP, AAMI 4, L, 122cm, 2 håndklæder, indpakket	14/28
652401	752401	VPP, AAMI 4, L-L, 126cm, 2 håndklæder, indpakket	13/26
652402	752402	VPP, AAMI 4, XL, 130cm, 2 håndklæder, indpakket	13/26
652403	752403	VPP, AAMI 4, XL-L, 135cm, 2 håndklæder, indpakket	12/24
652404	752404	VPP, AAMI 4, XXL-L, 140cm, 2 håndklæder, indpakket	11/22
652405	752405	VPP, AAMI 4, XXL-XL, 155 cm, 2 håndklæder, indpakket	11/22

STERILT ÆRME (HP)

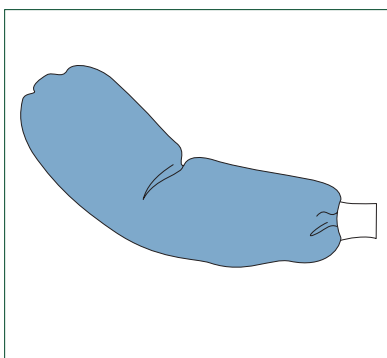

Varenr. steril	Varenr. usterilt	Beskrivelse	Inderæske/trp. karton
623501	-	Ærme, længde 56 cm. Forstærket spunlace nonwoven	36/72



BARRIER® hovedbeklædning

Kirurgisk hovedbeklædning hjælper med at beskytte patienter mod infektioner i operationssåret¹⁰

Operationspersonale bør være ekstra opmærksomme på at dække de kropsdele, der udgør en trussel overfor patienten pga. risikoen for at fremmede partikler falder ned i operationssåret. Dette gælder især for hovedet - specifikt håret.

Hovedbeklædning er udviklet til at forebygge partikler så som hår eller hud fra at falde fra operationspersonalet ned i såret. Kirurgisk hovedbeklædning kan hjælpe med at reducere risikoen for infektioner i operationssåret¹¹.

Vores brede sortiment af BARRIER hovedbeklædning tilbyder forskellige designs og pasforme, og dækker kravene til mange typer operationer samt forskellig frisurer, hovedformer og -størrelser. BARRIER hovedbeklædning kan hjælpe med at reducere risikoen for at partikler falder ned i såret.¹².

OPERATIONSHUE ANNIE



Varenr.	Beskrivelse	Inderæske/ trp. karton
621500	Operationshue L (elastisk), blandede farver	150/600
621715	Operationshue M (elastisk), blå	150/600
621725	Operationshue M (elastisk), grøn	150/600
621735	Operationshue M (elastisk), hvid	150/600
621815	Operationshue L (elastisk), blå	150/600
621825	Operationshue L (elastisk), grøn	150/600
621835	Operationshue L (elastisk), hvid	150/600
621925	Operationshue XL (elastisk), grøn	150/600

OPERATIONSHUE KOSACK



Varenr.	Beskrivelse	Inderæske/ trp. karton
621000	Operationshue one-size (elastisk), grøn	120/960
621001	Operationshue one-size (elastisk), lilla	120/960
621005	Operationshue one-size (elastisk), blå	120/960

OPERATIONSHUE JACK



Varenr.	Beskrivelse	Inderæske/ trp. karton
620300	Operationshue one-size (elastisk), grøn	150/1200

OPERATIONSHUE PHILIP



Varenr.	Beskrivelse	Inderæske/ trp. karton
621301	Operationshue one-size (bindebånd), grøn	100/500

OPERATIONSHUE FLORY



Varenr.	Beskrivelse	Inderæske/ trp. karton
620500	Operationshue one-size (bindebånd), grøn	100/500

OPERATIONSHUE PEGGY



Varenr.	Beskrivelse	Inderæske/ trp. karton
621700	Operationshue one-size (elastisk), grøn	120/960

OPERATIONSHUE, HJELM, TUCK



Varenr.	Beskrivelse	Inderæske/ trp. karton
620100	Hjelm one-size (bindebånd), grøn	120/960
620105	Hjelm one-size (bindebånd), blå	100/500

OPERATIONSHUE ANNIE



Varenr.	Beskrivelse	Inderæske/ trp. karton
621845	Operationshue m. svedbånd, L (elastisk), grøn	120/480

OPERATIONSHUE COMMODUS



Varenr.	Beskrivelse	Inderæske/ trp. karton
622010	Operationshue m/svedbånd, one-size (elastisk), blå/grøn/hvid	60/480

OPERATIONSHUE GLENN



Varenr.	Beskrivelse	Inderæske/ trp. karton
620200	Operationshue med stor krave, one-size (svedbånd, bindebånd), grøn	40/200

OPERATIONSHUE GLENN PRO



Varenr.	Beskrivelse	Inderæske/ trp. karton
620205	Operationshue med stor krave, one-size (svedbånd, bindebånd), blå	35/175

OPERATIONSHUE ALBIN



Varenr.	Beskrivelse	Inderæske/ trp. karton
620250	Operationshue med kort halskrave, one-size (svedbånd, bindebånd), grøn	60/300

OPERATIONSHUE MISS



Varenr.	Beskrivelse	Inderæske/ trp. karton
42022	Operationshue one-size (elastisk), latex, blå	120/960
42023	Operationshue one-size (elastisk), latex, grøn	120/960



OPERATIONSHUE TOP NURSE



Varenr.	Beskrivelse	Inderæske/ trp. karton
42093	Operationshue one-size (elastisk), latex, grøn	120/960



OPERATIONSHUE ALL



Varenr.	Beskrivelse	Inderæske/ trp. karton
42073	Operationshue one-size (bindebånd), grøn	120/960

OPERATIONSHUE ALL PRO



Varenr.	Beskrivelse	Inderæske/ trp. karton
42074	Hjelm med svedbånd, one-size (svedbånd, bindebånd), grøn	70/560

OPERATIONSHUE ALL PRO



Varenr.	Beskrivelse	Inderæske/ trp. karton
42076	Operationshue med sjalskrave og svedbånd, one-size (svedbånd, bindebånd), grøn	50/400



BARRIER® Medicinske ansigtsmasker

Komfortabel beskyttelse med BARRIER® Medicinske ansigtsmasker

Vores BARRIER Medicinske ansigtsmasker giver bakteriefiltrering, hvilket reducerer risikoen for infektion¹³. Komfort er et andet aspekt af en medicinsk ansigtsmaskes kvalitet. Vores medicinske ansigtsmasker er fremstillet i materialer, der hjælper med at sikre høj komfort og lav luftmodstand for at undgå irritation hos bæreren.

nemmere at trække vejret, og gør det mere komfortabelt over længere perioder

- Højt bakteriefiltreringseffektivitet reducerer spredningen af bakterier til luften på operationsstuen

- Stænkresisten medicinsk ansigtsmaske reducerer risikoen for at bæreren udsættes for forurenede væsker
- Tydelige illustrationer på alle BARRIER Medicinske ansigtsmaskers æsker for at gøre det nemt for bæreren at vælge den rette maske

• Lav respirationsmodstand gør det





Varenr.	Beskrivelse	Inderæske/ trp. karton
4228	Medicinsk ansigtsmaske, blå	50/500



Varenr.	Beskrivelse	Inderæske/ trp. karton
4301	Medicinsk ansigtsmaske, grøn	50/600



Varenr.	Beskrivelse	Inderæske/ trp. karton
4311	Medicinsk ansigtsmaske, blå	50/600





Varenr.	Beskrivelse	Inderæske/ trp. karton
4230	Medicinsk ansigtsmaske, blå	60/600



Varenr.	Beskrivelse	Inderæske/ trp. karton
4302	Medicinsk ansigtsmaske, grøn	50/600



Varenr.	Beskrivelse	Inderæske/ trp. karton
4312	Medicinsk ansigtsmaske, blå	50/600



STANDARD (TYPE II)



Varenr.	Beskrivelse	Inderæske/ trp. karton
42280	Medicinsk ansigtsmaske, blå	60/600
42290	Medicinsk ansigtsmaske, grøn	60/600



Varenr.	Beskrivelse	Inderæske/ trp. karton
4237	Medicinsk ansigtsmaske, blomstret	60/600



SPECIAL (TYPE II)



Varenr.	Beskrivelse	Inderæske/ trp. karton
4231	Medicinsk ansigtsmaske, blå	60/600



Varenr.	Beskrivelse	Inderæske/ trp. karton
4238	Medicinsk ansigtsmaske, grøn	60/600






Varenr.	Beskrivelse	Inderæske/ trp. karton
658200	Medicinsk ansigtsmaske, grøn	50/500



Varenr.	Beskrivelse	Inderæske/ trp. karton
658000	Medicinsk ansigtsmaske, grøn	60/600



Varenr.	Beskrivelse	Inderæske/ trp. karton
658300	Medicinsk ansigtsmaske, hvid	60/600

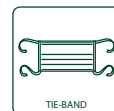

SPECIAL (TYPE II)




Varenr.	Beskrivelse	Inderæske/ trp. karton
658010	Medicinsk ansigtsmaske, grøn	60/600



EXTRA PROTECTION (TYPE IIR)



Varenr.	Beskrivelse	Inderæske/ trp. karton
4224	Medicinsk ansigtsmaske, blå	50/500

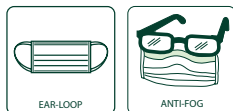

Varenr.	Beskrivelse	Inderæske/ trp. karton
4315	Medicinsk ansigtsmaske, blå	50/600



Varenr.	Beskrivelse	Inderæske/ trp. karton
4313	Medicinsk ansigtsmaske, blå	50/600





Varenr.	Beskrivelse	Inderæske/ trp. karton
658391	Medicinsk ansigtsmaske, hvid	50/500



Varenr.	Beskrivelse	Inderæske/ trp. karton
4234	Medicinsk ansigtsmaske, blå	50/500



Varenr.	Beskrivelse	Inderæske/ trp. karton
4236	Medicinsk ansigtsmaske, lavendel	50/500



Varenr.	Beskrivelse	Inderæske/ trp. karton
4291	Medicinsk ansigtsmaske, blå, antidug skum	50/500





Varenr.	Beskrivelse	Inderæske/ trp. karton
4232	Medicinsk ansigtsmaske, blå	50/200



Varenr.	Beskrivelse	Inderæske/ trp. karton
4267	Medicinsk ansigtsmaske, blå	50/200





Varenr.	Beskrivelse	Inderæske/ trp. karton
42904	Filtrerende halvmaske FFP2, hvid	20/200



Varenr.	Beskrivelse	Elastik	Bindebånd	Kopform	Anti-dug	Visir	Inderæske/trp. karton	Holder	Farve
MEDICINSKE ANSIGTSMASKER / STANDARD (TYPE II)									
4228	Blå	•					50/500		•
4301	Grøn	•					50/600	X	•
4311	Blå	•					50/600	X	•
4230	Blå		•				60/600	X	•
4302	Grøn		•				50/600	X	•
4312	Blå		•				50/600	X	•
42280	Blå		•				60/600	X	•
42290	Grøn		•				60/600	X	•
4237	Blomstret		•				60/600	X	✿
MEDICINSKE ANSIGTSMASKER / SPECIAL (TYPE II)									
4231	Blå		•		•		60/600	X	•
4238	Grøn		•		•		60/600		•
658200	Grøn	•		•			50/500		•
658000	Grøn		•	•			60/600	X	•
658300	Hvid		•	•			60/600	X	○
658010	Grøn		•	•	•		60/600	X	•
MEDICINSKE ANSIGTSMASKER / EXTRA PROTECTION (TYPE IIR)									
4224	Blå	•			•		50/500		•
4315	Blå	•					50/600	X	•
4313	Blå		•				50/600	X	•
658391	Hvid		•	•	•		50/500	X	○
4234	Blå		•		•		50/500	X	•
4236	Lavendel		•		•		50/500	X	•
4291	Blå		•		•		50/500	X	•
4232	Blå		•		•	•	50/200		•
4267	Blå	•			•	•	50/200		•
MEDICINSKE ANSIGTSMASKER / PERSONLIGT VÆRNEMIDDEL									
42904	Filtrerende halvmaske FFP2, hvid						20/200		○



Sådan anvender du:

Medicinsk ansigtsmaske med øreelastik

- A. Dæk næse og mund med masken, mens du holder i øreelastikkerne. Næseklemmen skal være øverst.
- B. Placer elastikkerne omkring ørerne. Træk i masken for at folde den helt ud. Dette er for at minimere de antal lag, du skal ånde gennem.
- C. Form næseklemmen rundt om næsen.
- D. Hår og ører skal dækkes med en passende hue for at minimere spredningen af hår og andre partikler. Hvis der er risiko for væskestænk, skal du anvende en type IIR stænkresistent maske med visir eller en type IIR stænkresistent maske og beskyttende briller/visir. Skift maske, når den er kontamineret og mellem hver operation.
- E. Smid masken væk efter brug.



Sådan anvender du:

Medicinsk ansigtsmaske med bindebånd

- A. Form næseklemmen. Placer masken for ansigtet, så den dækker både din næse og din mund.
- B. Placer de øverste bindebånd på toppen af dit hoved, og bind dem stramt for at minimere luftlækage.
- C. Placer de nederste bindebånd rundt om nakken og bind også dem stramt.
- D. Fold altid masken helt ud for at minimere antallet af lag, du skal ånde gennem.
- E. Skift maske, når den er kontamineret og mellem hver operation.
- F. Hår og ører skal dækkes med en passende hue for at minimere spredningen af hår og andre partikler. Hvis der er risiko for væskestænk, skal du anvende en type IIR stænkresistent maske med visir eller en type IIR stænkresistent maske og beskyttende briller/visir. Skift maske, når den er kontamineret og mellem hver operation.
- G. Smid masken væk efter brug.



Sådan anvender du: Medicinsk ansigtsmaske med visir

Hvis der er risiko for væskestænk, skal du altid anvende enten en type IIR stænkresistent medicinsk ansigtsmaske med visir eller en type IIR stænkresistent maske kombineret med beskyttende briller eller visir.

- A. Før du tager masken på, skal visiret foldes langs siderne for at opnå optimal beskyttelse mod stænk fra siden, der kan komme i kontakt med øjnene.
- B. Form næseklemmen.
- C. Fold masken helt ud.
- D. Placer masken på dit ansigt, så den dækker både næse og mund.
- E. Placer de øverste bindebånd på toppen af dit hoved, og bind dem stramt for at minimere luftlækage.
- F. Placer de nederste bindebånd rundt om nakken og bind også dem stramt.
- G. Fold altid masken helt ud for at minimere antallet af lag, du skal ånde gennem.
- H. Skift maske, når den er kontamineret og mellem hver operation.
- I. Smid masken væk efter brug.



BARRIER® uniformer

Med Mölnlycke®, kan du forvente uniformsløsninger, du kan stole på, i en høj kvalitet. Vores sortiment inkluderer en bred vifte af uniformer, warm-up jackets og renrumsdragter, der passer til de specifikke behov og præferencer, der er på forskellige arbejdspladser. Modellen, komfortniveauet, farve og størrelse - det er dit valg.

Vidste du?

Mölnlycke BARRIER uniformer er CE mærket medicinsk udstyr og de produceres i materialer med lav fnugafgivelse i et kontrolleret, rent miljø. Vores sikre produktions- og pakkeprocesser sikrer høj kvalitet og pålidelig beskyttelse - hver gang.



Warm-up Jacket

Extra komfort

Unisoft® materiale der giver ekstra komfort og blødhed. God varmekomfort med korte ærmer, hvilket muliggør desinfektion af underarmen. Ergonomisk placerede lommer og størrelser fra S til XXL.



Warm-up Jacket

Extra komfort

Unisoft materiale der giver ekstra komfort og blødhed. God varmekomfort med lange ærmer. Ergonomisk placerede lommer og størrelser fra S til XXL.



Renrumsdragt

Designet med fokus på funktionalitet med flere store lommer og et absorberende og soft foer, hvilket giver øget komfort. Størrelser fra XS til XXXL. Bidrager til at skabe ultra-ren luft^{15, 16, 17, 18} og reducerer signifikant både CFU og partikelantal¹⁵. Dette er især vigtigt inden for ortopædi-, implantat- og pædiatrisk kirurgi.



Uniform med manchet

Extra komfort

Unisoft materiale der giver ekstra komfort og blødhed. Smart design og ergonomiske lommer. Størrelse XS til XL med overdel og bukser pakket for sig, hvilket gør det muligt at kombinere størrelser. Manchetter i ærmer, livet og ved anklernerne.



Uniform

Extra komfort

Unisoft materiale der giver ekstra komfort og blødhed. Smart design og ergonomiske lommer. Mange størrelser fra XS til XXXXL, med overdel og bukser pakket for sig, hvilket gør det muligt at kombinere størrelser.



Uniform

Basic

I et komfortabelt nonwoven materiale i unisex design. Størrelser fra XS til XXL. Holder til saks og kuglepennen i en af de tre praktiske lommer på overdelen.



'Mit operationsteam har haft meget gode erfaringer med uniformer fra Mölnlycke.'

Prof. Dr. Jürgen Beck, Deputy Medical Director
Inselspital, Bern, Schweiz

Valget er enkelt

Gør tingene nemmere, bedre og mere effektivt

Du og dit team arbejder hårdt. Du yder behandling med stor kompetence - samtidig med at du håndterer dagligdagens store og små udfordringer. Uniformer bør ikke være en af dine udfordringer.

'I vores afprøvninger, har enganguniformer fået mere positiv feedback end flergangsbeklædning. Resultaterne motiverede ledelsen til at vælge enganguniformer.'

Nicole Söll,
Medical Documentalist, Inselspital, Bern, Schweiz

Omkostningseffektivt

En smart investering. Der er intet behov for dyre vaskeprocesser - uanset om det udføres i huset eller er outsourcet. Du skal ikke betale for reparationer eller erstatningsuniformer. Ganske enkelt - gennemsigtighed og ingen skjulte omkostninger.

Leverancer til tiden

Takket være pålidelige leverancer, har dit personale altid de rette uniformer, når de behøver dem. De er altid rene og klar til brug. Med vores leverancer får du strømlinet lagerbeholdningen, og du er ikke afhængig af vaskeriets kapacitet.

Høj kvalitet

BARRIER® uniformer er CE mærket medicinsk udstyr og de produceres i materiale med lav fnugafgivelse. Produktionen foregår i et kontrolleret miljø. Vores produktions- og pakkeprocesser sikrer høj kvalitet og pålidelig beskyttelse - hver eneste gang.

Vores mål er, at du aldrig skal tænke over eller bekymre dig om dine uniformer. Ja, det er ambitiøst - men det opsummerer vores forpligtelse over for dig og for at udvikle løsninger, der fungerer.

ENGANGSUNIFORM BASIC, OVERDEL, GRØN



Varenr.	Beskrivelse	Inderæske/ trp. karton
839105	XS	-/45
839109	S	-/45
839209	M	-/45
839309	L	-/45
839409	XL	-/45
839459	XXL	-/30

ENGANGSUNIFORM BASIC, BUKSER M. BINDEBÅND, GRØN



Varenr.	Beskrivelse	Inderæske/ trp. karton
839505	XS	-/45
839509	S	-/45
839609	M	-/45
839709	L	-/45
839809	XL	-/45
839859	XXL	-/30

ENGANGSUNIFORM (SÆT MED BUKSER OG OVERDEL), BLÅ



Varenr.	Beskrivelse	Inderæske/ trp. karton
836009	Sæt XS	-/50
836109	Sæt S	-/45
836209	Sæt M	-/45
836309	Sæt L	-/45
836409	Sæt XL	-/45
836509	Sæt XXL	-/35



Varenr.	Beskrivelse	Inderæske/ trp. karton
832009	Sæt XS	-/50
832109	Sæt S	-/45
832209	Sæt M	-/45
832309	Sæt L	-/45
832409	Sæt XL	-/45
832509	Sæt XXL	-/35

ENGANGSUNIFORM EXTRA COMFORT, OVERDEL, BLÅ



Varenr.	Beskrivelse	Inderæske/ trp. karton
21600	XS	/48
21610	S	/48
21620	M	/48
21630	L	/48
21640	XL	/48
21650	XXL	/48
21660	XXXL	/48
21670	XXXXL	/48

ENGANGSUNIFORM EXTRA COMFORT, BUKSER M. BINDEBÅND, BLÅ



Varenr.	Beskrivelse	Inderæske/ trp. karton
21700	XS	/48
21710	S	/48
21720	M	/48
21730	L	/48
21740	XL	/48
21750	XXL	/48
21760	XXXL	/48
21770	XXXXL	/48

ENGANGSUNIFORM EXTRA COMFORT, OVERDEL, GRØN



Varenr.	Beskrivelse	Inderæske/ trp. karton
18600	XS	/48
18610	S	/48
18620	M	/48
18630	L	/48
18640	XL	/48
18650	XXL	/48
18660	XXXL	/48
18670	XXXXL	/48

ENGANGSUNIFORM EXTRA COMFORT, BUKSER M. BINDEBÅND, GRØN



Varenr.	Beskrivelse	Inderæske/ trp. karton
18700	XS	/48
18710	S	/48
18720	M	/48
18730	L	/48
18740	XL	/48
18750	XXL	/48
18760	XXXL	/48
18770	XXXXL	/48

ENGANGSUNIFORM EXTRA COMFORT, OVERDEL M. MANCHET I ÆRMER OG LIV, GRØN



Varenr.	Beskrivelse	Inderæske/ trp. karton
22600	XS	/48
22610	S	/48
22620	M	/48
22630	L	/48
22640	XL	/48

ENGANGSUNIFORM EXTRA COMFORT, BUKSER M. BINDEBÅND OG MANCHET VED ANKLER, GRØN



Varenr.	Beskrivelse	Inderæske/ trp. karton
22700	XS	/48
22710	S	/48
22720	M	/48
22730	L	/48
22740	XL	/48



BARRIER® Renrumsdragt

Du tager patientsikkerhed seriøst og arbejder altid for at opnå det bedst mulige resultat. Men alligevel risikerer én ud af 20 patienter en infektion i operationssåret²⁰, hvilket kan føre til unødvendige lidelser og smerte for patienterne og som årligt koster mere end DKK 13 milliarder i Europa^{21*}.

Det betyder noget at reducere antallet af infektioner i operationssåret (SSI). En SSI kan, for eksempel, betyde, at patienten skal tilbringe seks måneder i sengen med en infektion i det dybe væv. Derved optages ressourcer, der kunne have været brugt til andre patienter. Og infektionerne kunne have været forebygget.


80% af bakterierne kommer fra luften²³. At finde måder at sænke antallet af luftbårne bakterier på operationsstuen (OP) er derfor en vigtig del af at forebygge SSI'er²⁴. Dette er især vigtigt inden for ortopædi, implantatkirurgi og pædiatriske indgreb. At arbejde mod at opnå ultraren luft er en vigtig indsats. Måske har du laminært airflow på din operationsstue? Men det i sig selv er måske ikke nok¹⁶.

Renrumsdragter foretrækkes

Ultraren luft opnås ved en kombination af mange faktorer.

Personalebeklædning er en af disse. Renrumsdragter bør blive brugt, selv hvis der er installeret laminært airflow. Grunden er tydelig: en af de primære årsager til luftbårne mikroorganismer er personerne på OP (patienter og personale)²⁵.

Renrumsdragter reducerer personalets forurening og bidrager til at opretholde ultraren luft¹⁵.

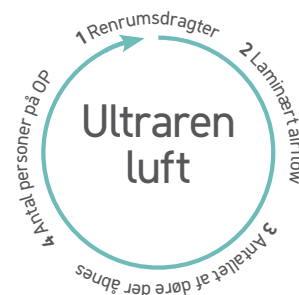

*I Europa er den årlige omkostning rapporteret til at være fra DKK 13,4 til 174,8 milliarder.²¹



**HVORFOR
BARRIER®
RENNUMSDRAGT**

- Laveste CFU/m³¹⁵
- Beskyttelseffektivitet er højere¹⁵
- BARRIER Rennumsdragt foretrækkes¹⁵

RENNUMSDRAGT OVERDEL MED KOMFORTLAG, MANCHET I ÆRMER OG LIV, BLÅ



Varenr.	Beskrivelse	Inderæske/ trp. karton
842000	XS	-/28
842100	S	-/26
842200	M	-/22
842300	L	-/20
842400	XL	-/18
842500	XXL	-/18
842600	XXXL	-/16

RENNUMSDRAGT BUKSER MED BINDEBÅND OG KOMFORTLAG, MANCHET I BEN, BLÅ




Varenr.	Beskrivelse	Inderæske/ trp. karton
843000	XS	-/28
843100	S	-/26
843200	M	-/22
843300	L	-/20
843400	XL	-/18
843500	XXL	-/18
843600	XXXL	-/16

WARM UP JACKET EXTRA COMFORT, KORT ÆRME, GRØN



Varenr.	Beskrivelse	Inderæske/ trp. karton
18300	S	-/48
18310	M	-/48
18320	L	-/48
18330	XL	-/48
18340	XXL	-/48

WARM UP JACKET EXTRA COMFORT, LANGT ÆRME, GRØN

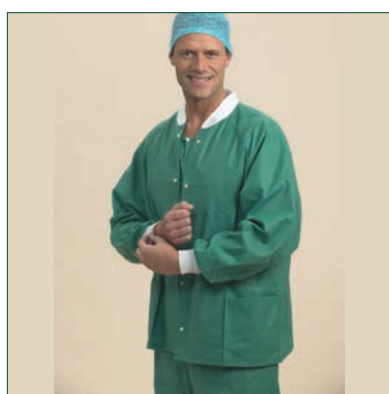

Varenr.	Beskrivelse	Inderæske/ trp. karton
18001	S	-/48
18010	M	-/48
18020	L	-/48
18030	XL	-/48
18040	XXL	-/48
18050	XXXL	-/48

WARM UP JACKET EXTRA COMFORT, LANGT ÆRME, BLÅ



Varenr.	Beskrivelse	Inderæske/ trp. karton
28000	S	-/48
28010	M	-/48
28020	L	-/48
28030	XL	-/48
28040	XXL	-/48
28050	XXXL	-/48

BASIC PATIENTSKJORTE



Varenr.	Beskrivelse	Inderæske/ trp. karton
616550	Patientskjorte, uden ærmer, one-size, blå	10/120
616560	Patientskjorte, korte ærmer, one-size, blå	10/120

BARRIER® EASYWARM® AKTIVT SELVVARMENDE TÆPPE




Varenr.	Beskrivelse	Inderæske/ trp. karton
629900	Aktivt selvvarmende tæppe 92x152cm	-/10

BARRIER® EASYWARM® + AKTIVT SELVVARMENDE TÆPPE



Varenr.	Beskrivelse	Inderæske/ trp. karton
629910	Aktivt selvvarmende tæppe 110/150x200cm Kan deles for dækning af øvre og nedre kropsdele	-/7

ENGANGSTÆPPE NONWOVEN

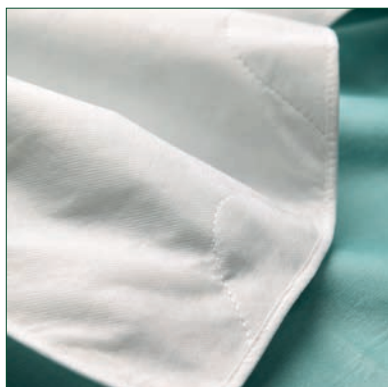

Varenr.	Beskrivelse	Inderæske/ trp. karton
629998	Engangstæppe, nonwoven 130x95cm, hvid	-/40
629999	Engangstæppe, nonwoven, 130x190cm, hvid	-/20

BENVARMER TIL PATIENTER



Varenr.	Beskrivelse	Inderæske/ trp. karton
629993	Benvarmer til patienter, hvid	-/74

BESKYTTELSESKITTEL



Varenr.	Beskrivelse	Inderæske/ trp. karton
1901	Beskyttelseskittel, L, gul	-/50
1902	Beskyttelseskittel, L, blå	-/50
1903	Beskyttelseskittel, L, grøn	-/50
1904	Beskyttelseskittel, L, hvid	-/50
1905	Beskyttelseskittel, L, mørkeblå	-/50
1921	Beskyttelseskittel, XL, gul	-/50
1922	Beskyttelseskittel, XL, blå	-/50
1923	Beskyttelseskittel, XL, grøn	-/50
1924	Beskyttelseskittel, XL, hvid	-/50
1925	Beskyttelseskittel, XL, mørkeblå	-/50

BESKYTTELSESKITTEL MED MANCHET



Varenr.	Beskrivelse	Inderæske/ trp. karton
19055	Beskyttelseskittel m. manchet, L, mørkeblå	-/50
19255	Beskyttelseskittel m. manchet, XL, mørkeblå	-/45

STERIL BESKYTTELSESKITTEL



Varenr.	Beskrivelse	Inderæske/ trp. karton
616641	Beskyttelseskittel m. manchet, L, 1 håndklæde, mørkeblå	28/56
616650	Beskyttelseskittel m. manchet, L, mørkeblå	26/52

VÆSKETÆT BESKYTTELSESKITTEL



Varenr.	Beskrivelse	Inderæske/ trp. karton
1931	Væsketæt beskyttelseskittel m. manchet L, gul	-/50
1932	Væsketæt beskyttelseskittel m. manchet L, blå	-/50
1933	Væsketæt beskyttelseskittel m. manchet XL, gul	-/40
1934	Væsketæt beskyttelseskittel m. manchet XL, blå	-/40

BESKYTTELSESKITTEL AAMI2



Varenr.	Beskrivelse	Inderæske/ karton	trp.
1301	Beskyttelseskittel AAMI2, M, blå	-/120	
1302	Beskyttelseskittel AAMI2, M, gul	-/120	
1311	Beskyttelseskittel AAMI2, L, blå	-/90	
1312	Beskyttelseskittel AAMI2, L, gul	-/90	
1321	Beskyttelseskittel AAMI2, XL, blå	-/90	
1322	Beskyttelseskittel AAMI2, XL, gul	-/90	
1331	Beskyttelseskittel AAMI2, XXL, blå	-/90	
1332	Beskyttelseskittel AAMI2, XXL, gul	-/90	

VÆSKETÆT BESKYTTELSESKITTEL, ÅNDBAR RYG, AAMI2



Varenr.	Beskrivelse	Inderæske/ trp. karton
1001	Væsketæt beskyttelseskittel AAMI2, M, blå	-/120
1002	Væsketæt beskyttelseskittel AAMI2, M, gul	-/120
1011	Væsketæt beskyttelseskittel AAMI2, L, blå	-/80
1012	Væsketæt beskyttelseskittel AAMI2, L, gul	-/80
1021	Væsketæt beskyttelseskittel AAMI2, XL, blå	-/60
1022	Væsketæt beskyttelseskittel AAMI2, XL, gul	-/60
1031	Væsketæt beskyttelseskittel AAMI2, XXL, blå	-/60
1032	Væsketæt beskyttelseskittel AAMI2, XXL, gul	-/60

Vælg den handske
der passer til det
indgreb, du skal
udføre



Biogel® handsker

Biogel er en af verdens førende brands indenfor højkvalitets- og teknisk avancerede operationshandsker til sundhedspersonale. Det er brandet med den unikke indvendige polymercoating og Biogel handsker var det første tiltag, som gjorde det let at tage handsker på selv med fugtige hænder. Biogel Indicator Systems giver den bedste beskyttelse med tydelig, hurtig og stor punkturindikation. Umiddelbar opdagelse af huller giver sikkerhed for både dig og patienten - og giver dig en beskyttelse, du kan stole på. Biogel har et acceptabelt kvalitetsniveau (AQL) for frihed

for huller på 0,4 efter pakning, og kombineret med en 100% lufttrykstest, giver det dig en sikkerhedsegenskab, der er med til at minimere risikoen for både patient og sundhedspersonale mod blodbårne patogener, herunder HIV og hepatitisvira.

Biogel er testet i henhold til EN 455 standarden og har et lavt endotoksin niveau < 20 EU/par, der kan reducere risikoen for postoperative infektioner.

Biogel handsker har været udelukkende pudderfri i mere end 20 år. Disse handsker er

fremstillet og pakket i et pudderfrit miljø og kan bruges til en hvilken som helst operationsprocedure, uden at der er risiko for pudderkontaminering.

Biogel® handsker designet til at understøtte præcision

Unik Biogel coating

Biogel handskernes coating gør det nemt at tage handskerne på, selv med fugtige hænder.

Biogel kvalitet

Hver eneste handske er lufttryktestet og visuelt inspiceret af hensyn til kvalitet og brugernes sikkerhed. Biogel har en AQL-frihed for huller på 0,4 efter pakning.

Biogel pudderfri naturgummilatex operationshandsker

Da handsker med pudder frigiver mere luftbåret latexprotein end noget andet medicinsk produkt, er alle Biogel handsker fri for pudder for at minimere risikoen for overfølsomhed over for naturgummilatex. Pudder har desuden være kendt for at være potentiel årsag til postoperative komplikationer hos patienter og dermatitis hos sundhedspersonalet^{27,28}.



Biogel syntetiske operationshandsker

Selvom naturgummilatex er den gyldne standard for at yde fremragende barrierebeskyttelse, tilbyder nutidens syntetiske operationshandsker barrierebeskyttelsesegenskaber, pasform, følsomhed og komfort som er lig med eller sammenlignelige med naturgummilatex. Biogel sortimentet af syntetiske operationshandsker fås i materialerne polychloropren såvel som polyisopren, der har en molekylestruktur, som svarer til naturgummilatex.

Biogel® Indikator® systemer

Perforationer i handsker kan få alvorlige konsekvenser i vore dages sygehusmiljø. The American College of Surgeons erklærer følgende: "Dobbelt handske lag er med til at reducere mængden af potentiel udsættelse med en faktor 10.²⁹ Da 92% af alle punkturnsker, uden at kirurgerne opdager det, har Biogel dobbelthandske punkturndikations-system en 97 % nøjagtighedsrate i at identificere punkturnsker.³⁰

Biogel produktsortimentet tilbyder flere forskellige Biogel® Indikator® systemer, med farveindikationsteknologier, der kan advare kirurgen med tydelig, hurtig og stor indikation i tilfælde af punkturnsker, hvis de skulle indtræffe, mens der er væske til stede.


Biogel Indikator systemerne fås i både naturgummilatex og syntetisk polyisopren.

Sådan fungerer Biogel Indikator systemer

- To handsker anvendes: en halmgul Biogel handske yderst oven på en -nummer større farvet inderhandske (grøn i naturgummilatex, blå i syntetisk materiale).
- Hvis den yderste handske får en punkturnsker og der trænger væske ind mellem de to handsker, advares en mørk plet brugeren om punkturen.

Handskepunkturnsker må ikke negligeres. Lad Biogel Indikator systemerne advare dig på en hurtig, tydelig og stor måde med synlig indikation på punkturnsker, der forekommer, mens der er væske til stede.

Vores punkturindikationssystem er unik

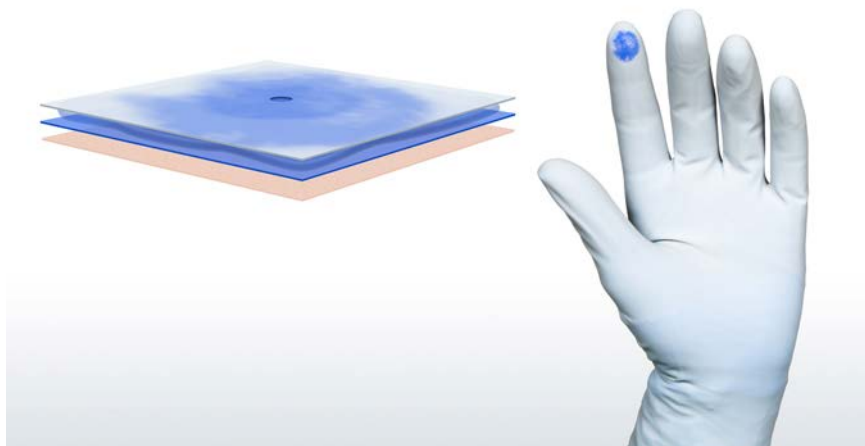

Tydelig, hurtig og stor, beskyttelse du kan se

Vi ønsker, at du ser en punktur, så snart den opstår. Dermed kan du hurtigt skifte handsker og fortsætte indgrebet uden at gå på kompromis med din eller patientens beskyttelse.

Biogel® Indicator® System er udviklet, så du kan se området med punktur hurtigere, større og mere tydeligt.

Hvis yderhandsken får en punktur, kommer væske ind mellem de to handsker og skaber en mørk plet, der hurtigt vokser og advarer brugere om en punktur.

Tydelig

Inderhandskens farvefysik er valgt for at vække øjets følsomhed. Yderhandsken er gennemsigtig, så når en punktur opstår, advares du ved at inderhandskens farve vises³⁰.

Hurtig

Den patenterede behandling af handskeoverfladen markerer stedet for punkturen med det samme ved at sprede indespærret væske for at skabe en synlig indikation, der hurtigt vokser³⁰.

Stor

Indikationspletten vokser sig hurtigt stor, så du kan se den med det samme – og så andre kan se den på afstand i tilfælde af, at den er uden for dit direkte synsfelt³⁰.

*'Til klinikere, der ikke bruger
dobbelthandsker, siger jeg: 'Gør det!'
Det er sådan en nem måde at beskytte dig
selv og alle andre'*

Julie Karlsson, Traumesygeplejerske



Hvordan kan vi hjælpe dig?

Vores Account Managere hjælper dig med at indføre dobbelthandsker på operationsstuen. De samarbejder med dig om at finde de rette materialer, egenskaber og størrelser, så alt passer til jeres behov.

Vi hjælper dig med afprøvninger og undervisning. Vi kan også hjælpe dig og rådgive dig om vigtige sundhedsfaglige emner så som infektionsforebyggelse, anbefalet praksis og den korrekte brug af operationshandsker. Vi kan endda også hjælpe dig med at øge effektiviteten på operationsstuen ved at undervise dig i korrekt handskebrug, handskestandarder og andre sikkerhedsemner.

'Det er faktisk ret enkelt. Dobelthandsker handler om sikkerhed for personalet, patienten og hospitalet. Omkostninger bør aldrig afgøre, om du anvender dobbelthandsker.'

Julie Karlsson, Traumesygeplejerske

**Punkturindikation.
Tydelig, hurtig, stor.**



Biogel Eclipse®

751



Varenr. steril	Beskrivelse	Str.	Inderæske/trp. karton
75155	Biogel Eclipse	5,5	50/200
75160	Biogel Eclipse	6,0	50/200
75165	Biogel Eclipse	6,5	50/200
75170	Biogel Eclipse	7,0	50/200
75175	Biogel Eclipse	7,5	50/200
75180	Biogel Eclipse	8,0	50/200
75185	Biogel Eclipse	8,5	50/200
75190	Biogel Eclipse	9,0	40/160

Anbefales til alle kirurgiske indgreb. Biogel Eclipse® kan anvendes alene eller som udskiftningshandske for at opretholde farveindikationssystemets nøjagtighed når yderhandsken i Biogel Eclipse® Indicator® System (REF 607) har fået en punktur. Mærkbart blødere end Biogel® Surgeons, og Biogel Eclipse tilbyder en enestående barriere beskyttelse kombineret med fingerspidsfølelse, pasform og komfort. Biogel Eclipse® er en naturgummilatexhandske, der kan løfte niveauet for handskekomfort med bedre pasform og fingerspidsfølsomhed.

Biogel Eclipse® Indicator® System

607



Varenr. steril	Beskrivelse	Str.	Inderæske/trp. karton
60755	Biogel Eclipse Indicator	5,5	25x2/100
60760	Biogel Eclipse Indicator	6,0	25x2/100
60765	Biogel Eclipse Indicator	6,5	25x2/100
60770	Biogel Eclipse Indicator	7,0	25x2/100
60775	Biogel Eclipse Indicator	7,5	25x2/100
60780	Biogel Eclipse Indicator	8,0	25x2/100
60785	Biogel Eclipse Indicator	8,5	25x2/100

Anbefales til alle kirurgiske indgreb. Biogel Eclipse® Indicator® System er udviklet for at sikre den bedst mulige indikation ved anvendelse af dobbelthandsker. Anvend Biogel Eclipse® (REF 751) som udskiftningshandske for at opretholde farveindikationssystemets nøjagtighed, når yderhandsken i Biogel Eclipse® Indicator® System har fået en punktur. Mærkbart blødere end Biogel Surgeons. Inderhandsken er grøn for at give umiddelbar detektion ved perforation, og den glatte overflade er udviklet for at gøre det muligt at tage yderhandsken på hurtigt og let.

Biogel® Surgeons

822



Varenr. steril	Beskrivelse	Str.	Inderæske/trp. karton
82255	Biogel Surgeons	5,5	50/200
82260	Biogel Surgeons	6,0	50/200
82265	Biogel Surgeons	6,5	50/200
82270	Biogel Surgeons	7,0	50/200
82275	Biogel Surgeons	7,5	50/200
82280	Biogel Surgeons	8,0	50/200
82285	Biogel Surgeons	8,5	50/200
82290	Biogel Surgeons	9,0	40/160

Anbefales til alle kirurgiske indgreb og andre specialer, der ikke kræver unikke egenskaber. Sterile, puddefri handsker i naturgummilatex til fremragende barrierebeskyttelse ved generelle kirurgiske indgreb.

Biogel® M

823



Varenr. steril	Beskrivelse	Str.	Inderæske/trp. karton
82355	Biogel M	5,5	50/200
82360	Biogel M	6,0	50/200
82365	Biogel M	6,5	50/200
82370	Biogel M	7,0	50/200
82375	Biogel M	7,5	50/200
82380	Biogel M	8,0	50/200
82385	Biogel M	8,5	50/200
82390	Biogel M	9,0	40/160

Sterile, pudderfri handsker i naturgummitex med en specialbehandlet overflade, der giver ekstra greb og kontrol.

Biogel® Super-Sensitive

825



Varenr. steril	Beskrivelse	Str.	Inderæske/trp. karton
82555	Biogel Super-Sensitive	5,5	50/200
82560	Biogel Super-Sensitive	6,0	50/200
82565	Biogel Super-Sensitive	6,5	50/200
82570	Biogel Super-Sensitive	7,0	50/200
82575	Biogel Super-Sensitive	7,5	50/200
82580	Biogel Super-Sensitive	8,0	50/200
82585	Biogel Super-Sensitive	8,5	50/200
82590	Biogel Super-Sensitive	9,0	40/160

Sterile, pudderfri handsker i naturgummitex til fremragende barrierebeskyttelse ved kirurgiske indgreb, og med forbedret fingerspidsfølsomhed når dette er ønsket eller nødvendigt.

Biogel® Dental Steril

99990



Varenr. sterilt	Beskrivelse	Str.	Inderæske/trp. karton
9999055	Biogel Dental steril	5,5	10/100
9999060	Biogel Dental steril	6,0	10/100
9999065	Biogel Dental steril	6,5	10/100
9999070	Biogel Dental steril	7,0	10/100
9999075	Biogel Dental steril	7,5	10/100
9999080	Biogel Dental steril	8,0	10/100
9999085	Biogel Dental steril	8,5	10/100
9999090	Biogel Dental steril	9,0	10/100

Anbefales til alle kirurgiske dentalprocedurer.
Steril, pudderfri dentalhandske i naturgummitatex.

Biogel® Dental

56XX



Varenr. sterilt	Beskrivelse	Str.	Inderæske/trp. karton
5636	Biogel Dental	5,5	25/150
5637	Biogel Dental	6,0	25/150
5638	Biogel Dental	6,5	25/150
5639	Biogel Dental	7,0	25/150
5640	Biogel Dental	7,5	25/150
5641	Biogel Dental	8,0	25/150
5642	Biogel Dental	8,5	25/150
5643	Biogel Dental	9,0	25/150

Anbefales til alle kliniske dentalingreb.
Usteril, pudderfri dentalhandske i naturgummitatex.

Biogel® Diagnostic

56XX



Varenr. sterilt	Beskrivelse	Str.	Inderæske/trp. karton
5653	Biogel Diagnostic	5,5	25/150
5654	Biogel Diagnostic	6,0	25/150
5655	Biogel Diagnostic	6,5	25/150
5656	Biogel Diagnostic	7,0	25/150
5657	Biogel Diagnostic	7,5	25/150
5658	Biogel Diagnostic	8,0	25/150
5659	Biogel Diagnostic	8,5	25/150
5660	Biogel Diagnostic	9,0	25/150

Anbefales til alle kliniske procedurer.
Usteril, pudderfri dentalhandske i naturgummitatex.

Biogel® PI Micro

485



Varenr. sterilt	Beskrivelse	Str.	Inderæske/trp. karton
48555	Biogel PI Micro	5,5	50/200
48560	Biogel PI Micro	6,0	50/200
48565	Biogel PI Micro	6,5	50/200
48570	Biogel PI Micro	7,0	50/200
48575	Biogel PI Micro	7,5	50/200
48580	Biogel PI Micro	8,0	50/200
48585	Biogel PI Micro	8,5	50/200
48590	Biogel PI Micro	9,0	40/160

Steril, pudderfri handske i syntetisk polyisopren. Anbefales til alle kirurgiske indgreb, hvor der kan forventes latexallergi (Type I) hos patient eller personale eller hvis der er behov for ekstra fingerspidsfølsomhed. Biogel® PI Micro kan anvendes alene eller som udskiftningshandske for at opretholde farveindikationssystemets nøjagtighed når yderhandsken i Biogel® PI Micro Indicator® System (REF483) har fået en punktur. Den er typisk 20% tyndere end Biogel PI UltraTouch.

Biogel® PI Micro Indicator® System

483



Varenr. sterilt	Beskrivelse	Str.	Inderæske/trp. karton
48355	Biogel PI Micro Indikator	5,5	25x2/100
48360	Biogel PI Micro Indikator	6,0	25x2/100
48365	Biogel PI Micro Indikator	6,5	25x2/100
48370	Biogel PI Micro Indikator	7,0	25x2/100
48375	Biogel PI Micro Indikator	7,5	25x2/100
48380	Biogel PI Micro Indikator	8,0	25x2/100
48385	Biogel PI Micro Indikator	8,5	25x2/100

Steril, pudderfri handske i syntetisk polyisopren. Anbefales til alle kirurgiske indgreb, hvor der kan forventes latexallergi (Type I) hos patient eller personale eller hvis der er behov for ekstra fingerspidsfølsomhed. Anvend Biogel® PI Micro (REF 485) som udskiftningshandske for at opretholde farveindikationssystemets nøjagtighed, når yderhandsken i Biogel® PI Micro Indikator® System har fået en punktur. Typisk 20% tyndere end Biogel PI Indikator system. Inderhandsken er blå for at give umiddelbar detektion ved perforation, og den glatte overflade er udviklet for at gøre det muligt at tage yderhandsken på hurtigt og let.

Biogel® PI UltraTouch®

409



Varenr. sterilt	Beskrivelse	Str.	Inderæske/trp. karton
40955	Biogel PI UltraTouch	5,5	50/200
40960	Biogel PI UltraTouch	6,0	50/200
40965	Biogel PI UltraTouch	6,5	50/200
40970	Biogel PI UltraTouch	7,0	50/200
40975	Biogel PI UltraTouch	7,5	50/200
40980	Biogel PI UltraTouch	8,0	50/200
40985	Biogel PI UltraTouch	8,5	50/200
40990	Biogel PI UltraTouch	9,0	40/160

Steril, pudderfri handske i syntetisk polyisopren. Anbefales til alle kirurgiske indgreb, hvor der kan forventes latexallergi (Type I) hos patient eller personale. Biogel® PI UltraTouch® kan anvendes alene eller som udskiftningshandske for at opretholde farveindikationssystemets nøjagtighed når yderhandsken i Biogel PI Indikator® System (REF414) har fået en punktur.

Biogel® PI Indicator® System

414



Varenr. steril	Beskrivelse	Str.	Inderæske/trp. karton
41455	Biogel PI Indicator	5,5	25x2/100
41460	Biogel PI Indicator	6,0	25x2/100
41465	Biogel PI Indicator	6,5	25x2/100
41470	Biogel PI Indicator	7,0	25x2/100
41475	Biogel PI Indicator	7,5	25x2/100
41480	Biogel PI Indicator	8,0	25x2/100
41485	Biogel PI Indicator	8,5	25x2/100

Steril, puddefri handske i syntetisk polyisopren. Anbefales til alle kirurgiske indgreb, hvor der kan forventes latexallergi (Type I) hos patient eller personale. Anvend Biogel® PI UltraTouch® (REF 409) som udskiftningshandske for at opretholde farveindikationssystemets nøjagtighed, når yderhandsken i Biogel PI Indicator System har fået en punktur. Inderhandsken er blå for at give umiddelbar detektion ved perforation, og den glatte overflade er udviklet for at gøre det muligt at tage yderhandsken på hurtigt og let.

Biogel® Skinsense®

509



Varenr. steril	Beskrivelse	Str.	Inderæske/trp. karton
50955	Biogel Skinsense	5,5	50/200
50960	Biogel Skinsense	6,0	50/200
50965	Biogel Skinsense	6,5	50/200
50970	Biogel Skinsense	7,0	50/200
50975	Biogel Skinsense	7,5	50/200
50980	Biogel Skinsense	8,0	50/200
50985	Biogel Skinsense	8,5	50/200
50990	Biogel Skinsense	9,0	40/160

Steril, puddefri handske i polychloropren. Anbefales til alle kirurgiske indgreb, hvor der kan forventes latexallergi (Type I) hos patient eller personale. Ved indgreb, hvor der er behov for længere gennembrudstider for f.eks. cytostatik, anbefales Biogel® Skinsense® og Biogel® Skinsense® Indicator® System. Handsken kan anvendes alene eller som udskiftningshandske for at opretholde farveindikationssystemets nøjagtighed når yderhandsken i Biogel® Skinsense® Indicator® System har fået en punktur.

Biogel® NeoDerm®



Varenr. steril	Beskrivelse	Str.	Inderæske/trp. karton
42955	Biogel Neoderm	5,5	50/200
42960	Biogel Neoderm	6,0	50/200
42965	Biogel Neoderm	6,5	50/200
42970	Biogel Neoderm	7,0	50/200
42975	Biogel Neoderm	7,5	50/200
42980	Biogel Neoderm	8,0	50/200
42985	Biogel Neoderm	8,5	50/200
42990	Biogel Neoderm	9,0	40/160

Steril, puddefri handske i polychloropren. Anbefales til kirurgiske indgreb, hvor der er allergi over for naturgummilætex og/eller følsomhed overfor typiske* accelerator kemikalier hos patient eller personale. *Thiuramer, Mercaptobezothiasol, Diphenylthiurea, Diphenylguanidine og Dithiocarbamater.

Biogel® PI UltraTouch® S



Varenr. steril	Beskrivelse	Str.	Inderæske/trp. karton
45555	Biogel PI UltraTouch S	5,5	50/200
45560	Biogel PI UltraTouch S	6,0	50/200
45565	Biogel PI UltraTouch S	6,5	50/200
45570	Biogel PI UltraTouch S	7,0	50/200
45575	Biogel PI UltraTouch S	7,5	50/200
45580	Biogel PI UltraTouch S	8,0	50/200
45585	Biogel PI UltraTouch S	8,5	50/200
45590	Biogel PI UltraTouch S	9,0	40/160

Steril, puderfri handske i syntetiske polyisopren. Anbefales til alle kirurgiske indgreb, især hvor allergisk kontaktdermatitis forårsaget af kemiske acceleratore* er en bekymring for personalet. De anbefales også ved allergi overfor naturgummilætex hos patient eller personale. Biogel® PI UltraTouch® S kan anvendes alene eller som udskiftningshandske for at opretholde farveindikationssystemets nøjagtighed når yderhandsken i Biogel® PI UltraTouch® S indicator® System (REF453) har fået en punktur.
*Thiuramer, Dithiocarbamater, Thiazoler, Thiourea og diphenylguanidine

Biogel® PI UltraTouch® S Indicator®



Varenr. steril	Beskrivelse	Str.	Inderæske/trp. karton
45355	Biogel PI UltraTouch S Indicator	5,5	25x2/100
45360	Biogel PI UltraTouch S Indicator	6,0	25x2/100
45365	Biogel PI UltraTouch S Indicator	6,5	25x2/100
45370	Biogel PI UltraTouch S Indicator	7,0	25x2/100
45375	Biogel PI UltraTouch S Indicator	7,5	25x2/100
45380	Biogel PI UltraTouch S Indicator	8,0	25x2/100
45385	Biogel PI UltraTouch S Indicator	8,5	25x2/100

Steril, puderfri handske i syntetiske polyisopren. Anbefales til alle kirurgiske indgreb, især hvor allergisk kontaktdermatitis forårsaget af kemiske acceleratore* er en bekymring for personalet. De anbefales også ved allergi overfor naturgummilætex hos patient eller personale. Brug Biogel® PI UltraTouch® S (REF455) som udskiftningshandske for at opretholde farveindikationssystemets nøjagtighed, når yderhandsken i Biogel® PI UltraTouch® S Indicator® har fået en punktur.
*Thiuramer, Dithiocarbamater, Thiazoler, Thiourea og diphenylguanidine



Biogel® Tech sortiment

Handskerne i Biogel® Tech sortimentet er fremstillet for at beskytte processen, produktet og operatøren

- AQL på 0,4 (frihed for huller), efter pakning⁵⁴
- Hver handske (100%) er lufttryktestet for huller, der typisk ikke opdages ved visuel inspektion⁵⁵
- 100% pudderfri
- Enestående barrierebeskyttelse^{56, 57, 58}
- Brancheførende lavt endotoksin niveau [<2 EU/par]⁵⁴
- Meget kontrolleret sterilisation til mindst 25 kGy
- Produceret i et kontrolleret miljø med strenge hygiejnekrav i hele processen. Alle vores fabrikker lever op til ISO 13485 og ISO 14001⁵⁴

Indpakning udviklet til kritiske miljøer

Biogel® Tech handskesortimentet er udviklet til brug i kritiske miljøer og er PPE certificerede. Pakningen, der er varmemeforseglede dobbeltposer, lever op til hygiejnestandarder for kritiske miljøer og sikrer brugervenlighed, da pakningslagene kan fjernes.



Plastindpakning i høj kvalitet for at holde partikeltallet så lavt som muligt. Indpakningen forbliver åben, når den er foldet ud, så **aseptisk påtagning sikres**.

Biogel® PI Micro Tech

44485



Varenr. sterilt	Beskrivelse	Str.	Polypose/trp. karton
4448555	Biogel PI Micro Tech	5,5	25x2x4/200
4448560	Biogel PI Micro Tech	6,0	25x2x4/200
4448565	Biogel PI Micro Tech	6,5	25x2x4/200
4448570	Biogel PI Micro Tech	7,0	25x2x4/200
4448575	Biogel PI Micro Tech	7,5	25x2x4/200
4448580	Biogel PI Micro Tech	8,0	25x2x4/200
4448585	Biogel PI Micro Tech	8,5	25x2x4/200
4448590	Biogel PI Micro Tech	9,0	20x2x4/160

En syntetisk handske til kritiske miljøer. Det er vores tyndeste polyisoprenhandske, og den tilbyder fremragende barrierebeskyttelse samt pasform, fingerspidsfølelse og komfort. Den kan bæres alene eller i kombination med Biogel® PI Tech Indicator® Underglove for forbedret beskyttelse af de produkter, der håndteres såvel som af operatøren. Den er blevet testet og godkendt til brug med kemoterapimidler.

Biogel® PI Micro Tech Indicator® Underglove

44489



Varenr. sterilt	Beskrivelse	Str.	Polypose/trp. karton
4448955	Biogel PI Micro Tech Indicator Underglove	5,5	25x2x4/200
4448960	Biogel PI Micro Tech Indicator Underglove	6,0	25x2x4/200
4448965	Biogel PI Micro Tech Indicator Underglove	6,5	25x2x4/200
4448970	Biogel PI Micro Tech Indicator Underglove	7,0	25x2x4/200
4448975	Biogel PI Micro Tech Indicator Underglove	7,5	25x2x4/200
4448980	Biogel PI Micro Tech Indicator Underglove	8,0	25x2x4/200
4448985	Biogel PI Micro Tech Indicator Underglove	8,5	25x2x4/200
4448990	Biogel PI Micro Tech Indicator Underglove	9,0	20x2x4/160

En blå, syntetisk inderhandske til kritiske miljøer. Det er vores tyndeste polyisoprenhandske, og den tilbyder fremragende barrierebeskyttelse samt pasform, fingerspidsfølelse og komfort. Den kan bæres alene eller i kombination med Biogel® PI Tech for forbedret beskyttelse af de produkter, der håndteres såvel som af operatøren. Den er blevet testet og godkendt til brug med kemoterapimidler.

Biogel® PI Tech

44409



Varenr. sterilt	Beskrivelse	Str.	Polypose/trp. karton
4440955	Biogel PI Tech	5,5	25x2x4/200
4440960	Biogel PI Tech	6,0	25x2x4/200
4440965	Biogel PI Tech	6,5	25x2x4/200
4440970	Biogel PI Tech	7,0	25x2x4/200
4440975	Biogel PI Tech	7,5	25x2x4/200
4440980	Biogel PI Tech	8,0	25x2x4/200
4440985	Biogel PI Tech	8,5	25x2x4/200
4440990	Biogel PI Tech	9,0	20x2x4/160

En syntetisk polyisopren handske til kritiske miljøer. Den tilbyder fremragende barrierebeskyttelse samt pasform, fingerspidsfølelse og komfort. Den kan bæres alene eller i kombination med Biogel® PI Tech Indicator® Underglove for forbedret beskyttelse af de produkter, der håndteres såvel som af operatøren. Den er blevet testet og godkendt til brug med kemoterapimidler.

Biogel® PI Tech Indicator® Underglove

44416



Varenr. sterilt	Beskrivelse	Str.	Polypose/ trp. karton
4441655	Biogel PI Tech Indicator Underglove	5,5	25x2x4/200
4441660	Biogel PI Tech Indicator Underglove	6,0	25x2x4/200
4441665	Biogel PI Tech Indicator Underglove	6,5	25x2x4/200
4441670	Biogel PI Tech Indicator Underglove	7,0	25x2x4/200
4441675	Biogel PI Tech Indicator Underglove	7,5	25x2x4/200
4441680	Biogel PI Tech Indicator Underglove	8,0	25x2x4/200
4441685	Biogel PI Tech Indicator Underglove	8,5	25x2x4/200
4441690	Biogel PI Tech Indicator Underglove	9,0	20x2x4/160

En blå, syntetisk polyisopren inderhandske til kritiske miljøer. Den tilbyder fremragende barrierebeskyttelse samt pasform, fingerspidsfølelse og komfort. Den kan bæres alene eller i kombination med Biogel® PI Tech for forbedret beskyttelse af de produkter, der håndteres såvel som af operatøren. Den er blevet testet og godkendt til brug med kemoterapimidler.

Biogel® NeoTech

44509



Varenr. sterilt	Beskrivelse	Str.	Polypose/ trp. karton
4450955	Biogel NeoTech	5,5	25x2x4/200
4450960	Biogel NeoTech	6,0	25x2x4/200
4450965	Biogel NeoTech	6,5	25x2x4/200
4450970	Biogel NeoTech	7,0	25x2x4/200
4450975	Biogel NeoTech	7,5	25x2x4/200
4450980	Biogel NeoTech	8,0	25x2x4/200
4450985	Biogel NeoTech	8,5	25x2x4/200
4450990	Biogel NeoTech	9,0	20x2x4/160

En syntetisk polychloropren handske til kritiske miljøer. Den kan bæres alene eller i kombination med Biogel® NeoTech Indicator® Underglove for forbedret beskyttelse af de produkter, der håndteres såvel som af operatøren. Den er blevet testet og godkendt til brug med kemoterapimidler.

Biogel® NeoTech Indicator® Underglove

44406



Varenr. sterilt	Beskrivelse	Str.	Polypose/ trp. karton
4440655	Biogel NeoTech Indicator Underglove	5,5	25x2x4/200
4440660	Biogel NeoTech Indicator Underglove	6,0	25x2x4/200
4440665	Biogel NeoTech Indicator Underglove	6,5	25x2x4/200
4440670	Biogel NeoTech Indicator Underglove	7,0	25x2x4/200
4440675	Biogel NeoTech Indicator Underglove	7,5	25x2x4/200
4440680	Biogel NeoTech Indicator Underglove	8,0	25x2x4/200
4440685	Biogel NeoTech Indicator Underglove	8,5	25x2x4/200
4440690	Biogel NeoTech Indicator Underglove	9,0	20x2x4/160

En blå, syntetisk polychloropren inderhandske til kritiske miljøer. Den kan bæres alene eller i kombination med Biogel® NeoTech for forbedret beskyttelse af de produkter, der håndteres såvel som af operatøren. Den er blevet testet og godkendt til brug med kemoterapimidler.

Biogel® Tech



Varenr. steril	Beskrivelse	Str.	Polypose/ trp. karton
4482255	Biogel Tech	5,5	25x2x4/200
4482260	Biogel Tech	6,0	25x2x4/200
4482265	Biogel Tech	6,5	25x2x4/200
4482270	Biogel Tech	7,0	25x2x4/200
4482275	Biogel Tech	7,5	25x2x4/200
4482280	Biogel Tech	8,0	25x2x4/200
4482285	Biogel Tech	8,5	25x2x4/200
4482290	Biogel Tech	9,0	20x2x4/160

En holdbar naturgummilatex handske til alle formål i kritiske miljøer. Den tilbyder fremragende barrierebeskyttelse samt pasform, fingerspidsfølelse og komfort. Den har let bøjede fingre og en ru overflade. Den er blevet testet og godkendt til brug med kemoterapimidler.

Udpakning af Biogel® handskepakninger

'Holdeteknik'

Der findes forskellige, grundlæggende teknikker til udpakning af sterile operationshandsker. Der er flere grunde til, at udpakningsteknikkerne varierer:

- enkelt- eller dobbeltpakkede handsker
- pakningens udformning og foldning
- de forskellige materialer, der anvendes til både inder- og yderpakning
- den teknik, der bruges ved påtagning af handskerne (åben eller lukket påtagning, med manchetten i hænderne eller fremme)³¹.

Sørg for at yderemballagens kanter ikke kommer i kontakt med inderemballagen, samt at inderemballagen ikke rører den svejste kant på yderemballagens indre kanter. Dette gøres for at sikre inderemballagens/-emballagernes sterilitet.

Åbning af pakken (udført af en usteril person)



1. Tag fat i pakningens øverste, korte side. Undersøg pakningen, og ryst den om nødvendigt let for at sikre, at inderemballagen ligger midt i pakningen for at undgå, at inderemballagen falder ud på en svejste kant, når yderemballagen åbnes.



2. Træk inderemballagens sider fra hinanden. Start med det øvre hjørne længst væk fra dig selv. Fortsæt med det øvre hjørne tættest på dig.



3. Tag godt fat med begge hænder på hver side af pakningen, så yderemballagens lange sider kan trækkes lidt fra hinanden.



4. Pres begge hænder sammen, så de to inderemballager tvinges fra hinanden.



5. Ved åben påtagning tager man fat i inderhandskens indpakning, handske 1 i Indicator-handskesystemet, i den øverste, korte ende. Sørg for, at den assisterende sygeplejerske vender den rigtige ende af pakningen mod den person, der skal have handskerne på.



6. Når man tager handske 1, skal man sørge for, at hænderne ikke kontaminerer handske 2, som stadig ligger i yderemballagen, mens det første par handsker tages på. Imens sikrer den assisterende sygeplejerske, at den inderemballage, der ligger i yderemballagen, holdes steril.



7. Flyt hænderne til inderemballagens nederste, korte ende, og læg inderemballage 1 et tørt og rent sted. Sørg for, at ca. 5 cm af pakningens nederste ende er fri af bordet, så der kan tages fat i den, og inderemballagen kan pakkes op uden risiko for kontaminering af de desinficerede hænder.



8. Åben inderemballage 1 helt, og sørg for, at de desinficerede hænder ikke kontamineres. Tag de farvede inderhandsker på.



9. Tag inderemballage 2 hos den assisterende sygeplejerske, og tag yderhandskerne ud.



10. Tag handskerne på som anbefalet³¹.

Udpakning af Biogel® handskepakninger

'Lægge teknik'

Der findes forskellige, grundlæggende teknikker til udpakning af sterile operationshandsker. Der er flere grunde til, at udpakningsteknikkerne varierer:

- enkelt- eller dobbeltpakkede handsker
- pakningens udformning og foldning
- de forskellige materialer, der anvendes til både inder- og yderpakning
- den teknik, der bruges ved påtagning af handskerne (åben eller lukket påtagning, med manchetten i hænderne eller fremme)³¹.

Sørg for at yderemballagens kanter ikke kommer i kontakt med inderemballagen, samt at inderemballagen ikke rører den svejste kant på yderemballagens indre kanter. Dette gøres for at sikre inderemballagens/-emballagernes sterilitet.

Åbning af pakken (udført af en usteril person)



1. Tag fat i pakningens øverste, korte side. Undersøg pakningen, og ryst den om nødvendigt let for at sikre, at inderemballagen ligger midt i pakningen for at undgå, at inderemballagen falder ud på den svejste kant, når yderemballagen åbnes.



2. Træk inder-embalagens sider fra hinanden. Start med det øvre hjørne længst væk fra dig selv. Fortsæt med det øvre hjørne tættest på dig.



3. Tag godt fat med begge hænder på hver side af pakningen, så yderemballagens lange sider kan trækkes lidt fra hinanden.



4. Nu kan pakningen med handskerne enten lægges på et bord og åbnes der, eller åbnes, mens man holder den frem for sig som på billede 3.



5. Tag fat i både handskepakning 1 og 2 i Indicator-handskesystemet i den nederste ende for at sikre, at hænderne ikke bliver kontaminerede, da den sterile kant i pakningens top er ret kort.



6. Adskil de to pakninger og læg dem ned hver for sig på et rent og tørt sted. Sørg for, at ca. 5 cm. af pakningens nederste ende er fri af bordet, så der kan tages fat i den, og inderemballagen kan pakkes op uden risiko for kontaminering af de desinficerede hænder.



7. Åbn de to inderemballager helt, så det ikke bliver nødvendigt at røre papirembalagen igen. Sørg for, at dine desinficerede hænder ikke kontamineres. Tag handskerne på som anbefalet³¹.

Handskepåtagnig for Biogel® Indicator® Systemer

‘ÅBEN påtagning’

lfør dig den sterile kittel og åbn yder-og inderemballagen som anbefalet³²



1. Tag den første farvede handske ud af inderemballagen med din ikke-dominante hånd. Placér tommel- og pegefingern på din anden hånd på folden af det ombukkede handske-skaft på højde med handskens håndflade og træk handsken over hånden.



2. Behold handskeskaftet ombukket.



3. Tag den anden farvede handske ud af emballagen ved at tage fat med dine behandskede fingre under det ombukkede handskeskaft. Med strakt arm og let bøjet albue, føres den ubehandskede hånd ind i handsken.



4. Træk handsken op over kittlens vævede manchete ved at vrikke armen frem og tilbage med små bevægelser.



5. Træk handsken helt på plads. Sørg for, at handsken dækker kittlens manchete med en margin på ca. 10 cm. Følg samme procedure for den anden handske.



6. Åbn inderemballagen med de halmfarvede yderhandsker. Før fingrene fra den ene behandskede hånd ind i den første yderhandske, mens handsken strækkes for at sikre optimal komfort og pasform. Træk handsken helt på plads og gentag proceduren med den anden yderhandske.



7. Sørg for, at yderhandsken er trukket godt op over inderhandsken (ca. 2,5 cm) for at undgå, at den ruller eller glider ned. Tryk kanten af handskens manchete godt ned mod kittlen, for at anti-rulle båndet i handsken sidder fast på kittlen.



8. Når handskepåtagnig og evt. justeringer er afsluttet, skal du strække dine arme for at sikre dig, at handskerne sidder rigtigt.

Udskiftning af kontamineret/perforeret handske under operation.



9. Hvis der opstår handskepunktur, hvor der er væske tilstede, vil der forekomme en mørk plet på yderhandsken på det sted, hvor punkturen optræder.



10. Fjern yderhandsken ved at trække handskeskaftet ned over hånden, så handsken vender vrangen udad. Smid handsken væk.



11. Kontrollér inderhandsken for punktur. Er der punktur, tages handsken af og udskiftes i henhold til de lokale forskrifter. Ellers tørres handsken af med en steril serviet.

Åbn en ny pakke med den rette type Biogel yderhandsker for at sikre, at farveindikationssystemet virker efter hensigten. Tag den nye yderhandske på og sørg for, at skaftet på den er trukket godt op over inderhandsken (ca. 2,5 cm) for at undgå, at den ruller eller glider ned.

Handskepåtagnig for Biogel® Indicator® Systemer

'LUKKET påtagning med manchetterne i hænderne'

lfør dig den sterile kittel og åbn yder-og inderemballagen som anbefalet³²



1. Stræk ikke hænderne gennem ærmerne manchetter. Hold manchetterne i hænderne som vist på billedet.



2. Yderemballagen åbnes nu af sygeplejersken med gulvfunktion. Tag inderemballagen med hænderne helt dækket af kittlens ærmer.



3. Læg inderemballagen på det sterile underlag, så handskens fingre peger mod dig. Åbn inderemballagen (de farvede handske), mens du sørger for at holde hænderne helt dækket af kittlens ærmer. Tag den første handske med din dominerende hånd (den højre handske med din højre hånd, eller den venstre handske med din venstre hånd).



4. Vip handsken forsigtigt bagover, så den hviler på din venstre eller højre underarm. Handskens tommelfinger er nu ud for din egen tommelfinger.



5. Brug din anden hånd, som stadig er inde i kittelærmet, og træk kanten af handsken over din håndryg.



6. Træk handsken op over kittlens manchete ved at vrikke fingrene frem og tilbage med små bevægelser.



7. Handsken er nu helt på plads. Sørg for, at handsken altid dækker kittlens vævede manchete fuldstændigt. Tag den anden handske op med den ubehandskede hånd, på samme måde som ved første handske.



8. Brug din behandskede hånd til at trække kanten af handsken over bagsiden af din anden hånd. Vrik med dine fingre og træk handsken op over din hånd som før, indtil den er helt på plads.



9. Tag yderhandskerne på. Sørg for at yderhandsken er trukket godt op over inderhandsken (ca. 2,5 cm) for at undgå, at den ruller eller glider ned. Tryk kanten af handskens manchete godt ned mod kittlen, for at anti-rulle båndet i handsken sidder fast på kittlen.



10. Når handskepåtagnig og evt. justeringer er afsluttet, skal du strække dine arme for at sikre dig, at handskerne sidder rigtigt.

Udskiftning af kontamineret/perforeret handske under operation.



11. Hvis der opstår handskepunktur, hvor der er væske tilstede, vil der forekomme en mørk plet på yderhandsken på det sted, hvor punkturen optræder.



12. Fjern yderhandsken ved at trække handskeskafteet ned over hånden, så handsken vender vrangen udad. Smid handsken væk.



13. Kontrollér inderhandsken for punktur. Er der punktur, tages handsken af og udskiftes i henhold til de lokale forskrifter. Ellers tørres handsken af med en steril serviet.

Åbn en ny pakke med den rette type Biogel yderhandsker for at sikre, at farveindikationssystemet virker efter hensigten. Tag den nye yderhandske på og sørg for, at skafteet på den er trukket godt op over inderhandsken (ca. 2,5 cm) for at undgå, at den ruller eller glider ned.

Handskepåtagnig for Biogel® Indicator® Systemer

' LUKKET påtagning med manchetterne over hænderne '


Ifør dig den sterile kittel og åbn yder-og inderemballagen som anbefalet³².



1. Stræk ikke hænderne gennem ærmerens manchetter. Manchetterne skal være løse som vist på billedet.



2. Yderemballagen åbnes af sygeplejersken med gulvfunktion. Tag inderemballagen med kittlen, mens hænderne bliver i manchetten.

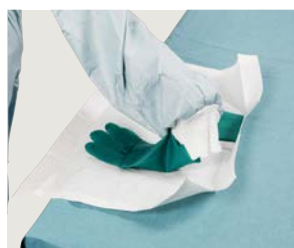

3. Læg inderemballagen på det sterile underlag, så handskens fingre peger mod dig. Åbn inderemballagen (de farvede handske), mens du hele tiden sørger for at holde hænderne inde i kittlens ærmer. Tag den første handske med din dominerende hånd (den højre handske med din højre hånd eller den venstre handske med din venstre hånd).



4. Vip handsken forsigtigt bagover, så den hviler på din venstre eller højre underarm. Handskens tommelfinger er nu ud for din egen tommelfinger.



5. Brug din anden hånd, som stadig er inde i kittelærmet, og træk kanten af handsken over din håndryg.



6. Træk handsken op over kittlens manchete ved at vrikke fingrene frem og tilbage med små bevægelser.



7. Handsken er nu helt på plads. Sørg for, at handsken altid dækker kittlens vævede manchete fuldstændigt. Tag den anden handske op med den ubehandskede hånd, på samme måde som ved den første handske.



8. Brug din behandskede hånd til at trække kanten af handsken over bagsiden af din anden hånd. Vrik med dine fingre og træk handsken op over din hånd som før, indtil den er helt på plads.



9. Tag yderhandskerne på. Sørg for at yderhandsken er trukket godt op over inderhandsken (ca. 2,5 cm) for at undgå, at den ruller eller glider ned. Tryk kanten af handskens manchete godt ned mod kittlen, for at anti-rulle båndet i handsken sidder fast på kittlen.



10. Når handskepåtagnig og evt. justeringer er afsluttet, skal du strække dine arme for at sikre dig, at handskerne sidder rigtigt.

Udskiftning af kontamineret/perforeret handske under operation.



11. Hvis der opstår handskepunktur, hvor der er væske tilstede, vil der forekomme en mørk plet på yderhandsken på det sted, hvor punkturen optræder.



12. Fjern yderhandsken ved at trække handskeskaftet ned over hånden, så handsken vender vrangen udad. Smid handsken væk.



13. Kontrollér inderhandsken for punktur. Er der punktur, tages handsken af og udskiftes i henhold til de lokale forskrifter. Ellers tørres handsken af med en steril serviet.

Åbn en ny pakke med den rette type Biogel yderhandsker for at sikre, at farveindikationssystemet virker efter hensigten. Tag den nye yderhandske på og sørg for, at skaftet på den er trukket godt op over inderhandsken (ca. 2,5 cm) for at undgå, at den ruller eller glider ned.

Handskepåtagnig for Biogel® Indicator® Systemer

'ASSISTERET påtagning'

Ifør dig den sterile kittel og åbn yder-og inderemballagen som anbefalet³²



1. Placér fingrene på hver hånd under det ombukkede skaft (ca. 10 cm fra handskemanchet kanten) på den farvede inderhandske. Handskens håndflade skal være vendt mod den ubehandskede persons hånd med handsken lige ud for personens tommelfinger. Brug fingrene til at strække manchetten for at åbne handsken. Den ubehandskede person stikker derefter sin hånd ind i handsken med et fast, nedadgående tryk.



2. Gentag for den anden hånd. Personen, der får handsker på, kan hjælpe med påtagningen ved at tage fat på handskemanchetten.



3. Når de halmfarvede yderhandsker skal tages på, kan personen, der får handsker på, hjælpe med påtagningen ved at tage fat i manchetten og trække udad for at åbne handsken.



4. Sørg for, at yderhandsken er trukket godt op over inderhandsken (ca. 2,5 cm) for at undgå, at den ruller eller glider ned.



5. Gentag for den anden hånd og tryk kanten af handskes manchet godt ned mod kittlen, for at anti-rulle båndet i handsken sidder fast på kittlen.



6. Når handskepåtagnig og evt. justeringer er afsluttet, skal du strække dine arme for at sikre dig, at handskerne sidder rigtigt.

Udskiftning af kontamineret/perforeret handske under operation.



7. Hvis der opstår handskepunktur, hvor der er væske tilstede, vil der forekomme en mørk plet på yderhandsken på det sted, hvor punkturen optræder.



8. Fjern yderhandsken ved at trække handskeskaftet ned over hånden, så handsken vender vrangen udad. Smid handsken væk.



9. Kontrollér inderhandsken for punktur. Er der punktur, tages handsken af og udskiftes i henhold til de lokale forskrifter. Ellers tørres handsken af med en steril serviet.

Åbn en ny pakke med den rette type Biogel yderhandsker for at sikre, at farveindikationssystemet virker efter hensigten. Tag den nye yderhandske på og sørg for, at skaftet på den er trukket godt op over inderhandsken (ca. 2,5 cm) for at undgå, at den ruller eller glider ned.

Vejledning til fjernelse af operationskittel - og handsker

Fjernelse af beskidt kittel og handsker



1. For at beskytte arbejdsbeklædningen (uniform/renrumsdragt), arme og hænder fra mikrober, der findes på ydersiden af en beskidt kittel og handsker, skal handskerne og kitlen tages af på en helt bestemt måde.



2. Start med at tage den ene, beskidte yderhandske af og smid den væk.



3. Fortsæt med at tage den anden yderhandske af og smid den væk.



4. Tag fat på kitlen ved skulderen eller livet (som på billedet). Hvis det er en fleggangskittel, bindes kitlen op. Den assisterende person skal binde ryglukningen op.



5. Træk ryggen og ærmet fra kitlen fremad, og udover den behandskede hånd ved at vende vrangen ud på kitlen og krænge handskens manchet med.



6. Hold arme og kittel væk fra kroppen mens du stadig har vrangen ud på kitlen. Herefter smides kitlen væk.



7. Brug en af de behandskede fingre på den ene hånd til at holde ved manchetten, mens handsken fjernes med vrangen udad. Nu bruges hånden uden handske til at tage fat i den vendte manchet på den anden handske. Denne handske vendes også med vrangen ud, mens den fjernes. Smid handskerne væk og desinficer hænderne.

Kontaktpersoner hos Mölnlycke

Allan Ravn

Region Syddanmark (excl. OUH)
Region Midt (vest)
Færøerne og Island
BARRIER og Procedurepakker



Anne-Marie Thuesen

Region Hovedstaden
BARRIER og Procedurepakker



Christa Peistrup Meincke

Region Sjælland + OUH
BARRIER og Procedurepakker



Kirsten Holme

Region Nordjylland + Midtjylland (øst)
BARRIER og Procedurepakker



Hanne Martinsen

Jylland og Fyn, Island og Færøerne
Biogel



Ninette Lykke


Hovedstaden og Sjælland
Biogel



Referencer

1. Data on file Mölnlycke.
2. Greiling, M. A multinational case study to evaluate and quantify time-saving by using custom procedure trays for operating room efficiency. Data presented at European Association of Hospital Managers, September 2010 (poster).
3. Neely AN, Maley MP J Clin Microbiol 2000;36:724-6.
4. Verkala K et al Eur J Card Surg 1998;14:206-10.
5. Humans as dispersers of microorganisms- dispersion pattern and prevention. Jan Hoborn.
6. Fulfil the requirements of EN 14683:2005 Surgical masks - Requirements and test methods.
7. Clinical study to assess the safety and efficacy of BARRIER EasyWarm, an active self warming blanket used to prevent hypothermia. Data on file. 2012.
8. European Standard EN 13795:2011 Surgical AFD/EKNINGER, gowns and clean air suits, used as medical devices for patients, clinical staff and equipment - General requirements for manufacturers, processors and products, test methods, performance requirements and performance levels.
9. ANSI/AAMI PB70:2012 Liquid performance and classification of protective apparel and AFD/EKNINGER for use in health care facilities. 3. FQN material study on competitor gown materials, 2010.
10. Neely AN, Maley MP J Clin Microbiol 2000;36:724-6.
11. Gordon A J, et al. Letter to the Editor. J Hosp Inf 2009;8:289-291
12. Humans as dispersers of microorganisms - dispersion pattern and prevention. Jan Hoborn. Department of Clinical Bacteriology, Inst of Medical Microbiology, University of Göteborg, Göteborg, Sweden
13. Hubble MJ et al. Clothing in laminar-flow operating theatres. J Hosp Inf 1996;32:1-7
14. EN 14683:2014 Surgical masks- Requirements and test methods, Annex A (informative)
15. Ljungqvist B and Reinmüller B. PEOPLE AS A CONTAMINATION SOURCE. Surgical clothing systems for operating rooms - a comparison between disposable non-woven and reusable mixed material. Report from Chalmers University of Technology. 2012.
16. Pada S and Pert TM Curr Opin Infec Dis 2015; 28:369-374.
17. Tammelin, A., Ljungqvist, B., Reinmüller, B. Singleuse surgical clothing system for reduction of airborne bacteria in the operating room. J Hospital Infect. 2013. 84(3):245-7.
18. Tammelin, A., Hambraeus, A., Stahle, E. Routes and sources of Staphylococcus aureus transmitted to the surgical wound during cardiothoracic surgery: possibility of preventing wound contamination by use of special scrub suits. Infection Control and Hospital Epidemiology 2001;22(6):338-346.
20. European Centre for Disease Prevention & Control (ECDC) Communicable Diseases Report. 2008.
21. Anderson DJ et al. the official journal of the Society of Hospital Epidemiologists of America. 2008;29 Suppl 1:S51-61.
22. Leaper et.al. Surgical site infection - a European perspective of incidence and economic burden. Int Wound J. 2004 Dec;1(4):247-73
23. Howarth FH. Prevention of airborne infection during surgery. Lancet, 1985; 1(8425): 386-8.
24. Kasina, P., Tammelin, A., Blomfeldt, A-M., Ljungqvist, B., Reinmüller, B., Ottosson, C. Comparison of three distinct clean air suits to decrease the bacterial load in the operating room: an observational study. Patient Safety in Surgery 2016;10(1): DOI 10.1186/s13087-015-0091-4.
25. Hambraeus, A. Aerobiology in the operating room - a review. Journal of Hospital Infection 1988;11(Supplement A):68-76.
27. Total Protein - Based on ASTM D5712 - 10 Standard Test Method for Analysis of Aqueous Extractable Protein in Natural Rubber and Its Products Using the Modified Lowry Method. Testing conducted at Guthrie Foundation for Education and Research, LEAP Testing Service, Report #5268.
28. Antigenic Protein - Based on ASTM D6499 - 07 Standard Test Method for The Immunological Measurement of Antigenic Protein in Natural Rubber and its Products. Testing conducted at Guthrie Foundation for Education and Research, LEAP Testing Service, Report #5268.
29. Wigmore SJ & Rainey JB, 'Use of Coloured Undergloves to Detect Glove Puncture.' BSJ 1994: 81: 1480
30. Summary of Indication Performance of Biogel Gloves Indicator Systems versus Competitors' Double Gloving Combinations. October 2020. Mölnlycke Health Care. Data on file.
31. Folin A. Donning Indicator Double Gloving System. Safe Hands 1/2010. Mölnlycke Health Care AB.
32. Folin A. Opening methods for the indicator double gloving system packaging. Safe Hands 2/2009. Mölnlycke Health Care AB.
33. Mischke C, Verbeek JH, Saarto A, Lavoie MC, PahwaM, Ijaz S. Gloves, extra gloves or special types of gloves for preventing percutaneous exposure injuries in healthcare personnel. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 3. Art. No.: CD009573. DOI: 10.1002/14651858.CD009573.pub2.
34. Preventing Disease in the Operating Room. Panel discussion, American College of Surgeons Spring Meeting April 29, 1998. Accessed at www.facs.org/80/about.college/acscomm\core\coreprev.html on Sep 16,1999
35. 1. Customer reference case. 2014. Data on file.
54. Summary of Technical Documents. Mölnlycke Health Care. Data on File
55. SOP LR2200. Automatic Glove Inspection by QMAX. Mölnlycke Health Care. Data on file.
56. Aldiyami, Ehab; Kulkarni, Ashwin; et al. Latex-free gloves Safer for Whom?; The Journal of Arthroplasty; 2010; Vol. 25 No. 1 pp. 27-30.
57. Collins J. A Clinical Investigation to Evaluate the Biogel PI Micro Surgical Glove. Mölnlycke Health Care, 2014. Data on file.
58. Gottrup F, Müller K, Bergmark S, Nørregaard S. Powder-free, non sterile gloves assessed in a wound healing centre. Eur J Surg. 2001 Aug;167(8):625-7

NOTER

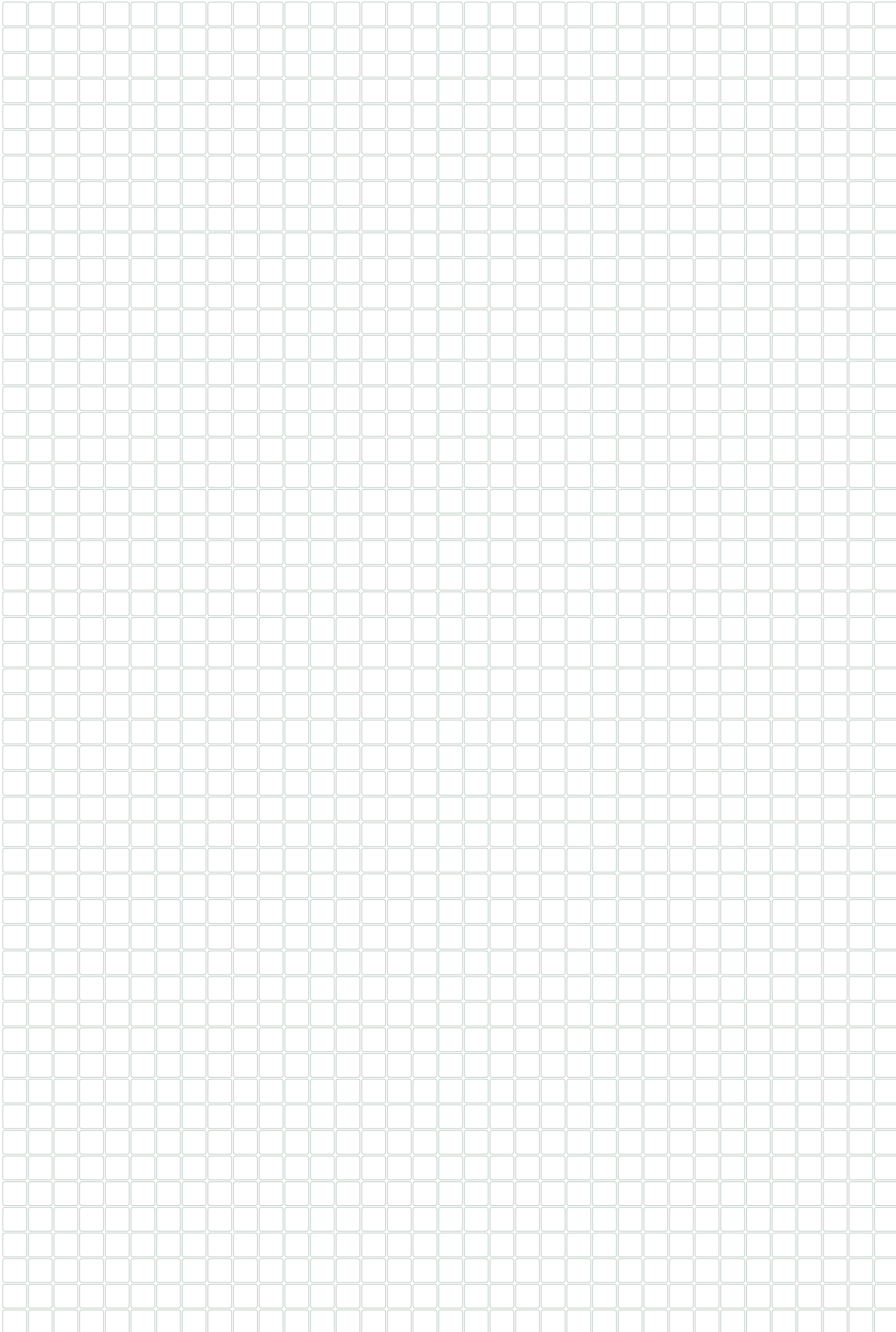

Revolutionise care for people and planet

Rundt om i verden er sundhedssystemer og fagfolk under pres for at levere bedre pleje til flere mennesker, for bedre værdi. De har brug for innovative løsninger, de kan stole på. Det er her, vi kommer ind i billedet. Vi har været på forkant med forandring siden 1849, med banebrydende radikal innovation, der forbedrer livskvaliteten for patienter og dem, der plejer dem, og samtidig reducerer sundhedsplejens miljøpåvirkning. Vi leverer effektive løsninger, og vi er altid på udkig efter nye måder at forbedre os på.

Vi kan tilbyde undervisning i mange forskellige områder inden for jeres speciale. I er altid velkomne til at kontakte os ved et specifikt behov. Undervisningen kan holdes i jeres egen afdeling - f.eks. som et morgenmøde.

Online undervisning

På vores hjemmeside kan du læse mere om erfaringer, viden og ekspertise vedr. brugen af operationsprodukter. Du kan også finde forskelligt uddannelsesmateriale samt videovejledninger til korrekt drapering af forskellige operationsafdækninger. Der er også vejledninger til korrekt påtagning af operationsbeklædning.



<https://www.linkedin.com/company/mölnlycke-danmark>

Læs mere på www.mölnlycke.com/da-dk

Mölnlycke Health Care ApS, Gydevang 39, 3450 Allerød. Tlf.: 80 88 68 10. info.dk@molnlycke.com.
Mölnlycke, Drisite, BARRIER, Biogel, Mepilex, Unisoft, BARRIER Flex, varemærker, navne og logoer er registreret globalt til en eller flere af virksomhederne i Mölnlycke Health Care gruppen. ©2025 Mölnlycke Health Care AB. Alle rettigheder forbeholdes.
DKSU0301810. Version maj 2026

