

Handskepåtagning for Biogel® Indicator® Systemer

'ÅBEN' påtagning'

Ifør dig den sterile kittel og åbn yder-og inderemballagen som anbefalet¹



1. Tag den første farvede handske ud af inderemballagen med din ikke-dominante hånd. Placer tommel- og pegefingern på din anden hånd på folden af det ombukkede handskeskaft på højde med handskens håndflade og træk handsken over hånden.



2. Behold handskeskaftet ombukket.



3. Tag den anden farvede handske ud af emballagen ved at tage fat med dine behandskede fingre under det ombukkede handskeskaft. Med strakt arm og let bøjet albue, føres den ubehandskede hånd ind i handsken.



4. Træk handsken op over kitlens vævede manchete ved at vrikke armen frem og tilbage med små bevægelser.



5. Træk handsken helt på plads. Sørg for, at handsken dækker kitlens manchete med en margin på ca. 10 cm. Følg samme procedure for den anden handske.



6. Åbn inderemballagen med de halmfarvede yderhandsker. Før fingrene fra den ene behandskede hånd ind i den første yderhandske, mens handsken strækkes for at sikre optimal komfort og pasform. Træk handsken helt på plads og gentag proceduren med den anden yderhandske.



7. Sørg for, at yderhandsken er trukket godt op over inderhandsken (ca. 2,5 cm) for at undgå, at den ruller eller glider ned. Tryk kanten af handskens manchete godt ned mod kitlen, for at anti-rulle båndet i handsken sidder fast på kitlen.



8. Når handskepåtagning og evt. justeringer er afsluttet, skal du strække dine arme for at sikre dig, at handskerne sidder rigtigt.

Udskiftning af kontamineret/perforeret handske under operation.



9. Hvis der opstår handskepunktur, hvor der er væske tilstede, vil der forekomme en mørk plet på yderhandsken på det sted, hvor punkturen optræder.



10. Fjern yderhandsken ved at trække handskeskaftet ned over hånden, så handsken vender vrangen udad. Smid handsken væk.



11. Kontrollér inderhandsken for punktur. Er der punktur, tages handsken af og udskiftes i henhold til de lokale forskrifter. Ellers tørres handsken af med en steril serviet.

Åbn en ny pakke med den rette type Biogel yderhandsker for at sikre, at farveindikationssystemet virker efter hensigten. Tag den nye yderhandske på og sørg for, at skaftet på den er trukket godt op over inderhandsken (ca. 2,5 cm) for at undgå, at den ruller eller glider ned.

Besøg vores hjemmeside for videovejledning til påtagning af kittel og operationshandsker.

Referencer: 1 Folin A.Udpakning af Indicator-dobbelthandskesystem. En Sikker Hånd 2/2009. Mölnlycke Health Care AB.

Læs mere på www.molnlycke.dk

Mölnlycke Health Care ApS, Gydevang 39, 3450 Allerød. Tlf.: 48 168 268. info.dk@molnlycke.com
Mölnlycke og Biogel varemærker, navne og logoer er registreret globalt til en eller flere af virksomhederne i Mölnlycke Health Care gruppen. © 2019 Mölnlycke Health Care AB. Alle rettigheder forbeholdes. DKSU0011901


Mölnlycke®

Handskepåtagning for Biogel® Indicator® Systemer

'LUKKET' påtagning med manchetterne over hænderne'

Ifør dig den sterile kittel og åbn yder-og inderemballagen som anbefalet¹.



1. Stræk ikke hænderne gennem ærmernes manchetter. Manchetterne skal være løse som vist på billedet.



2. Yderemballagen åbnes af sygeplejersken med gulvfunktion. Tag inderemballagen med kittlen, mens hænderne bliver i manchetterne.



3. Læg inderemballagen på det sterile underlag, så handskens fingre peger mod dig. Åbn inderemballagen (de farvede handske), mens du hele tiden sørger for at holde hænderne inde i kittlens ærmer. Tag den første handske med din dominerende hånd (den højre handske med din højre hånd eller den venstre handske med din venstre hånd).



4. Vip handsken forsigtigt bagover, så den hviler på din venstre eller højre underarm. Handskens tommelfinger er nu ud for din egen tommelfinger.



5. Brug din anden hånd, som stadig er inde i kittelærmet, og træk kanten af handsken over din håndryg.



6. Træk handsken op over kittlens manchete ved at vrikke fingrene frem og tilbage med små bevægelser.



7. Handsken er nu helt på plads. Sørg for, at handsken altid dækker kittlens vævede manchete fuldstændigt. Tag den anden handske op med den ubehandskede hånd, på samme måde som ved den første handske.



8. Brug din behandskede hånd til at trække kanten af handsken over bagsiden af din anden hånd. Vrik med dine fingre og træk handsken op over din hånd som før, indtil den er helt på plads.



9. Tag yderhandskerne på. Sørg for at yderhandsken er trukket godt op over inderhandsken (ca. 2,5 cm) for at undgå, at den ruller eller glider ned. Tryk kanten af handskens manchete godt ned mod kittlen, for at anti-rulle båndet i handsken sidder fast på kittlen.



10. Når handskepåtagning og evt. justeringer er afsluttet, skal du strække dine arme for at sikre dig, at handskerne sidder rigtigt.

Udskiftning af kontamineret/perforeret handske under operation.



11. Hvis der opstår handskepunktur, hvor der er væske tilstede, vil der forekomme en mørk plet på yderhandsken på det sted, hvor punkturen optræder.



12. Fjern yderhandsken ved at trække handskeskiftet ned over hånden, så handsken vender vrangen udad. Smid handsken væk.



13. Kontrollér inderhandsken for punktur. Er der punktur, tages handsken af og udskiftes i henhold til de lokale forskrifter. Ellers tørres handsken af med en steril serviet.

Åbn en ny pakke med den rette type Biogel yderhandsker for at sikre, at farveindikationssystemet virker efter hensigten. Tag den nye yderhandske på og sørg for, at skaftet på den er trukket godt op over inderhandsken (ca. 2,5 cm) for at undgå, at den ruller eller glider ned.

Besøg vores hjemmeside for videovejledning til påtagning af kittel og operationshandsker.

Referencer: 1 Folin A.Udpakning af Indicator-dobbelthandskesystem. En Sikker Hånd 2/2009. Mölnlycke Health Care AB.

Læs mere på www.molnlycke.dk

Mölnlycke Health Care ApS, Gydevang 39, 3450 Allerød. Tlf.: 48 168 268. info.dk@molnlycke.com
Mölnlycke og Biogel varemærker, navne og logoer er registreret globalt til en eller flere af virksomhederne i Mölnlycke Health Care gruppen. © 2019 Mölnlycke Health Care AB. Alle rettigheder forbeholdes. DKSU0021901


Mölnlycke®

Handskepåtagning for Biogel® Indicator® Systemer

'LUKKET' påtagning med manchetterne i hænderne'

Ifør dig den sterile kittel og åbn yder-og inderemballagen som anbefalet¹



1. Stræk ikke hænderne gennem ærmernes manchetter. Hold manchetterne i hænderne som vist på billedet.



2. Yderemballagen åbnes nu af sygeplejersken med gulvfunktion. Tag inderemballagen med hænderne helt dækket af kitlens ærmer.



3. Læg inderemballagen på det sterile underlag, så handskens fingre peger mod dig. Åbn inderemballagen (de farvede handske), mens du sørger for at holde hænderne helt dækket af kitlens ærmer. Tag den første handske med din dominerende hånd (den højre handske med din højre hånd, eller den venstre handske med din venstre hånd).



4. Vip handsken forsigtigt bagover, så den hviler på din venstre eller højre underarm. Handskens tommelfinger er nu ud for din egen tommelfinger.



5. Brug din anden hånd, som stadig er inde i kittelærmet, og træk kanten af handsken over din håndryg.



6. Træk handsken op over kitlens manchet ved at vrikke fingrene frem og tilbage med små bevægelser.



7. Handsken er nu helt på plads. Sørg for, at handsken altid dækker kitlens vævede manchet fuldstændigt. Tag den anden handske op med den ubehandskede hånd, på samme måde som ved første handske.



8. Brug din behandskede hånd til at trække kanten af handsken over bagsiden af din anden hånd. Vrik med dine fingre og træk handsken op over din hånd som før, indtil den er helt på plads.



9. Tag yderhandskerne på. Sørg for at yderhandsken er trukket godt op over inderhandsken (ca. 2,5 cm) for at undgå, at den ruller eller glider ned. Tryk kanten af handskens manchet godt ned mod kitlen, for at anti-rulle båndet i handsken sidder fast på kitlen.



10. Når handskepåtagning og evt. justeringer er afsluttet, skal du strække dine arme for at sikre dig, at handskerne sidder rigtigt.

Udskiftning af kontamineret/perforeret handske under operation.



11. Hvis der opstår handskepunktur, hvor der er væske tilstede, vil der forekomme en mørk plet på yderhandsken på det sted, hvor punkturen optræder.



12. Fjern yderhandsken ved at trække handskeskaffet ned over hånden, så handsken vender vrangen udad. Smid handsken væk.



13. Kontrollér inderhandsken for punktur. Er der punktur, tages handsken af og udskiftes i henhold til de lokale forskrifter. Ellers tørres handsken af med en steril serviet.

Åbn en ny pakke med den rette type Biogel yderhandsker for at sikre, at farveindikations-systemet virker efter hensigten. Tag den nye yderhandske på og sørg for, at skaffet på den er trukket godt op over inderhandsken (ca. 2,5 cm) for at undgå, at den ruller eller glider ned.

Besøg vores hjemmeside for videovejledning til påtagning af kittel og operationshandsker.

Referencer: 1 Folin A.Udpakning af Indicator-dobbelthandskesystem. En Sikker Hånd 2/2009. Mölnlycke Health Care AB.

Læs mere på www.molnlycke.dk

Mölnlycke Health Care ApS, Gydevang 39, 3450 Allerød. Tlf.: 48 168 268. info.dk@molnlycke.com
Mölnlycke og Biogel varemærker, navne og logoer er registreret globalt til en eller flere af virksomhederne i Mölnlycke Health Care gruppen. © 2018 Mölnlycke Health Care AB. Alle rettigheder forbeholdes. DKSU361812


Mölnlycke®

Handskepåtagning for Biogel® Indicator® Systemer

'ASSISTERET påtagning'

Ifør dig den sterile kittel og åbn yder-og inderemballagen som anbefalet¹



1. Placer fingrene på hver hånd under det ombukkede skaft (ca. 10 cm fra handskemanchet kanten) på den farvede inderhandske. Handskens håndflade skal være vendt mod den ubehandskede persons hånd med handsken lige ud for persons tommelfinger. Brug fingerne til at strække manchetten for at åbne handsken.

Den ubehandskede person stikker derefter sin hånd ind i handsken med et fast, nedgående tryk.



2. Gentag for den anden hånd. Personen, der får handsker på, kan hjælpe med påtagningen ved at tage fat på handskemanchetten.



3. Når de halmfarvede yderhandsker skal tages på, kan personen, der får handsker på, hjælpe med påtagningen ved at tage fat i manchetten og trække udad for at åbne handsken.



4. Sørg for, at yderhandsken er trukket godt op over inderhandsken (ca. 2,5 cm) for at undgå, at den ruller eller glider ned.



5. Gentag for den anden hånd og tryk kanten af handskens manchete godt ned mod kitten, for at anti-rulle båndet i handsken sidder fast på kitten.



6. Når handskepåtagning og evt. justeringer er afsluttet, skal du strække dine arme for at sikre dig, at handskerne sidder rigtigt.

Udskiftning af kontamineret/perforeret handske under operation.



7. Hvis der opstår handskepunktur, hvor der er væske tilstede, vil der forekomme en mørk plet på yderhandsken på det sted, hvor punkturen optræder.



8. Fjern yderhandsken ved at trække handskeskaftet ned over hånden, så handsken vender vrangen udad. Smid handsken væk.



9. Kontrollér inderhandsken for punktur. Er der punktur, tages handsken af og udskiftes i henhold til de lokale forskrifter. Ellers tørres handsken af med en steril serviet.

Åbn en ny pakke med den rette type Biogel yderhandsker for at sikre, at farveindikationssystemet virker efter hensigten. Tag den nye yderhandske på og sørg for, at skaftet på den er trukket godt op over inderhandsken (ca. 2,5 cm) for at undgå, at den ruller eller glider ned.

Besøg vores hjemmeside for videovejledning til påtagning af kittel og operationshandsker.

Referencer: 1 Folin A.Udpakning af Indicator-dobbelthandskesystem. En Sikker Hånd 2/2009. Mölnlycke Health Care AB.

Læs mere på www.molnlycke.dk

Mölnlycke Health Care ApS, Gydevang 39, 3450 Allerød. Tlf.: 48 168 268. info.dk@molnlycke.com
Mölnlycke og Biogel varemærker, navne og logoer er registreret globalt til en eller flere af virksomhederne i Mölnlycke Health Care gruppen. © 2019 Mölnlycke Health Care AB. Alle rettigheder forbeholdes. DKSU0031901


Mölnlycke®