

Patientvejledning

Brug af Avance® Solo

Hvad skal du vide, når du er i behandling med Avance® Solo NPWT systemet



Avance® Solo
Bring healing home


Mölnlycke®



Indhold

Introduktion til sårbehandling med undertryk (NPWT)	
Bliv fortrolig med NPWT og Avance Solo	4-5
Hvad skal du vide, når du bruger Avance Solo	
Læs mere om, hvad du skal gøre, og hvad du skal undgå, når du er i behandling med Avance Solo NPWT system	6-7
Sådan passer du på din Avance Solo	
Information om, hvordan du rengør og vedligeholder din Avance Solo pumpe, og hvad de audiovisuelle signaler betyder	8-11

Scan QR-koden med telefonens kamera for at besøge Avance Solo webstedet.
Her finder du instruktionsvideoer, dokumenter til download og meget mere.




Vigtigt: Du skal straks kontakte sundhedspersonale, hvis du oplever blødning, forhøjet blodtryk eller udfordringer med pumpen.
Hvis du har spørgsmål i øvrigt, er du velkommen til at kontakte sundhedspersonalet:

Navn: _____

Tlf.: _____

Du modtager behandling med Avance Solo NPWT fra Mölnlycke. Denne brochure informerer dig om, hvordan du bruger og vedligeholder pumpen. Læs den omhyggeligt.

Hvad er de forskellige dele i Avance Solo?

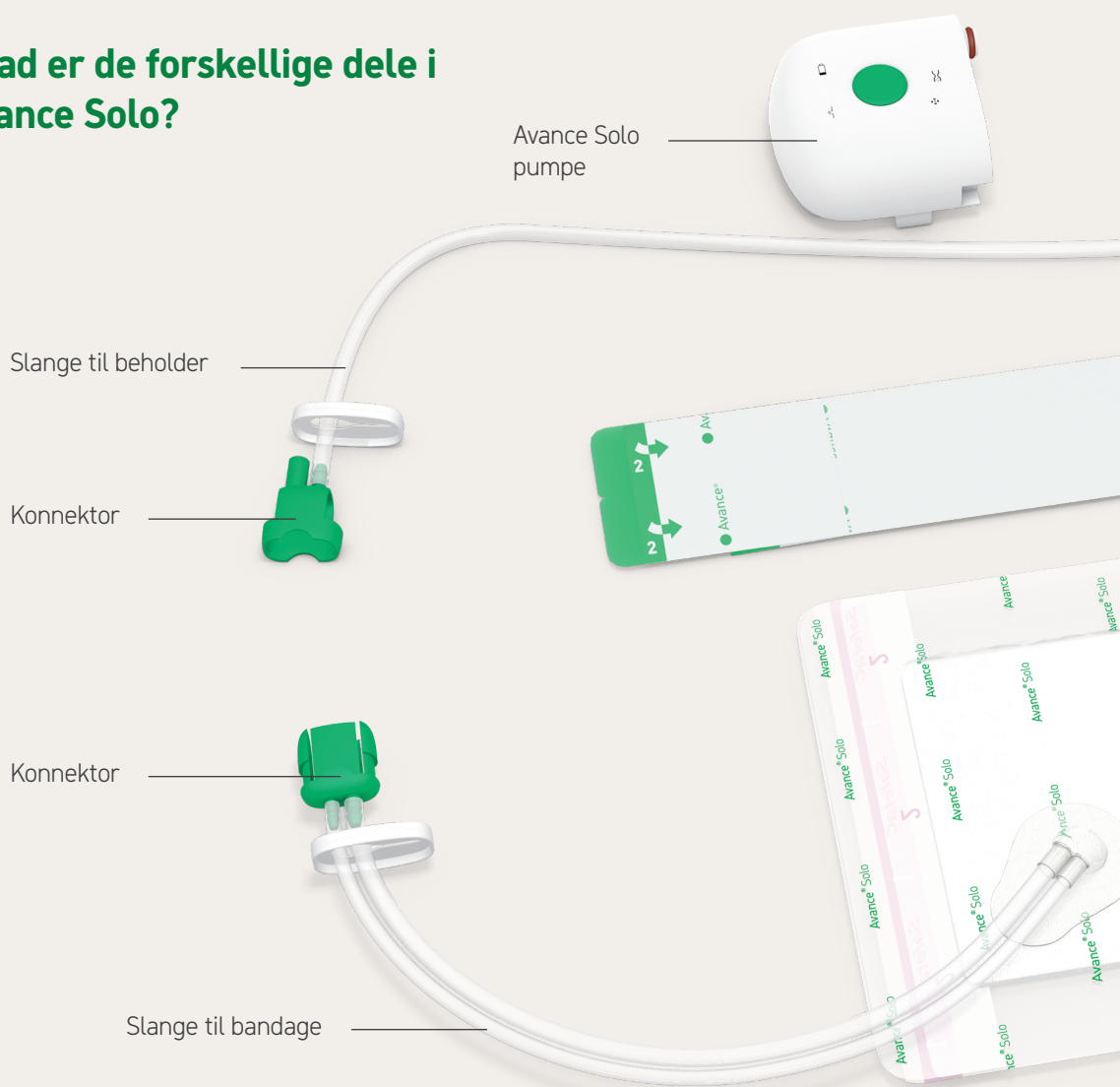


Hvad er sårbehandling med undertryk (NPWT)?

Sårbehandling med undertryk (NPWT) er en metode til behandling af sår ved hjælp af undertryk, der fjerner væske fra såret.

Hvad er fordelene ved NPWT?

- NPWT støtter helingen i komplekse sår og sår, der heler langsomt¹.
- Det hjælper med at reducere hævelse og beskytter såret mod kontaminering udefra².

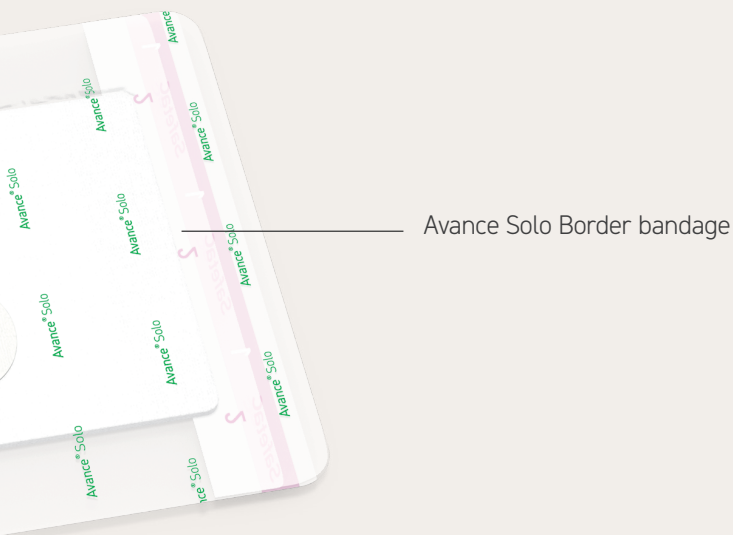

Hvad skal du være opmærksom på, når du bruger Avance Solo

Avance Solo er medicinsk udstyr, og det er vigtigt, at du passer godt på det. De komplette instruktioner, advarsler og forholdsregler fremgår af brugervejledningen, der følger med produktpakken.

Vær opmærksom på:

- skift ikke bandagen selv.
- udsæt ikke bandage, pumpe, beholder eller slanger for direkte vandstråler, kulde eller varme (driftstemperatur 5–40 °C).
- bandagen, pumpen, beholderen eller slangerne må ikke komme i vand.
- pumpen må ikke være tændt, hvis du evt. skal ud at flyve. Tag batterierne ud.
- pumpen må ikke adskilles.
- pumpen skal være utilgængelig for børn og kæledyr.

Vigtige funktioner:

- Sørg for at være opmærksom på de synlige og hørbare alarmer for lækage, blokering og lavt batteriniveau, som Avance Solo pumpen afgiver. Se side 11 for en liste over signaler og alarmer.
- For at levere kontinuerligt, reguleret negativt tryk kører pumpen, og der høres en pulserende lyd. Dette er helt normalt og en bekræftelse på, at systemet fungerer.²⁻⁷ For at reducere forstyrrelser, mens du sover om natten, kan du få tilbudt en natboks via sundhedspersonalet.
- Kontrollér, at bandagen er trukket sammen og fast ved berøring. Hvis du oplever problemer skal du kontakte sundhedspersonalet.

Sørg for at bære og placere pumpen på en måde, der forhindrer:

- Fastklemning eller strangulering (dvs. at slangen er snoet omkring en legemsdel).
- Binding eller blokering af slange.
- Når du bruger bælteclipsen, skal du sørge for, at den er placeret på begge sider af dit bælte/linning. Hvis du af hensyn til komforten eller bekvemmeligheden placerer pumpen foran, skal den fjernes, før du sætter dig ned, for at undgå, at pumpen bliver skubbet ud af bælteclipsen.


Hvordan håndterer jeg mine daglige hygiejnerutiner?

Let brusebad er tilladt, men det er vigtigt at holde pumpen væk fra vand. Bandagen er vandafvisende, men bør ikke udsættes for direkte vandstråler. Følg nedenstående vejledning for at undgå kontaminering.


Følg disse trin, når du tager et let brusebad:




Sæt behandlingen på pause ved at trykke på den grønne startknap på pumpen og slippe den efter to (2) sekunder.

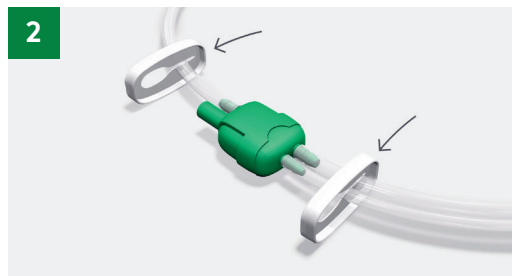


Afklem beholderslangen og bandageslangen ved at placere glideklemmerne ved siden af de grønne konnektorer og lade dem glide hen over slangerne, indtil de sidder fast.

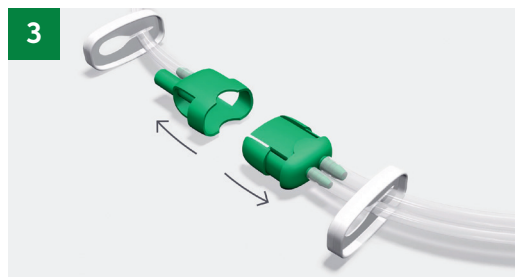

Beholderslangen med pumpe kobles fra bandageslangen, og delen med pumpen anbringes sikkert væk fra brusebadet.

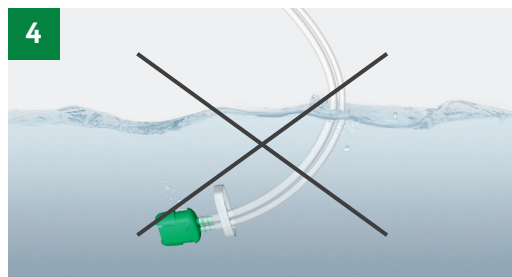

Sørg for, at bandageslangen ikke nedsænkes i vand under brusebadet.

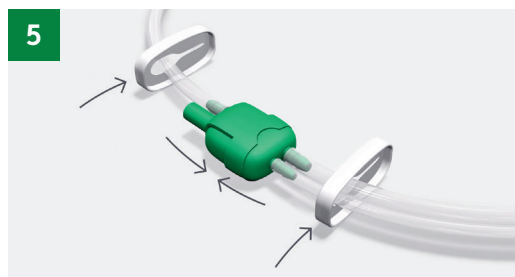

Tilslut bandagen til pumpen og beholderen igen efter brusebadet ved at montere de grønne konnektorer. Frigør de to klemmer, når bandagen er tilsluttet.



Genstart behandlingen ved at trykke på knappen og holde den nede. Slip efter to (2) sekunder, indtil pumpen aktiveres, og knappen blinker.


Sådan passer du på din Avance Solo

Udskiftning af beholder


Du kan se, om beholderen skal skiftes, gennem det gennemsigtige vindue bag på beholderen, hvis der er enpumpeblokeringsalarm. Hvis du skal skifte beholder, skal du følge nedenstående trin. Du kan få anvist af sundhedspersonalet, hvordan man skifter beholderen.




Sæt pumpen på pause ved at trykke på den grønne startknap og slippe den efter to (2) sekunder. Pumpen udsender to bip for at bekræfte, at den er i pausetilstand.

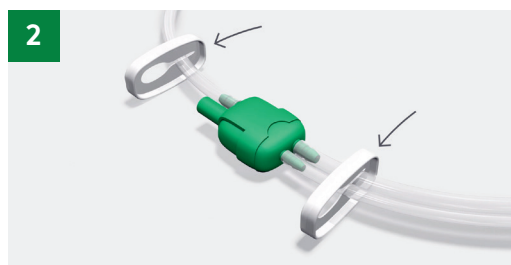

Skub slangeklemmerne op, så de er tæt på de grønne konnektorer, og skub begge klemmer hen over slangen for at sikre, at der ikke lækkes væske, når den frakobles.

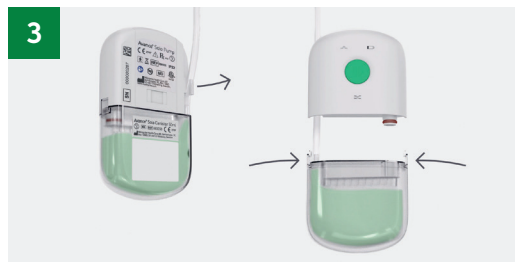

Løsn slangerne bag på pumpen. Tryk hårdt på de sidemonterede plasttappe og træk, mens du forsigtigt rokker med beholderen for at frakoble den. Tilslut den nye beholder. Du kan forvente, at beholderen sidder godt fast, hvilket er normalt og nødvendigt for at opretholde en effektiv forsegling.

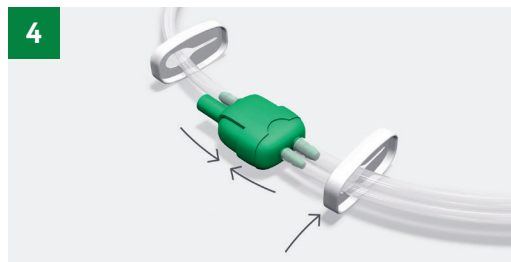

Kobl de to grønne konnektorer sammen igen, løsn klemmen på bandageslangen og genstart pumpen ved at trykke på den grønne startknap og slippe den efter to (2) sekunder. Overvåg, at det negative tryk er aktivt. Bandagen skal være trukket sammen og fast ved berøring.

Udskiftning af batterier

Du skal skifte de to (2) batterier, hvis der er alarm for lavt batteriniveau eller efter 7 dage. Brug kun medfølgende lithiumbatterier.

Udfør følgende trin for at udskifte batterierne:

- Hvis pumpen stadig er aktiv, stilles den på pause ved at trykke på den grønne startknap og slippe den efter to (2) sekunder.
- Åbn batterirummet ved at skubbe låget væk.
- Tag batterierne ud.
- Isæt nye batterier og sørg for, at pluspolen (mærket +) og minuspolen (mærket -) på hvert batteri svarer til +/- etiketten i batterirummet.
- Luk låget til batterirummet
- Pumpen udfører en selvtest, og der lyder en ringetone, når testen er afsluttet, og pumpen er klar til brug.
- Genstart pumpen ved at trykke på den grønne startknap og slippe den efter to (2) sekunder. Sørg for, at det negative tryk er aktivt, bandagen skal være trukket sammen og fast ved berøring.



Sådan rengør du pumpen

Pumpen kan rengøres lejlighedsvis ved aftørring med en fugtig klud eller med et ikke-slibende rengøringsmiddel. Pumpen må ikke kommes under rindende vand.



Husk at besøge Avance Solo patienthjemmesiden!

Her finder du bl.a. instruktionsvideoer om emnerne i denne brochure.



Hvad betyder signalerne fra Avance Solo?

Pumpen bruger forskellige signaler til at advare dig, når den er i drift, eller hvis du har brug for at gøre noget. Sørg for, at du kan høre og forstå de forskellige signaler.

Sæt pumpen på pause ved at trykke på den grønne startknap og slippe den efter to (2) sekunder. Når pumpen er sat på pause, starter den automatisk efter 60 minutter. For at genstarte behandlingen skal du trykke på den grønne startknap og holde den inde. Slip den efter to (2) sekunder, indtil pumpen aktiveres, og startknappen blinker.

Alarmer og fejlfinding

Beskrivelse af lyd- og billeddisplay	Mulig årsag
 Indikatoren for lækage blinker én gang i sekundet. Pumpen udsender gentagne gange en alarm med et bip og holder derefter pause.	Der er registreret en luftlækage.
 Indikatoren for blokering blinker én gang hvert sekund. Pumpen udsender gentagne gange en alarm med et bip og holder derefter pause.	Beholderen er fuld, eller slangerne er blokerede.
 Indikatoren for lavt batteri blinker hvert femte (5.) sekund. Når der er mindre end 4 timers batteritid tilbage, blinker indikatorlampen for lavt batteri én gang hvert sekund, og pumpen afgiver gentagne gange en alarm med et bip.	Batterierne er ved at være flade.
 Alle indikatorlys blinker samtidigt, én gang hvert sekund, og pumpen afgiver gentagne gange en alarm med et bip.	Alarm for intern fejl , og pumpen kan ikke startes.

Bemærk: Den regelmæssige pulserende lyd, som du måske hører fra pumpen, er helt normal og bekræfter, at systemet fungerer.

Sådan foretager du fejlfinding

Sådan afhjælpes en lækage:

Tryk rundt om bandagens kanter og strimlerne for at forbedre kontakten med huden.

Kontrollér, at beholderen er fastgjort til pumpen, at beholderslangen er fastgjort til beholderen, og at bandageslangen er tilsluttet beholderslangen.

Tryk på den grønne startknap for at genstarte pumpen.

Hvis lækageproblemet ikke er løst, vil pumpen igen afgive en alarm for lækage og derefter sætte behandlingen på pause. Hvis dette sker, skal du kontakte din læge.

Sådan korrigeres en blokering:

Sørg for, at slangerne ikke er afklemte eller knækkede. Hvis beholderen er fuld, skal den udskiftes i henhold til instruktionerne på side 8 i dette dokument eller i brugervejledningen (følger med produktpakken) i afsnit 7.3.

Tryk på den grønne startknap for at genstarte pumpen.

Hvis blokeringen ikke løses, vil pumpen igen afgive en alarm for blokering og derefter sætte behandlingen på pause. Hvis dette sker, skal du kontakte din læge.

Sådan skifter du batterier:

Udskift batterierne i henhold til instruktionerne på side 9 i dette dokument eller i brugervejledningen (følger med i produktpakken) i afsnit 7.4. Brug kun den type og model af litumbatterier, der er angivet for dette produkt af Mölnlycke Health Care. Tryk på den grønne startknap for at genstarte pumpen.

Kontakt sundhedspersonalet eller Mölnlycke Health Care.

Proving it every day

Hos Mölnlycke® leverer vi innovative løsninger til behandling af sår, forbedring af sikkerhed og effektivitet ved operationer samt forebyggelse af tryksår. Løsninger, der medvirker til at opnå bedre resultater, og som understøttes af klinisk og sundhedsøkonomisk evidens.

I alt, hvad vi gør, er vi styret af et enkelt formål: at hjælpe sundhedspersonalet med at yde deres bedste. Og vi er forpligtet til at bevise det hver dag.

Referencer:

1. Apelqvist, J., Willy, C., Fagerdahl, A.M. et al. Negative Pressure Wound Therapy – overview, challenges and perspectives. J Wound Care 2017; 26: 3, Suppl 3, S1-S113. 2. Willy C, Agarwal A, Andersen CA, Santis GD, Gabriel A, Grauhan O, Guerra OM, Lipsky BA, Malas MB, Mathiesen LL, Singh DP, Reddy VS. Closed incision negative pressure therapy: international multidisciplinary consensus recommendations. Int Wound J 2016; doi: 10.1111/iwj.12612. 2-7. Data forefindes (ref10) (ref15) (ref17) (ref18) (ref23) (ref24).

Læs mere på www.molnlycke.dk

Mölnlycke Health Care ApS, Gydevang 39, 3450 Allerød. Tlf.: + 45 80 88 68 10.

Mölnlycke, Avance og Safetac varemærker, navne og logoer er registreret globalt til en eller flere virksomheder i Mölnlycke Health Care gruppen. ©2023 Mölnlycke Health Care AB. Alle rettigheder forbeholdes. DKWC1942312

