


Nos solutions Mölnlycke dans la prise en charge des plaies chroniques

Nos solutions Mölnlycke sont à choisir selon plusieurs critères

- Stade de cicatrisation
- Niveau d'exsudats et/ou de fibrine
- Localisation de la plaie
- Etat de la peau péri lésionnelle

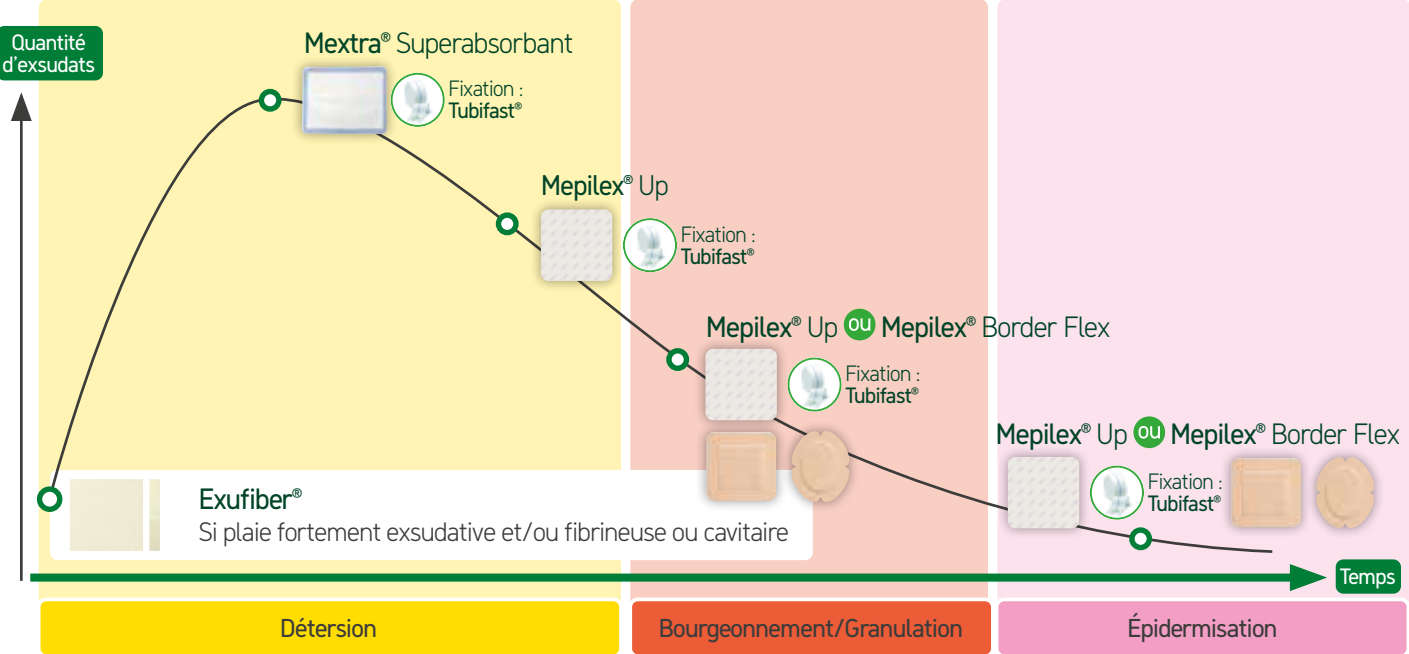

CAS CLINIQUE

Ulcère de jambe veineux

Femme de 71 ans

Score EVA évalué à 6/10 le jour de la prise en charge

Ancienneté de la plaie - 1 mois

- Plaie à fond fibrineux
- Peaux périlésionnelles atrophiques et dermite ocre
- Exsudats séreux moyennement à fortement abondants

Antécédents de la patiente

- Diabète de type 2
- Insuffisance veineuse
- Hypertension

Protocole de soins

Détersion mécanique avant l'instauration d'un protocole alliant :

Mepilex® Up

Bandes de compression multicouche

NOS AUTRES CAS CLINIQUES

Évolution de la plaie

J0

Surface de la plaie 42,1cm²

J21

Surface de la plaie 14,3cm²

J35

Plaie complètement cicatrisée - EVA à 0

Bénéfices cliniques :

1. Réduction de la douleur

2. Peau périlésionnelle protégée

3. Amélioration du confort patient

Résultats :

Plaie cicatrisée en 35 jours

175 jours de gagnés sur le délai moyen de cicatrisation de 210 jours.

1. Améliorer la qualité du système de santé et maîtriser les dépenses : propositions de l'Assurance Maladie RAPPORT AU MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET AU PARLEMENT SUR L'ÉVOLUTION DES CHARGES ET PRODUITS DE L'ASSURANCE MALADIE AU TITRE DE 2014 (LOI DU 13 AOÛT 2004) pour 2014. 2014. https://www.assurance-maladie.ameli.fr/sites/default/files/2013-07/rapport-propositions-pour-2014.assurance-maladie_0.pdf.

Mepilex® Up

Mode d'emploi

Nettoyer la plaie. Retirer le feuillet protecteur. Appliquer sans étirer, le côté adhérent sur la plaie.

Mepilex Up doit recouvrir la peau saine environnante. Pour les petites plaies, au moins 1 cm et pour les grandes plaies, au moins 3 cm. Pour les plaies hautement exsudatives, au moins 5 cm.

Maintenir Mepilex Up avec un bandage de type Tubifast 2-Way Stretch

Poses et découpes

NOTRE GAMME MEPILEX ÉVOLUE !

Mepilex XT est remplacé par Mepilex Up depuis Janvier 2025

Dimensions (cm x cm)	Boîte (pcs)	Arrêt Mepilex® XT Code ACL 13	Nouveau Mepilex® Up Code ACL 13
14 x 15	10	7 323 190 123 582	7 333 350 497 019
10 x 21	10	7 323 190 123 551	7 333 350 465 346
17,5 x 17,5	10	7 323 190 123 568	7 333 350 675 981
21 x 22	10	7 323 190 123 575	7 333 350 797 881

References:

1. Mölnlycke Health Care. Data on file. 2024. 2. Jones E et al., Impact of exudate and odour from chronic venous leg ulceration. Nursing Standard 2008;22:45 (53–61).Date of acceptance January 4, 2008. 3. Weir, D. and Davies, P. (2023). The impact of venous leg ulcers on a patient's quality of life: considerations for dressing selection. Wounds International, 7(2): 36–41. 4. World Union of Wound Healing Societies (WUWHS) Consensus Document. Wound exudate: effective assessment and management. Wounds International, 2019. 5. Price PE, Fagervik-Morton H, Mudge EJ, Beele H, Ruiz JC, Nyström TH, Lindholm C, Maume S, Melby-Østergaard B, Peter Y, Romanelli M, Seppänen S, Serena TE, Sibbald G, Soriano JV, White W, Wollina U, Woo KY, Wyndham-White C, Harding KG. Dressing-related pain in patients with chronic wounds: an international patient perspective. Int Wound J. 2008 Jun;5(2):159-71. doi: 10.1111/j.1742-481X.2008.00471.x. PMID: 18494622; PMCID: PMC7951668. 6. Gardener S, 'Leaky legs' is not a diagnosis! Impact of exudate on patients with venous leg ulceration. Journal of Community Nursing. 2024; 38(2):24. 7. Zilmer R, et al., Biophysical effects of repetitive removal of adhesive dressings on peri-ulcer skin. J Wound Care 2006;15(5):187–191. 8. Waring M, et al., An evaluation of the skin stripping of wound dressing adhesives. J Wound Care 2011; 20(9): 412–422. 9. White, R. A multinational survey of the assessment of pain when removing dressings. Wounds UK. 4(1). 2008].

Mepilex® Up : *Remboursement LPPR, catégorie pansements hydrocellulaires, à absorption importante, stériles. La prise en charge est assurée pour les plaies aiguës, sans distinction de phase et pour les plaies chroniques dès la phase de bourgeonnement en traitement séquentiel, localisées dans des endroits difficiles à panser tels que le sacrum, le talon, le coude et le genou. Prix LPPR = Prix limite de vente. Classe IIb.

*Pansements inscrits sur la Liste des Produits et Prestations Remboursables (LPPR) par la Sécurité Sociale. Mölnlycke Health Care, Mextra, Mepilex, Tubifast 2-Way Stretch et Safetac sont des marques et des logos déposés au niveau mondial par la société Mölnlycke Health Care AB ou l'une de ses filiales.

Dispositifs médicaux CE 2797 fabriqués par Mölnlycke Health Care. Document réservé à l'usage des professionnels de santé. Pour plus d'informations, veuillez-vous reporter à la notice d'utilisation accompagnant les produits.

Service clients ville : 03 20 12 25 72 – relationclient@molvianto.com

Distributeur : Mölnlycke Health Care - CS 70205 - 13 allée du Château Blanc - 59445 Wasquehal cedex

SIRET : 38319747200061 - RCS Lille Métropole 383197472.

www.molnlycke.fr - communication.france@molnlycke.com

© Copyright (2025) Mölnlycke Health Care

Documents de référence et liens utiles

Mölnlycke®

Mepilex® Up

Aide à la prise en charge des plaies chroniques

NOUVEAU

Le progrès défie la gravité

Révolutionner les soins pour les personnes et la planète

Edition Septembre 2025

Mölnlycke®

Face à la difficulté de la prise en charge des fuites d'exsudats, les patients et les professionnels de santé ont besoin de solutions innovantes.

64%

des patients ont déjà vécu des problèmes de fuites d'exsudats de leur plaie⁵.

Les patients souffrant d'ulcères veineux de jambe et d'autres plaies exsudatives peuvent voir leur qualité de vie considérablement réduite. Lorsque les pansements ne parviennent pas à gérer l'exsudat, le liquide peut s'écouler sur la peau saine et les vêtements des patients. Cela est inesthétique et peut dégager de mauvaises odeurs, ce qui est très gênant et embarrassant. Il n'est pas rare que les patients s'isolent socialement, ce qui a un impact significatif sur leur qualité de vie³.



Mepilex® Up
Le progrès défie la gravité

Découvrez une nouvelle approche de la gestion des exsudats

Nouveau

Propriétés uniques de Mepilex Up


Mepilex Up est un nouveau pansement non bordé en mousse, conçu pour minimiser les fuites et empêcher leur propagation sur la peau saine¹.

- Mepilex Up est conçu avec un profil mince pour:
- Absorber les quantités importantes de fluides¹
 - S'adapter aux zones difficiles à panser¹


Une capacité d'absorption innovante et une répartition unique de l'exsudat dans le pansement - contre la gravité^{1,7-9}



Une structure en mousse spécifique donnant lieu à une surface alvéolée.

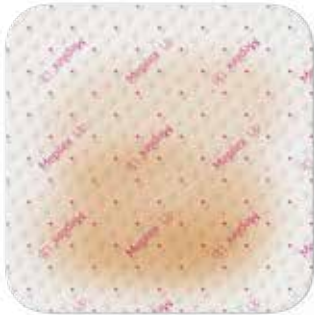


La mousse alvéolée innovante améliore la capillarité, permettant aux fluides de se répandre dans toutes les directions, même contre la gravité¹.

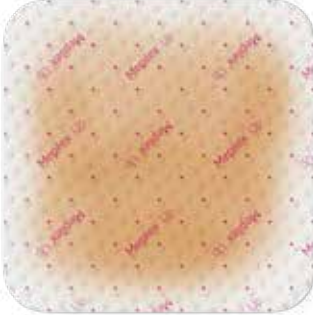

Des propriétés uniques de répartition dans la gestion des fluides qui permettent de minimiser le risque de fuite et gérer les exsudats pendant plusieurs jours¹.

Action de capillarité améliorée

Les pansements en mousse non bordés sont spécialement conçus pour absorber le liquide de la plaie par capillarité. Néanmoins, la structure alvéolée unique de Mepilex Up accélère ce processus. Cela signifie qu'il peut répartir les fluides plus efficacement dans toutes les directions, même vers le haut, contre la gravité¹.

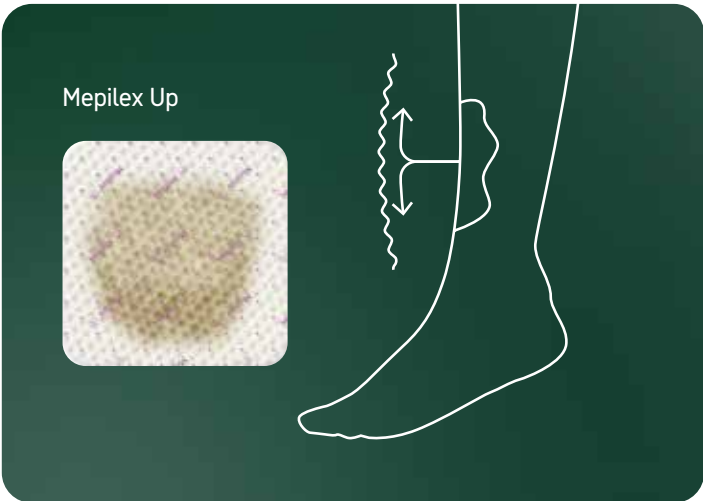

Pansement hydrocellulaire siliconé à micro-adhérence sélective, non bordé.

Composition

- Film externe en polyuréthane perméable à la vapeur et imperméable à l'eau.
- Coussin absorbant, souple, en mousse de polyuréthane compressée.
- Interface siliconée (Safetac) non adhérente au site humide de la plaie.



Indications

se référer à la notice d'utilisation

Jusqu'à 7 jours d'utilisation

Utilisable sous compression

Confort patient

Traitement des plaies exsudatives à tous les stades de cicatrisation, telles que plaies chroniques, plaies traumatiques, plaies secondaires en cours de cicatrisation :

- Ulcères de jambes
- Escarres

- Plaies du pied diabétique
- Déchirures cutanées