

Contactez votre HAD

si vous êtes dans une des situations ci dessous :

- Votre pansement n'adhère plus
- Votre pansement sature vite en sang
- Une alarme clignote ou sonne
- Vous constatez des signes tels que fièvre, gonflement, douleur évolutive



En cas de doutes et de symptômes nouveaux, consultez la structure d'hospitalisation à domicile

COORDONNÉES



Votre infirmière



Votre médecin

Autres numéros utiles

Le système Avance® Solo émettra des bruits réguliers correspondants au fonctionnement de la pompe. Ces bruits sont parfaitement normaux et confirment que le système fonctionne. Ce livret ne se substitue pas aux notices des produits concernés. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Fabriqué par Mölnlycke Health Care, Suède. Pour plus d'informations, veuillez-vous reporter à la notice d'utilisation accompagnant les produits.

Pour toute question d'information médicale, veuillez contacter votre médecin traitant.

Pour déclarer un problème de tolérance ou une réclamation qualité suite à l'utilisation du produit, veuillez nous adresser un email à l'adresse reclamation.qualite@molnlycke.com. Le signalement que vous effectuez à Mölnlycke France ne peut en aucun cas se substituer à une consultation médicale. Vous pouvez également signaler aux Autorités sanitaires, sur le site signalement-sante.gouv.fr, tout événement indésirable, effet indésirable, incident ou risque d'incident lié à un produit de santé.

Mölnlycke Health Care - CS 70205 - 13 allée du Château Blanc - 59445 Wasquehal cedex

Service clients Hôpital : 0800 910 289 - E-mail : csc.fr@molnlycke.com

SiRET 38319747200061 - RCS Lille Métropole 383197472 - Fabricant : Mölnlycke Health Care, Suède.

www.molnlycke.fr / communication.france@molnlycke.com

Tous les produits mentionnés sont fabriqués en Europe.

Avance® : Classe IIb. Non remboursé LPPR. Dispositifs médicaux CE 2797.

© Copyright (2024) Mölnlycke Health Care . FRWC21562408 - 08/2024



Avance® Solo et Avance® Solo Adapt

Traitement par pression négative

Guide
d'information
Patient



Révolutionner les soins
pour les personnes et la planète



Avance® solo

Vous accompagne
dans votre thérapie
chaque jour

Voici les principales questions
que vous vous posez :

Qu'est que le pansement Avance® Solo ?

C'est un pansement qui aspire,
dans l'objectif d'évacuer les éventuels
exsudats en présence, d'accélérer la
cicatrisation de votre plaie.

Comment vivre avec Avance® Solo ?

En fonction de la localisation du
pansement, vous pouvez vivre
normalement.
Pour les sorties, des boîtiers de
transport sont à votre disposition
(demander à votre professionnel de
santé).

Fréquence de changement du pansement?

La fréquence de renouvellement
de votre pansement est liée à une
prescription médicale de votre médecin.
Un professionnel de santé déterminera
et vous informera de la fréquence de
changement du pansement.

Comment fonctionne Avance® Solo ?

Le moteur crée une aspiration par
le biais du pansement . Le réservoir
assure la gestion des exsudats. Les
alarmes vous alertent des incidents
afin d'assurer votre sécurité ainsi que la
pression exercée sur votre plaie.


Que fait on de la pompe Avance® Solo après la fin du traitement?

Molnlycke s'occupe de tout, dans le
cadre du recyclage nous mettons à
disposition une enveloppe santé pour le
retour du moteur de la pompe.



Tout est fait pour sécuriser votre traitement

Présence d'alarmes sonores et visuelles

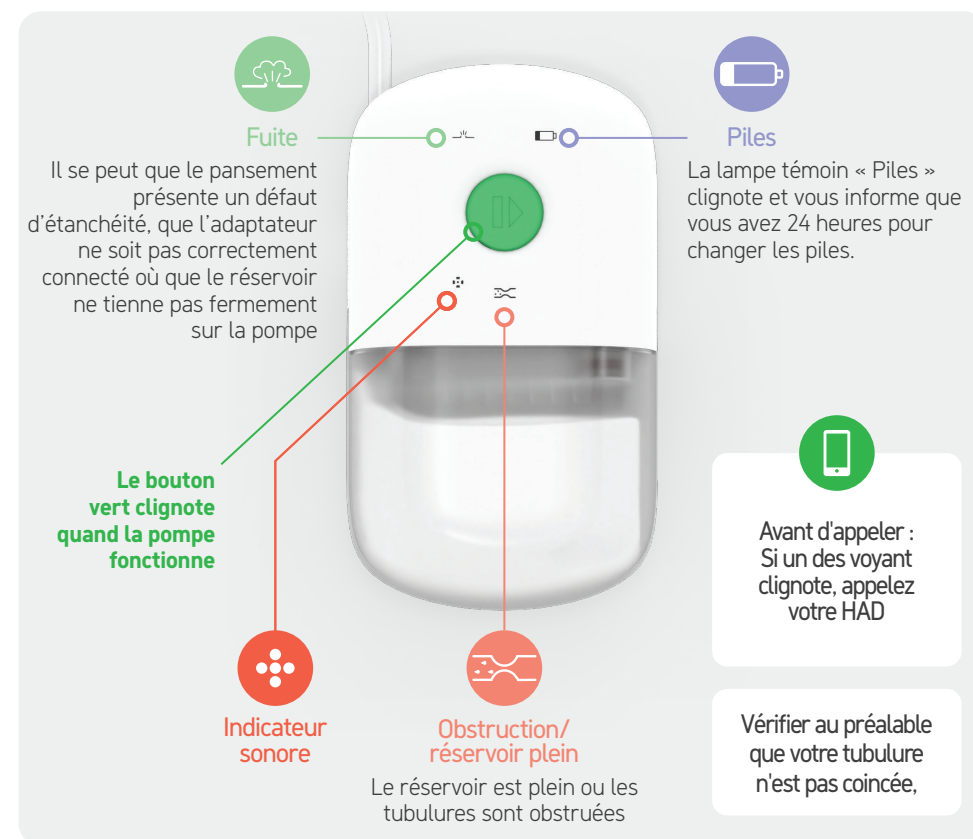

Tout est fait pour faciliter votre quotidien

Boîte de transport

Une boîte pour faciliter le transport et apporter du confort dans votre quotidien est mise à disposition sur simple demande auprès de votre professionnel de santé. Cette dernière vous accompagnera afin que puissiez sortir en toute tranquillité