

HOMME DE 25 ANS

- Présentant une plaie consécutive à l'exérèse d'un kyste sous-cutané dans le sillon inter-fessier.
- Cette plaie a été traitée antérieurement avec un pansement hydrocolloïde.

ANTÉCÉDENTS DU PATIENT

- Aucun antécédent médical

PROTOCOLE DE SOINS J+3 APRÈS EXÉRÈSE

J0 à J49

Alginate* (mèche)



Mepilex® Border
Protect Sacrum
22x25**



Renouvellement
tous les jours

* pour plaie cavitaire et pour assurer l'absorption des exsudats.
** pour protéger et recouvrir la plaie; pour le confort du patient.

EVOLUTION DE LA PLAIE

J0



- Surface de 14 cm²
- Plaie en phase de détersion
- Absence de signes cliniques d'infection locale
- Peau périlésionnelle saine
- Niveau d'exsudat faible

90%
fibrine

10%
bourgeonnement

J12



- Plaie en phase de détersion acquise (fibrine < 50%)
- Peau périlésionnelle saine
- Absence d'exsudat

40%
fibrine

60%
bourgeonnement

PROTOCOLE DE SOINS

J49 à J60



Mepilex® Border Flex Oval 10x12,5**



Renouvellement
tous 2 les jours

** pour protéger et recouvrir la plaie; pour le confort du patient.

EVOLUTION DE LA PLAIE

J49



- Surface de 2 cm² (réduction de 86%)
- Plaie en phase de bourgeonnement
- Peau périlésionnelle saine
- Absence d'exsudat
- Poursuite du traitement avec Mepilex® Border Flex Oval

90%
bourgeonnement

10%
épidermisation

J60



- Plaie cicatrisée
- Peau périlésionnelle saine

100%
épidermisation

ÉVALUATION DES UTILISATEURS

- Le patient n'a pas présenté de douleur cliniquement significative lors des renouvellements de pansements (EVA < 30 mm). Selon le soignant, Mepilex® Border Protect Sacrum est conforme et adapté à la forme de la plaie initiale et permet un retrait facilité par les ailettes. Mepilex® Border Flex Oval se conforme bien à la plaie sans y adhérer et son assortiment de 4 tailles permet de s'adapter à l'évolution de la plaie.

Mölnlycke Health Care, Mepilex, Safetac sont des marques et des logos déposés au niveau mondial par la société Mölnlycke Health Care AB ou l'une de ses filiales.

* Pansements inscrits sur la Liste des Produits et Prestations Remboursables (LPPR) par la Sécurité Sociale.

Mepilex® Border Protect Sacrum : remboursement LPPR, catégorie pansements hydrocellulaires anatomiques à absorption importante, adhésifs, stériles. La prise en charge est assurée pour les plaies aiguës et chroniques dès la phase de bourgeonnement en traitement séquentiel. Prix LPPR = Prix limite de vente. Classe IIb.

Mepilex® Border Flex Oval : remboursement LPPR, catégorie pansements hydrocellulaires à absorption importante, adhésifs, stériles.

La prise en charge est assurée pour les plaies aiguës et chroniques dès la phase de bourgeonnement, en traitement séquentiel. Prix LPPR = Prix limite de vente. Classe IIb.

Tous les produits mentionnés sont fabriqués en Europe. Dispositifs médicaux CE 01965. L'organisme notifié pour l'ensemble de ces produits est BSI (British Standards Institution).

Toutes les allégations cliniques des produits présentés proviennent de la notice d'utilisation et du dossier technique de marquage CE. Pour plus d'informations, veuillez vous reporter à la notice d'utilisation accompagnant le produit.

Ce document a été préparé par le Département Médical de la filiale France de Mölnlycke.

© Copyright (2019) Mölnlycke Health Care.

Réclamation qualité produits : reclamation.qualite@molnlycke.com

Service clients & Renseignements produits : Tel : 03 20 12 25 55 - Fax : 03 20 12 25 46

Distributeur : Mölnlycke Health Care

CS 70205 - 13 allée du Château Blanc - 59445 Wasquehal cedex

Fabricant : Mölnlycke Health Care, Box 13080, SE-402 52 Göteborg, Sweden

Tél : +46 31 722 30 00 - Fax : +46 31 722 34 01

www.molnlycke.fr