

Mölnlycke® Z-Flo™ posizionatore fluido – protezione continua

Adulto e pediatrico



I dispositivi per il posizionamento del paziente sono inadeguati

Il posizionamento del paziente é una pietra miliare della prevenzione e del trattamento delle ulcere da pressione. Eppure i dispositivi a disposizione sono tutt'altro che adeguati.

E' necessario chiedersi se coperte, cuscini e cunei offrono i seguenti vantaggi:

- Ridistribuzione della pressione attraverso l'avvolgimento?
- Capacità di ottenere la posizione desiderata?
- Capacità di mantenere quella posizione nel tempo?
- Possibilità di ripiegarlo per proteggere le aree sensibili?

Protezione continua mediante ridistribuzione della pressione e posizionamento duraturo

Il posizionatore fluido Mölnlycke® Z-Flo™ consente di essere modellato al fine di adattarlo all'anatomia del paziente e ridistribuire la pressione. Consente di essere adattato alle esigenze di posizionamento individuali e di mantenere la posizione desiderata nel tempo.



Le aree del posizionatore possono essere modellate per strumenti medicali, tubi e lesioni esistenti



Posizionare Z-Flo sotto la testa e allinearla con la parte superiore delle spalle



Modellare Z-Flo in modo che si adatti alla forma della testa e riempi l'area del rachide cervicale



Il posizionatore posto in modo corretto offre sia il posizionamento che lo scarico della pressione

Mölnlycke® Z-Flo™ in terapia intensiva


Mölnlycke Z-Flo è un prodotto versatile con molteplici usi. In terapia intensiva, l'utilizzo più comune è la prevenzione delle lesioni da pressione occipitale e la rotazione del paziente.

Riduzione del
87.7%
di lesioni da pressione
nella zona occipitale¹

Prevenzione delle lesioni da pressione in zona occipitale

Uno studio ha valutato l'efficacia clinica del posizionatore fluido Mölnlycke Z-Flo nel ridurre l'occorrenza di lesioni da pressione occipitali, nel setting della terapia intensiva. Oggetto di studio sono stati i pazienti sottoposti ad ECMO dove il frequente scarico e il riposizionamento dell'occipite rappresenta una criticità¹.

Utilizzare Mölnlycke Z-Flo per aumentare la superficie di contatto e per riposizionare il capo e contribuire alla prevenzione delle lesioni da pressione.

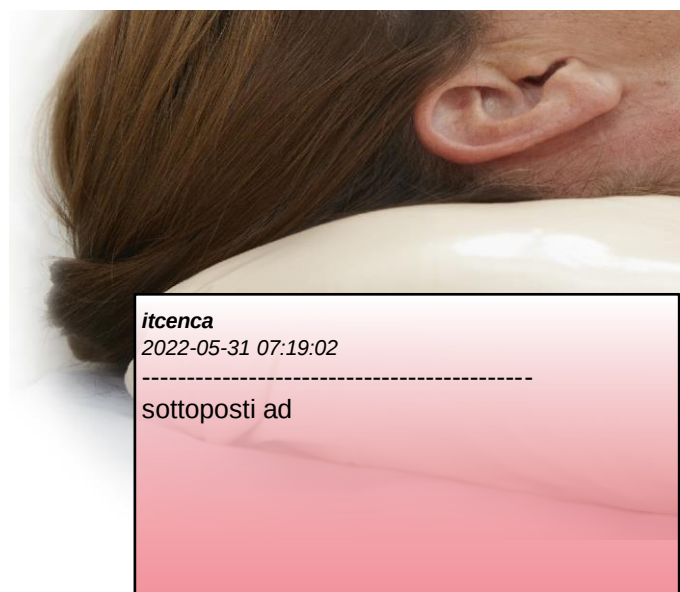


Turning and repositioning

Il posizionatore fluido Mölnlycke Z-Flo mantiene la sua forma e la posizione del paziente nel tempo.

Inoltre, il posizionatore fluido consente all'operatore sanitario di decidere il grado di rotazione, che può andare da un piccolo microgiro fino a giri di grado ampio.

Uno studio ha esaminato l'utilizzo del posizionatore fluido Mölnlycke Z-Flo in confronto all'utilizzo di cuscini.

I risultati hanno mostrato una differenza statisticamente significativa tra la capacità dei due dispositivi di posizionamento di mantenere l'angolo di decubito desiderato nel tempo.

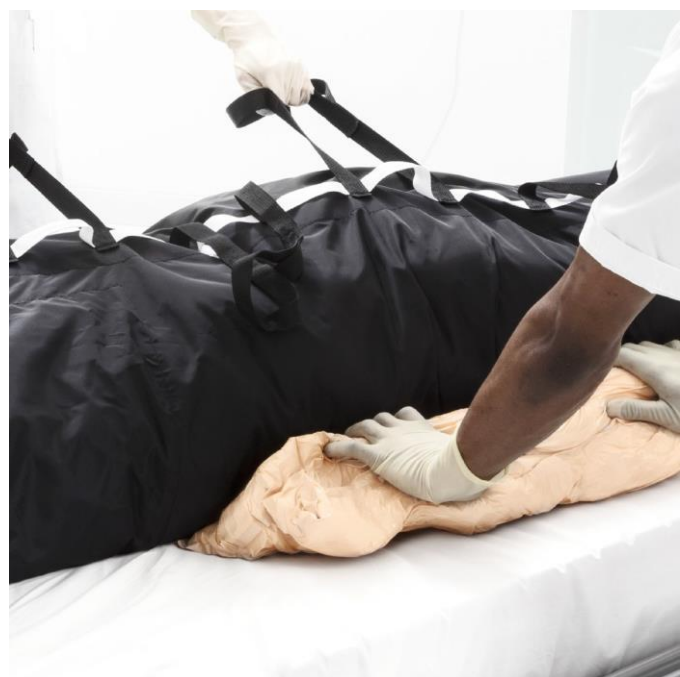

Proving it every day

In Mölnlycke forniamo soluzioni innovative per la gestione delle ferite, il miglioramento della sicurezza, dell'efficienza chirurgica e la prevenzione delle ulcere da pressione. Soluzioni che aiutano a ottenere risultati migliori e sono supportate da evidenze cliniche ed economico-sanitarie.

In tutto ciò che facciamo, siamo guidati da un unico scopo: aiutare gli operatori sanitari a dare il meglio di sé. E ci impegniamo per dimostrarlo ogni giorno.

Posizionatore fluido per adulti

Codice prodotto	Descrizione	Dimensioni	Pezzi/TRP
1401007	Posizionatore piccolo	29 x 50 cm	8
1401011	Posizionatore medio	40 x 76 cm	1
1401005	Posizionatore grande	64 x 91 cm	1
1401003	Posizionatore medio con linguetta	41 x 75 cm	1

Posizionatore fluido pediatrico e neonatale

Codice prodotto	Descrizione	Dimensioni	Pezzi/TRP
1400239	Posizionatore medio con fodera	23 x 38 cm	6
1400200	Posizionatore grande con fodera	30 x 51 cm	6
1400227	Posizionatore piccolo con fodera	18 x 25 cm	12
1400222	Tubo piccolo con tre fodere	76 x 16,5 cm	6
1400224	Tubo grande con fodera	152 x 16,5 cm	6
1400206	Corpo intero medio con fodera	41 x 61 cm	6
1400213	Corpo intero grande con fodera	51 x 76 cm	4



Scopri di più su come il
posizionatore fluidizzato
Mölnlycke Z-Flo™ può aiutare
voi e i vostri pazienti

References: 1. Barakat-Johnson M et al. Evaluation of a fluidised positioner to reduce occipital pressure injuries in intensive care patients: A pilot study. Int Wound J. 2018;1-9.
2. Kapp S, Gerditz M, Gefen A, Prematunga R, Santamaria N. An observational study of the maintenance of the 30°side-lying lateral tilt position among aged care residents at risk of developing pressure injuries when using the standard care pillow and a purpose-designed positioning device. IntWound J. 2019.

Per saperne di più visita il sito www.molnlycke.it

Mölnlycke Health Care Srl, Via Marsala 40/C, Gallarate, 21013 (Va). Telefono + 0331714011.
Il marchio, il nome e il logo Mölnlycke sono registrati a livello globale in una o più aziende del gruppo Mölnlycke Health Care.
Z-Flo è un marchio di Mölnlycke Health Care ©2022 Mölnlycke Health Care. Tutti i diritti riservati.

