

Mepilex® Border Protect

メピレックス® ボーダー プロテクト **かかと／仙骨**

……………取扱説明書……………

*ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。

*本書はいつもお手元においてご使用ください。

※医療機器ではありません。

製品概要

- ①本製品は、皮膚接触面にソフトシリコンをコーティングしたポリウレタンフィルム、ポリウレタンフォーム、不織布、コットンとポリアクリレート繊維からなるパッド、防水ポリウレタンフィルムからなる5層構造の健常皮膚用保護パッドです。皮膚接触面は、使用時まで剥離紙で覆われています。
- ②本品は健常皮膚を保護する目的にて使用します。
- ③形状はかかと用、仙骨用の2種類があります。

**かかと用****仙骨用**

パッド：左図の中心の部分
ボーダー：パッドの周りの部分

使用上の注意

- ①傷やけが、皮膚疾患やその疑いのある部位には使用しないこと。
- ②目やその周囲、口の中など、粘膜には使用しないこと。
- ③本品の構成成分に対してアレルギー反応を有する人に、本品を使用しないこと。
- ④本品は局所管理に使用する製品であるため、体位変換やスキンケアなど必要に応じて行うこと。
- ⑤本品はクッション性を有するが、体圧分散を目的に使用する際は本品単体ではなく、他の適切な体圧分散器具を併用すること。
- ⑥本品は1回のみを使い捨てであり、再使用はしないこと。
- ⑦体圧や医療関連機器などによる外力を軽減させたい、製品貼付部位については定期的に観察すること。
- ⑧本品を使用し、窒息の恐れがある部位への使用は避けること。
- ⑨シャワー浴を実施する場合は、周囲のボーダー部分が皮膚に密着していることを確認すること。貼付したままの入浴は避けること。
- ⑩本品は7日間を限度として交換すること。その場合においても観察は怠らないこと。消耗が見られる場合は新品と交換すること。
- ⑪かぶれ、かゆみ、湿疹などの異常が現れた場合は、直ぐに使用を中止し、医師に相談すること。
- ⑫本品は医師、看護師、その他医療従事者の指示を仰ぐことが望ましい。
- ⑬本製品は滅菌済である。使用前にパッケージが破損または開封されている場合は使用しないこと。再滅菌はしないこと。

貼付方法

かかと用



① 貼付時の向きを確認する。(Aの部分がアキレス腱側になるように持つ)



② 中央の剥離紙をはがし、本品を貼付したいかかとの下に沿わせる



③ Aの部分をアキレス腱側、AとBの中央のくびれている部分にかかとを合わせて貼付を開始する



④ Aの残された左右両側の剥離紙をはがし、くるぶし部分に沿わせて貼付し、なじませる。反対側も同様に貼付する



⑤ Bの部分を足底に沿わせながら貼付する



⑥ Aと同様に残された左右両側の剥離紙をはがし、両端のタブ部分を持ちながら、貼付してなじませる



⑦ 貼付した部分全体にやさしく触れ、全体が皮膚に接していることを確認する

＊必要な場合は、筒状包帯などで固定を追加する。

貼付下の確認方法



① 本品がよれたり汚染なく、正しく貼付されていることを確認し、両端のタブを持ちながらやさしくはがす



② 本品の両端のタブ部分を保持したまま、皮膚の状態が確認できるまではがす



③ Aの部分を貼付したまま、パッド部分の下の皮膚の状態を観察する



④ 本品を再度、同じ位置に貼付する



⑤ 本品が元の位置に貼付されたこと、ボーダー部分がよれたりせずに貼付されていることを確認する



⑥ 貼付した部分全体にやさしく触れ、全体が皮膚に接していることを確認する

仙骨用



① 保護したい部位を確認し、適切な貼付位置を決める




② 貼付部位の皮膚を整えた後、中央の剥離紙をゆっくりとはがす



③ 臀部をよく伸展させ、臀裂から粘着部分に沿って仙骨部まで貼付する。この際、尾骨部分もパッドで覆われるよう注意する



④ 左右に残された剥離紙をはがし、ゆっくりと肌に沿わせるように全面を貼付する

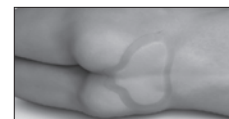


⑤ 貼付されたところ




⑥ 貼付した部分全体にやさしく触れ、全体が皮膚に接していることを確認する

貼付下の確認方法

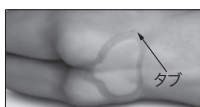

① 本品がよれたり汚染なく、正しく貼付されていることを確認する

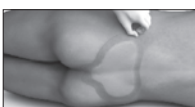

② 左右両端にあるタブをやさしくはがす



③ タブ部分を保持したまま、皮膚の状態が確認できるまではがす



④ 臀裂部分は貼付したまま、パッドの下の皮膚の状態を確認する



⑤ 本品を再度、同じ位置に貼付する



⑥ 本品が元の位置に貼付されたこと、ボーダー部分がよれたりせずに貼付されていることを確認する



⑦ 貼付した部分全体にやさしく触れ、全体が皮膚に接していることを確認する

剥がし方

本品を剥がす際には、皮膚を傷つけないよう慎重に剥がすこと。

保管方法

- ① 小児の手の届かない場所への保管
- ② 高温多湿、直射日光を避けて室温で保管してください。
- ③ 製品包装に記載されている使用期限を守って使用してください。

■ 輸入販売元

メンリッケヘルスケア株式会社
東京都新宿区西新宿6-20-7
コンシェルシア西新宿タワーズ ウェスト
TEL: 03-6914-5004

■ 製品に関するお問い合わせ

メンリッケヘルスケア株式会社
ウインドケア事業部
TEL: 03-6279-0991

