

Mepilex® Border Protect

メピレックス® ボーダー プロテクト **スクエア／楕円**


取 扱 説 明 書

＊ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。
＊本書はいつもお手元においてご使用ください。

※医療機器ではありません。

製 品 概 要

- ①本製品は、皮膚接触面にソフトシリコンをコーティングしたポリウレタンフィルム、ポリウレタンフォーム、不織布、コットンとポリアクリレート繊維からなるパッド、防水ポリウレタンフィルムからなる5層構造の健常皮膚用保護パッドです。皮膚接触面は、使用時まで剥離紙で覆われています。
- ②本品は健常皮膚を保護する目的にて使用します。
- ③スクエア／楕円タイプに確認用タブはありません。

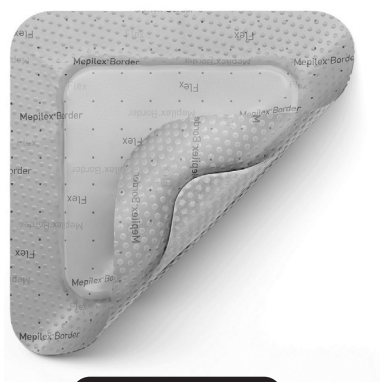

スクエア



楕 円

パ ッ ド：左図の中心の部分
ボーダー：パッドの周りの部分

使用上の注意

- ①傷やけが、皮膚疾患やその疑いのある部位には使用しないこと。
- ②目やその周囲、口の中など、粘膜には使用しないこと。
- ③本品の構成成分に対してアレルギー反応を有する人に、本品を使用しないこと。
- ④本品は局所管理に使用する製品であるため、体位変換やスキンケアなど必要に応じて行うこと。
- ⑤本品はクッション性を有するが、体圧分散を目的に使用する際は本品単体ではなく、他の適切な体圧分散器具を併用すること。
- ⑥本品は1回のみの使い捨てであり、再使用はしないこと。
- ⑦体圧や医療関連機器などによる外力を軽減させたい、製品貼付部位については定期的に観察すること。
- ⑧本品を使用し、窒息の恐れがある部位への使用は避けること。
- ⑨シャワー浴を実施する場合は、周囲のボーダー部分が皮膚に密着していることを確認すること。貼付したままの入浴は避けること。
- ⑩本品は7日間を限度として交換すること。その場合においても観察は怠らないこと。消耗が見られる場合は新品と交換すること。
- ⑪かぶれ、かゆみ、湿疹などの異常が現れた場合は、直ぐに使用を中止し、医師に相談すること。
- ⑫本品は医師、看護師、その他医療従事者の指示を仰ぐことが望ましい。
- ⑬本製品は滅菌済である。使用前にパッケージが破損または開封されている場合は使用しないこと。再滅菌はしないこと。


貼付方法

- ①貼付する部位の大きさに合わせて、十分に覆うことができる適切な製品サイズを選ぶこと。
- ②貼付する部位の皮膚を洗浄し、よく乾かすこと。保湿剤などを使用する場合は、保湿剤の成分が浸透し、皮膚に湿り気のない状態で使用すること。
- ③貼付する際には、本品を伸ばしたり、しわが寄らないように注意すること。

剥離紙2枚の場合



- ①保護したい部位を確認し、適切な貼付位置を決める。貼付部位の皮膚を整えた後、剥離紙をゆっくり剥がす。

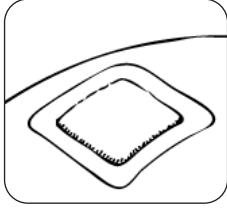

- ②貼付した部分全体に優しく触れ、全体が皮膚に接触しているところを確認する。

剥離紙3枚の場合



- ①保護したい部位を確認し、適切な貼付位置を決める。貼付部位の皮膚を整えた後、真ん中の剥離フィルムをゆっくり剥がす。



- ②貼付部位に真ん中を固定し、左右の剥離紙を剥がして、貼付部位全体を優しく触れ、全体が皮膚に接触していることを確認する。



剥がし方

本品を剥がす際には、皮膚を傷つけないよう慎重に剥がすこと。

保管方法

- ①小児の手の届かない場所への保管
- ②高温多湿、直射日光を避けて室温で保管してください。
- ③製品包装に記載されている使用期限を守って使用してください。

■輸入販売元

メンリッケヘルスケア株式会社
東京都新宿区西新宿6-20-7
コンシェルシア西新宿タワーズ ウェスト
TEL: 03-6914-5004

■製品に関するお問い合わせ

メンリッケヘルスケア株式会社
ウンドケア事業部
TEL: 03-6279-0991